

HUMANTECHNIK

freeTEL III



Brugervejledning

SCANTONE
Dansk Høredesign

Læs denne vejledning grundigt før telefonen tages i brug, for at få det optimale ud af de mange funktioner.

Placer basestationen på en skridsikker overflade. Sørg for at kablet ikke sidder i spænd, udsættes for høj varme eller beskadiges.

Udsæt aldrig telefonen for følgende indflydelseskilder:

- Høj varmepåvirkning, direkte sollys, fugt, støv, opløsningsmidler og dampe.
- Tæt på andet elektrisk udstyr

Brugervejledning

Pakkens indhold: (Kontroller, at følgende komponenter er inkluderet)

- Telefon
- Basestation
- Strømforsyningsenhed
- Telefonkabel
- 3 batterier (NiMH)
- Brugervejledning
- Garantibevis / købsfaktura



Hvis der mangler dele, kontakt straks din forhandler.

Telefonforbindelse


1. Tilslut strømforsyningen til stikkontakten og i basestationen. (se figur 1).
 2. Sæt stikket på telefonkablet i basestationen. (se figur 1).
 3. Sæt telefonkablet i telefonstikket til din telefonlinje. (se figur 2).
 4. Læg de to batterier i telefonen, og sæt batteridækslet på igen. (se figur 3).
Sørg for, at batterierne er sat korrekt i!
 5. Sæt telefonen med tastaturet fremad i basestationen. (se figur 2).
- Når telefonen er sat korrekt i, vil batteridisplayet  begynde at blinke på telefonens display og den røde opladnings-LED lyser på basestationen.


Figure 1



Figure 2



Figure 3

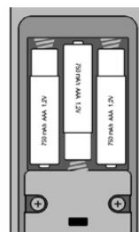


Vær opmærksom!

For at minimere risikoen for interferens – placér ikke basestationen tæt på f.eks. fjernsyn, radio, andre telefoner, ventilatorer osv.

Batterier


Før ibrugtagning første gang:

Batterierne skal oplades i 12 timer første gang telefonen tilsluttes.

Telefonen leveres med NiMH-batterier. Fuldt opladede batterier har en standby tid på ca. 100 timer eller en maksimal taletid på 10 timer. Afladede batterier tager ca. 12 timer at genoplade. Statusindikatoren blinker, mens telefonen oplades og lyser fast, i displayet, ved fuld opladning . Telefonen har automatisk opladningskontrol, som forhindrer batterier i at bliver overopladet.

Bemærk: Tag batterierne ud af telefonen, hvis telefonen er ude af brug i længere tid (mere end 6 måneder).

Visning af status for batteriopladning


Når batterierne næsten er afladet, vises ikonet på displayet , og der lyder et advarselssignal. Hvis telefonen ikke er oplades snarest, slukker telefonen automatisk. Personlige præferencer (telefonbog, genopkaldsliste, osv.) bevares, selvom batterierne er afladet eller taget ud.


Rækkevidde

Telefonens signalrækkevidde kan variere mellem 50 og 300 m. Det maksimale interval opnås kun i "fugleflugt", uden forhindringer mellem telefonen og basestationen. Er telefonen udenfor rækkevidden under et opkald lyder et advarselssignal. Gå tættere på basestationen for at opnå bedre forbindelse.




Lokalisér telefonen

Hvis telefonen er blevet forlagt, bruges personsøgningsfunktionen.


1. Tryk på knappen  på basestationen.
2. Alle tilføjede telefoner kaldes.
3. Opkaldet afsluttes, når der trykkes på en hvilken som helst tast på en af de trådløse telefoner, der søges.

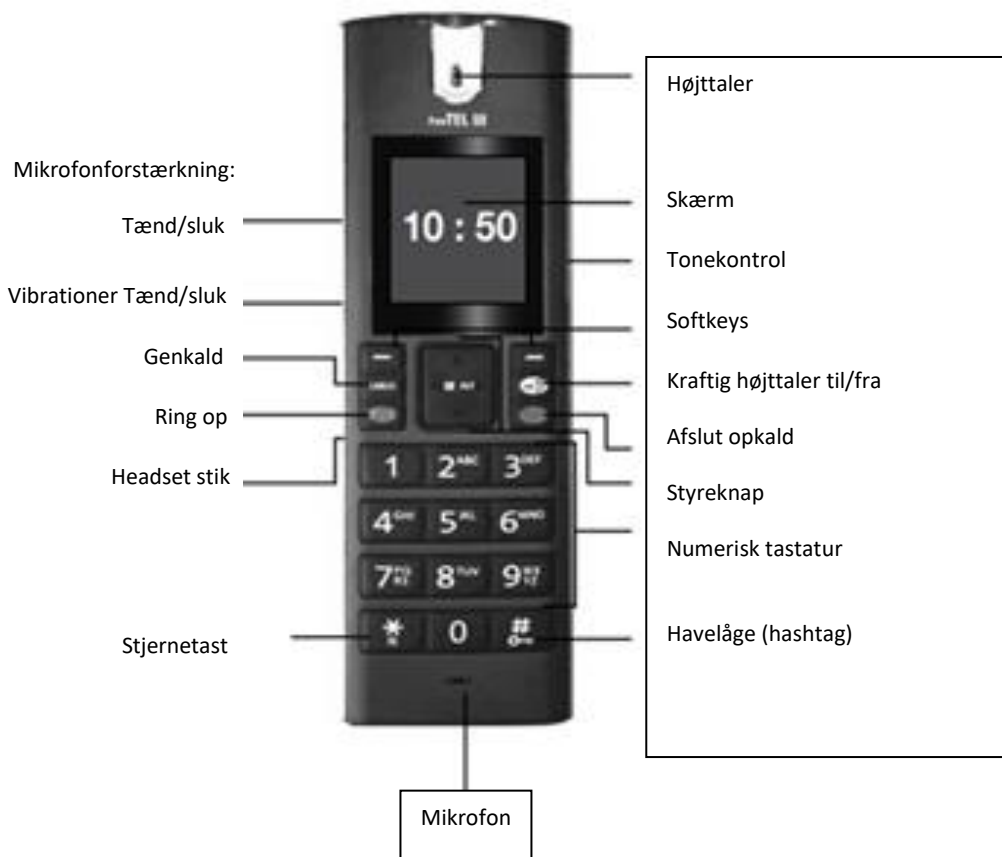

Base station controls

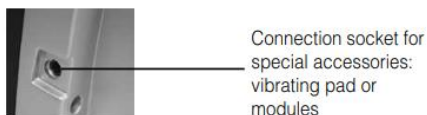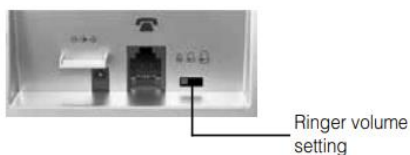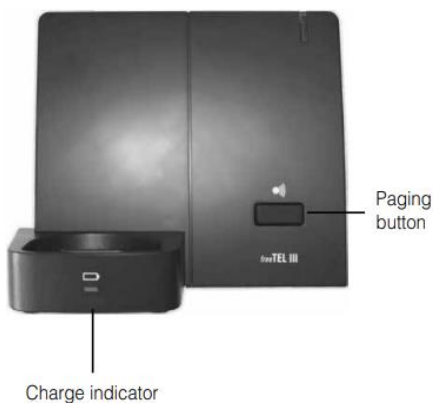

Softkeys

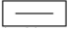

De to softkeys  til venstre og højre for kontrolltasten tildeles forskellige funktioner i forskellige menuer. I denne brugervejledning navngives de altid svarende til teksten i displayet.




Tast

I standbytilstand


I menuen

-  (venstre) - Åben hovedmenu - Diverse funktioner (venstre)
 -  (højre) - Åben telefonbog - Diverse funktioner (til højre)
-

Skærm

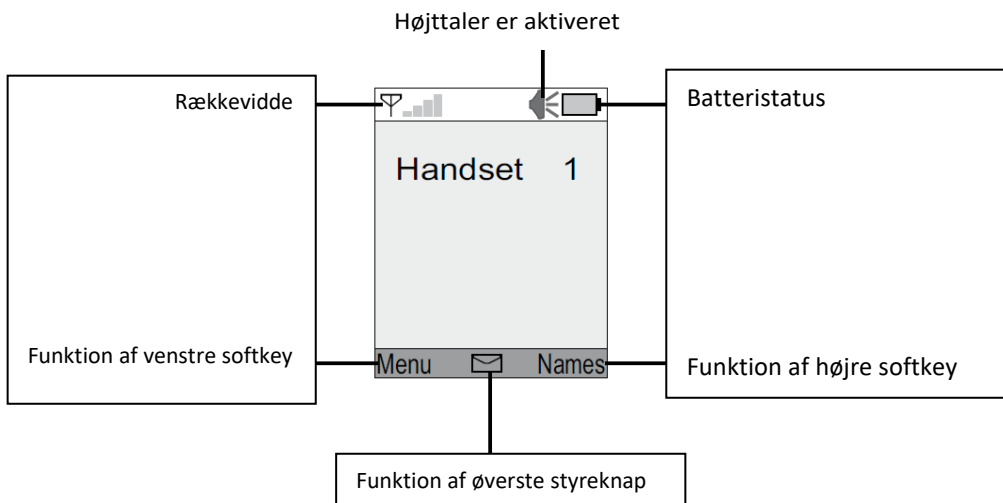

Indstilling af dato / tid

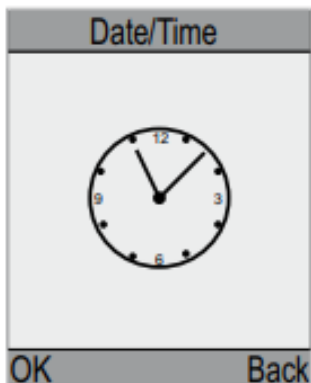

Tryk på Menu (venstre softkey), gå til **Date/Time** ved hjælp af tasten ▼ eller ▲ og tryk på OK (venstre softkey)





Indtast dag, måned og år med 8 cifre (f.eks. 1 2 0 5 2 0 1 1 for 12.05.2011). Der kan springes mellem indtastningsfelterne ved hjælp af tasterne ◀ og ▶. Efter afslutning af datoindtastningen, springer markøren automatisk til det første ciffer i tidsindtastningsfelterne.



Indtast timer og minutter med 4 cifre (f.eks. 0 9 2 5 for kl. 09:25). Spring mellem indtastningsfelterne ved hjælp af tasterne ◀ og ▶. Tryk på **OK** (venstre softkey) for at gemme indstillinger, eller vælg med tasterne ▲▼ menupunktet **"Auto update"** (automatisk opdatering). Aktiver eller deaktiver herefter den automatiske tidsangivelse fra telefonlinjen ved hjælp af tasterne ◀ eller ▶. Tryk på **OK** (venstre softkey) for at gemme indstillingerne.

Brug af telefonen

Ring op

1.  Indtast det ønskede telefonnummer (maks. 20 cifre). Hvis forkert tal indtastes, tryk  for at slette det.
2. Tryk på . Nummeret ringes op.
3. Afslut opkaldet ved at trykke på  knappen igen.



Afslut opkald

For at afslutte opkaldet trykkes på tasten  eller placér telefonrøret i basen.



Besvarelse af opkald

Et indgående opkald signaliseres flere gange på telefonen:


- akustisk med en ringetone
- visuelt ved hjælp af et lyssignal på telefonen og en meddelelse på displayet
- mekanisk ved hjælp af vibrationer

1. Telefonen ringer
2. Tryk på  for at besvare opkaldet
3. Afslut opkaldet ved at trykke på knappen 

Brug af håndfri-funktionen under et opkald

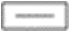

1. Tryk på den venstre softkey () eller tasten  for at aktivere håndfri tilstand under et opkald


2. For at deaktivere håndfri, tryk på venstre softkey () eller tasten 

Bemærk: Hvis højttalertelefonen er tændt, vises  i displayet.


Genopkald

Tryk på **LNR/II** for at få vist de senest kaldte telefonnumre.



1. Tryk på **LNR/II**-knappen, og rul derefter til det ønskede nummer ved hjælp af   tasterne

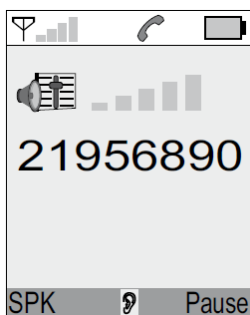

2. Tryk på  tasten for at ringe op til nummeret



Indstilling af højttaler lydstyrke / diskant / baskontrol



Højttalervolumen kan indstilles under et telefonopkald ved hjælp af pileknapperne på forsiden af telefonen.

Højttalerlydstyrken kan øges eller sænkes i fem trin ved at trykke på knapperne  eller 

Tryk   for at aktivere yderligere forstærkning (tasten lyser rødt) og for at aktivere tonekontrol. Diskant- eller baskontrol kan også hæves i trin på 10 dB ved hjælp af tonekontrol (skubkontakt på venstre side af telefonen)


Tryk   igen for at deaktivere yderligere forstærkning og tonekontrol (tasten lyser ikke længere)

Bemærk:

Forstærkningsafbryderen fungerer kun, når modtageren er aktiveret.

Tænd / sluk for mikrofonforstærkning: »FreeTEL III« er udstyret med en ekstra mikrofonforstærkning, som kan være tændt efter behov. Dette gør det muligt at hæve lydstyrken af stille lydtransmissioner, som gør det muligt for personen i den anden ende at forstå bedre. For at tænde mikrofonforstærkning, skub kontakten M til ●.

Brug af telefonbogen

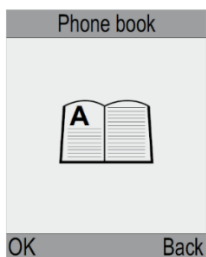

Op til 100 kontakter kan gemmes med navn og telefonnummer i telefonbogen. Når et telefonnummer er blevet gemt, kan et opkald foretages ved blot at trykke på et par taster. Hvert navn kan være på max. 12 karakter, og telefonnummeret kan være på max. 20 cifre.

Tast Bogstav / Tegn

1	[Space] 1
2	ABCabc2ÅÄÅÄääääàç
3	DEFdef3ÉÊËËëëëè
4	GHIghi4iî
5	JKLjkl5

Tast Bogstav / Tegn

6	MNOmno6Öóóóóññ
7	PQRSpqrs7ß
8	TUVtuv8ÛÜÜÜüüù
9	WXYZwxyz9ÿÿÿ
0	0

Volumen på telefonens melodi-/ringtone kan indstilles som følger:




- > Tryk på **Menu** (venstre softkey) - **"Ringer"**
- > Tryk på **OK** (venstre softkey)
- > Brug ◀ og ▶ for at vælge den ønskede melodi- el. ringtone
- > Tryk på knappen ▼
- > Brug ◀ og ▶ for at vælge den ønskede volumen
- > Tryk på **OK** (venstre softkey) for at gemme indstillinger.

Bemærk: Tryk på **Back** (højre softkey) for at returnere til menulisten.

Ændring af sprog i menu

Skærm teksterne kan indstilles til forskellige sprog.

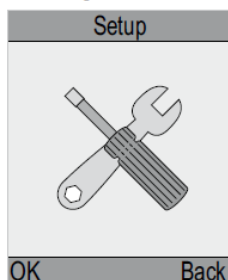


- > Tryk på **Menu** (venstre softkey) -> **"Setup"**
- > Tryk på **OK** (venstre softkey) -> **"Language"**
- > Tryk på **OK** (venstre softkey)
- > Brug knapperne ◀ og ▶ for at vælge det ønskede sprog
- > Tryk på **OK** (venstre softkey) for at gemme indstillinger

Bemærk: Tryk på **Back** (højre softkey) for at returnere til menulisten.

Bluetooth® - (Denne funktion gælder kun for visse modeller)

Aktivere / deaktivere Bluetooth®-funktionen

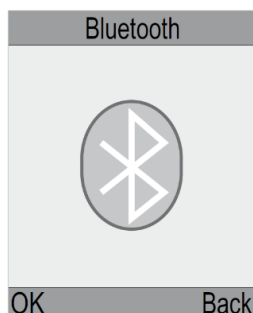

- Tryk på **Menu** (venstre softkey) -> **"Bluetooth"**
- > Tryk på **OK** (venstre softkey) -> **BT Mode**
- > Tryk på **OK** (venstre softkey)
- > Brug ◀ og ▶ for at vælge "ON" eller "OFF"
- > Tryk på **OK** (venstre softkey) for at gemme indstillinger


Bemærk:

Hvis Bluetooth®-funktionen er aktiveret, aflades batterierne hurtigere end under normal anvendelse. Slå funktionen fra, hvis der ikke er brug for den!

Forbind Bluetooth®-enheder

Det er muligt at forbinde »freeTEL III«, via Bluetooth®-forbindelsen, med et Bluetooth®-headset eller andre Bluetooth®-aktiverede enheder.

Tryk på **Menu** (venstre softkey) → ”**Bluetooth**”

- Tryk på **OK** (venstre softkey) –”**BT Parring**”
- Tryk på **OK** (venstre softkey)
- Aktivér den Bluetooth®-aktiverede enhed og indstil den i forbindelses-tilstand (se enhedens brugervejledning)
- Hvis forbindelsen mellem »freeTEL III« og den Bluetooth®-aktiveret enhed er korrekt oprettet vises et  på displayet

Bemærk:

Bluetooth®-funktionen skal være aktiveret, så andre Bluetooth®-aktiverede enheder kan tilsluttes »freeTEL III«.

For mere avancerede funktioner, henvises til den engelsksprogede manual.

Garanti

Alle »freeTEL III« -enheder er meget pålidelige produkter. Hvis der opstår en funktionsfejl på trods af at enheden er opsat og betjent korrekt, bedes du venligst kontakte din forhandler eller producenten direkte.

Denne garanti dækker reparation af produktet og gratis returnering til dig. Vi anbefaler at sende produktet i sin originale emballage.

Garantien gælder ikke for skader, der er forårsaget ved forkert håndtering eller forsøg på at reparere enhed af uautoriserede personer (destruktion af tætning på enheden).

Reparationer udføres kun under garanti, ledsaget af en kopi af forhandlerens faktura / købskvittering. Angiv altid produktets serienummer ved enhver reklamation.

Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektroniske enheder (gældende i landene i Den Europæiske Union og andre europæiske med et separat indsamlingssystem). Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke skal håndteres som almindeligt husholdningsaffald, men skal returneres til et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektroniske enheder.

Du beskytter miljøet og sundheden for din ved korrekt bortskaffelse af dette produkt. Miljø og sundhed er truet af forkert bortskaffelse.



Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup

Tlf. 46 19 51 00 – info@scantone.dk – www.scantone.dk