

Axi2Go Quick Start

AXI2GO




CE



- NL** Plaats, indien nodig, uw muntstuk in het muntslot (A) en ontkoppel de Axi2Go.
- GB** If necessary, insert a coin in the coin slot (A) and release the Axi2Go.
- DE** Stecken Sie, falls erforderlich, eine Münze in das Münzschloss (A) und entkoppeln Sie den Axi2Go.



- NL** Plaats uw bagage op het bagagerekje (B) (indien aanwezig).
- GB** Put your luggage on the luggage rack (B) (if present).
- DE** Stellen Sie Ihr Gepäck auf den Gepäckträger (B) (falls vorhanden).

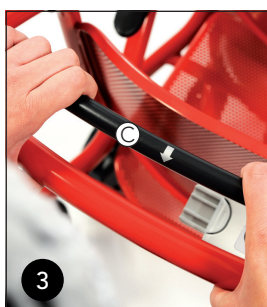

- NL** U kunt met de Axi2Go gaan rijden door de zwarte rembeugel (C) naar beneden te duwen en vast te houden. Zodra u de rembeugel loslaat, staat de stoel weer op de rem.
- GB** You can release Axi2Go's brake by pressing the black brake bar (C) downwards and holding it down. As soon as you release the brake bar, the wheelchair brakes come back on.
- DE** Um mit dem Axi2Go fahren zu können, drücken Sie den schwarzen Bremsbügel (C) nach unten und halten ihn fest. Wenn Sie den Bremsbügel wieder loslassen, wird die Bremse des Rollstuhls wieder angezogen.



Axi2Go Quick Start



4

- NL De inzittende kan plaatsnemen. Zet alvorens u gaat rijden de voeten op de voetplaat **(D)**.
- GB The occupant can now sit down. Before you start moving, the feet should be on the footrest **(D)**.
- DE Der Rollstuhlbenutzer kann sich setzen. Stellen Sie die Füße auf die Fußplatte, bevor Sie losfahren **(D)**.



5

- NL Een eventueel obstakel kunt u trotseren door met uw voet op de kiepvoorziening **(E)** te drukken en gelijktijdig met uw handen de duwbeugel naar beneden te duwen, waarna u de Axi2Go over de verhoging kunt rijden.
- GB You can overcome obstacles you may meet by pushing on the tilt pedal **(E)** and at the same time pressing the push bar downwards with your hands, after which you can roll the Axi2Go over the elevation.
- DE Ein Hindernis können Sie überwinden, indem Sie mit dem Fuß auf den Bordsteinheber **(E)** drücken und gleichzeitig mit den Händen die Schubstange nach unten drücken; danach können Sie den Axi2Go über die Erhebung fahren.



6

- NL Stal uw Axi2Go na gebruik (en ontvang uw muntstuk terug).
- GB After use, park the Axi2Go (and retrieve your coin).
- DE Stellen Sie den Axi2Go nach dem Gebrauch wieder ab (Sie erhalten dann Ihre Münze zurück).



- Let op:** Het oprijden van een helling kan men voorwaarts doen, het afrijden van een helling is beter achterwaarts uit te voeren.
- Attention:** You can go up a slope forwards, but it is better to descend a slope backwards.
- Achtung:** Das Hinauffahren einer Steigung kann vorwärts erfolgen; das Hinunterfahren von einer Steigung erfolgt am besten rückwärts.



- Let op:** Gebruik nooit schurende en agressieve schoonmaakmiddelen zoals thinner, wasbenzine en dergelijke.
- Attention:** Never use abrasive or aggressive cleaners or solvents such as thinners, dry-cleaning naptha or the like.
- Achtung:** Verwenden Sie niemals scheuernde und aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Verdünner, Waschbenzin oder Ähnliches.