



Brugervejledning

Geo-Matrix Hybrid, Geo-Matrix Hybrid Deep, Geo-Matrix Hybrid Low Profile, Geo-Matrix Hybrid Deep Low Profile, Geo-Matrix Platinum, Geo-Matrix Platinum+, Geo-Matrix Bold, Geo-Matrix Vinga, PC Cutback, Zentury

VIGTIG FORBRUGEROPLYSNING

BEMÆRK: Denne vejledning indeholder instruktioner til brug med Blake Medical pudeprodukter. Disse oplysninger skal videregives videre til brugeren af dette produkt. Fjern ikke denne vejledning før levering til slutbrugeren.

LEVERANDØR: Denne vejledning skal gives til brugeren af dette produkt ved levering eller installation.

BRUGER: Før du bruger dette produkt, skal du læse hele denne vejledning og gemme til fremtidig reference.

Generel produktsikkerhed

Sikker anvendelse af dette produkt afhænger af din gode dømmekraft og sunde fornuft, såvel som din leverandør, plejepersonale, sundhedspersonale og din opmærksomhed med hensyn til at følge advarslerne, bemærkningerne og instruktionerne i denne vejledning.

BEMÆRK: Vi har samlet denne manual ud fra de seneste specifikationer og produktinformation, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer, når de bliver nødvendige. Enhver ændring af vores produkter kan forårsage små variationer mellem illustrationerne og forklaringerne i denne manual og det produkt, du har købt. Kontakt altid din nærmeste autoriserede Blake Medical-leverandør eller blakemedical.ca for at få den seneste litteratur og information.

ADVARSEL: Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i skade på produktet eller skade på brugeren. Læs venligst denne brugsanvisning, før du bruger dette produkt.

Installer ikke dette udstyr uden først at have læst og forstået denne vejledning. Hvis du ikke er i stand til at forstå advarslerne og/eller instruktionerne, skal du kontakte kvalificeret sundhedspersonale eller leverandøren.

1. ADVARSEL

Montering af en siddepude på en kørestol kan påvirke kørestolens tyngdepunkt. Forkert installeret kan det få kørestolen til at vælte bagover, hvilket potentielt kan resultere i personskade. Vurder altid, om tilføjelse af tipsikringer og/eller yderligere kørestolsstabiliserende anordninger kan være nødvendige for at hjælpe med at øge stabiliteten efter tilføjelse af en siddepude.

2. ADVARSEL

Alle Blake Medical rygstøtter og siddepuder er designet til at hjælpe med at reducere forekomst af trykskader. Dog kan ingen rygstøtte eller siddepude helt eliminere siddetryk eller forhindre trykskader. Blake Medical rygstøtter og siddepuder er ikke en erstatning for god hudpleje, herunder ordentlig kost, renlighed og regelmæssige trykafastningsteknikker.

BEMÆRK - LÆS FØR BRUG

3. ADVARSEL

Haleben og bækkenben må ikke røre bunden af siddepuden. Tjek for "bund ud" bør foretages under første brug og efter enhver ændring af brugerens tilstand (f.eks. overdrevent væggtab, overdreven vægtøgning, forlænget hospitalsophold osv.).

4. ADVARSEL

Tjek din hud regelmæssigt for rødme, især i løbet af de første par dage. Hvis der opstår rødme og den ikke forsvinder efter 15 minutter, skal du kontakte din terapeut, sundhedspersonale, læge eller lignende.

5. ADVARSEL

Vær sikker på, at Velcro® på undersiden af siddepuden er påsat korrekt og den er i stand til at holde siddepuden på plads.

6. ADVARSEL

Undgå at bruge siddepuden på alt for stramt sædebetræk.

Udstrakt sædebetræk giver ikke altid tilstrækkelig støtte til siddepuden og kan resultere i forkert person placering i kørestolen.

Vi foreslår udskiftning af det stramme sædebetræk eller tilføj en solid sædeindsats til bunden af siddepuden.

7. ADVARSEL

I tilfælde af tilsmudsning med kropsvæsker, når produktet overføres til en anden bruger eller lignende situationer skal siddepude vaskes og/eller desinficeres for at undgå krydskontaminering.

Bemærk: Skumkomponenter kan være svære at desinficere grundigt, så desinfektionen skal gøres ekstra omhyggelig. Betræk kan vaskes i maskine ved 60 grader – uden centrifugering - og lufttørres efterfølgende.



BESKYTTELSE af din SIDDEPUDE

ADVARSEL

Undgå altid at udsætte din siddepude for overdreven varme eller åben ild. Blake Medical-siddepudematerialerne fungerer optimalt ved stuetemperatur.

ADVARSEL

Lad altid Blake Medical siddepuder nå stuetemperatur før den tages i brug, da det for dig er mest behageligt. At sidde på alt en for varm eller kold overflade kan medvirke til at forårsage hudskader.

FORHINDRINGER ved NEDSIDNING på PUDEN

ADVARSEL

Sørg for, at der aldrig er nogen forhindringer imellem dig og din siddepude. Enhver forhindring vil reducere produktets effektivitet og/eller kan være med til at øge unødvendige trykpunkter på bruger.

BETRÆK INFORMATION

ADVARSEL

Produktet skal bruges med siddepudebetrækket opad (læg mærke til at Balke ETIKET på betrækkets side skal vende ud mod dit knæ). Hvis betrækket ikke er påsat korrekt, det kan reducere eller eliminere siddepudens fordele (komfort, trykfordeling og shear) og kan øge risikoen for hud- og bløddelsskader.

Konfigurer instruktioner:

- Kontroller pudestørrelsen. Pudens bredde og sæde skal matche. Når puden hviler mod armstøtter eller sideskærme, bredden kan være op til 2,5 cm (1") bredere. Dybden af puden kan overstige sædet med ca. 2,5 cm (1")
- Kontroller, om størrelsen på dækslet svarer til pudens størrelse.
- Fjern beskyttende bagbånd fra selvklæbende krogstrimler fastgjort til bunden af puden.
- Placer hynden på sædet, og sørg for, at Blake-logoet vises foran til venstre.
- Efter flere minutters brug skal du sikre fodstøtter og korrekt placeret for at sikre tilstrækkelig vægtfordeling foran på puden.