

Audinor DUO system 3.0

Quick Guide DK_20210909_01



Mikrofon
til samtalepartner

Modtager
til dig

Opladning

Sæt ladeledningen i ladekontakten ved hjælp af det magnetiske stik. Enhedens lampe lyser rødt når den lades op, og grønt når den er fuldt opladet.

Tænd/sluk

- Tænd: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde i 1 sekund, indtil den grønne lampen slukker.
- Sluk: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde i 1 sekund, indtil den røde lampen slukker.

Lytte

Når du bruger halsslyngen, skal høreapparaterne skiftes til teleslynge programmet. Hvis du ikke har høreapparater, kan man alternativt bruge et par almindelige hovedtelefoner.

Lydstyrke på modtager

Tryk på knappen med + symbol for at skrue op for lyden.

Tryk på knappen med – symbol for at skrue ned for lyden.

Tilkobling af ekstern lydkilde

Du kan tilkoble en ekstern lydkilde til både mikrofon (TV mm) og modtager (iPad, mobiltelefon mm). Brug det medfølgende audiokabel med magnetisk stik.

Mere kaffe?

Løft modtageren til vandret position for at høre via modtagerens mikrofon. Kan bruges for at høre en taler tæt på, f.eks. når mikrofonen er tilkoblet fjernsynet. Lampen blinker hvidt når funktionen er aktiv. Når modtageren slippes igen, genetableres forbindelsen til den trådløse mikrofon.

NB: Første gang aktivering: Hold enheden vandret, og hold "lydstyrke op" knappen inde i 5 sek.

Mute/Dæmpning af bordmikrofon

Vend mikrofonen med forsiden ned mod bordet for midlertidigt at mute den. Når den vendes tilbage, kan du høre den igen.

Batteristatus

Med et kort tryk på tænd/sluk knappen vil batteristatus blive fortalt, f.eks. "mikrofon 80 procent".

Parring

Enhederne er færdig parret ved levering. For at parre en modtager til en ny mikrofon, trykkes "lydstyrke op"-knappen på modtageren inde i 3 sek.

Audinor ApS, Benediktevej 5, DK-3480 Fredensborg

Mail: info@audinor.dk Telefon: (+45) 42180685