

BRUDESTOL REKO SOFT, JUSTERBAR

Artikelnr.: 142005, 141990 142181

Anvendelse: Brudestolen Reko Soft er designet til brug i brusebad. Stolen har en stabil, fuldt svejset konstruktion med armstøtter, der gør det lettere at rejse sig op. Sædet er blødt og varmeisolerende. Ryglæn fås som tilbehør og kan bestilles separat hos Swereco.



Sikkerhedsanvisninger:

- Dette produkt må kun anvendes til det formål, det er beregnet til.
- Stolen er ikke beregnet til brug i badekar.
- Stolen skal placeres på en plan overflade med alle fire ben solidt plantet på gulvet.
- Stolen må ikke være vinklet, så den kun står på to ben, når brugeren sidder på den. Den maksimale brugervægt er udregnet med alle fire ben på gulvet.
- Stolen må ikke flyttes, mens brugeren sidder på den.
- Gumispidserne bør kontrolleres regelmæssigt. Beskadigede eller slidte spidser kan resultere i et forringet gulvgreb og bør udskiftes. De kan bestilles hos Swereco.
- Hvis stolen er indstillet til en let foroverbøjet position, må den maksimale højdeforskel mellem de forreste og bageste ben ikke overstige 2,5 cm, hvilket svarer til ét trin på benenes højdeindstilling.
- Før brug skal du sikre dig, at klemmerne til højdejustering er forsvarligt fastgjort.
- Hvis du udskifter klemmerne, skal du sikre dig, at de har den korrekte størrelse, 25 mm (de fås i forskellige størrelser).
- Hvis der er tegn på, at højdejusteringen er slidt, eller at produktet på anden måde er slidt op, skal stolen tages ud af drift og sendes til service.

Symboler: Forklaring af symbolerne på produktet og i brugsanvisningen



Maksimal brugervægt



Kan vaskes med alkalisk sæbeopløsning, pH 5-9.



Vaskes ved højst 85 °C i 3 minutter.



Visuel kontrol



Produktet overholder EU-direktiv MDR 2017/745 og 2007/47/EF om medicinsk udstyr

Teknisk specifikation

Art. nr.: 142005 Voksne

Sædedybde: 34 cm
Sædebredde: 47 cm
Vægt: 4,9 kg
Højde: 45-55 cm
Materiale: Stålrør, polyuretan (sæde), termoplastisk elastomer (gumispidser)



Maks. 150 kg

Art. nr.: 141990 Børn

Sædedybde: 22 cm
Sædebredde: 38 cm
Vægt: 3,4 kg
Højde: 35-45 cm
Materiale: Stålrør, polyuretan (sæde), termoplastisk elastomer (gumispidser)



Maks. 70 kg

Fremstillet af:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

SVERIGE




Tlf.: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Brugsanvisning:

1. Tryk klemmen af stolebenet for at justere højden, indstil den korrekte højde, og tryk klemmen tilbage på benet. Sørg for, at klemmen sidder ordentligt fast inden brug. Hvis en gammel klemme skal udskiftes, så kontrollér, at den nye klemme har den korrekte størrelse på 25 mm.
2. Kontrollér gumispidserne før brug. Beskadigede/slidte gumispidser skal udskiftes med nye.
3. Hvis brusestolen er indstillet til en let foroverbøjet position, må højdeforskellen mellem det forreste og bageste ben ikke overstige 2,5 cm, hvilket svarer til ét højdeindstillingstrin.

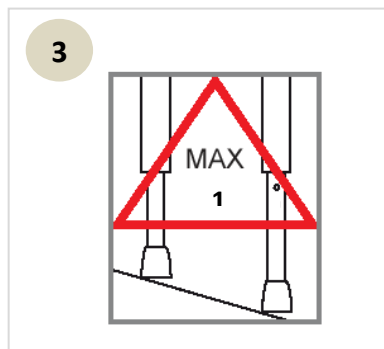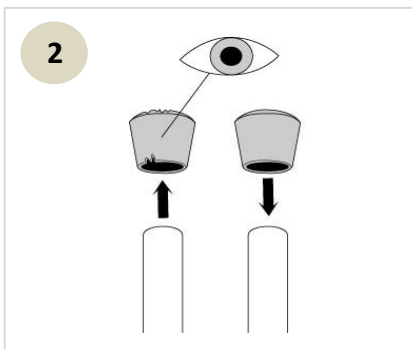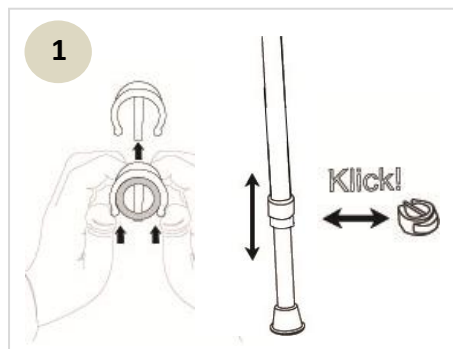


Anvisninger for vedligeholdelse: Rengør regelmæssigt, og når det er nødvendigt (mindst én gang om ugen), med en sæbeopløsning med en pH-værdi på 5-9. Når der skiftes til en ny bruger, skal produktet desinficeres og derefter autoklaveres ved højst 85 °C i 3 minutter. Alternativt kan du tørre det af med 70 % isopropanol.

Tilbehør:

Art. nr. 142050, ryglæn til 142050 voksne

Art. nr. 141995, ryglæn til 141990 børn

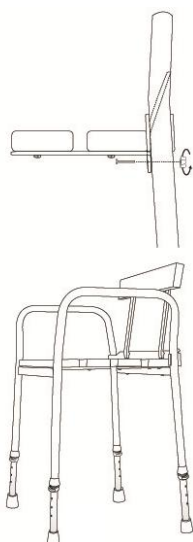

Montering af ryglæn:

Placer ryglænet på stolen, så det er kilet fast, og så hullerne i ryglænet flugter med hullerne i stolen.

Fastgør ryglænet med skrue og møtrik som vist.

Reservedele:

Art. nr. 120695, gumispids 19 mm

Art. nr. 14420213, klemme 25 mm

Art. nr. 14211305, klemmeholder

Art. nr. 14200004, plade (til 142005)

Art. nr. 14199005, plade (til 141990)

Art. nr. 14200005, skrue til plade (1 stk.)

Art. nr. 14205025-S, sæt med skruer og møtrikker til ryglæn



142005 + 142050

Genbrug:

Når produktet tages ud af brug, skal det genanvendes som metalkrot og plastaffald. Emballagen består af bølgepap og skal genbruges i overensstemmelse hermed.



Enhver alvorlig hændelse opstået under brugen skal indberettes til Swereco AB.

3142005_ENG