

Birgit med Polar Fodbremse 600-351



Brugervejledning

Under sædet har du 3 håndtag. 1 i venstre og 2 i højre side

Højdejustering: Håndtag i venstre side. Hold håndtaget oppe, mens du enten letter dig eller lægger vægt i, for at ændre højden på stolen.

Sædekip: Forreste håndtag i højre side. Når håndtaget er oppe, er sædet låst op og kan tippe frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse den ønskede position. Kan du ikke få den til det, skyldes det at ryglænet er for langt fremme. Stå evt. af stolen, og tip det med hænderne, og lås så ved at tage håndtaget ned.

Ryglæn: Bagerste håndtag i højre side. Når håndtaget er oppe, følger ryglænet dig frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse i ønsket position. Bagpå stolen, sidder der en håndskrue, til højdejustering af ryglænet.

Fodbremsen: For at bremse stolen skal man trykke pedalen på basen ned. Når den skal låses op igen skal du trykke på den inderste side af pedalen.

Vi giver 5 års garanti på stolen

