



Anne med Polar Fodbremse 600-301-CE



Modeller:

- Inge
- Knud
- Anne
- Birgit
- Nina
- Sadelstole
- Sadelstole med ryglæn

BRUGER MANUAL

Original

Oprettelses dato: 20-08-2026
Dokument navn: Anne med Polar Fodbremse 600-301-CE
Udarbejdet af: Egholm Stole ApS

Indholdsfortegnelse:

1	Introduktion.....	2
2	Identifikation	2
2.1	Fabrikant information	2
2.2	Identifikation af	2
2.3	CE mærke og Overensstemmelseserklæring	2
2.3.1	CE-mærkeplade:	2
2.3.2	EU-Overensstemmelseserklæring.....	3
3	Sikkerhedsinformationer	4
3.1	Sikkerhedsbestemmelser og advarsler	4
4	Beskrivelse af Stolen.....	5
4.1	Generel beskrivelse af stolen	5
4.2	Begrænsninger,	5
4.2.1	Tilsigtet brug	5
4.2.2	Målgruppe	5
4.2.3	Område begrænsninger	5
4.2.4	Tidsbegrænsninger	5
4.3	Kontrol før ibrugtagning	5
5	Betjeningsvejledning.....	5
5.1	Stolens funktioner.....	6
5.1.1	Højdejustering	6
5.1.2	Sædekip	6
5.1.3	Indstilling af ryglæn.....	6
5.1.4	Bremsefunktion	6
6	Vedligehold og rengøring.....	7
6.1	Rengøring	7
6.1.1	Hjul	7
6.1.2	Stel	7
6.1.3	Polsteroverflader	7
7	Reservedele	7
7.1	Kontakt ved bestilling af reservedele	7
7.2	Reservedelsliste	7
7.3	Bestilling af forbrugs- og reservedele	8
8	Ophør af brug.....	8
8.1	Demontering / Genanvendelse	8

1 Introduktion

Denne brugsanvisning er udarbejdet af Egholm Stole ApS.



Vigtigt!

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug.

Den bør altid være til rådighed for brugeren og følge stolen

2 Identifikation

2.1 Fabrikant information

Emne	Beskrivelse
Fabrikant	Egholm Stole ApS
Adresse:	Lundagervej 100 C
Postnummer/ by:	8722 Hedensted
Telefon nr.:	28257140
E-mail:	salg@egholmstole.dk

2.2 Identifikation af

Emne	Beskrivelse
Navn:	Anne med Polar Fodbremse 600-301-CE
Serial nr.:	(01) 05745001436094 (21) 100003
Produktionsår:	2026

2.3 CE mærke og Overensstemmelseserklæring

2.3.1 CE-mærkeplade:

Egholm Stole ApS - ergonomi i fokus DK-8722 Hedensted www.egholmstole.dk		
Produkt: Serial no.: Produktionsår: Max brugervægt:	Birgit med Polar fodbremse (01) 05745001436094 (21) 100003 2026 160 kg	

2.3.2 EU-Overensstemmelseserklæring

EU-Overensstemmelseserklæring

I henhold til **FORORDNING (EU) 2017/745** fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. april 2017

Original

Fabrikant

Egholm Stole ApS
Lundagervej 100 C
8722 Hedensted, Danmark
Tlf.: +45 75893410

Beskrivelse og identifikation af produktet

Produkt: Anne med Polar Fodbremse 600-301-CE
HMI nr: 132120
Serienummer UDI-DI (GMN): (01) 05745001436094 (21) 100003
Handelsnavn: Anne med Polar Fodbremse 600-301-CE

Risikoklasse: Klasse I

Det erklæres hermed udtrykkeligt, at produktet opfylder alle relevante bestemmelser i følgende forordning:

(EU) 2017/745 Forordning (EU) 2017/745 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. april 2017 om medicinske anordninger, der ændrer Direktiv 2001/83/EF, Forordning (EF) nr. 178/2002 og Forordning (EF) nr. 1223/2009 og ophæver Rådets direktiver 90/385/EØF og 93/42/EØF.

Henvisning til anvendte harmoniserede standarder

EN ISO 14971:2019 Medicinske anordninger – Anvendelse af risikostyring for medicinsk udstyr

Henvisning til andre anvendte standarder

DS/EN 1335-1:2020 + A1:2022 Kontormøbler – Kontorstole – Del 1: Mål – Bestemmelse af

Dimensioner

DS/EN 1335-2:2018
Sikkerhedskrav

Kontormøbler – Kontorstole – Del 2:

Hedensted d. 20-08-2026

Diana og Jette Egholm
Direktører

3 Sikkerhedsinformationer



ADVARSEL!

Følg instruktionerne i denne manual til sikker og korrekt anvendelse.

Gem denne manual til senere brug

3.1 Sikkerhedsbestemmelser og advarsler

Liste med relevante advarsler, brugeren skal forholde sig til ved brug af stolen


Symbol	Forklaring
	Brug aldrig stolen på ujævne overflader, herunder områder med niveauforskelle eller løse tæpper, da dette kan medføre risiko for, at stolen mister stabilitet
	Stolen skal altid være bremset, når man sætter sig ned eller rejser sig op fra den
	Indstil kun sæde- og rygvinkel, imens brugeren sidder i stolen med fødder i kontakt med gulv
	Service, ud over almindelig rengøring, bør altid udføres af en fagperson
	Brug kun stolen hvis alle dens funktioner er funktionelle

4 Beskrivelse af Stolen

Birgit med Polar fodbremse har et rigtig godt formstøbt sæde og et ryglæn med indbygget lændestøtte. Armlænene kan højdejusteres.

Betrækket er Valencia Kunstlæder, som er antibakteriel, rengøringsvenligt og slidstærkt. Det ideelle er at stolen kan låses ved behov, ved tryk på fodpedalen.

4.1 Generel beskrivelse af stolen

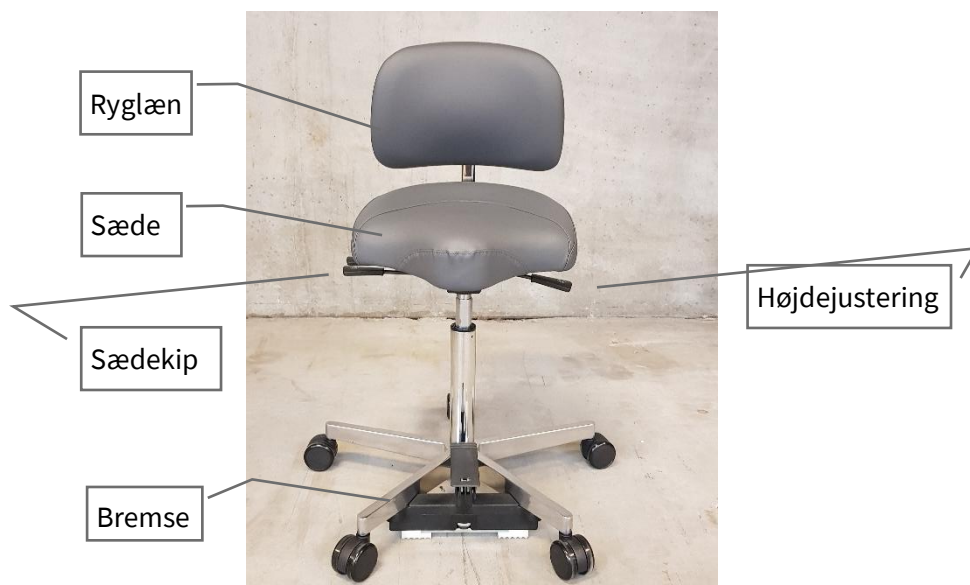

4.2 Begrænsninger,

4.2.1 Tilsigtet brug

Bremsestolen er beregnet til brug af personer i eget hjem, som har nedsat evne til at stå op, f.eks. under forberedelse af mad eller andre daglige aktiviteter. Stolen giver mulighed for stabil siddestilling og sikker mobilitet ved behov. Den er også tilegnet personer på arbejdsmarkedet, der har behov for en stabil stol der kan låses.

4.2.2 Målgruppe

Voksne med nedsat stå- og balanceringssevne, der har behov for en stabil stol med integreret bremsefunktion.

4.2.3 Område begrænsninger

bremsestole med fodbremse er IKKE egnet til gulvtæpper. Se i stedet på vores stole med håndbremse.

4.2.4 Tidsbegrænsninger

Garanti periode: 5 år ved maks. brugervægt på 160 kg

4.3 Kontrol før ibrugtagning

Kontroller stolen for mangler eller transportskader før ibrugtagning

Kontakt leverandøren/Egholm Stole ApS, hvis der observeres mangler eller skader på stolen

5 Betjeningsvejledning

I dette afsnit beskrives hvorledes stolen betjenes på en sikker og korrekt måde.

5.1 Stolens funktioner

5.1.1 Højdejustering

For at sikre en ergonomisk korrekt arbejdsstilling kan du nemt justere stolens siddehøjde.

Følg disse trin:

- Sæt dig på stolen
Sæt dig roligt på sædet, så gasliften kan reagere korrekt på din vægt.
- Find højdehåndtaget
Under sædet, i venstre side, sidder et lille håndtag eller en vippearm. Dette håndtag styrer stolens gaslift.
- Hæv stolen
Rejs dig en smule fra sædet, så der ikke er fuld belastning på stolen. Træk eller vip håndtaget opad.
Stolen vil nu hæve sig, så længe du holder håndtaget aktivt.
- Sænk stolen
For at sænke højde, forbliv siddende og træk igen håndtaget opad.
Stolen sænker sig gradvist, indtil du slipper håndtaget.



5.1.2 Sædekip

Forreste håndtag i højre side.

Når håndtaget er oppe, er sædet låst op og kan tippe frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse den ønskede position. Kan du ikke få den til det, skyldes det at ryglænet er for langt fremme. Stå evt. af stolen, og tip det med hænderne, og lås så ved at tage håndtaget ned.

5.1.3 Indstilling af ryglæn

Bagerste håndtag i højre side. Når håndtaget er oppe, følger ryglænet dig frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse i ønsket position. Bagpå stolen, sidder der en håndsrue, til højdejustering af ryglænet.

5.1.4 Bremsefunktion

Du kan låse stolen ved behov, ved at træde pedalen fremad.

For at låse op, træder du bagud.

På bremsen sidder der et lille hjul/justeringsskrue der kan justere højden på bremsen. Hvis den er for høj, kan stole vippe lidt når den er låst. Drej på hjulet/skruen for at justere højden.

Stolen kan fås med 2 forskellige typer gascylindere.

Den ene er låst, så sædet ikke drejer. Dette gør stolen meget stabil, og fodbremsen flytter sig ikke. For at dreje stolen, låses der op ved at træde pedalen bagud. Herefter kan hele stolen let dreje.

Den anden mulighed, er en drejbar gascylinder. Den fungerer, så du frit kan dreje på sædet, uanset om stolen er låst eller ej. Ulempen er, at så drejer du også væk fra fodbremsen



6 Vedligehold og rengøring

6.1 Rengøring

Stolen skal altid holdes ren. Især hjulene, for at stolen kører optimalt

6.1.1 Hjul

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester o.l.

Rens hjulbanerne efter behov. Bliver hjulene slidte, kan der købes nye hos Egholm Stole

6.1.2 Stel

Rengøres med lunkent vand evt. tilsat en pH-neutral sæbe.

6.1.3 Polsteroverflader

Betrækket på denne model er som standard kunstlæder.

Stof: Pletter fjernes med en hårdt opvreden klud med vand. Kan støvsuges med blød børste.

Kunstlæder: Rengøres med en hårdt opvreden klud med vand eller mild sæbe. Tåler også 70/30 sprit opløsning

Læder: Rengøres med sæbespån eller læderrens og derefter vedligeholdes med læderbalsam. Vi henviser til Denwax.com.

7 Reservedele

7.1 Kontakt ved bestilling af reservedele

Emne	Beskrivelse
Fabrikant	Egholm Stole ApS
Adresse:	Lundagervej 100 C
Postnummer/ by:	8722 Hedensted
Telefon nr.:	28257140
E-mail:	salg@egholmstole.dk

7.2 Reservedelsliste

Skulle noget gå i stykker, eller ønskes stolen ændret?

Alle dele på stolen kan udskiftes.

Kontakt os for yderligere info om mulighederne, da de er mange.

Ryglæn	Vi har flere typer ryglæn. Vi kan også ombetrække ryglænet.
Sæde	Der kan tilkøbes nyt sæde. Vi kan ombetrække det gamle og _I kan få en helt anden type sæde på.
Mekanisme – dele	Skulle håndskruen være beskadiget, kan vi sende en ny
Mekanisme	Mekanismen under sædet med håndtag, kan skiftes
Gascylinder -	Der er 2 typer. Drejbar og ikke drejbar. Begge fås i flere højder Ikke drejbar https://www.egholmstole.dk/produkt/ikke-roterbare-gascylindere/

	Drejbar https://www.egholmstole.dk/produkt/gascylindere-til-hoejdejustering/
Fodkryds	Der kan købes ny fodkryds med bremse.
Hjul	Hjulene kan let skiftes. https://www.egholmstole.dk/produkt/hjul-uden-skaerm/

7.3 Bestilling af forbrugs- og reservedele

For at sikre en korrekt bestilling af reservedele, skal følgende information, være med på bestillingen.

- Stolens serienummer
- Beskrivelse af reservedelen / reservedelene
- Fakturerings data
- Ønsket leveringstid.

8 Ophør af brug

Inden stolen kasseres, så vær sikker på at der ikke blot skal skiftes en reservedel. Vi kan også ombetrække sæde og ryg. Vi bestræber os på at lave stole der kan bruges i rigtig mange år, Det er bedre at forære stolen til en værdig trængende end at kassere den.

8.1 Demontering / Genanvendelse

Hvis stolen skulle komme i en så dårlig tilstand, at det vurderes, at den skal tages ud af brug, er det vigtigt at den ophugges korrekt i forhold til lokale regler for bortskaffelse/genanvendelse af materialer.

Følgende skal overholdes:

- Adskil stolens genanvendelige dele og aflever dem på et genbrugscenter.
- Sælg stolen til en autoriseret skrothandler.
- Stolen må ikke smides ude i naturen.