

da

Elkørestol

Modeller i CHAIR: 1.610 MC1 / 1.611 MC2 /
1.612 MC3 / 1.613 MC FRONT /
1.615 MC2 RS / 1.616 MC S

Betjeningsvejledning



MEYRA®

Indhold

De anvendte mærkninger betydning	7
Indledning	7
Modeller	7
Indikationer / kontraindikationer	7
Modtagelse	8
Brug i overensstemmelse med formålet	8
Anvendelse	8
Tilpasning	9
Kombination med produkter fra andre producenter	9
Ibrugtagning efter opbevaring	9
Levetid	10
Grundstilling	10
Oversigt	11
Model 1.610	11
Model 1.611	12
Model 1.612	13
Model 1.613	14
Model 1.615	15
Model 1.616	16
Håndtering af elkørestol	17
Sikring af elkørestol	17
Funktionskontrol	17
Køreegenskaber	17
Bremser	17
Driftsbremse	17
Bremsning af kørestol	17
Parkeringsbremse	17
Aktivering af bremsler	18
Deaktivering af bremsler	18
Køre-/skubbefunktion	19
Indstilling til skubbefunktion	19
Indstilling til kørefunktion	19

Klargøring til drift	20
Kontrol inden kørsel	22
Batteriopladning	22
Positionering af betjeningsmodul	23
Funktionsbeskrivelse	23
Indstilling af afstand til armstøtte	23
Afmontering af betjeningsmodul	23
Montering af betjeningsmodul	23
Drejning af betjeningsmodulet til siden og bagud	24
Højdeindstilling af betjeningsmodulet	24
Benstøtter	25
Lægbælte	25
Afmontering af lægbælte	25
Montering af lægbælte	25
Længdeindstilling af lægbælte	25
Benstøtteunderdel	26
Fodplader	26
Fodbræt	26
Benstøtteoverdel	27
Drejning af benstøtter til siden	27
Tilbage drejning af benstøtter	28
Afmontering af benstøtter	29
Montering af benstøtter	29
Benstøtte m. mekanisk højdeindstilling	30
Løft/sænkning af benstøtte	30
Benstøtte med elektrisk højdeindstilling	31
Højdeindstilling	31
Afmontering af benstøtte med elektrisk højdeindstilling	32
Montering af benstøtte med elektrisk højdeindstilling	32
Armlænene	33
Afmontering af armlæn	33
Montering af armlæn	33
Belyste frakkeskånere	34
Til-/frakobling af de belyste frakkeskånere	34


Ryglæn	35
Nedklapning af ryglæn	35
Opklapning af ryglæn	35
Indstilling af ryglænets hældning	35
Sikre positioner for ryglænet	36
Variabel ryg	37
Afmontage af rygpulstring	37
Montering af rygpulstring	37
Ryglæn med elektrisk indstilling	38
Nedklapning af ryglæn med elektrisk indstilling	38
Opklapning af ryglæn	38
Ryglænspulstring	39
Sikre positioner for ryglænet	39
Sæde	40
Sædepulstring	40
Siddepude	40
Sædehældning	40
Manuel indstilling af sædehældning	41
Justering af elektrisk sædehældning	41
Sædehøjdeindstilling	42
Hovedstøtte	43
Sikkerhedssele	44
USB-tilslutningsport	45
Ledsagerstyring med mit prioritetsstyring	46
Positionering af styring	46
Holder til ganghjælpemidler	46
Belysning	47
Sidespejl	47
Afmontage af sidespejl	47
Montering af sidespejl	47
Indstilling af spejl	47

Flytning og transport	48
På-/aflæsning	48
Ramper og lifte	48
Persontransport i motorkøretøjer	48
Transportsikring	49
Dæk	50
Vedligeholdelse	50
Servicearbejde	50
Serviceplan	51
Sikringer	53
Udskiftning af sikringer	53
Belysning	54
Kørelys	54
Fejludbedring	55
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	56
Ledsager	56
Udstigning fra elkørestolen	57
Opsamling af genstande	57
Kørsel på skråninger, stigninger eller skrånende kørebane	57
Forcering af forhindringer	58
Elektrisk anlæg	58
Befordring i offentlige transportmidler	58
Kørsel i offentlig trafik	59
Rengøring	59
Behandlet overflade	60
Desinficering	60
Reparation	60
Istandsættelse	60
Service	60
Reservedele	60
Anvisninger vedrørende længere brugspausser	61
Bortskaffelse	61

Tekniske data	62
Dæktryk ved luftfyldte dæk	62
Rækkevidde	62
Køreegenskaber ved forcering af stigninger	62
Anvendte standarder	63
Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.610	64
Yderligere tekniske data for model 1.610	65
Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.611	66
Yderligere tekniske data for model 1.611	67
Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.612	69
Yderligere tekniske data for model 1.612	70
Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.613	71
Yderligere tekniske data for model 1.613	73
Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.615	74
Yderligere tekniske data for model 1.615	75
Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.616	77
Yderligere tekniske data for model 1.616	78
Symbolforklaring til vaskeanvisningerne	80
Symbolforklaring til vaskeanvisningerne	80
Forklaring til mærkaterne på elkørestolen	81
Forklaring til symbolerne på typeskiltet	82
Kontrolokumentation	83
Ansvar/garanti	84
Ansvar- / garantikupon	85
Kontrolokumentation ved overdragelse	85
Notater	86

DE ANVENDTE MÆRKNINGERS BETYDNING

Sikkerhedsanvisninger på farvet baggrund skal altid følges!


-  Dette symbol står for anvisninger og anbefalinger.
- [] Henvisning til et billednummer.
- () Henvisning til et funktionselement i et billede.

INDLEDNING

Læs dette dokument før første ibrugtagning, og ret dig efter det.

Børn og unge bør eventuelt læse dette dokument før første køretur sammen med forældre eller en tilsynsførende eller ledsager.

Denne betjeningsvejledning skal gøre dig fortrolig med håndteringen af elkørestolen samt forebygge uheld.

-  De illustrerede udstyrsvarianter kan afvige fra din model.

Derfor er der også angivet kapitler med optioner, som muligvis ikke er relevante for din individuelle elkørestol. I bestillingsformularen til din elkørestol finder du en liste over ekstraudstyr og tilbehørsdele, som kan leveres.

Synshandicappede brugere finder PDF-filerne med udvidede oplysninger om vores produkter på vores website under:

< www.meyra.com >.

-  Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål.

Alternativt kan brugere med synshandicap få en hjælper til at læse teksten i dokumentationsmaterialet højt.

Informationer om produktsikkerheden og mulige tilbagekaldelsesaktioner for vores produkter finder du i < *Information center* > (infocenter) på vores hjemmeside:

< www.meyra.com >.

Vi har udviklet en elkørestol, som opfylder de tekniske og lovmæssige krav til medicinsk udstyr. Hvis der på trods af dette alligevel skulle opstå en alvorlig hændelse, bedes du skrive til os på vores e-mail-adresse < info@meyra.de > og kontakte den kompetente myndighed i dit medlemsland.

MODELLER

Denne betjeningsvejledning gælder for følgende modeller:

Model 1.610

Model 1.611

Model 1.612

Model 1.613

Model 1.615

Model 1.616

INDIKATIONER / KONTRAINDIKATIONER

Søg straks læge ved allergiske reaktioner, rødmen og/eller tryksteder ved brug af elkørestolen.

For at undgå kontaktallergier anbefaler vi kun at benytte elkørestolen med tøj på.

Din elkørestols væld af funktioner gør, at den kan bruges ved væsentlig til fuldt udpræget begrænsning af mobiliteten/evnen til at gå ved strukturelle og/eller funktionelle skader på de nedre ekstremiteter (bl.a. amputation, ulykkesskader, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletalt betingede bevægelsesforstyrrelser f.eks. på grund af:

- lammelser
- tab af lemmer (benamputation)

- defekt/deformationer af lemmer
- ledkontrakturer/-skader
- andre sygdomme.

Ved den individuelle forsyning skal man desuden være opmærksom på den handicappede persons fysiske og psykiske tilstand, alder samt de personlige boligforhold og de personlige forhold.

Enhver forsyning bør i det enkelte tilfælde kontrolleres, afprøves ved den faguddannede person (rådgiver for medicinsk udstyr, genoptræningsrådgiver m.m.) og tilpasses til den individuelle uarbejdsdygtighed, som opstår af det definerede sygdomsbillede. Hertil hører også, at personer med problematikker, som er angivet i kontraindikationerne, i det enkelte tilfælde kan påvise den kognitive, karakteristiske og fysiske evne til at betjene et af de modeller, som er angivet i modellisten.

Elkørestolen må ikke anvendes ved:

- Kognitive begrænsninger og mental retardering, som udelukker en selvstændig brug af elkørestolen.
 - Indskrænket syn, som ikke kan kompenseres ved hjælp af synskorrigerende hjælpemidler eller andre hjælpemidler og som medfører begrænsninger i hverdagen.
 - Påvirkning af medicin med negativ indvirkning (drøftelse med læge eller farmaceut).
 - Forhold, som udelukker en selvstændig brug af styringen.
 - kraftige balance- og/eller sanseforstyrrelser.
 - Manglende evne til at sidde ned.
- ☞ Spørg din læge, terapeut eller autoriserede forhandler vedrørende disse og yderligere risici ved din elkørestol.

MODTAGELSE

Alle produkter underkastes kvalitetskontrol på fabrikken og emballeres i særlige papkasser.

- ☞ Vi vil imidlertid bede dig om at kontrollere elkørestolen for eventuelle skader, som er optrådt under transporten straks efter modtagelsen – helst mens leverandøren er til stede.
- ☞ Elkørestolens emballage bør opbevares til en transport, som eventuelt bliver nødvendig på et senere tidspunkt.

BRUG I OVERENSSTEMMELSE MED FORMÅLET

Din elkørestol er et miljøvenligt elkøretøj. Elkørestolen i modellerne 1.610, 1.611, 1.612, 1.613 og 1.615 blev udviklet til unge og voksne, og modellen 1.616 blev udviklet til unge og lave voksne.

ANVENDELSE

Anvend ikke elkørestolen uden monterede benstøtter og armlæn!

Elkørestolen tjener udelukkende til transport **af en** siddende person. – Den er ikke beregnet til andre former for træk- eller transportbelastninger.

Elkørestolen skal bruges på et jævnt, fast underlag og kan bruges på følgende måde:

- indendørs (f.eks. i boliger, daginstitutioner)
- anvendelse i det fri (f.eks. stier med fast underlag i parker).
- Udsæt aldrig elkørestolen for ekstreme temperaturer og skadevoldende miljøforhold som f.eks. stærkt sollys, ekstrem kulde og saltvand.

- Sand og andre smudspartikler kan sætte sig fast i de bevægelige dele og bewirke, at de ikke fungerer.

Elkørestolen har rige muligheder for tilpasning til individuelle kropsmål.

Nationale forskrifter kan forhindre, at elkørestolen kan medtages i bus, tog og lufttrafik.

- ☞ Forhør dig om mulige begrænsninger hos dit transportselskab.
- ☞ Få afklaret de specifikke transportbetingelser med dit flyselskab inden flyrejsen samt de lovbestemmelser vedrørende lufttransport, som gælder hhv. i dit oprindelsesland og på din feriedestination.

Brug kun elkørestolen i overensstemmelse med specifikationen og grænseværdierne, som er angivet i kapitel *Tekniske data* på side 62.

TILPASNING

Få principielt tilpasnings-, indstillings- eller reparationsarbejde udført af en autoriseret forhandler.

Elkørestolen giver tilpasningsmuligheder til individuelle kropsmål. Inden første brug bør din autoriserede forhandler bør foretage en tilpasning af elkørestolen og instruere dig i elkørestolens funktioner. I den forbindelse tages der hensyn til brugerens fysiske begrænsninger samt til i hvilke omgivelser elkørestolen hovedsagligt skal anvendes. Kontrollér inden første brug, at din elkørestol fungerer upåklageligt.

Såfremt din forhandler udfører en redigering/opdatering eller væsentlige forandringer af din elkørestol uden brug af originale reservedele, medfører dette eventuelt, at din elkørestol bringes i omsætning på ny. Dette betyder, at din forhandler evt. skal

foretage nye overensstemmelsesvurderinger og kontroller.

- ☞ Vi anbefaler en regelmæssig kontrol af elkørestolens tilpasning med henblik på at sikre den optimale forsyning også ved forandringer i brugerens sygdoms-/handicaptilstand på lang sigt. Specielt hos børn og unge anbefales det at foretage en tilpasning hver 6. måned.
- ☞ Vi anbefaler regelmæssig lægeundersøgelse for at sikre den aktive deltagelse i offentlig trafik.

KOMBINATION MED PRODUKTER FRA ANDRE PRODUCENTER

Enhver kombination af din elkørestol med komponenter, som ikke er leveret af os, udgør generelt en forandring af din kørestol. Kontakt os for at høre, om vi har godkendt kombinationen.

IBRUGTAGNING EFTER OPBEVARING

Elkørestolen er egnet til ibrugtagning efter opbevaring. Ved hjælp af modulsystemet kan elkørestolen tilpasses forskellige handicap og kropsmål. Før elkørestolen tages i brug igen, skal der altid foretages et komplet eftersyn.

- ☞ De hygiejniske foranstaltninger, der er nødvendige for genanvendelse, skal gennemføres efter en valideret hygiejneplan og skal omfatte desinficering.

Servicevejledningen, som er bestemt til den autoriserede forhandler, informerer om din elkørestols genbrug og genbrugshyppighed.

LEVETID

Vi antager, at produktet har en forventet gennemsnitlig levetid på 5 år, såfremt produktet anvendes til det tilsigtede formål, og samtlige krav med hensyn til vedligeholdelse og service overholdes. Produktets levetid afhænger af såvel anvendeshyppighed, anvendelsesmiljø samt plejen af produktet. Ved hjælp af reservedele er det muligt at forlænge produktets levetid. Reservedele fås som regel i op til 5 år, efter at produktionen er ophørt.

- ☛ Den oplyste levetid udgør ikke nogen yderligere garanti.

GRUNDSTILLING

Ved nedad- eller opadgående terræn og forhindringer må der kun køres i sædehøjdeindstillingens, ryghældningens og sædehældningens grundposition. – Fare for væltning!

Med grundposition menes følgende:

- Sædehøjdeindstilling i laveste position.
- Ryghældning i lodret position.
- Sædehældning i vandret position (dog maks. 10°).


OVERSIGT

Model 1.610

Oversigten viser elkørestolens vigtigste komponenter og betjeningsanordninger.

Pos. Betegnelse

- (1) Ryglæn
- (2) Armlæn
- (3) Siddepude
- (4) Benstøtte
- (5) Lægbælte
- (6) Fodplade
- (7) Styrehjul
- (8) Drivhjul
- (9) Rangeringsstang
- (10) Betjeningsmodul
- (11) Belysning foran
- (12) Håndtag til skift mellem køre-/skubbe-funktion
- (13) Støttehjul
- (14) Batterikasse
- (15) Belysning bag
- (16) Typeskilt

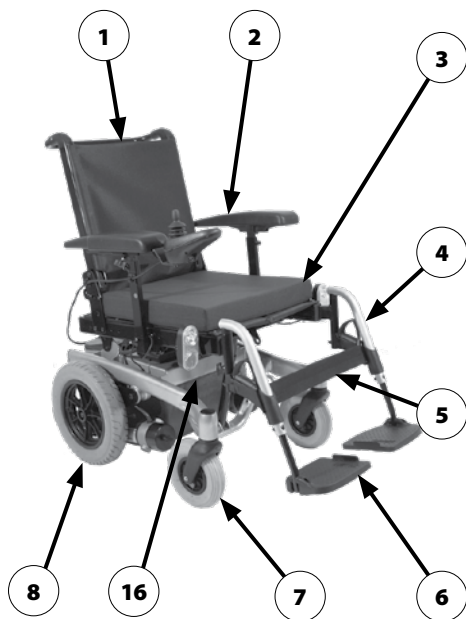



OVERSIGT

Model 1.611

Oversigten viser elkørestolens vigtigste komponenter og betjeningsanordninger.

Pos. Betegnelse

- (1) Ryglæn
- (2) Armlæn
- (3) Siddepude
- (4) Benstøtte
- (5) Lægbælte
- (6) Fodplade
- (7) Styrehjul
- (8) Drivhjul
- (9) Rangeringsstang
- (10) Betjeningsmodul
- (11) Belysning foran
- (12) Håndtag til skift mellem køre-/skubbe-funktion
- (13) Støttehjul
- (14) Batterikasse
- (15) Belysning bag
- (16) Bagagehylde
- (17) Typeskilt

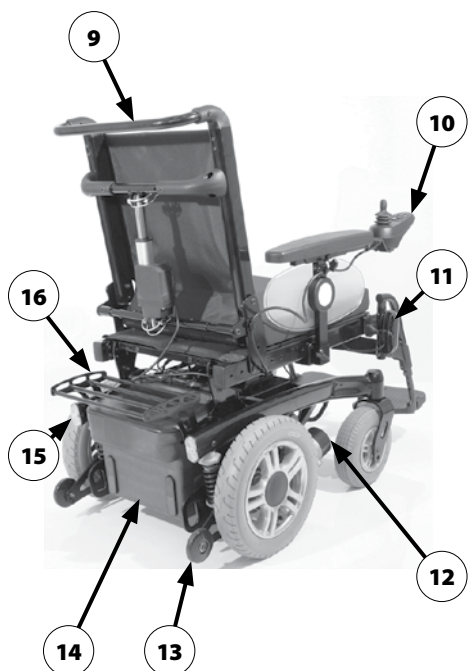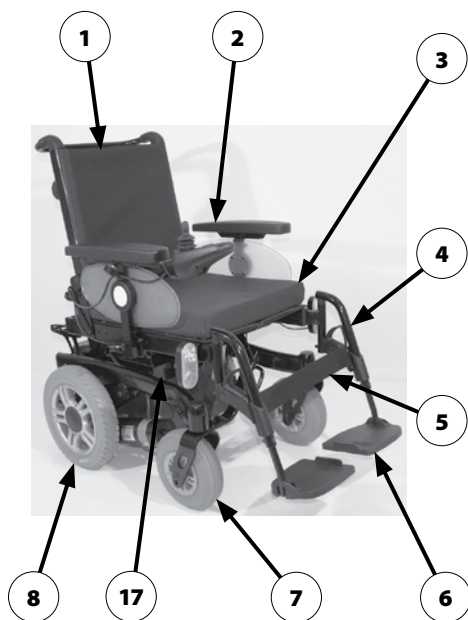

OVERSIGT

Model 1.612

Oversigten viser elkørestolens vigtigste komponenter og betjeningsanordninger.

Pos. Betegnelse

- (1) Ryglæn
- (2) Armlæn
- (3) Siddepude
- (4) Benstøtte
- (5) Lægplade
- (6) Fodplade
- (7) Styrehjul
- (8) Drivhjul
- (9) Rangeringsstang
- (10) Betjeningsmodul
- (11) Belysning foran
- (12) Håndtag til skift mellem køre-/skubbe-funktion
- (13) Støttehjul
- (14) Batterikasse
- (15) Belysning bag
- (16) Bagagehylde
- (17) Typeskilt



OVERSIGT

Model 1.613

Oversigten viser elkørestolens vigtigste komponenter og betjeningsanordninger.

Pos. Betegnelse

- (1) Ryglæn
- (2) Armlæn
- (3) Betjeningsmodul
- (4) Belysning foran
- (5) Drivhjul
- (6) Benstøtte
- (7) Støttehjul
- (8) Håndtag til skift mellem køre-/skubbe-funktion
- (9) Styrehjul
- (10) Belysning bag
- (11) Rangeringsstang
- (12) Typeskilt




OVERSIGT

Model 1.615

Oversigten viser elkørestolens vigtigste komponenter og betjeningsanordninger.

Pos. Betegnelse

- (1) Ryglæn
- (2) Armlæn
- (3) Betjeningsmodul
- (4) Siddepude
- (5) Lægbælte
- (6) Fodplade
- (7) Styrehjul
- (8) Håndtag til skift mellem køre-/skubbe-funktion
- (9) Drivhjul
- (10) Belysning foran
- (11) Rangeringsstang
- (12) Bagagehylde
- (13) Støttehjul
- (14) Benstøtte
- (15) Typeskilt

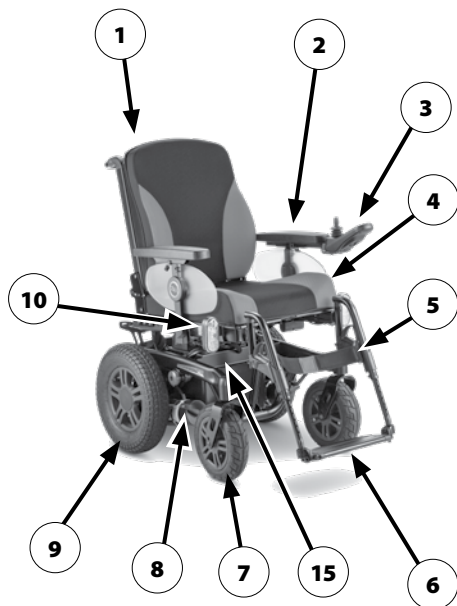


OVERSIGT

Model 1.616

Oversigten viser elkørestolens vigtigste komponenter og betjeningsanordninger.

Pos. Betegnelse

- (1) Ryglæn
- (2) Armlæn
- (3) Siddepude
- (4) Fodplade
- (5) Styrehjul
- (6) Drivhjul
- (7) Rangeringsstang
- (8) Betjeningsmodul
- (9) Håndtag til skift mellem køre-/skubbe-funktion
- (10) Støttehjul
- (11) Batterikasse
- (12) Belysning
- (13) Typeskilt

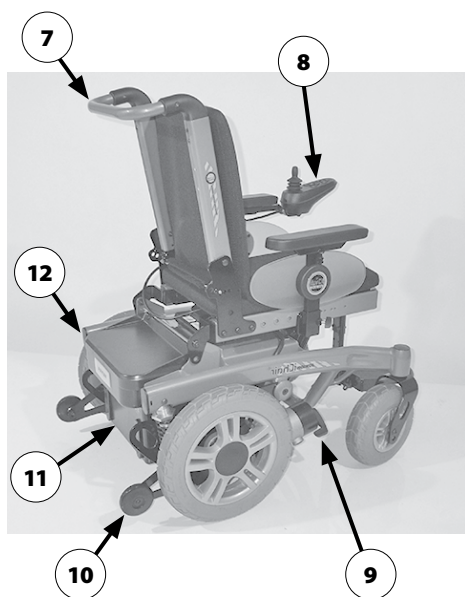

HÅNDBETING AF ELKØRESTOL

Sikring af elkørestol

Elkørestolen skal sikres på følgende måde, så den ikke triller utilsigtet:

1. Vip håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion opad i begge sider til positionen for kørefunktion.
2. Sluk for betjeningsmodulet.

Funktionskontrol

Inden enhver ibrugtagning skal elkørestolens funktionsdygtighed og sikkerhed kontrolleres.

- ☞ Se kapitlet < *Kontrol inden kørsel* > i vedlagte dokumentation.

Køreegenskaber

Hastighed og kørselsretning bestemmes dels af dig selv under kørslen, ved at du bevæger joysticket (køre-/styrehåndtaget) og dels af den indstillede maksimale tophastighed på din elkørestol.

BREMSE

Brems din elkørestol forsigtigt og rettidigt. Dette gælder især foran personer og ved kørsel ned ad bakke!

Driftsbremse

Motorerne fungerer elektrisk som driftsbremse, og bremses elkørestolen jævnt og uden ryk, indtil den holder stille.

Bremsning af kørestol

Vip joysticket (køre-/styrehåndtaget) langsomt bagud til startpositionen (nulstilling) for at bremse kørestolen blidt.

- ☞ Elkørestolen standser på den kortest mulige strækning, efter at joysticket er sluppet.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremserne virker kun, når håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion for begge motorer er vippet til positionen for kørefunktion. De løsner sig automatisk, når man starter kørslen.

Parkeringsbremserne slækkes manuelt, ved at håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion indstilles til skubbefunktion på begge motorer.

Aktivering af bremsler

Elkørestolen må ikke kunne skubbes med aktiverede bremsler.

For at aktivere bremserne skal håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion i begge sider være vippet op og helt i bund i kørefunktionen [1].

- ☞ Håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion er beregnet til at blive betjent af en ledsager.



Deaktivering af bremsler

Forflytning til/fra elkørestolen må kun ske, når elkørestolen er slukket og håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion i begge sider står på kørefunktion!

Ellers kan en utilsigtet berøring af joysticket (køre-/styrehåndtaget) sætte elkørestolen i gang! – Fare for uheld!

For at deaktivere bremserne skal håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion vippes ned og helt i bund i skubbefunktionen [2].

- ☞ Håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion er beregnet til at blive betjent af en ledsager.



Køre-/skubbefunktion

Elkørestolen må kun indstilles til skubbefunktion eller skubbes med henblik på rangering eller i nødstilfælde, når den holder stille, dog ikke på strækninger med fald/stigninger.

- ☞ Ved skubbefunktion er de elektromagnetiske bremses slået fra.
 - Elkørestolen kan således kun bremses ved skift til kørefunktion.
- ☞ Tag fat i ryglænets rangeringsgreb for at rangere elkørestolen.

Indstilling til skubbefunktion

1. Sluk for betjeningsmodulet, ellers vil kørestolen være svær at skubbe.
 - ☞ Se betjeningsvejledningen til *< Betjeningsmodul >*.
2. Løsn bremserne [1].
 - ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Deaktivering af bremses* på side 18.

Elkørestolen kan nu skubbes.

Indstilling til kørefunktion

1. Aktivér bremserne [2].
 - ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Aktivering af bremses* på side 18.
2. Tænd for betjeningsmodulet.
 - ☞ Se betjeningsvejledningen til *< Betjeningsmodul >*.

Nu kan elkørestolen køre.



KLARGØRING TIL DRIFT

For at gøre elkørestolen klar til drift, skal følgende anvisninger udføres i den nævnte rækkefølge.

🔊 Oplad batterierne via betjeningsmodulet inden første tur.


1. Klargøring til kørsel

Indstil motorerne til kørefunktion [1]. – Husk at aktivere bremserne.

🔊 Se kapitlet *Aktivering af bremseser* på side 18.

2. Kontrollér, at batteri-/hovedsikringen sidder fast

🔊 Fladsikringen (2) til batteri-/hovedstrømmen skal sidde fast i sikringsholderen.

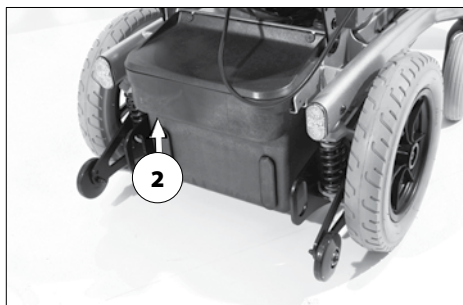


3. Kontrollér betjeningsmodulets position

Du har nået det maksimale udtræk, når en markering bliver synlig på betjeningsmodulets optagesesrør.

- ☞ Betjeningsmodulets position skal indstilles på en sådan måde, at elkørestolen kan styres behageligt og sikkert.
 - ☞ Betjeningsmodulets afstand til armstøtten kan indstilles, når klemeskruen (3) er løsnet.
4. Spænd klemeskruen igen, når indstillingen er udført.
- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Positionering af betjeningsmodul* på side 23.

5. Tænd for betjeningsmodulet

- ☞ Tryk på Til/Fra-knappen (4) på betjeningsmodulets betjeningsfelt.
- ☞ Se betjeningsvejledningen til *< Betjeningsmodul >*.

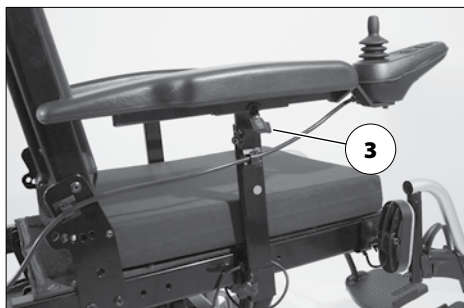

Kontrol inden kørsel

Inden kørsel bør følgende kontrolleres:

- ☞ Batteriets opladningstilstand
 - ☞ Indstillingen på den forvalgte maksimale hastighed.
- – Se betjeningsvejledningen til < *Betjeningsmodul* >.

Batteriopladning

Stik ikke andre genstande i opladningskontakten end batteriopladningsstikket.
– Fare for kortslutning!

Batterier må kun oplades i tørre rum med god ventilation.

Beskyt batteriopladeren mod varme, fugt, dryp- og stænkvand samt stødpåvirkninger, da opladeren indeholder netspænding. – Fare for kortslutning samt livsfare!

Sørg for, at opladeren altid får nok luft (dæk den ikke til), så det er muligt at aflede den varme, der opstår. – Der er risiko for brand!

Stil batteriopladeren på et fast underlag, når du vil lade batterierne op.

Undgå at stille batteriopladeren på elkøretøjets sæde, når det skal oplade.



Undgå at ryge, og sørg for, at der ikke er åben ild eller gnister, når du håndterer kabler og elektriske apparater. De gasser, som kan opstå i forbindelse med opladningen, kan være eksplosionsfarlige.

Undgå gnistdannelse på grund af statisk elektricitet (som f.eks. kan skyldes syntetiske gulvbelægningsmateriale).

- ☞ Følg betjeningsvejledningen til batteriopladeren ved opladning.

1. Parkér elkørestolen i sikret tilstand.

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Sikring af elkørestol* på side 17.

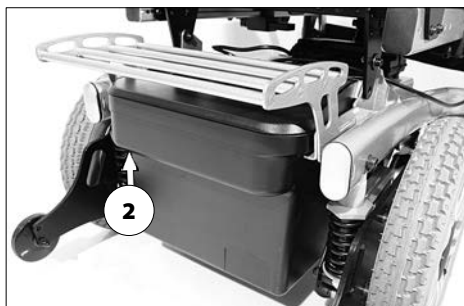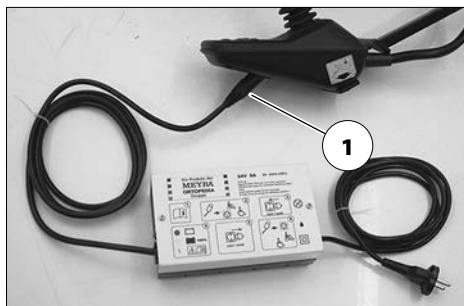

2. Sæt stikket fra opladeren i batteriopladningsstikket på betjeningsmodulet (1).
3. Tænd for batteriopladeren/sæt strømstikket til batteriopladeren i en passende stikkontakt.
 - ☞ Opladningsprocessen er sat i gang.
 - ☞ Opladningsprocessen kører kun, hvis batteri-/hovedsikringen (2) er intakt!
4. Afbryd forbindelsen mellem batteriopladeren og strømmettet, når opladningsprocessen er afsluttet, og træk stikket til batteriopladeren ud af batteriladestikket.

Positionering af betjeningsmodul

Sluk for betjeningsmodulet inden indstilling/afmontering.

Funktionsbeskrivelse

En detaljeret beskrivelse af trykknapper og symboler findes i betjeningsvejledningen < *Betjeningsmodul* >.

Betjeningsmodulets position kan tilpasses brugerens individuelle mål. Under transport eller med henblik på opbevaring kan betjeningsmodulet også tages af og lægges til side eller lægges på sædet.

Indstilling af afstand til armstøtte

Sluk for betjeningsmodulet inden indstilling/afmontering.

Du har nået det maksimale udtræk, når en markering bliver synlig på betjeningsmodulets optagelsesrør.

For at indstille afstanden skal klemeskruen (1) løsnes. Skub derefter betjeningsmodulet til den ønskede position. Træk forsigtigt kablet med, og stram klemeskruen (1) forsvarligt igen.

Afmontering af betjeningsmodul

For at afmontere betjeningsmodulet skal klemeskruen (1) løsnes, og stikforbindelsen (2) afbrydes (4).


- ⚠ Undlad at trække i kablerne.

Træk derefter betjeningsmodulet fremad og ud af røret til armstøtten.

Montering af betjeningsmodul

Pas på ikke at komme i klemme, når du sætter betjeningsmodulet i.

For at anvende kørefunktionen skal betjeningsmodulet stikkes ind i røret til armstøt-

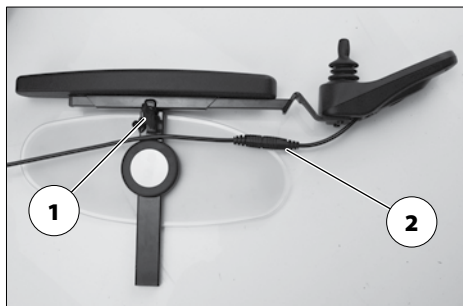

ten forfra [3], og afstanden til armstøtten derefter indstilles.

- 📖 Følg anvisningerne i kapitlet *Indstilling af afstand til armstøtte* på side 23.

Saml derefter den afbrudte stikforbindelse (4) igen (2).

- 📖 Kontrollér, at betjeningsmodulet virker.

Drejning af betjeningsmodulet til siden og bagud

Stik ikke hænderne/armene ind imellem komponenterne. – Risiko for at komme i klemme!

Med den valgfri, drejelige holder til betjeningsmodulet [1] kan betjeningsmodulet drejes til siden og bagud [2], så det sidder i siden, parallelt med armlænet. Derved bliver det f.eks. muligt:

- at køre tættere på et bord
- at tage betjeningsmodulet af uden problemer.




For normal kørefunktion skal betjeningsmodulet svinges frem igen, indtil det mærkes, at det rammer magnetforbindelsen [1].

- ☞ For at gøre det lettere at dreje betjeningsmodulet kan magnetens styrke forringes, ved at den tildækkes (3) med f.eks. tape.
- ☞ Hvis betjeningsmodulet er positioneret for tæt på armlænet, skal det justeres en smule fremefter, før det svinges ud.

Højdeindstilling af betjeningsmodulet

Løsn klemeskruen (4) for at højdeindstille betjeningsmodulet.

- ☞ Spænd klemeskruen igen, når indstillingen er udført.

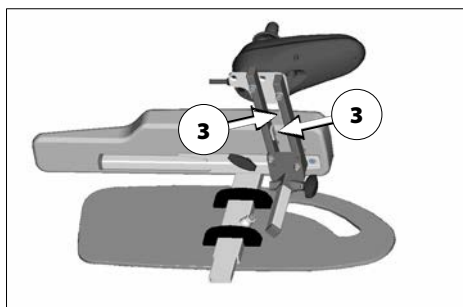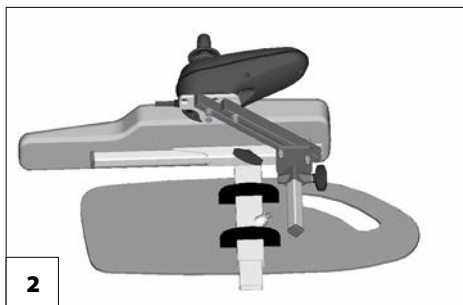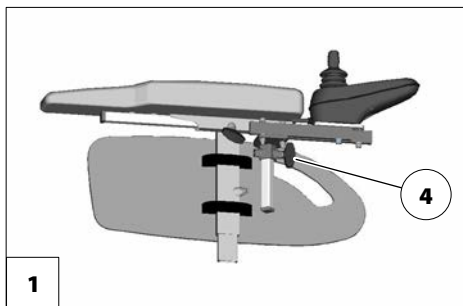

BENSTØTTER

Inden aktivitet på benstøtterne skal elkørestolen sikres, så den ikke triller utilsigtet.

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Sikring af elkørestol* på side 17.

Lægbælte

Kør ikke uden lægbælte. – Fare for uheld!

Det aftagelige lægbælte (1) forhindrer fødderne i at glide bagud og ned af fodpladerne.

- ☞ For at kunne svinge benstøtterne ud til siden, skal lægbæltet tages af [2].
- ☞ Lægbæltet bortfalder ved højdeindstillelige benstøtter, hvor det erstattes af de polstrede lægstøtter.

Afmontering af lægbælte

For at tage lægbæltet af, skal det trækkes af holderne (3).

Montering af lægbælte

For at påsætte lægbæltet skubbes stropperne på holderne [4] igen.

Længdeindstilling af lægbælte

For at længeindstille lægbæltet skal det føres rundt om holderne (2), og tilpasses i den rigtige længde ved hjælp af velcrolukningen.



Benstøtteunderdel

Ved på- eller afstigning skal fodpladerne eller fodstøtten slås op [1] + [2] eller den centrale benstøtte [2] sænkes ned til underlaget.

☞ Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme!

1. Begge fødder fjernes fra fodpladerne.
2. Tag et evt. lægbælte (3) af.

☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Lægbælte* på side 25.

☞ Inden kørsel skal fodpladerne/fodbrættet klappes ned igen [4], og lægbæltet anbringes.

Fodplader

Fodpladerne kan klappes udad og op [1] eller indad og ned [4].

Fodbræt



Inden benstøtteoverdelen svinges ud til siden og afmonteres, skal fodbrættet klappes op.

Opklapning af fodbræt

For at klappe fodbrættet op skal den løse side af fodbrættet (5) klappes opad og helt i bund.

Nedklapning af fodbræt

For at klappe fodbrættet ned skal den løse ende af fodbrættet vippes helt ned på fodbrætholderen [6].

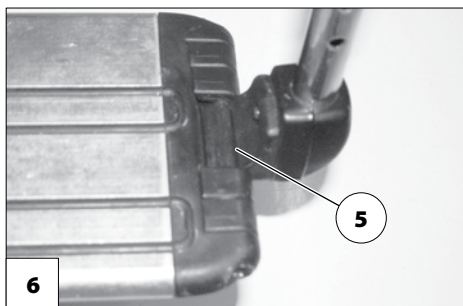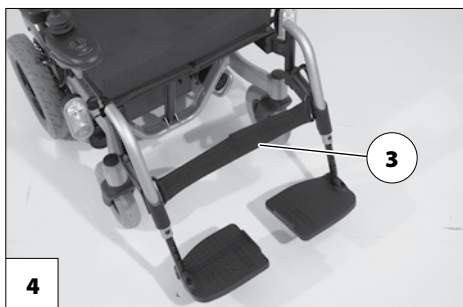

Benstøtteoverdel

Benstøtteoverdelen med indsat benstøtteunderdel betegnes benstøtten.

Drejning af benstøtter til siden

Benstøtter, der er svinget ud til siden, er automatisk låst op og kan let falde af. Vær opmærksom på dette (f.eks. ved transport).



Benstøtterne kan svinges ind/ud, så det bliver lettere at komme ind og ud af elkørestolen samt komme helt hen til skabe, senge eller badekar [1] og [2].

- ☞ Inden benstøtterne svinges ud til siden, skal lægbæltet tages af.
- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Lægbælte* på side 25.

For at svinge benstøtterne ud til siden skal fodpladerne/fodbrættet klappes op.

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Benstøtteunderdel* på side 26.

Træk eller tryk derefter det tilhørende låsehåndtag (3) bagud, og sving den tilhørende benstøtte ud til siden.

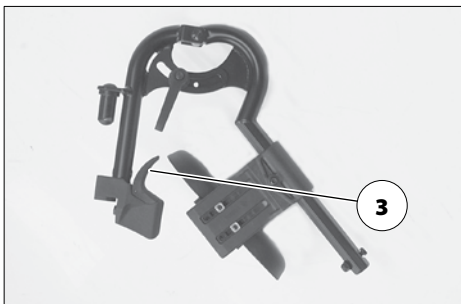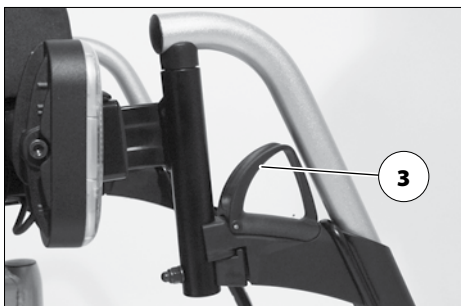

Tilbage drejning af benstøtter

For at dreje benstøtterne tilbage skal de drejes fremad, indtil det tydeligt høres, at de falder på plads [1].

- ☞ Når det tydeligt høres, at benstøtterne er svinget ind, skal låsefunktionen kontrolleres.
- ☞ Følg derefter anvisningerne i kapitlet *Benstøtteunderdel* på side 26.



Afmontering af benstøtter

Benstøtterne kan tages af [1], hvilket reducerer elkørestolens længde (vigtigt ved transport), og gør ud- og indstigning i kørestolen lettere.

- ☞ Inden benstøtterne svinges ud til siden, skal lægbæltet tages af.
 - ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Lægbælte* på side 25.

For at tage benstøtterne af skal de først svinges ud til siden, og derefter løftes opad [1].

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Drejning af benstøtter til siden* på side 27.
- ☞ Vær opmærksom på evt. risiko for klemning!

Montering af benstøtter

For at montere benstøtterne skal de svinges ud til siden og trykkes parallelt på det forreste stelrør og skubbes nedad [2]. Ved denne bevægelse skal tappen glide ind i stelrøret.

- ☞ Når benstøtterne er hængt på, skal de svinges ind [3].
 - ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Tilbage drejning af benstøtter* på side 28.




Benstøtte m. mekanisk højdeindstilling

Stik ved indstilling af den højdeindstillige benstøtte aldrig den frie hånd ind i justeringsmekanismen. – Fare for at komme i klemme!

Benstøtten må ikke falde ned af sig selv.
– Risiko for tilskadekomst!

👉 Få hjælp med justeringen, i givet fald af en ledsager.

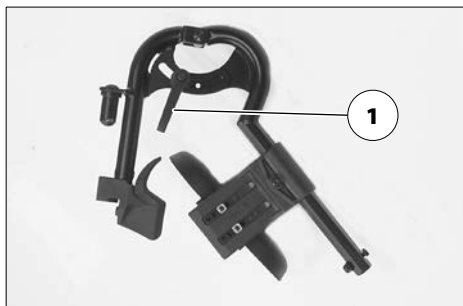

Løft/sænkning af benstøtte

1. Inden løft/sænkning skal benstøtten aflastes, ved at den løftes kortvarigt af en ledsager.
2. Løsn derefter spændearmen (1), og lad en ledsager løfte/sænke benstøtten langsomt til det ønskede niveau.
3. Spænd spændearmen (1) igen efter indstillingen.

Benstøtte med elektrisk højdeindstilling

Stik ved indstilling af den højdeindstillelige benstøtte aldrig den frie hånd ind i justeringsmekanismen. – Fare for at komme i klemme!

Benstøtten med elektrisk højdeindstilling [1]+[2] får automatisk elektrisk kontakt ved påmontering.

Højdeindstilling

For at indstille benstøtten i højden skal den løftes/sænkes til det ønskede niveau (1)+(2) ved hjælp af betjeningsmodulet.

- ☞ Se betjeningsvejledningen til < *Betjeningsmodul* >.



Afmontering af benstøtte med elektrisk højdeindstilling

Når benstøtterne med elektrisk højdeindstilling er taget af, skal den elektriske kontakt (3) evt. beskyttes mod fugt, regn samt støv og snavs (f.eks. ved længere tids opbevaring)!

- ☞ Evt. funktionsfejl i den elektriske indstilling.
- ☞ Som beskyttelse kan afdækningen, som fås som ekstraudstyr, evt. anvendes.

For at afmontere benstøtten skal låsehåndtaget (1) alt efter model først trækkes eller trykkes bagud eller vippes op eller ned.

Sving derefter benstøtten ud til siden, og tag den af ved at løfte den opad [2].




- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Drejning af benstøtter til siden* på side 27.

Montering af benstøtte med elektrisk højdeindstilling

- ☞ Drej benstøtterne indad, når de er hængt på.
- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Montering af benstøtter* på side 29.

Tryk benstøtterne, som er svinget ud til siden, parallelt ind mod det forreste stelrør, og monter dem ved at trykke nedad. – Ved denne bevægelse skal tappen glide ind i stelrøret (1).

- ☞ Udfør funktionstest på benstøtten med elektrisk højdeindstilling!

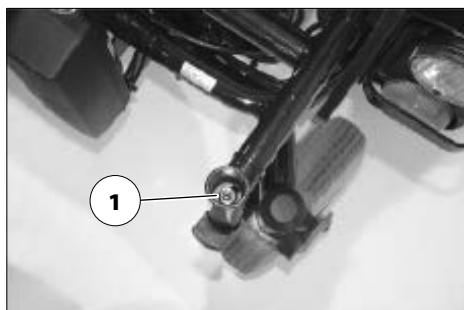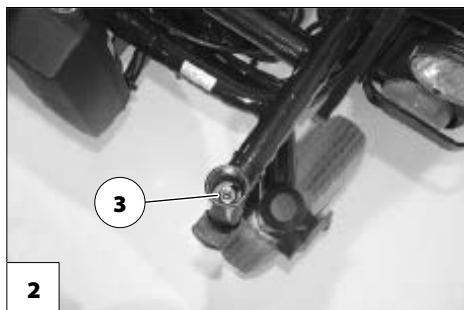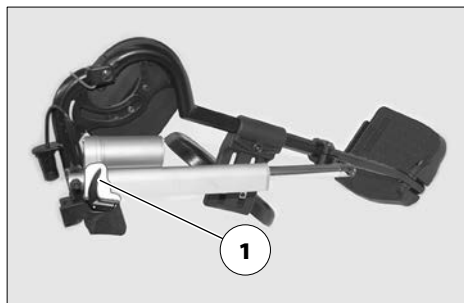

ARMLÆNENE

Undlad at bruge armlænene [1] til at bære eller løfte elkørestolen i.

Undlad at køre uden armlæn!

Afmontering af armlæn


For at afmontere armlænet skal klemskruen (2) først løsnes, og armlænet derefter trækkes op og af.

- ☞ Hvis armlænet på styresiden skal tages af, skal betjeningsmodulet (4) først afmonteres.
- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Afmontering af betjeningsmodul* på side 23.

Montering af armlæn

For at stikke armlænet ind skal det først stikkes helt i bund i holderen (3), og derefter skal klemskruen spændes (2).

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Montering af betjeningsmodul* på side 23 vedr. indstikning af betjeningsmodulet (4).

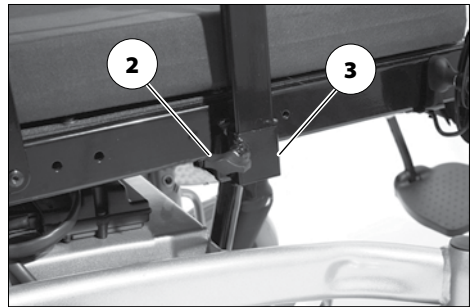

Belyste frakkeskåner


En tilkoblet belysning er også aktiv, når betjeningsmodulet er slukket.

Inden for den tyske færdselslovs gyldighedsområde, må der ikke anvendes tilkoblet belysning.

Til-/frakobling af de belyste frakkeskåner

Hvis armlænene er taget af, skal de elektriske kontakter (2) evt. beskyttes mod fugt, regn samt støv og snavs (f.eks. ved længere tids opbevaring)!


For at til-/frakoble belysningen skal der trykkes på kontakten (1).

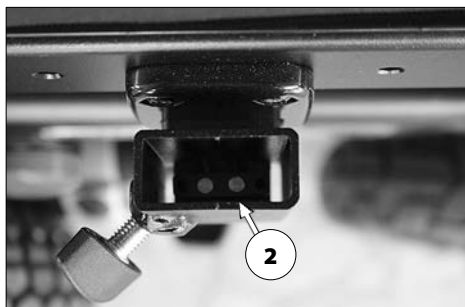

RYGLÆN

Ved opbevaring eller transport kan ryglænet klappes ned.


- ☞ For at give en bedre illustration af wiretrækket (1) er ryglænet vist uden polstringselement.

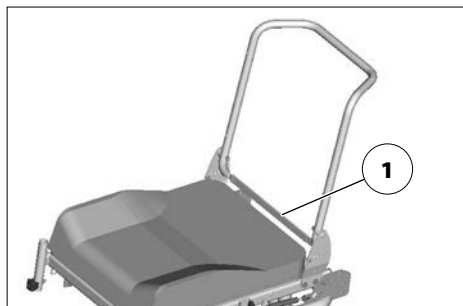

Nedklapning af ryglæn

- ☞ Til dette formål kan siddepolstringen ved behov tages af (velcrolukning).

Frigør ryglænet ved at trække eller trykke i midten af wiretrækket (1) og klappe ryglænet ned mod sædet [2].

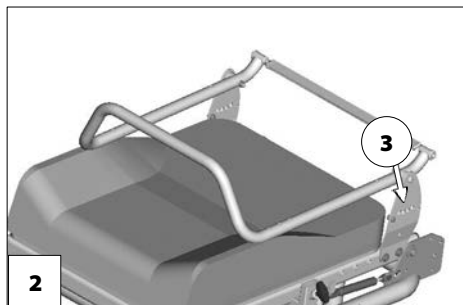

Opklapning af ryglæn

Ret ryglænet op, og træk trykboltene ind ved at trække eller trykke i midten af wiretrækket (1).

Slip wiretrækket for at låse i den ønskede ryglænsposition (3). – Flyt ryglænet, indtil det tydeligt høres, at trykboltene falder på plads.

Sæt evt. sædepolstringen på igen.

- ☞ For at gøre det lettere at låse ryglænet, anbefales det at smøre trykboltene med fedt.
- ☞ Kontrollér, at ryglænet er sikkert låst.

Indstilling af ryglænets hældning

Frigør ryglænet ved at trække eller trykke i midten af wiretrækket (1).

Slip wiretrækket for at låse i den ønskede ryglænsposition (3). – Flyt ryglænet, indtil det tydeligt høres, at trykboltene falder på plads.

- ☞ Kontrollér, at ryglænet er sikkert låst.


Sikre positioner for ryglænet

Enhver ændring af sædehældningen medfører en ændring af den sikre ryglæns-hældning!

De mange muligheder for indstilling af sædet omfatter også indstillinger, som kun må anvendes som hvileposition, idet disse indstillinger under kørefunktionen kan medføre ustabile køreforhold.

Alt efter den valgte sædehældning må du ved kørsel på stigninger kun vælge nogle bestemte ryglænsindstillinger [1].

- ☞ Af hensyn til din egen sikkerhed bør du få godkendt den indstillede sædehældning af din forhandler, og få den markeret i tabellen!

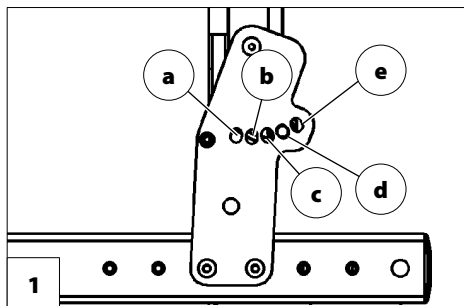

Eksempel:

Indstillet sædehældning:.....6°

Ryglænets trykbolt må ved kørsel på stigninger kun sidde i position c, d, eller e.

Model 1.610/1.611

Sædehældning	Indstillet sædehældning	Sikre positioner for ryglæns-hældning [1]
0°		c, d
2°		c, d
4°	Fabriksindstilling	c, d
6°		c, d, e
8°		d, e
10°		d, e

Model 1.612 / 1.615


Sædehældning	Indstillet sædehældning	Sikre positioner for ryglæns-hældning [1]
0°		c, d
4°	Fabriksindstilling	c, d
8°		c, d, e
12°		c, d, e

Variabel ryg

Rygselen kan justeres ved hjælp af velcrolukning på spændebåndene (2).

Afmontering af rygpolstring

For at tage rygpolstringen af skal den bageste del (1) først trækkes af, slås om foran og trækkes af den justerbare rygsele (3).

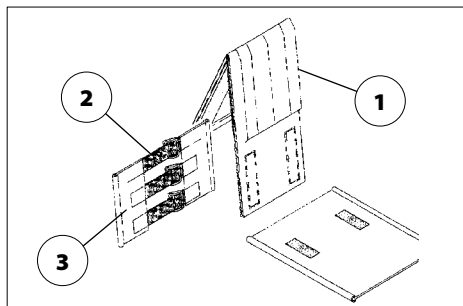


Montering af rygpolstring

For at montere rygpolstringen skal den (1) lægges midt på de øverste velcrobånd (2), og fastgøres ved hjælp af velcrolukningen på den justerbare rygsele (3).

- ☞ For at få en blød overkant skal der være en smule afstand mellem det øverste spændebånd (2) og rygpolstringen (1), som er vippet om.
- ☞ Vær opmærksom på følgende, når brugeren atter læner sig mod rygpolstringen (1):
- ☞ Trykket mod ryggen skal være jævnt fordelt på rygpolstringen.
- ☞ Ved rygpolstringens overkant skal en hånd kunne komme ind mellem polstring og ryg.
- ☞ Brugers hoved skal ved hjælp af indstillingen af spændebåndene holdes i balance.

De forlængede dele af ryggen samles afhængigt af den indstillede ryglænsenhøjde evt. både på og under siddefladerne (4).

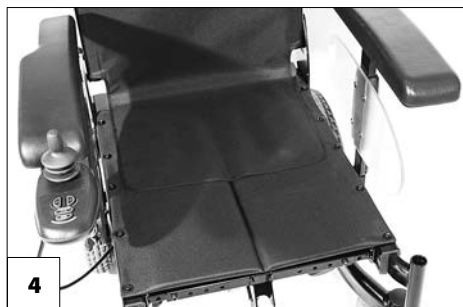

Ryglænen med elektrisk indstilling

Ryglænet må kun justeres, hvis elkørestolen står på et plant underlag. På stigninger er der risiko for, at kørestolen vælter!

Ryglænet [1] kan indstilles elektrisk.

- ☞ Se betjeningsvejledningen til < *Betjeningsmodul* >.

Nedklapning af ryglænet med elektrisk indstilling

For at klappe ryglænet med elektrisk indstilling [2] ned, skal sikkerhedsbøjlen (3) først klappes op, og stikbolten (4) fjernes.

- ☞ Hold i den forbindelse ryglænet og motoren i denne position med den ene hånd på rangeringsstangen (6).


Læg derefter motoren på den nederste flade, og klap ryglænet fremad og ned [2].

- ☞ Sæt stikbolten (4) i igen, så den ikke falder ud.

Opklapning af ryglænet

Efter opklapning af ryglænet [1] skal stikbolten (4) fjernes, motoren løftes og sættes på plads. Stik derefter stikbolten (4) i igen, og luk sikkerhedsbøjlen [5].

- ☞ Kontrollér, at ryglænet er faldet på plads efter opklapning, og at stikbolten er monteret.
- ☞ For at sikre fejlfri funktion skal stikbolten altid holdes ren.

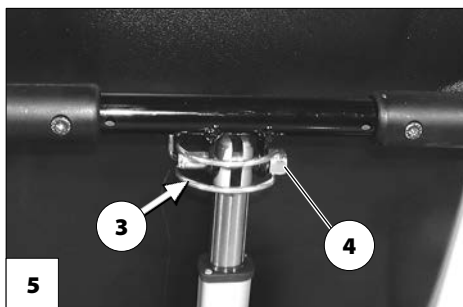

Ryglænspolstring

Ryglænspolstringen er fastgjort til ryglænskallen med velcrobånd, og kan tages af [1].


Sikre positioner for ryglænet

Enhver ændring af sædehældningen medfører en ændring af den sikre maksimale ryglænsældning!

De mange muligheder for indstilling af sædet omfatter også indstillinger, som kun må anvendes som hvileposition, idet disse indstillinger under kørefunktionen kan medføre ustabile køreforhold.

Din elkørestol er udstyret med en hældningskontakt, som begrænser ryglænsvinklen sammen med sædehældningen.

- ☞ Den maksimale ryglænsjustering er kun mulig ved en sædehældningsvinkel på 0°.
- ☞ Når den sikre hældning overskrides, også under kørsel, bremser elkørestolen automatisk helt ned, og der lyder et < bip >, hver gang joysticket flyttes. Fortsat kørsel er kun mulig, hvis ryg-/sædehældningsvinklen reduceres.

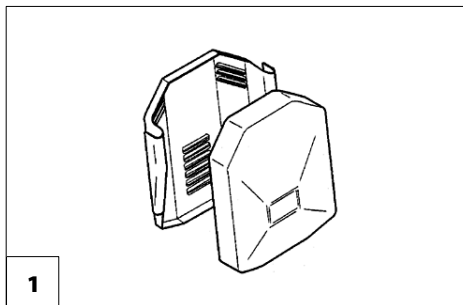

SÆDE

Sædepolstring

Sædepolstringen [1] er fastgjort til sædepladen med velcrobånd og kan tages af ved rengøring og vedligeholdelse.

Efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde skal sædepolstringen igen sættes på og fastgøres [1]. – Velcrolukning.



Siddepude

Siddepuden lægges med de skridsikre nopper ned mod sædepladen [2].



Sædehældning

Juster kun sædehældningen [3], når elkørestolen står på en vandret, plan flade. På stigninger er der risiko for, at kørestolen vælter!

Indstillingen af sædehældningen er ikke forbundet med en automatisk hastighedsreducering.

Øget risiko for væltning i forbindelse med vinkeljusteret ryglæn.

Kontrollér inden kørsel, at der ikke er indstillet en negativ sædehældning/at sædehældningen også ved kørsel på stigninger/strækninger med fald giver en sikker siddeposition.



Manuel indstilling af sædehældning (kun model 1.613)

Manuel indstilling af sædehældningen foregår ved, at ringstiften (3) tages ud og stikke ind i et andet hul (5)-(8) i justeringsrøret (4).

- ☞ Når ringstiften er flyttet, skal det sikres, at den er rigtigt lukket.

Justering af elektrisk sædehældning

Sædehældningen [1] udføres ved hjælp af betjeningsmodulet eller et separat indstillingsmodul.

- ☞ Se betjeningsvejledningen til < *Betjeningsmodul* >.


Fra siddende til stående

Inden anvendelse af støtten til skift fra siddende til stående stilling skal elkørestolen sikres, og fodpladerne klappes op.

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Sikring af elkørestol* på side 17.

Har man brug for hjælp til at rejse sig, kan sædet hældes i fremadgående retning [2] (negativ sædehældning).

- ☞ Indstillingen af den negative sædehældning skal hjælpe med at rejse sig op, når elkørestolen står stille.
- ☞ Styrehjulene skal pege bagud eller til siden, når siddefladen hældes fremefter (støtte ved skift fra siddende til stående stilling), da fodpladerne ellers støder ind i styrehjulene.
- ☞ Indstilling af en negativ sædehældning kan få benstøtteunderdelene til at ramme gulvet og styrehjulene til at løfte sig.

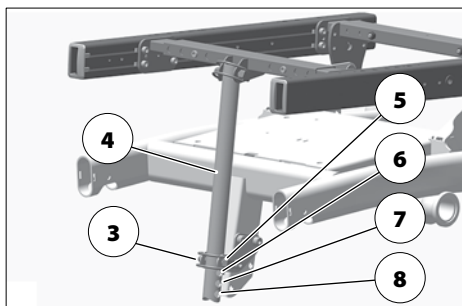

Sædehøjdeindstilling

Brugen af sædehøjdeindstillingen er kun tilladt på et plant underlag og i stilstand.

Læg begge underarme på armlænene, mens sædet sænkes. – Risiko for at komme i klemme!

Sædehøjden [1] kan indstilles via betjeningsmodulet.

- ☞ Sædehøjden kan derved øges trinløst.
 - ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Tekniske data* på side 62.
- ☞ Se betjeningsvejledningen til < *Betjeningsmodul* >.
- ☞ Hvis sædet er kørt ud af sin grundposition i opadgående retning, begrænses hastigheden og accelerationen sænkes.
 - ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Tekniske data* på side 62.
- ☞ Begrænsningerne af hastighed og acceleration ophæves automatisk igen, når sædet igen befinder sig i sin grundposition.



HOVEDSTØTTE

Hovedstøttens overkant skal altid indstilles tæt på baghovedet, cirka i øjenhøjde.


Undlad at placere hovedstøtten i nakkehøjde.

Træk kun maksimalt hovedstøtten ud af holderen indtil markeringen.

Hovedstøtten tjener kun som en hjælp til hovedholderen i regulær drift, den kan dog ikke erstatte en fast bil-hovedstøtte ved personbefordring i motorkøretøjer.

Vær opmærksom på risikoen for at komme i klemme, når hovedstøtten justeres.

Ved højdeindstilling og aftagning af hovedstøtten [1] skal klemskruen (2) løsnes.

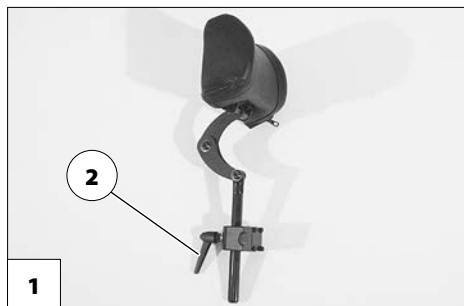

SIKKERHEDSSELE

Sørg for, at der ikke kommer nogen genstande i klemme under selebåndet!

Efterfølgende montering af et fastspændingsbælte må kun udføres på et sagkyn-digt værksted!

Fastspændingsbæltet er ikke en del af sikkerhedsselesystemet til elkørestolen og/eller passageren ved transport i bil.

For elkøretøjer med en maks. sluthastighed på mere end 10 km/t og for model 1.613 med 10 km/t gælder følgende:


- Dit køretøj er som standard udstyret med et fastspændingsbælte [1].
- Spænd for din egen sikkerheds skyld altid fastspændingsbæltet før køre-start.

Sikkerhedsselen [2] skrues på det pågældende ryglænsrør bagfra (1).

Sikkerhedsselen er beregnet til at stabilisere siddestillingen og forhindrer, at man vælter forlæns ud af elkørestolen.

Når sikkerhedsselen skal spændes, trækkes begge selens dele fremefter, og låsen skal gå hørligt i indgreb. Tryk på aktiveringsknappen og træk seleenderne fra hinanden for at åbne sikkerhedsselen.

- ☛ Sikkerhedsselen kan forlænges og må ikke sidde for stramt.

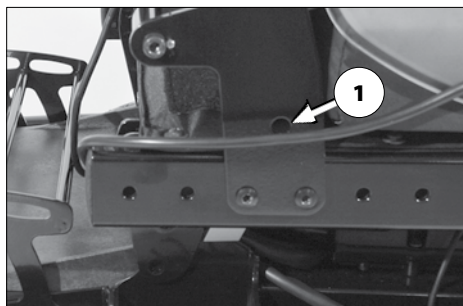

USB-TILSLUTNINGSPORT

Det maksimale strømforbrug må ikke overstige 1 A pr. tilslutning.

- USB-tilslutningsporten kræver konstant strømforsyning. Derfor kræves der evt. hyppig efterladning af batterierne.

USB-tilslutningsporten anvendes til tilslutning af udstyr med et USB-stik type A.

For at tilslutte udstyr skal stænkbeskyttelsen [1] først trækkes af, og USB-stikket derefter sættes i.

Hvis USB-tilslutningsporten ikke er i brug, skal den lukkes med stænkbeskyttelseskappen [2].



LEDSAGERSTYRING MED MIT PRIORITETSSTYRING

Ledsagerstyringen gør det muligt for ledsageren at styre elkørestolen via et separat, ekstra betjeningsmodul.

Positionering af styring

- ☞ Sluk betjeningsmodulet inden indstilling af positionen! – Herved undgås det, at elkørestolen sætter sig i bevægelse utilsigtet.

Højdeindstilling

Hold fast i betjeningsmodulet, og løs klemeskruen (1).

Skub betjeningsmodulet til den ønskede position, og stram klemeskruen igen.

Vinkelindstilling

Hold fast i betjeningsmodulet, og løs klemeskruen (2).

Drej betjeningsmodulet til den ønskede position, og stram klemeskruen igen.

HOLDER TIL GANGHJÆLPEMIDLER




Ganghjælpemidlerne kan – alt efter indstillet længde på ganghjælpemidlerne – rage ud over elkørestolens kontur!

- ☞ Vær særlig forsigtig under kørslen.

Ganghjælpemiddelholderen tjener til sikker medtagning af to ganghjælpemidler [3].

For at medføre ganghjælpemidler skal disse trykkes ned i hver to klemmer i holderen til ganghjælpemidler.

- ☞ Kontrollér, at ganghjælpemidlerne er sikkert klemt fast.

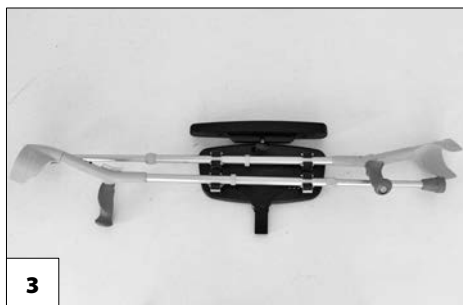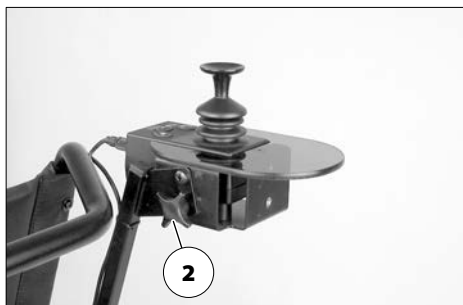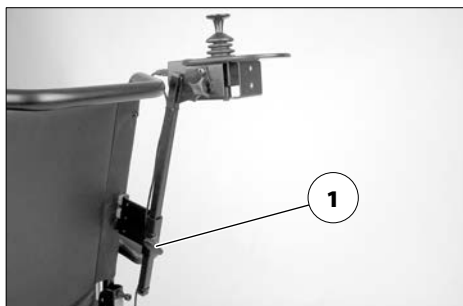


BELYSNING

Ved kørsel udendørs og på offentlige veje kan elkørestolen udstyres med et LED-belysningsanlæg.

Belysningen betjenes via førerens betjeningsmodul.

- ☞ Bemærk betjeningsvejledning < *betjeningsmodul* >!
- ☞ Ved dårligt udsyn og især i mørke skal der tændes for belysningsanlægget, så du bedre kan se og blive set.
- ☞ Kontrollér, at forlygter, blink- og baglygter samt reflekser ikke tildækkes af tøj eller af andre genstande, der er fastgjort på elkørestolen.

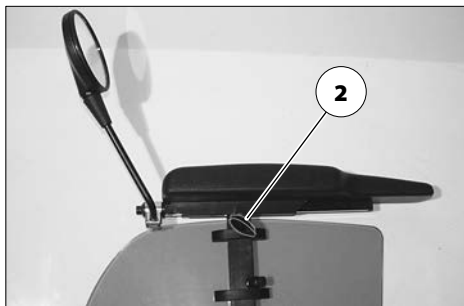

SIDESPEJL

Afmontering af sidespejl

For at afmontere sidespejlet skal klemeskruen (2) løsnes, og sidespejlet trækkes fremad og ud af armlænsrøret.

- ☞ Læg forsigtigt sidespejlet til side, og beskyt glasset mod belastning samt mod andre genstande.
- ☞ Sidespejlet skal altid holdes rent.

Til rengøring af spejlet anvendes et almindeligt glasrengøringsmiddel. Følg producentens anvisninger for produktet.

Montering af sidespejl

For at anvende kørefunktionen skal sidespejlet sættes ind i armlænsrøret forfra, og klemeskruen (2) strammes.

Indstilling af spejl

1. Forindstil sidespejlet ved at dreje bøjlen i siden.
2. Drej sidespejlet på monteringsstangen og kugleledet, indtil den ønskede synsvinkel er indstillet.

FLYTNING OG TRANSPORT

Elkørestolen må ikke løftes i ryglæn, benstøtter, armlæn eller afdækninger!

Elkørestolen skal slukkes, inden den løftes!

De dele, som er blevet afmonteret med henblik på læsning, skal opbevares sikkert og anbringes igen omhyggeligt inden kørsel.

For at bære de aftagelige dele kræves ingen specielle bærepunkter.

Følgende foranstaltninger kan af pladshensyn være nødvendige ved transport i køretøjer:

- Tag benstøtten af.
- Tag armlænet af.
- Slå ryglænet ned, eller tag det af.

På-/aflæsning

Elkørestolens vægt reduceres, når du tager aftagelige komponenter af.

Elkørestolen kan på-/aflæsses ved hjælp af en rampe eller en lift.

Ramper og lifte


Bemærk rampens eller liftens betjeningsvejledning.

Bemærk rampens eller liftens producent-specifikationer.

Den maksimale pålæsningshøjde, som står anført på rampen, skal være større end højden "h" fra jorden op til lastfladen, f.eks. på en personbil.

Rampens eller liftens bæreevne skal være større end elkørestolens tilladte totalvægt.

Når der bakkes op på ramper, er der fare for, at elkørestolen slår kolbøtter!

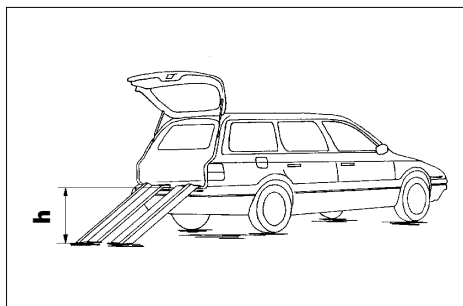

Persontransport i motorkøretøjer

Hvorvidt din egen elkørestol er godkendt til brug som sæde ved persontransport i motorkøretøjer, fremgår af typeskiltet på kørestolen.

☞ Læs mere i kapitel *Forklaring til symbolerne på typeskiltet* på side 82.

☞ Elkørestole, der ikke er godkendt som sæde ved befordring af personer i motorkøretøjer, er markeret med en ekstra mærkat. – Læs mere i kapitel *Forklaring til mærkaterne på elkørestolen* på side 81.

☞ Se vejledningen < *Sikkerhed med Meyra-kørestole, også ved transport i motorkøretøjer* >! – Dette dokument samt yderligere oplysninger findes på vores hjemmeside < www.meyra.com > i < *Downloadarkivet* >.

Personbefordring i henhold til ISO 7176-19 er kun tilladt med de efterfølgende forankringssystemer:

- 4-punkts-bespændingssystem i henhold til ISO 10542,
- Dahl Dockingstation MK II (ikke på model 1.611, 1.612),
- Dahl VarioDock (ikke på model 1.611, 1.612).





Oplysninger vedrørende montering og betjening fremgår af de specifikke monterings- og betjeningsvejledninger vedrørende forankringssystemet. Dokumentet medfølger med ethvert forankringssystem. Det specifikke dokument for forankringssystemet kan også findes under den produktspecifikke rubrik på vores hjemmeside < *betjeningsvejledning* > på vores hjemmeside < www.meyra.com >.

Transportsikring

Den aktuelle transportvirksomheds forskrifter og anvisninger skal følges. – Forhør dig om dem før transporten.

Elkørestolen skal nu sikres ved hjælp af forankringspunkterne [1]+[3] eller [2]+[4].

- ☞ De fire forankringspunkter er markeret med et "flueben"-symbol.
 - ☞ Se hertil også kapitlet *Forklaring til mærkaterne på elkørestolen* på side 81.
- ☞ Fremgangsmåden til sikring af elkørestolen fremgår af dokumentet < *Sikkerhedsanvisninger og generel håndteringsvejledning til elkøretøjer* > kapitlet < *Transport i biler eller med transportmidler* >. – Dette dokument og yderligere information findes i < *Information center* > på vores website < www.meyra.com >.

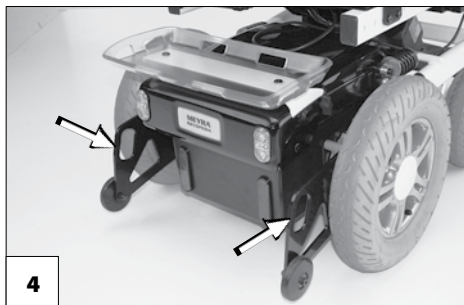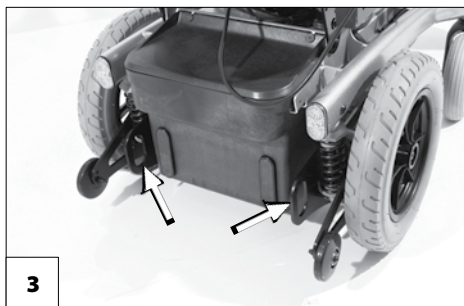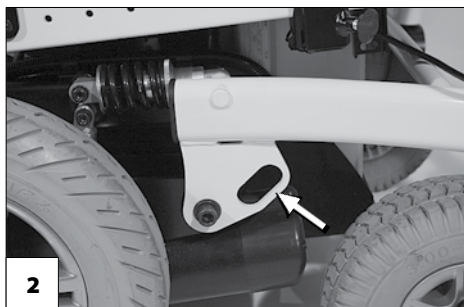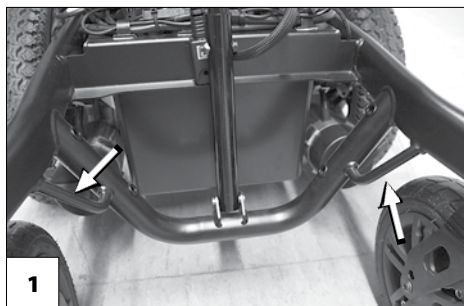

DÆK

Dækkene er lavet af en gummiblanding, der på nogle underlag kan efterlade spor, der kun vanskeligt eller slet ikke kan fjernes (bl.a. kunststof-, træ- eller parketgulve, tæpper, gulvbelægning). Vi hæfter ikke for skader på underlag på grund af slid eller kemiske processer på dækkene.

VEDLIGEHOLDELSE

Mangelfuld eller forsømt pleje og service af elkørestolen fører til en begrænsning af garantien fra producenten.

Servicearbejde

Følgende serviceplan indeholder retningslinjer for udførelse af servicearbejde.

- ☞ Vedligeholdelsesplanen giver ingen oplysninger om det faktisk nødvendige arbejdsomfang, som er konstateret ved elkørestolen.

Serviceplan		
HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Inden kørsel	Generelt Kontrollér for fejlfri funktion.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
	Kontrol af magnetbremse Stil håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion på kørefunktion i begge sider.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. Hvis elkørestolen kan skubbes, skal bremsen straks repareres af et sagkyndigt værksted. – Fare for uheld!
Især inden kørsel i mørke	Belysning Kontrollér, at belysning samt reflekser fungerer fejlfrit.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
Hver 2. uge (afhængigt af samlet kørestrækning)	Kontrollér dækkenes luftryk Dæktryk: 🔊 Se <i>Tekniske data</i> på side 62.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. Anvend en dæktryksmåler til dette formål.
	Stilleskruer Kontrollér, om skruer og møtrikker sidder godt fast.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. Stram de løsnede stilleskruer forsvarligt. Opsøg sagkyndigt værksted efter behov.
Hver 6.-8. uge (afhængigt af samlet kørestrækning)	Hjulfastgørelse Kontrollér, at hjulmøtrikker eller -skruer sidder godt fast.	Udfør dette alene eller sammen med en hjælper. Spænd løsnede hjulmøtrikker eller -skruer, og efterspænd efter 10 driftstimer eller 50 km. Opsøg sagkyndigt værksted efter behov.

Serviceplan		
HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Hver 2. måned (afhængigt af samlet kørestrækning)	Kontrollér dækkenes profil Mindste profildybde = 1 mm	Udfør visuel kontrol selv eller sammen med en hjælper. Kontakt et sagkyndigt værksted med henblik på reparation ved nedslidt dækprofil eller beskadigelse af dækkene.
Hver 6. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Kontrollér <ul style="list-style-type: none"> – Renhed. – Generel tilstand. 	Se kapitlet <i>Rengøring</i> på side 59.
Producentens anbefalinger: Hver 12. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Eftersyn <ul style="list-style-type: none"> – Elkørestol. – Oplader. 	Foretages af forhandleren.

Sikringer

Udskiftning af sikringer

Sikringer må kun erstattes med nye af samme type. – Bemærk *Tekniske data* på side 62.

Inden udskiftning af sikringer skal elkørestolen parkeres på et plant underlag og sikres, så den ikke ruller.

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Sikring af elkørestol* på side 17.



Nye sikringer fås f.eks. på tankstationer.

- ☞ Hvis sikringen springer igen, skal årsagen afhjælpes af en forhandler.

Sikring

Hoved-/batterisikring [1]

Fladsikringen til batteristrøm sidder i sikringsholderen (2) til batterikassen.

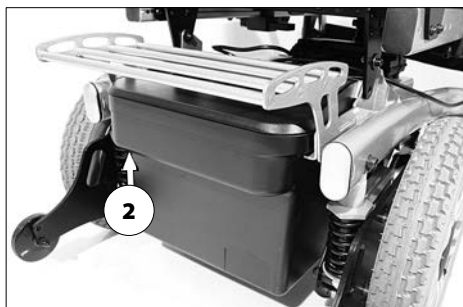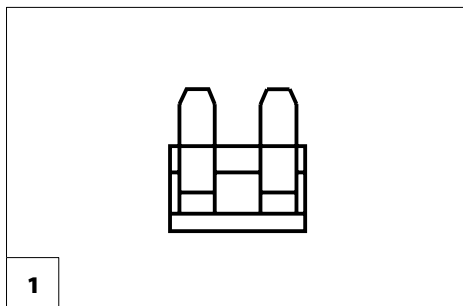

Belysning

Belysningen (1)+(2) er udstyret med LED-teknik med lang levetid.

- ☞ Hvis et af blinklysene er defekt, blinker de resterende med dobbelt frekvens.
- ☞ En defekt LED-pære skal straks repareres af et sagkyndigt værksted.

Kørellys

Belysningshuset (1) skal være indstillet på en sådan måde, at lyskeglen kan ses på kørebanen. Lyskeglen skal indstilles, så dens underkant er ca. 3 meter foran elkørestolen.

- ☞ Efter indstilling af sædehældningen skal belysningshuset evt. indstilles igen.
- ☞ Opsøg efter behov et sagkyndigt værksted for indstilling.



Fejludbedring		
Fejl	Årsag	Udbedring
Betjeningsmodulets batterikontrol lyser ikke efter tilslutning.	Batterisikringen er defekt eller er ikke monteret korrekt.	Udskift den defekte sikring/rengør kontakterne, og sæt dem rigtigt i.
	Stikforbindelsen til strømforsyningen er uden kontakt.	Kontrollér stikforbindelser.
Batteriindikatoren blinker, når der tændes.	En af drivmotorerne eller begge er indstillet til skubbefunktion.	Indstil håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion til kørefunktion i begge sider.
	Stikforbindelsen på et af drevene har ikke kontakt.	Kontrollér stikforbindelser.
	Fejl i elektronikken.	Skal repareres på sagkyndigt værksted. (Skubbefunktion). Indstillingshåndtag i position for kørefunktion.
	Ikke oplyste fejl.	Se under < <i>Fejldiagnose</i> > i betjeningsvejledningen til betjeningsmodulet.
Belysningen virker ikke.	LED-pære defekt.	Lad at autoriseret værksted foretage reparation/udskiftning.
	Belysnings- eller køreelektronik defekt.	Lad at autoriseret værksted foretage reparation/udskiftning.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

De nærværende sikkerhedsanvisninger er et udtræk af *Sikkerhedsanvisninger og generelle betjeningsanvisninger*, som kan findes på vores internetside: < www.meyra.com >.

Stik ikke fingrene ind i åbne stelrør (f.eks. efter afmontering af armlæn, benstøtter eller støttehjul). – Risiko for tilskadekomst!

Under anvendelse af elkørestolen, også ved stilstand og især på stigninger/skråninger, skal man indtage en sikker siddestilling. – Fare for uheld!

For at opnå en sikker siddeposition skal brugerens ryg flugte med rygpolstringen og brugerens bækken sidde helt tilbage på sædet.

En forflytning fra elkørestolen på stigninger/skråninger må kun i nødstilfælde ske med hjælp fra en ledsager og/eller hjælper! – Fare for uheld!

Justér kun sædehældningen, når elkørestolen står på en vandret, plan flade. På stigninger er der risiko for, at kørestolen vælter!

Øget risiko for væltning ved anvendelse af det vinkelindstillede ryglæn .

Før kørsel skal det sikres, at der ikke er indstillet en negativ sædehældning, og at sædehældningen garanterer en sikker siddestilling.

Du bør ikke ryge under brugen af elkørestolen.

Ved direkte sollys, kan sædebetræk/polstringer, armlænsbolstringer, benstøtter og håndtag opnå temperaturer på over 41 °C. – Der er fare for tilskadekomst ved kontakt med ubeskyttet hud! Undgå en sådan opvarmning af elkørestolen ved altid at parkere den i skyggen.

Specielle holdepunkter til fastgørelse af objekter, som skal medtages, er den optimale bagagehylde og skubbehåndtagene. – Den maksimale læsning ved skubbehåndtagene er 5 kg.

Der må stiges hhv. ind i og ud af sædet, når elkørestolen er slukket og indstillingshåndtaget køre-/skubbefunktion er sat på kørefunktion!

I modsat fald kan en utilsigtet berøring af joysticket sætte elkørestolen i gang! – Fare for uheld!

Ledsager

Ledsageren skal gøres opmærksom på alle evt. faresituationer, før han/hun begynder at hjælpe. De komponenter på din elkørestol, som ledsageren skal tage fat i, skal sidde forsvarligt fast.

Udstigning fra elkørestolen

Kør elkørestolen så tæt som muligt på det sted, hvor du vil stige ud af elkørestolen.

- ☞ I den forbindelse skal anvisningerne i kapitel *Sikring af elkørestol* på side 17, *Benstøtteunderdel* på side 26 og *Afmontering af armlæn* på side 33 følges.
- ☞ Vi anbefaler, at udstigningen af elkørestolen sker med en person til assistance.

Opsamling af genstande

Undgå at hælde overkroppen langt fremad, til siden eller bagud, især ved opsamling eller aflægning af tunge genstande. – Risikofor, at elkørestolen vælter, især ved lille sædebredde og stor sædehøjde (siddepudder)!

Kørsel på skråninger, stigninger eller skrånende kørebane

Fra en bestemt kørebanehældning er væltessikkerheden og bremse- og styrefunktion betydeligt nedsat på grund af reduceret vejgreb.

- ☞ Se kapitlet *Tekniske data* på side 62.

Læn dig aldrig til den lave side af skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Undgå ændringer i køretilstanden i ryk (især ved kritisk indstillede kørselsparametre som f.eks. store forsinkelser).

Kør altid med lav hastighed, når du kører ned og op ad bakke.

Ekstreme stigninger og nedkørsler skal køres med tilpasset sluthastighed.

Undlad at skifte til skubbefunktion på stigninger og nedkørsler. De automatiske bremsere fungerer ikke i skubbefunktion.

Undlad at skubbe køretøjet på stigninger og nedkørsler.

Der er fare for at vælte ved kørsel i sving og ved vending på stigninger og nedkørsler.

Undgå at køre på opad- eller nedadgående terræn med utilstrækkelig vejbanebeskaffenhed. Selv ved halvsides is-, vand-, mosbelægninger eller lignende på kørebanelen er der fare for, at elkørestolen mister sit vejgreb og skrider ukontrolleret. Sæt i givet fald straks joysticket i neutral position.

Kør aldrig hurtigere end fodgængerhastighed.

Den bremsekraft, der kan overføres til kørebanelen, er væsentligt mindre ved kørsel ned ad bakke end på lige vej og forringes yderligere ved dårligere vejforhold (f.eks. vådt føre, sne, grus, tilsmudsning). En farlig udskridning af de bremsede hjul og en dermed forbundet uønsket kursafvigelse skal udelukkes ved at bremse forsigtigt og kontrolleret.

For enden af bakken skal du passe på, at fodpladerne ikke berører jorden og dermed skaber en faresituation som følge af pludselig opbremsning.

Køreunderlag med sidehældning (f.eks. fortov med sidehældning) bevirker, at din elkørestol vil dreje mod den lave side. Dette skal du selv eller en ledsager udligne ved at styre modsat.

Forcering af forhindringer

Evnen til at forcere forhindringer hænger blandt andet sammen med kørebanens hældning og benstøtternes indstilling.

Enhver forcering af en forhindring udgør en risiko! – Fare for, at elkørestolen vipper.

Forcering af en forhindring er en særlig risikosituation, hvor der bl.a. skal tages hensyn til en kombination af sikkerhedsanvisninger vedrørende skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Kør så vidt muligt uden om forhindringer, som f.eks. sporriller, skinner, kloakdæksler eller lignende farekilder.

Kør altid hen imod mindre forhindringer, f.eks. afsatser/kanter langsomt og i ret vinkel (90°). Kør hen over forhindringen fremadkørende med ca. 0,5 m tilløb og begge hhv. for- og baghjul samtidig. I modsat fald kan din elkørestol hælde på tværs og vælte dig ud af elkørestolen.

Hold så stor en sikkerhedsafstand til afgrunde, trapper, skråninger, bredder osv., at der er tilstrækkelig plads til at reagere, bremse og vende.

Hvis det er muligt, skal du få en eller flere hjælpere til at løfte dig ud af elkørestolen og bære dig hen til det ønskede sted.

Hvis du kører ned af et trin (f.eks. fortovkanten) kan du nemt falde ud af elkørestolen, hvis hhv. fodpladerne og benstøtterne rammer kørebanen. Når man skal krydse spor eller sporriller, er det nødvendigt med øget opmærksomhed. – Utilsigtet afvigelse fra kursen!

Det er umuligt at køre sikkert på trapper med almindelige elkøretøjer.

Elektrisk anlæg

Forkerte og/eller upassende ændringer i køreegenskaberne kan påvirke elkørestolens og elkørestolsbrugerens sikkerhed. – Fare for uheld!

Den elektroniske styring af en elkørestol må ikke modificeres.

Såfremt elkørestolen reagerer usædvanligt eller udfører ukontrollerbare køremanøvrer, skal joysticket uopholdeligt bringes i neutral stilling, og/eller elkørestolen skal straks slukkes.

Befordring i offentlige transportmidler

Din elkørestol er ikke beregnet til personbefordring i offentlige transportmidler. Det kan medføre begrænsninger. Vi anbefaler, at der benyttes et sæde, der er indbygget i befordringsmidlet.

Hvis siddende befordring i elkørestolen alligevel skulle være uomgængeligt nødvendig, skal følgende overholdes:

- Benyt den plads, som trafiksselskabet har bestemt til frasætning.
- Overhold trafiksselskabets forskrifter, før du parkerer elkørestolen.
- Parkér din elkørestol mod kørselsretningen på den afsete plads.
- Elkørestolen skal placeres således, at ryglænet kan støtte mod begrænsningen af den afsete plads.
- Den ene side af elkørestolen skal desuden flugte med en ekstra begrænsning af den afsete plads, så kørestolen ikke kan skride under et uheld eller en pludselig bremsemanøvre.
- Aktivér desuden parkeringsbremsen.

Kørsel i offentlig trafik

Overhold de nationale gældende forskrifter vedrørende kørsel på offentlige veje og spørg i givet fald din autoriserede forhandler efter det nødvendige tilbehør.

Elkørestolen kan leveres med et lysanlæg som ekstraudstyr. Anlægget består af:

- lygter
- retroreflektorer.

Ved dårlig sigtbarhed og især efter mørkets frembrud anbefales det, at der monteres og tændes et aktivt belyningsanlæg, så din sigtbarhed øges og du selv nemmere kan blive set.

- ☞ Ved færdsel i den offentlige trafik er det føreren, der er ansvarlig for den funktions- og driftssikre tilstand af elkørestolen.
- ☞ Ved kørsel i offentlig trafik skal de gældende færdselsregler overholdes.
- ☞ Hvis du kører i mørke, anbefaler vi, at du bærer lyst og iøjnefaldende tøj, så det er lettere at se dig.
- ☞ Undgå ved kørsel i mørke at anvende kørebaner og cykelstier.
- ☞ Sørg for, at lysanlægget ikke tildækkes af beklædnings- eller andre genstande, der er fastgjort til elkørestolen.
- ☞ Ved fysiske begrænsninger som f.eks. blindhed kræves der en køreevneattest til selvstændig styring af en elkørestol.

Rengøring

Syntetiske afdækninger angribes af nonionnaktive detergenter, opløsningsmiddel og især af alkohol.

Elkørestolen må ikke spules med højtryksrensere! – Fare for kortslutning!

Polstringer og betræk er som regel forsynet med plejeanvisninger (plejeskilt).

- ☞ Bemærk kapitel *Symbolforklaring til vaskeanvisningerne* på side 80.

Ellers gælder følgende anvisninger:

- ☞ Rengør polstringerne med varmt vand og opvaskemiddel.
- ☞ Pletter kan fjernes med en svamp eller en blød børste.
- ☞ Vask genstridige pletter ved at anvende et almindeligt vaskemiddel.
- ☞ Må ikke vaskes! Undlad vask i vaskemaskine!

Skyl med rent vand, og lad det tørre.

Stellet og hjulene kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel. Derefter tørres omhyggeligt.

- ☞ Kontrollér stellet for korrosionsskader samt andre skader.
- ☞ De syntetiske materialer må kun rengøres med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel eller brun sæbe.
- ☞ Hvis der anvendes et almindeligt kunststofrengøringsmiddel, skal producentens anvisninger følges.

Belysningsudstyret skal altid holdes rent, og dets funktionsdygtighed skal kontrolleres, før kørsel påbegyndes.

- ☞ De elektriske komponenter skal beskyttes mod vand og fugt!
 - Fare for beskadigelse af elektronik og betjeningsfelt ved strålevand.

Ved pleje bør der anvendes silikonefri rengørings- og plejemidler på vandbasis.

- ☞ Følg producentens anvisninger for produktet.

Brug ikke aggressive rengøringsmidler, såsom opløsningsmidler eller hårde børster etc.

Yderligere oplysninger om rengøring og pleje finder du i < *Information center* > på vores website:

< www.meyra.com >.

Behandlet overflade

Der er bedst mulig beskyttelse imod korrosion på grund af en speciel overfladebehandling.

- ☞ Hvis lakken er ridset eller beskadiget på lignende måde, kan stederne udbedres med en lakstift, der kan fås hos os gennem forhandleren.

Hvis de bevægelige dele af og til smøres med lidt olie, forlænges deres funktion.

Desinficering

Hvis produktet benyttes af flere personer (f.eks. på plejehjem), skal der anvendes et almindeligt desinficeringsmiddel.

- ☞ Før desinficeringen skal polstringer og håndtag rengøres.
- ☞ Det er tilladt at spraye eller aftørre med godkendte og anerkendte desinfektionsmidler.

Oplysninger om kontrollerede og anerkendte desinfektionsmidler og -procedurer kan fås af din nationale myndighed for sundhedsbeskyttelse.

- ☞ Ved anvendelse af desinfektionsmidler kan der forekomme skader på overflader, hvilket kan forringe komponenternes funktion på længere sigt.

- ☞ Følg producentens anvisninger for produktet.

Reparation

Reparationer må principielt kun gennemføres af autoriserede forhandlere.

Istandsættelse

Ved udførelse af reparationsarbejde kan du have fuld tillid til din forhandler. Han/hun er blevet instrueret i udførelsen af dette arbejde.

Service

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, bedes du henvende dig til din forhandler, der kan rådgive dig samt udføre service og reparation.

Reserve dele

Sikkerhedsrelevante dele eller moduler må kun monteres af et sagkyndigt værksted. – Fare for uheld!

Reserve dele kan udelukkende fås hos forhandleren. I tilfælde af reparation må der kun anvendes originale reserve dele!

- ☞ Komponenter fra andre firmaer kan forårsage fejl.

En reservedelsliste med de tilhørende artikelnumre og tegninger ligger hos forhandleren.

For at få leveret de rigtige reserve dele er det altid nødvendigt også at angive kørestolens serie-nr. (SN)! Nummeret står på typeskiltet.

Ved enhver ændring/modificering af kørestolen foretaget af den autoriserede forhandler skal kørestolens betjeningsvejledning vedlægges supplerende information, såsom monterings-/betjeningsanvisninger. Dato for ændringer skal registreres og anføres ved reservedelsbestillingen.


På denne måde forebygges fejlbestillinger ved senere reservedelsbestillinger.

Anvisninger vedrørende længere brugspauser

Ved længere pauser i anvendelsen er følgende foranstaltninger nødvendige:

- ☞ Oplad batterierne i 16 timer mindst én gang om måneden.
- ☞ Opbevaringstemperaturerne skal overholdes.
 - ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Tekniske data* på side 62.

BORTSKAFFELSE

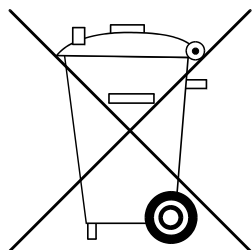

Bortskaffelse skal ske i henhold til nationalt gældende lovbestemmelser.

Kontakt kommunen for oplysninger om den lokale miljøstation.

TEKNISKE DATA

Alle angivelser under < Tekniske data > gælder standardmodellen.

Måletolerance ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Beregning af den maks. brugervægt:

Den tilladte samlede vægt fremkommer ved beregning af elkørestolens egenvægt og den maksimale bruger-/ (person-) vægt.

Yderligere vægt pga. senere påmonterede dele eller bagage reducerer den maks. brugervægt.

Eksempel:

En bruger vil tage bagage på 5 kg med. Dermed reduceres den maks. brugervægt med 5 kg.

Dæktryk ved luftfyldte dæk

Det maks. dæktryk står på begge sider af dækket.

Dæktryk – styrehjul

Standard:

2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi

Dæktryk - drivhjul

Standard:

3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Ultraletløb:

6 bar = 87 psi

Højtryksdæk:

8 bar = 116 psi

Rækkevidde

Vores oplyste nominelle data er realistiske ved overholdelse af ISO 7176-4.

Rækkevidden afhænger i høj grad af følgende faktorer:

- Batteritilstand
- Førervægt
- Kørehastighed
- Køreadfærd
- Kørebanens beskaffenhed
- Kørebetingelser
- Omgivelsestemperatur.

Rækkevidden indskrænkes stærkt af:

- Hyppig opadgående rampekørsel.
- Dårlig ladekapacitet på batterierne.
- Lave omgivelsestemperaturer (f.eks. om vinteren).
- Hyppig opstart og opbremsning (f.eks. i indkøbscentre),
- Ældede, sulfaterede batterier.
- Tvungne nødvendige, hyppige styremanøvrer.
- Nedsat kørehastighed (især ved fodgængerhastighed).

I praksis reduceres den rækkevidde, som fortsat kan opnås under "normale betingelser", til ca. 80 – 40 % af den nominelle værdi.

Køreegenskaber ved forcering af stigninger

Stigninger og strækninger med fald, der overstiger de tilladte værdier, må der af sikkerhedsmæssige årsager kun køres på uden fører (f.eks. ved ramper)!

Anvendte standarder

Elkørestolen er i overensstemmelse med standarden:

- EN 12184: 2014
- ISO 7176-8: 2014
- ISO 7176 -19: 2008
 - ☞ Evalueringen af crash-testen, hvor elkørestolen fastgøres ved køretøjets stopsystem, er udført i henhold til kontrolmetoderne i tillæg D.

Crash-testen blev udført og godkendt med de efterfølgende forankringssystemer:

- 4-punkts-forankringssystem i henhold til ISO 10542,
- Dahl Dockingstation MK II (ikke på model 1.611, .612),
- Dahl VarioDock (ikke på model 1.611, 1.612).
- ☞ De pågældende dokumenter, som leveres med produktet, følger med produkterne.

Modellerne er kategoriseret i anvendelsesklasse B iht. standard EN 12184.

Vores anvendte moduler og komponenter opfylder EN 1021-2 for bestandighed over for antændelse.

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.610

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1080 mm	– mm
Total bredde	580 mm	750 mm
Totalmasse	– kg	220 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	– kg	120 kg
Den tungeste dels masse	4,5 kg	– kg
Faktisk sædedybde	400 mm	530 mm
Faktisk sædebredde	430 mm	550 mm
Længde sammenklappet	– mm	– mm
Bredde sammenklappet	– mm	– mm
Højde sammenklappet	– mm	– mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	430 mm	600 mm
Sædevinkel	-2°	26°
Ryglænsvinkel	-10°	50°
Rygstroppens højde	450 mm	570 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	280 mm	500 mm
Statisk stabilitet neckørsel	–°	8,5°
Statisk stabilitet opkørsel	–°	8,5°
Statisk stabilitet sidelæns	–°	8,5°
Dynamisk stabilitet opkørsel	–°	8,5°
Vinkel benstøtter/sædeflade	110°	180°
Armlæns højde fra siddeflade	240 mm	350 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	330 mm	450 mm
Overvindelse af forhindringer	– mm	60 mm
Min. venderadius	840 mm	–
Tophastighed fremad (afhængigt af udstyr)	– km/t	6 km/t
Korteste bremsevej fra tophastighed	– mm	1000 mm
Rækkevidde (ved 6 km/t)	25 km	40 km
Aksel, horisontalposition	– mm	– mm

Yderligere tekniske data for model 1.610

	min.	maks.
Støjniveau		< 70 dB(A)
Kapslingsklasse		IP X4
Vendeplads	1300 mm	
Drevstyring	24 V / 60 A	24 V / 90 A
Fremdrifteffekt (6 / 10 km/t)		180 W
Hovedsikring		80 A
Belysning (ekstraudstyr)		LED-teknik 24 V
Nyttelast	- kg	10 kg
Akselbelastning foran	- kg	110 kg
Akselbelastning bagpå	- kg	150 kg
Frihøjde, motor		60 mm
Frihøjde, batteriplade		80 mm
Egenvægt (med batterier)	94 kg	111 kg
Egenvægt (uden batterier)	65 kg	
Total højde	930 mm	1130 mm
Sædepude tykkelse	60 mm	70 mm

Transportmål

Længde (inkl. støttehjul, uden benstøtter)	920 mm	- mm
Bredde (uden armlæn)		580 mm
Højde uden armlæn	560 mm	660 mm

Klimatekniske oplysninger

Omgivelsestemperatur		-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur med batterier		-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur uden batterier		-40 °C til +65 °C

Yderligere tekniske data for model 1.610

	min.	maks.
<u>Styrehjul</u>		
230 x 70 mm (9")	beskyttet mod uheld / punkterfri	
260 x 70 mm (10")	beskyttet mod uheld / punkterfri	
<u>Drivhjul</u>		
320 x 75 mm (12,5")	beskyttet mod uheld / punkterfri	
356 x 75 mm (14")	beskyttet mod uheld / punkterfri	
<u>Batterier</u>		
2 x 12 V 38 Ah (5 h) / 45 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie	
2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie	
Maks. batterimål (LxBxH)	260 x 174 x 205 mm	
Ladestrøm	6 A	12 A

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.611

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1130 mm	– mm
Total bredde	580 mm	800 mm
Totalmasse	– kg	320 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	– kg	160 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast) ved sædelift	– kg	140 kg
Den tungeste dels masse	4,5 kg	– kg
Faktisk sædedybde	400 mm	560 mm
Faktisk sædebredde	380 mm	650 mm
Længde sammenklappet	– mm	– mm
Bredde sammenklappet	– mm	– mm
Højde sammenklappet	– mm	– mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	440 mm	530 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude) ved sædelift	460 mm	790 mm

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.611

	min.	maks.
Sædevinkel	-2°	26°
Ryglæsvinkel	-10°	50°
Rygstroppens højde	450 mm	570 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	280 mm	500 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	-°	8,5°
Statisk stabilitet opkørsel	-°	8,5°
Statisk stabilitet sidelæns	-°	8,5°
Dynamisk stabilitet opkørsel	-°	8,5°
Vinkel benstøtter/sædeflade	110°	180°
Armlæns højde fra siddeflade	240 mm	350 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	330 mm	450 mm
Overvindelse af forhindringer	- mm	60 mm
Min. venderadius	840 mm	-
Tophastighed fremad (afhængigt af udstyr)	6 km/t	10 km/t
Korteste bremsevej fra tophastighed	1000 mm	2100 mm
Rækkevidde	25 km	40 km
Aksel, horisontalposition	- mm	- mm

Yderligere tekniske data for model 1.611

	min.	maks.
Løftehøjde sædelift		300 mm
Støjniveau		< 70 dB(A)
Kapslingsklasse		IP X4
Vendeplads	1300 mm	
Drevstyring	24 V / 70 A	24 V / 120 A
Fremdrifteffekt (6 / 10 km/t)	220 W	350 W
Hovedsikring		80 A
Belysning (ekstraudstyr)		LED-teknik 24 V
Nyttelast	- kg	10 kg

Yderligere tekniske data for model 1.611

	min.	maks.
Akselbelastning foran	– kg	140 kg
Akselbelastning bagpå	– kg	180 kg
Frihøjde, motor		60 mm
Frihøjde, batteriplade		80 mm
Egenvægt (med batterier)	100 kg	136 kg
Egenvægt (uden batterier)	65 kg	
Total højde	930 mm	1130 mm
Sædepude tykkelse	60 mm	150 mm

Transportmål

Længde (inkl. støttehjul, uden benstøtter)	830 mm	– mm
Bredde (uden armlæn)	580 mm	620 mm
Højde uden armlæn	570 mm	660 mm

Klimatekniske oplysninger

Omgivelsestemperatur		-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur med batterier		-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur uden batterier		-40 °C til +65 °C

Styrehjul

230 x 70 mm (9")	beskyttet mod uheld / punkterfri
260 x 70 mm (10")	beskyttet mod uheld / punkterfri

Drivhjul

320 x 75 mm (12,5")	beskyttet mod uheld / punkterfri
356 x 75 mm (14")	beskyttet mod uheld / punkterfri

Yderligere tekniske data for model 1.611

	min.	maks.
<u>Batterier</u>		
2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie	
2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie	
Maks. batterimål (LxBxH)	260 x 174 x 205 mm	
Ladestrøm	8 A	12 A

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.612

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1120 mm	– mm
Total bredde	630 mm	800 mm
Totalmasse	– kg	320 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	– kg	160 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast) ved sædelift	– kg	150 kg
Den tungeste dels masse	4,5 kg	– kg
Faktisk sædedybde	400 mm	560 mm
Faktisk sædebredde	380 mm	650 mm
Længde sammenklappet	– mm	– mm
Bredde sammenklappet	– mm	– mm
Højde sammenklappet	– mm	– mm
Sædefladsens højde ved forkanten (uden sædepude)	460 mm	520 mm
Sædevinkel	-2°	33°
Ryglænsvinkel	-10°	50°
Rygstroppens højde	450 mm	570 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	280 mm	500 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	–°	8,5°
Statisk stabilitet opkørsel	–°	8,5°
Statisk stabilitet sidelæns	–°	8,5°
Dynamisk stabilitet opkørsel	–°	8,5°

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.612

	min.	maks.
Vinkel benstøtter/sædeflade	110°	180°
Armlæns højde fra siddeflade	240 mm	350 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	330 mm	450 mm
Overvindelse af forhindringer	– mm	60 mm
Min. venderadius	900 mm	–
Tophastighed fremad (afhængigt af udstyr)	6 km/t	10 km/t
Korteste bremsevej fra tophastighed	1000 mm	2100 mm
Rækkevidde	25 km	40 km
Aksel, horisontalposition	– mm	– mm

Yderligere tekniske data for model 1.612

	min.	maks.
Løftehøjde sædelift		300 mm
Støjniveau		< 70 dB(A)
Kapslingsklasse		IP X4
Vendeplads	1350 mm	
Drevstyring	24 V / 70 A	24 V / 120 A
Fremdrifteffekt (6 / 10 km/t)	220 W	350 W
Hovedsikring		80 A
Belysning (ekstraudstyr)		LED-teknik 24 V
Nyttelast	– kg	10 kg
Akselbelastning foran	– kg	160 kg
Akselbelastning bagpå	– kg	220 kg
Frihøjde, motor		70 mm
Frihøjde, batteriplade		80 mm
Egenvægt (med batterier)	115 kg	118 kg
Egenvægt (uden batterier)	71,5 kg	
Total højde	970 mm	1140 mm
Sædepude tykkelse	60 mm	150 mm

Yderligere tekniske data for model 1.612

	min.	maks.
<u>Transportmål</u>		
Længde (inkl. støttehjul, uden benstøtter)	870 mm	– mm
Bredde (uden armlæn)	630 mm	630 mm
Højde uden armlæn	590 mm	680 mm

Klimatekniske oplysninger

Omgivelsestemperatur	-25 °C til +50 °C	
Opbevaringstemperatur med batterier	-25 °C til +50 °C	
Opbevaringstemperatur uden batterier	-40 °C til +65 °C	

Styrehjul

260 x 70 mm (10")	beskyttet mod uheld / punkterfri
-------------------	----------------------------------

Drivhjul

356 x 75 mm (14")	beskyttet mod uheld / punkterfri
-------------------	----------------------------------

Batterier

2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie	
2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie	
Maks. batterimål (LxBxH)	260 x 174 x 205 mm	
Ladestrøm	8 A	12 A

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.613

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1065 mm	1130 mm
Total bredde	620 mm	800 mm
Totalmasse	– kg	280 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	– kg	160 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast) ved sædelift	– kg	140 kg

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.613

	min.	maks.
Den tungeste dels masse	4,5 kg	– kg
Faktisk sædedybde	400 mm	560 mm
Faktisk sædebredde	380 mm	650 mm
Længde sammenklappet	– mm	– mm
Bredde sammenklappet	– mm	– mm
Højde sammenklappet	– mm	– mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	440 mm	510 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude) ved sædelift	460 mm	760 mm
Sædevinkel	4°	26°
Ryglænsvinkel	-10°	50°
Rygstroppens højde	450 mm	570 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	280 mm	450 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet sidelæns	–°	6°
Dynamisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Vinkel benstøtter/sædeflade	110°	180°
Armlæns højde fra siddeflade	240 mm	350 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	330 mm	450 mm
Overvindelse af forhindringer	– mm	60 mm
Min. venderadius	650 mm	–
Tophastighed fremad (afhængigt af udstyr)	6 km/t	10 km/t
Korteste bremsevej fra tophastighed	1000 mm	2100 mm
Rækkevidde	25 km	40 km
Aksel, horisontalposition	– mm	– mm

Yderligere tekniske data for model 1.613

	min.	maks.
Løftehøjde sædelift		300 mm
Støjniveau		< 70 dB(A)
Kapslingsklasse		IP X4
Vendeplads	1150 mm	
Drevstyring	24 V / 70 A	24 V / 90 A
Fremdrifteffekt (6 / 10 km/t)	220 W	300 W
Hovedsikring		80 A
Belysning (ekstraudstyr)		LED-teknik 24 V
Nyttelast	- kg	10 kg
Akselbelastning foran	- kg	180 kg
Akselbelastning bagpå	- kg	140 kg
Frihøjde, motor		60 mm
Frihøjde, batteriplade		80 mm
Egenvægt (med batterier)	108 kg	125 kg
Egenvægt (uden batterier)	79 kg	
Total højde	960 mm	1080 mm
Sædepude tykkelse	60 mm	150 mm

Transportmål

Længde (inkl. støttehjul, uden benstøtter)	910 mm	- mm
Bredde (uden armlæn)	620 mm	620 mm
Højde uden armlæn	610 mm	680 mm

Klimatekniske oplysninger

Omgivelsestemperatur		-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur med batterier		-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur uden batterier		-40 °C til +65 °C

Yderligere tekniske data for model 1.613

	min.	maks.
<u>Styrehjul</u>		
230 x 70 mm (9")	beskyttet mod uheld / punkterfri	
<u>Drivhjul</u>		
356 x 75 mm (14")	beskyttet mod uheld / punkterfri	
<u>Batterier</u>		
2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie	
2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie	
Maks. batterimål (LxBxH)	260 x 174 x 205 mm	
Ladestrøm	8 A	12 A

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.615

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1080 mm	– mm
Total bredde	650 mm	800 mm
Totalmasse	– kg	280 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	– kg	160 kg
Den tungeste dels masse	4,5 kg	– kg
Faktisk sædedybde	400 mm	560 mm
Faktisk sædebredde	380 mm	650 mm
Længde sammenklappet	– mm	– mm
Bredde sammenklappet	– mm	– mm
Højde sammenklappet	– mm	– mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	460 mm	530 mm
Sædevinkel	-2°	26°
Ryglæsvinkel	-10°	50°
Rygstroppens højde	530 mm	570 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	350 mm	500 mm

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.615

	min.	maks.
Statisk stabilitet nedkørsel	-°	8,5°
Statisk stabilitet opkørsel	-°	8,5°
Statisk stabilitet sidelæns	-°	8,5°
Dynamisk stabilitet opkørsel	-°	8,5°
Vinkel benstøtter/sædeflade	110°	180°
Armlæns højde fra siddeflade	240 mm	350 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	330 mm	450 mm
Overvindelse af forhindringer	- mm	60 mm
Min. venderadius	840 mm	-
Tophastighed fremad (afhængigt af udstyr)	6 km/t	13 km/t
Korteste bremsevej fra tophastighed	1000 mm	3400 mm
Rækkevidde	25 km	40 km
Aksel, horisontalposition	- mm	- mm

Yderligere tekniske data for model 1.615

	min.	maks.
Støjniveau	< 70 dB(A)	
Kapslingsklasse	IP X4	
Vendeplads	1300 mm	
Drevstyring	24 V / 70 A	24 V / 120 A
Fremdrifteffekt (6 / 13 km/t)	220 W	300 W
Hovedsikring	80 A	
Belysning (ekstraudstyr)	LED-teknik 24 V	
Nyttelast	- kg	10 kg
Akselbelastning foran	- kg	140 kg
Akselbelastning bagpå	- kg	180 kg
Frihøjde, motor	60 mm	
Frihøjde, batteriplade	80 mm	
Egenvægt (med batterier)	111 kg	- kg

Yderligere tekniske data for model 1.615

	min.	maks.
Egenvægt (uden batterier)	65 kg	
Total højde	– mm	1130 mm
Sædepude tykkelse	60 mm	150 mm

Transportmål

Længde (inkl. støttehjul, uden benstøtter)	830 mm	– mm
Bredde (uden armlæn)	650 mm	650 mm
Højde uden armlæn	590 mm	660 mm

Klimatekniske oplysninger

Omgivelsestemperatur	-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur med batterier	-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur uden batterier	-40 °C til +65 °C

Styrehjul

260 x 70 mm (10")	beskyttet mod uheld / punkterfri
-------------------	----------------------------------

Drivhjul

380 x 75 mm (15")	beskyttet mod uheld / punkterfri
-------------------	----------------------------------

Batterier

2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie
2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie
Maks. batterimål (LxBxH)	260 x 174 x 205 mm
Ladestrøm	8 A 12 A

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.616

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	970 mm	– mm
Total bredde	580 mm	800 mm
Totalmasse	200 kg	280 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	– kg	75 kg
Den tungeste dels masse	1,6 kg	– kg
Faktisk sædedybde	300 mm	400 mm
Faktisk sædebredde	300 mm	440 mm
Længde sammenklappet	– mm	– mm
Bredde sammenklappet	– mm	– mm
Højde sammenklappet	– mm	– mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	420 mm	470 mm
Sædevinkel	0°	30°
Ryglænsvinkel	-10°	35°
Rygstroppens højde	390 mm	440 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	250 mm	350 mm
Statisk stabilitet neckørsel	–°	8,5°
Statisk stabilitet opkørsel	–°	8,5°
Statisk stabilitet sidelæns	–°	8,5°
Dynamisk stabilitet opkørsel	–°	8,5°
Vinkel benstøtter/sædeflade	110°	180°
Armlæns højde fra siddeflade	180 mm	250 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	300 mm	360 mm
Overvindelse af forhindringer	– mm	60 mm
Min. venderadius	840 mm	–
Tophastighed fremad (afhængigt af udstyr)	6 km/t	10 km/t
Korteste bremsevej fra tophastighed	1000 mm	2100 mm
Rækkevidde	25 km	40 km
Aksel, horisontalposition	– mm	– mm

Yderligere tekniske data for model 1.616

	min	maks
Støjniveau		< 70 dB(A)
Kapslingsklasse		IP X4
Vendeplads	1300 mm	
Drevstyring	24 V / 70 A	24 V / 90 A
Fremdrifteffekt (6 / 13 km/t)	180 W	300 W
Hovedsikring		80 A
Belysning (ekstraudstyr)		LED-teknik 24 V
Nyttelast	- kg	10 kg
Akselbelastning foran	- kg	90 kg
Akselbelastning bagpå	- kg	140 kg
Frihøjde, motor		50 mm
Frihøjde, batteriplade		80 mm
Egenvægt (med batterier)	108 kg	121 kg
Egenvægt (uden batterier)	65 kg	75 kg
Total højde	890 mm	925 mm
Sædepude tykkelse	-	30 mm

Transportmål

Længde (inkl. støttehjul, uden benstøtter)	790 mm	- mm
Bredde (uden armlæn)	580 mm	- mm
Højde uden armlæn	610 mm	660 mm

Klimatekniske oplysninger

Omgivelsestemperatur		-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur med batterier		-25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur uden batterier		-40 °C til +65 °C

Yderligere tekniske data for model 1.616

min

maks

Styrehjul

190 x 50 mm (8")	beskyttet mod uheld / punkterfri
230 x 70 mm (9")	beskyttet mod uheld / punkterfri

Drivhjul

320 x 60 mm (12,5")	beskyttet mod uheld / punkterfri
---------------------	----------------------------------

Batterier

2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie
2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)	lukkede, vedligeholdelsesfrie
Maks. batterimål (LxBxH)	260 x 174 x 205 mm
Ladestrøm	8 A 12 A

Symbolforklaring til vaskeanvisningerne

(symbolerne er i overensstemmelse med europæisk standard)



Finvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C



Normalvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C



Håndvask



Må ikke udsættes for blegemidler



Ikke egnet til tørretumbler



Må ikke stryges



Må ikke kemisk renses

Symbolforklaring til vaskeanvisningerne

(symbolerne er i overensstemmelse med europæisk standard)



Sædets dybde




till. brugervægt **uden** sædelift




till. brugervægt **med** sædelift

Forklaring til mærkaterne på elkørestolen

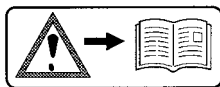

OBS!

Læs betjeningsvejledninger og vedlagt dokumentation.

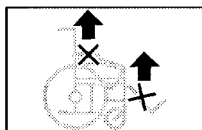

Løft ikke elkørestolen i armlæn eller benstøtte.
Kørestolen må ikke løftes i dele, der kan afmonteres.




Kørefunktion



Skubbefunktion



Skub kun kørestolen på plant underlag.

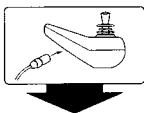

Oplysning om opladningsstik



Elkørestolen er **ikke** godkendt som sæde i et motorkøretøj.



Advarsel mod risiko for klemning. – Stik ikke hænder/arme ind imellem komponenterne



Anvendelse i kørende transportmidler. – Sluk eller skift til køreprogram 3.

Forklaring til symbolerne på typeskiltet



Producent



Bestillingsnummer



Serienummer




Produktionsdato



Till. brugervægt



Till. totalvægt

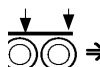

Till. akseltryk



Till. stigning



Till. fald

max. ... km/h

Till. maks. hastighed



Produktet er godkendt som sæde i bil.



Maks. tilladt brugervægt, når produktet er godkendt som sæde i et motorkøretøj.



Produktet er **ikke** godkendt som sæde i bil.



Medicinsk udstyr

KONTROLDOKUMENTATION

Køretøjets data:

Model:

Følgeseddel-nr.:

Serie-nr. (SN):

Anbefalet sikkerhedskontrol 1. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 2. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 3. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 4. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 5. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

ANSVAR/GARANTI

Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen samt uprofessionel udførelse af vedligeholdelsesarbejde og især af tekniske ændringer og udvidelser (påmonterede dele) uden vores samtykke medfører bortfald af såvel ansvars- og garantikrav som af almindeligt produktansvar.

For dette produkt påtager vi os det lovpligtige ansvar som en del af vores generelle forretningsbetingelser samt evt. øvrige udspecificerede/aftalte garantier. I forbindelse med krav om ansvar og garanti bedes du kontakte din forhandler medbringende følgende ANSVARS-/GARANTIKUPON samt de nødvendige oplysninger om model, følgesedel-nr. med leveringsdato og serienummer (SN).

Serienummeret (SN) kan aflæses på typeskiltet.

Anerkendelse af ansvars- og garantikrav forudsætter altid en korrekt anvendelse af produktet, anvendelse af originale reservedele fra forhandlere samt regelmæssig udførelse af vedligeholdelse og kontrol.

Garantien dækker ikke skader på overfladen, hjulenes slanger og dæk, beskadigelser som følge af løsnede skruer eller møtrikker, ødelagte fastgøringshuller som følge af hyppigt monteringsarbejde.

Garantien dækker heller ikke skader på drev og elektronik som følge af usagkyndig rengøring med dampstråleudstyr eller som

følge af, at komponenterne forsætligt eller uforsætligt er blevet udsat for vand.

Fejl på grund af strålingskilder som f.eks. mobiltelefoner med stor sendeeffekt, Hi-Fi-anlæg og andre kraftige støjkilder uden for normspecifikationerne kan ikke gøres gældende som ansvars- eller garantikrav.

Denne betjeningsvejledning skal som en integreret del af produktet medgives ved bruger- eller ejerskifte.

Evalueringen af vore produkter kan ske ved hjælp af vores < *Information center* > (information center) Område < *PMS* > på vores hjemmeside < www.meyra.com >.

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med fremskridt for øje.



Dette produkt stemmer overens med EF-direktiv 93/42/EØF og opfylder pr. 25.05.2021 kravene i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Ansvar- / garantikupon

Bedes udfyldt! Kan efter behov kopieres, og kopien sendes til forhandleren.

Ansvar/garanti

Modelbetegnelse:

Følgeseddel-nr.:

SN (se typeskiltet):

Leveringsdato:

Forhandlerens stempel:

Kontroldokumentation ved overdragelse

Køretøjets data:

Serie-nr. (SN):

Model:

Følgeseddel-nr.:

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Din forhandler

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf
TYSKLAND



Tlf. +49 5733 922 - 311

Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
