


VIGTIGT!

Tag madrassen ud af emballagen umiddelbart efter modtagelse, og læg madrassen på sengen.

Produktbeskrivelse

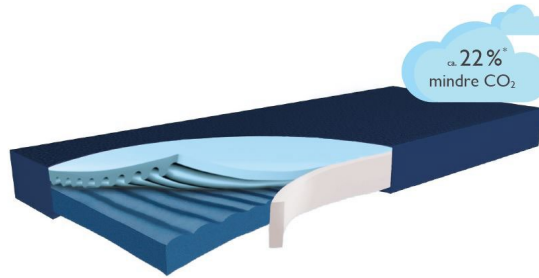

Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE miljøvenlige tryksårsmadrass, sårstadi 3 (EPUAP), har en 2-lags højelastisk skumkerne med skæringer både på langs og tværgående, og med faste sider, som giver bedre stabilitet - her med det specielle CLINIC betræk, der kan desinficeres og vaskes ved op til 95°.

GREENLINE madrasser er lavet af ECOLAST® skum. Sammenlignet med konventionelle decubitus-terapimadrasser (standardskummadrasser eller vekselryksmadrasser) har de mindre CO₂-udledning.

ECOLAST®-skum giver perfekt trykaflastning og en forbedret holdbarhed.

- Materiale: Pu-skum -ECOLAST®.
- Exceptionelt ventilationssystem sørger for et ideelt mikroklima.
- Udskifteligt brandhæmmende, ånd- og strækbart inkontinensbetræk i polyurethan med beskyttet lynlås. Betrækket har ultralyd svejsede syninger, hvilket minimerer risiko for bakterie gennemstrømning.
- Supersoft zone til lindring og aflastning af hoved og hæl.

Ved brug af senge med en længde på 220 cm skal den tilhørende madrasforlænger anvendes.

Indikation

Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE-madrassen, med ECOLAST® skum, er velegnet til både tryksårs-profylakse, tryksårsbehandling samt til smertebehandling.

Den bløde tryksårsafastende madras bidrager til forbedring af patienttilfredshed gennem gode ligge/sove komfortegenskaber og er velegnet til smertefølsomme patienter.

Funktion / Anvendelsesformål

Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE er et godt valg til middelrisikopatienter og et godt supplement til genoptræningsenge.

ECOLAST® skum er et specialudviklet hybridiskum. Sammenlignet med standardskum sikrer den mere åbne cellestruktur en forbedret luftcirkulation, hvilket giver patienten et optimalt mikroklima.

ECOLAST®-skum giver perfekt trykaflastning, og en høj vanddamppermeabilitet med åndbart, åbencellet ECOLAST® skum sikrer et behageligt soveklime.

Før ibrugtagning

- Kontrollér om sengen er egnet til brug af Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE-madrassen (er det den rigtige størrelse? etc.).
- Placér madrassen iflg. det påtrykte "DENNE SIDE OP".
- Madrassen er betrukket med inkontinensbetrækket ved levering.

VIGTIGT!

Kontrollér madrassen før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport af madrassen. En beskadiget eller defekt madras må ikke bruges.

Anvendelsesområde

Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE-madrassen er velegnet til brug på plejecentre, sygehuse, private sygehuse og klinikker.

Madrassen kan anvendes i enhver type seng – både faste og indstillelige. Sengen skal være stabil og have en jævn liggeflade, der matcher de ydre kanter af madrassen. Sengen må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige madrassen. Det er vigtigt, at sengerammen forhindrer, at Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE-madrassen kan glide ud af sengen. Den optimale trykaflastning opnås, når madrassen er plan. Madrassen må kun anvendes med det medfølgende betræk samt et lagen, der passer optimalt til madrassens mål, så der ikke opstår folder.

Hvis den tilhørende madrasforlænger skal anvendes, skal denne placeres i fodenden af sengen.

Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE er velegnet til patienter, der vejer op til 140 kg.

Anvendelsesrisici / kontraindikation

VIGTIGT! Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE og madrasforlænger må ikke anvendes til brugere, som har skumallergi.

Bruger/personale skal have den rette ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og for at vurdere eksisterende risici. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne for denne madras.

Undgå, at bruger ligger direkte på eksisterende sår.

Ved brug i en seng med sengehest, skal det kontrolleres og sikres, at der ingen risiko er for, at patienten kan komme i klemme/til skade eller falde ud. **Husk**, at der skal være en frihøjde på mindst 22 cm målt fra liggeflade på madras og til toppen af sengehestene.

Beskyt madras/madrassforlænger mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om begge er brandhæmmende.

Pleje og rengøring


Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE-madrassens skumkernen, uden inkontinensbetrækket, kan rengøres med almindeligt tilgængelige rengøringsmidler. Dette gøres ved at gennemvæde det forurenede område eller sprøjte hele skumkernen med et desinfektionsmiddel (f.eks. Bacillol eller ECOLAB skumspray Incidin OxyFoam S bestående af hydrogenperoxid). Derefter skal skumkernen lufttørres. Skumkernen kan autoklaveres ved 105° i henhold til RKIs retningslinjer. I hvert enkelt tilfælde er skumkernen dermed klar til brug igen. **BEMÆRK:** hvis synligt snavs ikke kan fjernes og/eller hvis der er synlige skader, skal skumkernen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

PU Inkontinensbetrækket kan rengøres enten ved at tørre med et kommercielt tilgængeligt desinfektionsmiddel fremstillet af isopropanol (f.eks. Bacillol) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB rengøringsklud Incidin OxyWipe S XL). Tørdesinfektion med klor (maks. 5000 ppm) er mulig. Efter desinficering aftørres med en fugtig klud (rent vand). Kemoterisk rengøring er mulig. Inkontinensbetrækket kan autoklaveres ved 105°. I hvert enkelt tilfælde er betrækket klar til brug igen. **BEMÆRK:** Hvis synligt snavs ikke kan fjernes og/eller der er synlige skader, skal betrækket bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Inkontinensbetrækket på både madras og madrasforlænger er aftageligt og kan åbnes ved hjælp af en skjult lynlås. Det kan vaskes i vaskemaskinen ved 95 ° C.

Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

Teknisk data

Materiale	Skumkerne: PU-skum - ECOLAST® Inkontinensbetræk: PU-belagt PES-bæremateriale
Tilladt brugervægt	0 - 140 kg
Enhedsvægt	Afhænger af størrelse
Medicinsk udstyr	Klassen 1, MDR 2017/745 CE
Teknisk sikkerhed	Brandhæmmende i henhold til DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
Test for toksikologisk uskadelighed / biokompatibilitet	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Garanti	5 år på skumkernens funktionelle egenskaber
QR-kode til HMI	 <p>QRickit</p> <p>Serie 73671 fra hmi-basen.dk</p>

Varenr.	HMI-nr.	Mål
GRHF+CL083200	132664	83 x 200 x 14 cm
GRHF+CL085200	132673	85 x 200 x 14 cm
GRHF+CL086196	132633	86 x 196 x 14 cm
GRHF+CL090190	132636	90 x 190 x 14 cm
GRHF+CL090200	132639	90 x 200 x 14 cm
GRHF+CL090210	132642	90 x 210 x 14 cm
GRHF+CL090220	132645	90 x 220 x 14 cm
GRHF+CL100200	132648	100 x 200 x 14 cm
GRHF+CL105196	132651	105 x 196 x 14 cm
GRHF+CL120200	132654	120 x 200 x 14 cm
GRHF+CL140200	132657	140 x 200 x 14 cm



Åndbart,
åben-cellet
ECOLAST®-skum



Autoklaverbar



Virus- og
bakterie-
bestandigt
betræk



Vandtæt, men
gennemtrænge-
lig for
vanddamp



Optimeret
tryklindring



Bi-elastisk betræk
til minimering af
forskydningskraft



Vedlige-
holdelsesfri



Brand-
Hæmmende
DIN 597 (I+II)
CRIB 5



Patientvægt:
- 140 kg