


**Self-standing support rail**  
Item No. 302090

**Montage- und Gebrauchsanleitung**  
**Montage- og brugervejledning**  
**User Manual**  
**Manuale d'uso e manutenzione**




Self-standing rail for toilet support  
White aluminium frame

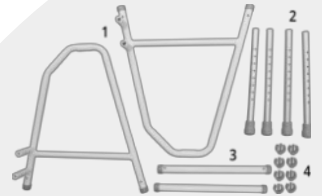

Self-standing rail is made of aluminium tubing and is corrosion resistant. No tools are required for assembly.



Self-standing rail for toilet support both sitting and standing aid.

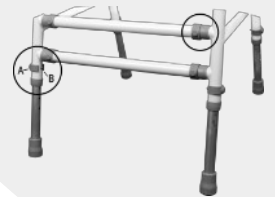

Self-standing rail is easily assembled  
Adjustable in 3 different widths  
Tested for 150 kg.



**Mobilex A/S**  
**Grønlandsvej 5**  
**DK-8660 Skanderborg**  
**www.mobilex.dk**

## 1. Indledning

Vi glæder os over, at du har købt et kvalitetsprodukt fra Mobilex. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt brug af produktet. Derfor bedes du læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i anvendelse. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så du opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

### Formålsbeskrivelse

Det Fritstående toiletstøtte er designet til personer, der har brug for støtte, når de sidder ned eller har brug for støtte for at komme op at stå, i forbindelse med toilettet besøg. Benene kan højdejusteres uden brug af værktøj.

### Indikationer

Det Fritstående toiletstøtte er designet til personer, der har brug for støtte, når de sidder ned eller har brug for støtte for at komme op at stå, i forbindelse med toilettet besøg. Den er fremstillet af aluminiumsrør og er korrosionsbestandig. Der kræves intet værktøj til montering.

### Kontraindikationer

Den Fritstående toiletstøtte er ikke egnet til patienter, der ikke kan opretholde deres kropsbalance, mens de sidder eller står. Den Fritstående toiletstøtte må ikke anvendes, hvis brugeren har problemer med opfattelsen. Kontraindikationer kan ikke relateres til et specifikt klinisk billede og afhænger af den individuelle vurdering af den potentielle brugers helbredstilstand. Valget af det ortopædiske hjælpemiddel, der passer til et bestemt sygdomsbillede, skal altid foretages med hjælp fra en speciallæge eller fysioterapeut.

Ved spørgsmål til produktet bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

<b>Mobilex A/S</b> Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark	Telefon: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 E-Mail: info@mobilex.dk
--	---

## 2. Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til Mobilex A/S.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Kontroller at alle 4 låseclips i benene sidder korrekt før ibrugtagning.

## 3. Beskrivelse

### Produktbeskrivelse

Den fritstående og højdejusterbare støtte er beregnet til personer, der har brug for støtte, når de sidder eller skal stå op, når de skal på toilettet.

### Leverede dele samt montagevejledning

Den fritstående og højdejusterbare støtte leveres pakket i en papkasse indeholdende:

- ✓ 2 håndtag i siden
- ✓ 4 ben
- ✓ 2 justerbare forreste stænger
- ✓ 8 klips
- ✓ Denne brugsanvisning



### Samling af fritstående og højdejusterbare støtte:

Den fritstående og højdejusterbare støtte leveres i en papkasse, hvori de nederste dele af benene er inkluderet separat. For at samle den fritstående og højdejusterbare støtte og gøre den klar til brug, skal du indsætte de 4 fodstøtter i de medfølgende siderør og fastgøre dem i den ønskede højde med de medfølgende clips, sørg for, at de 4 fodstøtter har samme højde (se illustrationen nedenfor). De to forreste stænger kan nu monteres med de medfølgende clips. Bredden af den fritstående og højdejusterbare støtte kan justeres til tre forskellige bredder ved hjælp af de medfølgende clips. Den fritstående og højdejusterbare støtte er lavet af korrosionsbestandig aluminium, og leveres som standard med et blødt

## Håndtering ved transport


Ved transport kan benene enten afmonteres eller placeres i højeste position for at reducere størrelsen.

## Samlevejledning

### Indstilling af den ønskede højde og bredde:

Den fritstående og højdejusterbare støtte er korrekt indstillet, når brugeren kan benytte støtten og have begge fødder er på gulvet.

Fjern **låseclips (A)** fra stolens ben eller ramme  
Juster det teleskopberbare ben/ramme til den ønskede højde og bredde  
Indsæt **låseclips (A)** i benets dertilgørende **låsehul (B)**  
Gentag 1-3 for de øvrige 3 ben

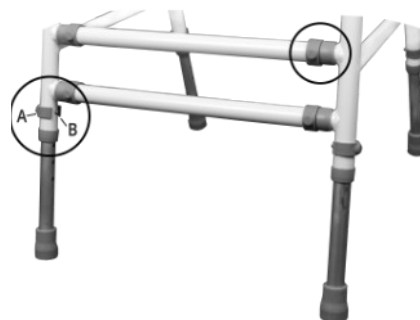

**Vigtigt:** Indstil ikke sæde-højden/bredden mens brugeren anvender produktet og sørg altid for at alle 4 ben er ens indstillet i samme højde og låseclips er korrekt monteret. Benene er monteret med skridsikre dupsko

## Tilbehør

Der er ingen tilbehør til dette produkt.

## 4. Tekniske data

Fritstående og højdejusterbare støtte	302090
Dimension (BxDxH) (mm)	468/493/518 x 532-615 x 616-786
Bredde ml. håndtag (mm)	416/441/466
Udvendig bredde (mm)	468/493/518
Håndtagshøjde (mm)	616-786
Vægt (kg)	1.88
Max. Belastning (kg)	150

## Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af Badebænken og oplyser bl.a. max. brugervægt.

Billede af typeskiltet Badebænk 302090

	QR-code link til hjemmesiden		Produktionsdato
	Producent		Max belastning
	Se brugervejledningen		Max bredde
	Til indendørs/udendørs brug		serienr.
	CE mærket produkt		Yarenr.
	Max belastning kurv		Medicinsk udstyr
	Kun til indendørs brug		

Oversigt ikon betydning

## 5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand. Kan rengøres med rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85% (v/v) samt klorprodukt med indhold svarende til min. 1000 ppm. Tåler maskinvask og lufttørring efter Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i henh. hjemmepleje og i plejeboliger. Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men bør regelmæssigt gennemgå en kontrol, der kan foretages af en sagkyndig. Ved en sådan kontrol anbefaler vi at følgende kontrolleres og udføres:

- ✓ Rengøring og desinficering af produktet
- ✓ Ramme/produkt tjekkes for skævheder og tegn på brud
- ✓ Sliddele kontrolleres og skiftes hvis nødvendigt

**Anbefalet levetid:** Normalt 10 år afhængigt af brugen.

### Opbevaring

Vi anbefaler opbevaring på et tørt sted.

### Genanvendelse

Produktet er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse, hvor en ny bruger skal overtage produktet, skal produktet være kontrolleret i henhold til pkt. 5.

## 6. Generel problemafhjælpning

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Den fritstående og højdejusterbare støtte er ustabil	Benene er indstillet i forskellige højder	Kontroller at alle 4 ben er sikret med splitter og er indstillet til samme højde

## 7. Bortskaffelse af produktet

Produktet kan ikke bortskaffes med almindeligt affald men skal afleveres på en lokal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal du straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.