

## ROBUST BRUDESTOL

Artikelnummer: 142140, 142143

**Anvendelse:** Den robuste brusestol er beregnet til at sidde på, når man tager brusebad. Stolen har en stabil, sammensvejet konstruktion af ekstra dimensionerede rør, der kan bære tunge brugere. Sædet består af ribber i polyuretan, hvilket gør det yderst stabilt. Ryglænet er tilgængeligt som tilbehør og kan bestilles separat hos Swereco.



142140

142140 +142143

### Sikkerhedsanvisninger:

- Dette produkt må kun anvendes til det formål, det er beregnet til.
- Stolen er ikke beregnet til brug i badekar.
- Stolen skal placeres på en plan overflade, hvor alle stolens fire ben står solidt på gulvet.
- Stolen må ikke være vinklet i en sådan stilling, at den kun står på to ben, når patienten sidder på den. Den maksimale brugervægt er udregnet med alle fire ben på gulvet.
- Stolen må ikke flyttes, mens brugeren sidder på den.
- Stolens ben kan skæres over af autoriseret personale (hjælpeteknikere på hjælpemiddel teknologiscentre) uden at ændre stolens egenskaber. Stolens ben kan skæres til, så stolen er flad fra sædehøjde 55 cm ned til 45 cm.
- Gummisspidserne bør kontrolleres regelmæssigt. Beskadigede eller slidte gummisspidser kan medføre et svækket greb og skal udskiftes. De kan bestilles hos Swereco.
- Hvis stolen er indstillet i en let fremadbøjet stilling, må den maksimale højdeforskel mellem de forreste og bageste ben højst være 2,5 cm, hvilket svarer til et trin på højdejusteringen.
- Når du bruger et ryglæn, skal du sørge for, at ryglænet er monteret som anvist.

### Symboler: Forklaring af symbolerne på produktet og i brugsanvisningen.



Maks. 300 kg

Maksimal brugervægt



Kan vaskes med alkalisk sæbeopløsning, pH 5-9



Vaskes ved højst 85 °C i 3 minutter.



Visuel kontrol



Produktet overholder EU-direktiv MDR 2017/745 og 2007/47/EG for medicinsk udstyr



### Teknisk specifikation

Sædets dybde x bredde: 45 x 55 cm  
Bredde mellem armlæn: 60 cm  
Samlet bredde (ydre mål): 66 cm  
Vægt: 11,4 kg  
Sædets højde: 55 cm  
Materiale: Stålrør, polyuretan (sæde), TPE (gummisspidser)  
Maksimal brugervægt: 300 kg

Fremstillet af:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

SVERIGE

Tlf.: +46 (0)8 5000 5240

[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

## Anvisninger for vedligeholdelse:

Rengør regelmæssigt og når det er nødvendigt (mindst én gang om ugen) med en sæbeopløsning med en pH-værdi på 5-9.

Når der skiftes til en ny bruger, skal produktet desinficeres og derefter autoklaveres ved højst 85° i 3 minutter. Alternativt kan du tørre det af med 70 % isopropanol.

**Genbrug:** Når produktet er brugt, skal det genanvendes som metalkrot og plastaffald. Emballagen består af bølgepap, og skal genbruges i overensstemmelse hermed.

## Reserve dele:

Art. nr. 120702, gummisspids, robust

## Tilbehør:

Art. nr. 142143, Ryglæn til robust brusestol

Følg nedenstående vejledning for at fastmontere ryglænet. Tegningerne er vist i en vinkel under stolen.

