

Remote Microphone Plus



Parring

Remote Microphone + skal parres med dine høreapparater for at fungere korrekt. Du skal kun lave parringen første gang du skal bruge Remote Microphone +.

- 1 Sluk for alle enheder der tidligere har været parret med dine høreapparater
- 2 Tænd for Remote Microphone +
- 3 Sluk dine høreapparater og tænd dem igen.
- 4 Placer dine Høreapparater max 15 cm fra Remote Microphone+
- 5 Hold knapperne "Input Mode" og "Volumen op" inde samtidig i 7 sekunder, indtil LED-lampen blinker rød og blå.
- 6 Et grønt lys vil blinke for hvert høreapparat, hvis parringen er succesfuld.




Parring af Remote Microphone Plus og Bluetooth enhed

- 1 Sluk for alle enheder der tidligere har været parret med dine høreapparater
- 2 Tænd for Remote Microphone +
- 3 Hold knapperne "Input Mode" og "Volumen ned" inde samtidig i 7 sekunder, indtil LED-lampen blinker rød og blå.
- 4 Sæt Bluetooth®-enheden i parringstilstand.
- 5 Når Remote Microphone Plus vises på din enhed skal du vælge den.
- 6 Remote Microphone Plus LED-lys blinker grøn to gange hvis parringen er succesfuld.



Brug

- Tryk på Multi-funktionsknappen i to sekunder for at tænde eller slukke Remote Microphone Plus.
- Remote Microphone Plus kan bæres om halsen eller klipses i dit tøj.
- Remote Microphone Plus har en rækkevidde på 10 m.
- Remote Microphone Plus kan streame i op til 10 timer på en opladning.
- Remote Microphone Plus kan lades helt op på 3 timer.
- LED-lyset blinker rødt og du vil høre en indikator i høreapparatet hver 5. minut hvis batteriet er tæt på at være afladet.
- Remote Microphone Plus mutes automatisk hvis den bliver tabt, og tænder igen når den er stabiliseret.
- For at justere volumen bruges + og knapperne på Remote Microphone Plus. Volumen kan også justeres på høreapparaterne, i appen eller på fjernbetjeningen (hvis du har valgt at have en).
- Når den bruges som fjernmikrofon bør eller til opkald bør Remote Microphone Plus være max 20 cm fra talerens mund. Remote Microphone Plus bør bæres vertikalt for bedste performance. Se billedet herunder.

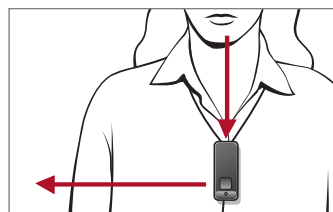

Input Mode


- 1 Tryk på Input Mode for at vælge næste tilgængelige lydkilde. Når du skifter tilstand, vil the FM System og Line-In kun være tilgængelige hvis de er forbundet til Remote Microphone Plus.
Hvis Input Mode LED er slukket skal du trykke på
- 2 Input Mode-knappen for at få LED'en til at lyse kortvarigt
- 3 Når Remote Microphone Plus slukkes, vil den automatisk huske hvilken tilstand den blev brugt i sidst.



Lydkilder

Fjernmikrofon:

- Tænd Remote Microphone Plus vælg mikrofonsymbolet med Input Mode-knappen
- Streamingen starter automatisk i dine høreapparater.
- Remote Microphone Plus kan bæres af taleren eller stilles på et bord

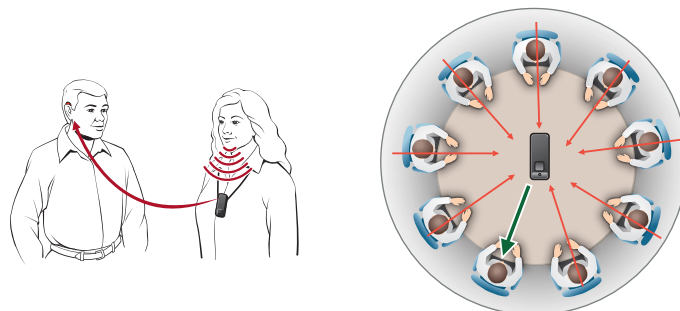

Input Mode (Fortsat)


📶 Streaming af opkald

- Tænd Remote Microphone Plus og vælg Bluetooth-symbolet med Input Mode-knappen. LED'en skal lyse blå
- Tryk på Multifunktions-knappen for at besvare et indkommende opkald.
- For aet udgående opkald ringer du op som normalt. Streaming starter automatisk.
- Tryk på multifunktionsknappen for at afbryde et opkald
- Efter opkaldet vender Remote Microphone Plus automatisk retur til sin forrige tilstand.
- For at afvise et opkald skal du holde Multifunktionsknappen inde i mere end 2 sekunder.




📶 Anden Audio Streaming

- Tænd Remote Microphone Plus
- Vælg Bluetooth. LED'en lyser blå når der er forbindelse til en Bluetooth-enhed
- Start musik eller anden audio på din enhed, og streamingen starter automatisk i dine høreapparater.

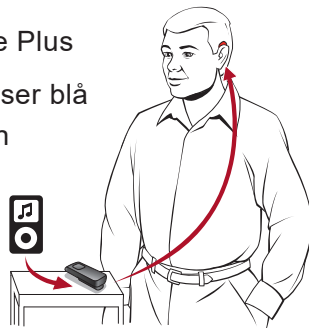

T Tele System

Remote Microphone Plus modtage lyd via en indbygget telespole hvis der er et signal fra en teleslynge. Bær Remote Microphone Plus vertikalt for den bedste performance

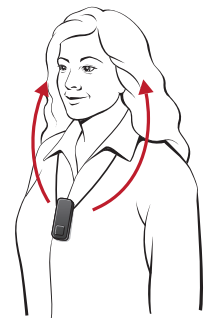


For at streame lyd fra et tele-system

- Tænd Remote Microphone Plus og vælg T.
- Streamingen starter automatisk i dine høreapparater.

FM System

- Sæt FM-senderen i stikket.
- Tænd Remote Microphone Plus og vælg FM system.
- Streamingen starter automatisk i dine høreapparater.

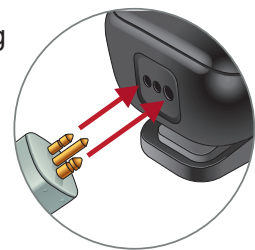

🎵 Line-In

Når et kabel er sluttet til via microUSB-stikket, kan Remote Microphone Plus modtage lyd fra en enhed der ikke bruger Bluetooth.

For at streame Line-In audio:

- Sæt kablet i microUSB-stikket
- Tænd Remote Microphone Plus vælg Line-In.
- Start musik eller anden lyd på din enhed. Streamingen starter automatisk i dine høreapparater.

