







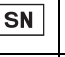







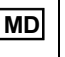


1. Grundlæggende instruktioner

Produktet skal anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning, og den skal opbevares et sikkert sted for eventuelle forespørgsler. Den indeholder vigtige oplysninger, som er nødvendige for den tilsigtede anvendelse. Dette hjælper med at undgå skader eller farer som følge af forkert brug.

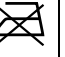Hvis der skulle opstå en alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal dette straks indberettes til SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG og den ansvarlige myndighed.

2. Forklaring af symboler

	Producent		Fremstillingsdato		Medicinsk udstyr
	Overensstemmelsesmærkning i henhold til den europæiske forordning om medicinsk udstyr 2017/745 (MDR)		Opmærksomhed Overhold de advarsler og sikkerhedsinstruktioner, der er anført i dette dokument.		Følg brugsanvisningen.
	Bemærk skilt/advarsel		Artikel nummer		Serienummer
	Kan vaskes ved op til 60 °C.		Kan ikke vaskes.		Må ikke stryges.
	Må ikke tørretumbles.		Tør i tørretumbler på skånsomt program.		Må ikke renses.
	Må ikke behandles med blegemiddel.		Egnet til tørre desinfektion.		

3. Produktbeskrivelse

SHP-puden til lateral positionering er en rørformet pude i kropslængde i en let S-form, der støtter hele kroppen og placerer den i en stabil position, især når patienten ligger på siden. Pudefyldet består af 100 % polystyrenkugler med små granuleringer, som tilpasser sig kroppens konturer på grund af deres forskydelighed i pudebetrækket. De er fast syet ind i et betræk af bi-elastisk polyamidstof (45 %) med en antibakteriel polyurethanbelægning (55 %). Pudebetrækket er uigennemtrængeligt for væsker, vaskbart, kan tørres af og er modstandsdygtigt over for blod og urin.

Se:



4. Formål

SHP-puden til lateral positionering tjener som en statisk positioneringshjælp for krop, krop og ekstremiteter til både decubitusprofylakse og decubitusbehandlingsstøtte.

4.1 Virkning



Den fungerer efter princippet om blød positionering eller fri positionering og understøtter gennemførelsen af specifikke positioneringsformer og positionering af særligt truede kropsdele eller kropsregioner.

Når puden bruges, flytter polystyrenkuglerne sig i betrækket på grund af trykbelastningen og tilpasser sig således brugerens anatomiske kropskonturer. Den punktelastiske formning understøttes af strækbarheden i pudebetrækkets materiale, hvorved kontaktfladen udvides i de områder, hvor der er risiko for decubitus, hvilket fører til en trykreduktion og trykomfordeling. Dette reducerer risikoen for udvikling af tryksår eller støtter effektivt behandlingen af et eksisterende tryksår.

Puden placeres direkte på de kropsdele, der skal støttes, og den kan bringes i sin endelige position ved hjælp af træk for at opnå positive virkninger på kropsopfattelsen.

4.2 Angivelse

Produktet er beregnet til patienter,

- hvor regelmæssige stillingsskift er påkrævet for at aflaste områder, der er udsat for tryksår, med mellemrum
- hvor permanent liggende stilling er påkrævet
- som har en øget risiko for tryksår, når de ligger ned
- For hvem der er behov for støtte til behandling

4.3 Anvendelsesområde

Påtænkte brugere

De tiltænkte brugere er alle medlemmer af læge- og sundhedsfaglige erhverv og af sundhedssektoren samt lægfolk, hvis de har den nødvendige uddannelse eller viden og erfaring til brug af produktet *eller* er blevet instrueret i håndteringen af produktet.

Patientgruppe

SHP-støttepuden er beregnet til personer, der på grund af sygdom, handicap eller alder skal ligge på ryggen i længere tid, som er i risiko for at udvikle tryksår eller for hvem støtte til behandling af tryksår er indiceret .

Der er ingen begrænsninger med hensyn til alder eller køn.

Brugermiljø

SHP-støttepuden til sidestøtte er velegnet til brug på hospitaler, plejehjem og plejehjem samt i hjemmet indendørs og kan anvendes i alle typer senge eller liggemøbler med en flad eller justerbar liggeflade.

5. Sikkerhedsinstruktioner




- Forordningen om operatører af medicinsk udstyr (MPBetreibV) er bindende for operatøren/brugeren af medicinsk udstyr. Brugeren skal have den fornødne ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og vurdere de eksisterende risici.
- Hvis SHP-sidestøttepuden anvendes i medicinske senge med sideskinner, skal det forhindres, at puden sætter sig fast i sideskinnerne for at undgå, at sideskinnerne mister deres funktion og dermed udgør en fare for patienten.
- Beskyt produktet mod åben ild (f.eks. cigaretbrænder, stearinlys) eller stærke varmekilder (f.eks. elektriske varmeapparater, gasovne). Der er risiko for brand !
- Sørg for, at der ikke er skarpe hjørner eller kanter i anvendelsesområdet, som kan beskadige puden.
- Direkte påføring på støttepuden er kontraindiceret hos patienter/beboere, der sveder meget og har tendens til maceration eller intolerance over for polyurethanbelagte tekstiler.

i I dette tilfælde anbefaler vi, at der anvendes et tekstilbetræk som supplement. Dette betræk med integreret flammebeskyttelse kombinerer inkontinensbeskyttelse med en hudvenlig tekstiloverflade og er ikke inkluderet i leveringsomfanget.

6. Anvendelse af produktet

- Hovedanvendelsen er 30° sidelæns positionering af patienter/beboere, hvor puden placeres direkte under de områder af skulder, ryg og bækken, der skal støttes, samt i området af de nedre ekstremiteter mellem benene. Dette medfører en fysiologisk benstilling, forhindrer knæene i at ligge oven på hinanden, giver mulighed for både styring og blød positionering af hele underbenet og fri positionering af den overliggende hæl.
- SHP-puden til lateral positionering kan også anvendes til 135° lateral positionering, hvor patienten lægges på maven på puden og dermed støttes i bryst- og maveområdet. Det ene ben bøjes let og placeres helt på puden for at opnå en stabil stilling.

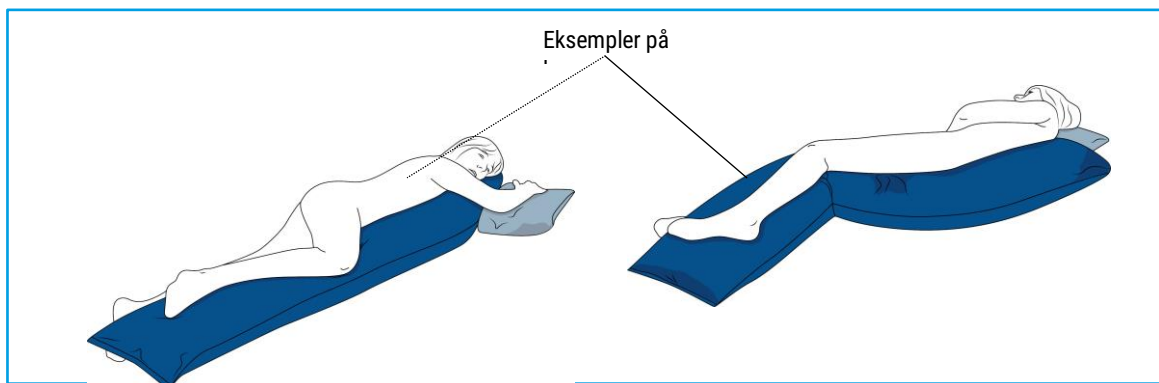


7. Pleje og rengøring

- I tilfælde af forurening kan puden rengøres med varmt sæbevand og desinficeres af brugeren selv. Desinfektion ved hjælp af tørre- eller spraydesinfektion bør kun foretages med klorfrie midler. Brugsanvisningen for de anvendte rengørings- og desinfektionsmidler skal overholdes.
- Det ekstra tekstilbetræk kan vaskes i en vaskemaskine ved 60 °C til maks. 95 °C med almindelige husholdningsvaskemidler og kan tørres i tørretumbler ved lav temperatur.
- Produktet leveres i brugsklar stand og er vedligeholdelsesfrit.
- Det anbefales ikke at genbehandle produktet og genbruge det på en anden patient i hjemmet.
- På det stationære område kan det efter valideret oparbejdning genbruges i tilfælde af patientskift i overensstemmelse med de gældende lovkraft for det pågældende hospital.

8. Transport og opbevaring

SHP-sidestøttepuden må kun opbevares på et rent og tørt sted.


 Når puden ikke er i brug, må du ikke placere tunge eller skarptskårne genstande på produktet, når det ikke er i brug.

9. Bortskaffelse

I princippet kan det uskadelige produkt bortskaffes med husholdningsaffaldet.

- Hvis der er mulighed for, at produktet kan være potentielt smittefarligt forurenet, skal det desinficeres under overholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne og først derefter bortskaffes. I det stationære område skal produktet bortskaffes under overholdelse af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med de gældende forskriftsmæssige krav for det pågældende anlæg.

10. Tekniske data


HMV nej.	11.11.05.2002
Påfyldning	100 % polystyrenkugler med små granulater
Ydre skal	bi-elastisk polyamidstof (45 %) med antibakteriel polyurethanbelægning (55 %)
Standard for brandbeskyttelse	Flammehæmmende - DIN EN ISO 12952 del 1+2
Pleje/rengøring	

11. Varianter

Artikel nummer	Mål	Størrelse	Farve	Vægt (± 5 %)	UDI-DI
P43799	142 x 26 cm	S	orange	0,78 kg	4056538005174
P43800	180 x 31 cm	M	blå	1,63 kg	4056538005181

12. Ekstra pudebetræk

- Valgfrit tilgængelig

Navn	Tekstilbetræk blå til sidestøttepude	
Artikel nummer	B43824	B43823
Størrelse	142 x 26 cm	180 x 31 cm
UDI-DI	4056538006447	4056538006430
Sammensætning	Materiale af lyocell- og modal fibre med polyurethanbelægning	
Flammehæmmende egenskaber	permanent flammehæmmende	
Pleje		

Der tages forbehold for eventuelle fejl og stavfejl. Oversættelsen er foretaget af producenten, og er uden ansvar for CarePartner.

Forhandler:


CarePartner
 - din partner til et bedre liv

Lindevej 2, DK-4200 Slagelse
 Tel.: +45 58 55 10 99
 www.carepartner.dk

