

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret i
Europa

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

38_20230612_DK

Master Comfort Sleep

Den perfekte sovemakker



Master Comfort Sleep



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 21

The Original Nordic
Human Handling Concept



-
-

Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 001-8085	136598	Master Comfort Sleep	5744001974650
MC 001-8086	136637	Master Comfort Sleep - Cover	5744001974667

Developed &
Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet bruges til understøttelse og aflastning af væv ved lejrning. Formålet er at give en stabil afgrænset positionering/- lejrning i forbindelse med forflytning eller langtidspositionering. Kiler med nonslip kan benyttes direkte på glatte flader.

Anvendelse af produktet:

Lejringspuden kan placeres mellem bruger og underlaget for at øge understøttelsesfladen og dermed fordele trykpåvirkningen på vævet. Cover kan monteres hvis der ønskes et andet materiale mod kroppen.

Advarsel:

Brug af lejringsmateriale kan ikke erstatte behovet for omlejrning og tilsyn med hud og væv.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for

den aktuelle bruger således, at forflytning og brug af hjælpemidlet foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger til brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet rengøres/vaskes.

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig vævsaflastning bør kasseres. Giver produktet ikke tilstrækkelig vævsaflastning bør andre løsninger afprøves. Produkter bør efterses jævnligt og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes eller hvis skummet ikke længere yder aflastning, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produkt-skader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Comfort Sleep

Placering af Master Comfort Sleep:



1. Master Comfort Sleep giver en stabil lejring og kan placeres foran overkroppen til støtte af hoved, forsiden af overkroppen og øverste ben.



2. Placeres Master Comfort Sleep bag bruger, støttes hoved, ryg/overkrop samt øverste ben.



3. Underdelen af Master Comfort Sleep kan modulleres, så enten øverste ben støttes eller Sleep ligger mellem benene for at lave trykaf-lasning.

Lejring i siddende:



4. Master Comfort Sleep kan placeres rundet om kroppen for at give øget stabilitet og kropsaf-grænsning.



5. Placer midten af Master Comfort Sleep under hovedet. Lad sengehestene være oppe for at holde på Krøyerkuglerne.



6. Placer og tilpas henholdsvis højre og venstre side (af Master Comfort Sleep) langs kroppen. Tilpas kuglerne, så de understøtter underarme og hænder. Tilpas kuglerne, så de understøtter underarme og hænder.

Betræk og indhold:



7. Standardbetrækket er vores lækre, hvide inkontinensstof, som er strækbart og har en lang holdbarhed. Det kan både tørres over med en fugtig klud og afsprittes.



8. Der kan tilkøbes et lækket bomuldsbetræk, så Master Comfort Sleep bliver ekstra blød og behagelig at ligge op ad.



9. Master Comfort Sleep indeholder ægte krøyerkugler, som fordeler sig stabilt mod kroppen og giver både omverden samt en god vægtfordeling mod vævet.

Brugervejledning - Master Comfort Sleep

Tekniske specifikationer

Materialer:

Yderside: Flammehæmmende, elastisk og vandtæt polyester.

Ekstra Cover: Bomuld, elastan.

Indhold: Originale, flammehæmmende Krøyerkugler.

ISO klassificering:

DS/EN ISO 12952-1:2010

Textiler - Vurdering af sengeudstørs antændelighed - Del 1: Antændelseskilde: glødende cigaret.

DS/EN ISO 12952-2:2010

Tekstiler - Vurdering af sengeudstørs antændelighed - Del 2: Antændelseskilde: tændstikflamme.

Varenummer - Navn:

MC 001-8085 Master Comfort Sleep

MC 001-8085 Master Comfort Sleep - Cover

Størrelse:

L 200 x B 50 cm

L 200 x B 50 cm

Max. Brugervægt:

200 kg

200 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Brug af lejringsmateriale kan ikke erstatte behovet for omlejring og tilsyn med hud og væv.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produktene er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 200 kg.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C, men aftørring med sprit/alkohol anbefales for at forlænge holdbarheden. Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C. Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Fortag jævnlig visuel inspektion og tjek at inkontinensoverfladen stadig er intakt ift. brug, og at alle syninger er intakte.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

