



Brugermanual

# CompressionAid®

BRUGERMANUAL – Compressionaid® – DK VERSION 1.0

Danrehab A/S

## 1. VEJLEDNING



Figur 1:  
Placer en hånd i knæhasen og en omkring foden



Figur 2:  
Benet bøjes ca. 90 gr. ved let glidende bevægelse af foden



Figur 3:  
Rullepladen føres ind under benet



Figur 4:  
Den højeste rulle skal være placeret under knæhasen



Figur 5:  
Strømpen påført Doff N' Donner placeres ved borgerens fod



Figur 6:  
Strømpen rulles stille og roligt op ad



Figur 7:  
Strømpen føres let hen over rullerne, bemærk kan gøres uden at løfte borgerens ben



Figur 8:  
Doff N' Donner rulles af borgerens ben, uden at løfte benet



Figur 9:  
Benet bøjes igen op til ca. 90 gr.



Figur 10:  
Rullepladen trækkes forsigtigt ud