

Zleep by ZiboCare[®]

Professionel tyngdedyne

Brugervejledning

ZLEEP - TYNDEDYNE

Zleep tyngdedynen er nyudviklede kvalitetsprodukter fra ZiboCare. De er udviklet med baggrund i vores mange års erfaring inden for sundhedssektoren og sansestimulerende hjælpemidler, og i tæt samarbejde med både brugere og sundhedspersonale.



Læs altid hele brugsanvisningen inden brug

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER OG KONTRAINDIKATIONER

Læs alle instruktioner inden brug.



Zleep tyngdedynen må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne vejledning.



Psykisk handicappede og brugere, der ikke kan tage vare på sig selv eller kommunikere deres oplevelser med Zleep tyngdedynen, må kun anvende Zleep tyngdedynen under opsyn.



Zleep tyngdedynen er ikke egnet til voksne eller børn, som ikke er i stand til selv at tage Zleep tyngdedynen eller plaiden af uden besvær.



I tilfælde af nedsat lungekapacitet eller hjerteproblemer: Konsulter relevant sundhedsfagligt personale før brug af Zleep dynen.



I tilfælde af kirurgiske implantater, osteoporose: Konsulter relevant sundhedsfagligt personale før brug af Zleep dynen.



Zleep tyngdedynen må ikke anvendes i nærheden af eller i forbindelse med brandkilder/varme overflader som f.eks. ild, brændende cigaretter eller varme lamper. Det frarådes at ryge ved brug af Zleep tyngdedynen.



Ved anvendelse af hygiejnebetækkelse, vær opmærksom på kvælningsrisiko.



Zleep tyngdedynen kan udgøre en faldfare, hvis den ligger på gulvet.



Zleep tyngdedynen er uegnet til børn under 3 år eller suicidale patienter uden opsyn.

Sådan virker Zleep by ZiboCare®

Formål og anvendelse

Zleep by ZiboCare® er en tyngdedyne, som er tiltænkt som en hjælp ved mange forskellige behov, primært for at skabe ro og velvære og derigennem kan være en hjælp til at falde i søvn, modvirke afbrudt søvn og forbedre søvnkvaliteten.

Zleep by ZiboCare® kan hjælpe med at reducere uro, tankemylder og utryghed. Tyngden og trykket af Zleep by ZiboCare® samler og beroliger kroppen. Dette sker, fordi hormonet oxytocin frigives og sender signaler til hjernen om, at man roligt kan "geare ned", finde ro og lade op.

Zleep by ZiboCare® kan enten bruges i sengen i forbindelse med den primære nattesøvn, eller i dagtimerne på en sofa, en briks eller i en god stol, når der er et behov for at finde ro, velvære og slappe af. Der benyttes et almindeligt dynebetræk til Zleep by ZiboCare®.

Eksempler



Generelle oplysninger

Opbevaring

Zleep by ZiboCare® skal altid opbevares tørt. Sørg for, at Zleep by ZiboCare® ikke ligger på gulvet, hvor man risikerer at snuble i den.

Mærkning

Zleep by ZiboCare® er mærket i henhold til EU-lovgivningen for medicinsk udstyr klasse 1, herunder med bl.a. produktnavn, produktionsdato, varenummer, størrelse/vægt og CE-mærkning.

Etiketten med relevant information, herunder vaskeanvisning, er syet i dynens nederste kant, så informationen altid er let tilgængelig, og så etiketten ikke generer brugeren ved anvendelse.

Levetid

Produktet har en forventet levetid på 5 år baseret på korrekt brug, håndtering, vask og opbevaring som beskrevet i brugsanvisningen. Levetiden kan blive forkortet ved hyppig vask. Det er brugerens ansvar løbende at vurdere, om produktet kan anvendes ud over den anførte levetid.

Service og vedligehold

Zleep by ZiboCare® kræver ingen service eller vedligehold ud over som anført i rengøring, vedligehold og vask.

DK – BRUGSANVISNING

Genanvendelse og bortskaffelse

Vi tænker på miljøet og arbejder ud fra FN's verdensmål.

Ved bortskaffelse kan dynen opdeles i følgende enkeltdele, som kan genanvendes:

- Plast og glas
- Stof

Affald sorteres og bortskaffes efter lokale regler.

Returnering og reklamationer

Ved eventuel returnering eller reklamation tages kontakt til der, hvor dynen er købt. Her vil de hjælpe med den videre håndtering af sagen iht. gældende forretningsbetingelser.

Rengøring, vedligehold og vask














- Behov og interval for vask afhænger af brug og anvendelse.
- Det anbefales, at tyngdedynen rystes og luftes regelmæssigt.
- Tyngdedynen tåler ikke at blive banket og støvsuget.
- Kontroller altid før vask, at Zleep by ZiboCare® er intakt, og at der ikke er skade eller brud på stof eller syninger.
- Se forklaring til vaskesymboler under afsnittet Symbolforklaring.
- Tjek altid vaskemaskinens anvisninger herunder vægtbegrænsning før vask.

Vaskeanvisning

- Kan maskinvaskes ved 60°C. Tåler industrivaks. Levetiden kan forlænges ved brug af skåneprogram
- Kan tørretumbles ved 80°C.
- Kan tåle blegning - klorin
- Kan tåle behandling med op til en PH værdi på 9,5
- Tjek altid din vaskemaskines kapacitet før vask.
- Skal rystes og luftes regelmæssigt, undgå at banke og støvsuge.




Symbolforklaring

-  Advarsel, se under *Vigtige sikkerhedsregler*
-  Fabrikant
-  Produktionsdato som anført på dynens etiket
-  Lotnr.
-  Medicinsk udstyr
-  Se brugsanvisning
-  CE - Class 1, MDR 2017/745
Produktet er CE-mærket
-  Reference nummer
-  Serie nummer
-  Max. vasketemperatur 60° C
-  Må tørretumbles ved max 80° C
-  Må bleges - kloidn
-  Sansestimulerende

Tekniske specifikationer

- Fyld:** 95% glasperler
5% polyester
- Bolster:** 100% bomuld OekoTex
Standard 100
- Standarder:** Efterlever gældende EU-krav:
EUROPAPARLAMENTETS OG
RÅDETS FORORDNING (EU)
2017/745 af 5. april 2017 om
medicinsk udstyr.


Kontaktinformation

-  ZiboCare Denmark ApS
Præstemarksvej 67, DK 8700 Horsens
www.zibocaredenmark.com

Bemærk:

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Varianter

Størrelse	140 x 200 cm	140 x 200 cm	140 x 200 cm	140 x 200 cm
Vægt	5 kg	7 kg	9 kg	11 kg
Fyldvægt	4272 g	6272 g	8272 g	10272 g
 REF	8098863	8098864	8098865	8098866
Kantbånd				







ZiboCare Denmark ApS
Præstemarksvej 67
8700 Horsens
Denmark
www.zibocaredenmark.dk

Ver.: 1.00
11.2023



ZiboCare[®]
Denmark