


Hyper Foam PLUS *clinic* GREENLINE

Brugsanvisning

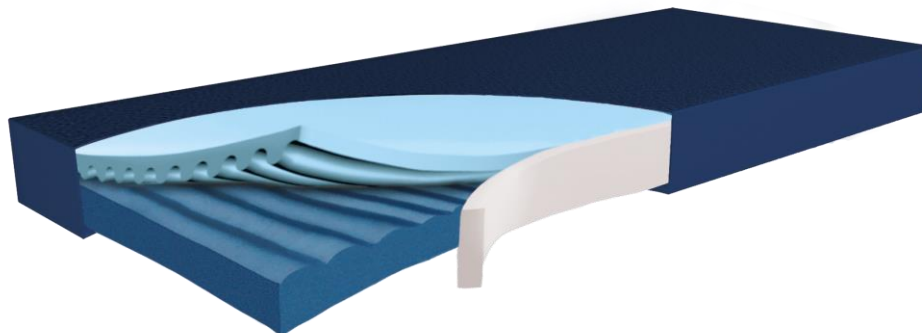

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager madrassen i brug, og overhold **advarslerne!**

Model	Mål	HMI-nr.	Varenr.	Produktvægt	Patientvægt
Hyper Foam PLUS clinic GREENLINE	85 x 200 x 14 cm	132673	998001	8 kg	0-140 kg
Hyper Foam PLUS clinic GREENLINE	90 x 200 x 14 cm	132639	998005	8 kg	0-140 kg

Tiltænkt anvendelse

Hyper Foam PLUS clinic GREENLINE er velegnet til brug i private hjem, plejecentre, sygehuse, institutioner og klinikker.

- Madras til forebyggelse og behandling af tryksår op til grad 3 (Seiler/EPUAP)
- Smertebehandling
- Til patienter med moderat risiko for tryksår.

Begrænsninger

Ingen kendte kontraindikationer.

Advarsler

Før madrassen tages i brug første gang, skal den være klargjort ifølge nedenstående og brugsanvisningen gennemlæst. Madrassen er velegnet til indstillelige liggeflader.

Tjek at der minimum er 22 cm fra overfladen af madrassen til overkanten af sengehesten, når denne er slået op.

Inden brug

1. Fjern madrassen fra kassen straks efter modtagelsen.
2. Læg madrassen på sengen.
3. Bemærk "THIS SIDE UP", der er trykt på toppen af madrassen sammen med fodsymbol.

Rengøring

Skum:

- Kan rengøres med almindeligt tilgængelige desinficeringsmidler. Dette gøres ved at wipe eller sprøjte et desinfektionsmiddel fremstillet af isopropanol (f.eks. Bacillol) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB Incidin OxyWipe S). Desinfektion med klor (maks. 5000 ppm) er mulig. Efter desinficering aftørres med en fugtig klud (rent vand). Kemotermisk rengøring er mulig. Derefter skal skumkernen lufttørres.
- Skummet kan autoklaveres ved 105° (RKI-guidelines, vakuumproces 55 min). Herefter er skummet klar til brug igen.



BEMÆRK: hvis synligt snavs ikke kan fjernes og/eller hvis der er synlige skader, skal skummet bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Inkontinensbetræk:

- Kan rengøres med almindeligt tilgængelige desinficeringsmidler. Dette gøres ved at wipe eller sprøjte et desinfektionsmiddel fremstillet af isopropanol (f.eks. Bacillol) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB Incidin OxyWipe S). Desinfektion med klor (maks. 5000 ppm) er mulig. Efter desinficering aftørres med en fugtig klud (rent vand). Kemotermisk rengøring er mulig. Derefter skal lufttørres.
- Inkontinensbetrækket kan autoklaveres ved 105° (RKI-guidelines, vakuumproces 55 min). Herefter er betrækket klar til brug igen.
- Inkontinensbetrækket på både madras og madrasforlænger er aftageligt og kan åbnes ved hjælp af en skjult lynlås. Det kan vaskes i vaskemaskinen ved 95 ° C.

BEMÆRK: Hvis synligt snavs ikke kan fjernes og/eller der er synlige skader, skal betrækket bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Teknisk data

Medicinsk udstyr	Klasse 1, MDR 2017/745  
Produktet indeholder:	Decubitus terapimadras med skum PU-inkontinensbetræk (aftageligt med lynlås) Brugsanvisning
Materiale	Kerne i PU-skum (ECOLAST®) Betræk: PU-belagt PES-materiale
Teknisk sikkerhed	Flammehæmmende test i henhold til DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 krybbe 5, BS 7177
Testning for toksikologisk ufarlighed / biokompatibilitet	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Garanti	5 år på de funktionelle egenskaber
Vedligeholdelse	Ingen



Åndbart,
åben-cellet
ECOLAST®-skum



Autoklaverbar



Virus- og
bakterie-
bestandigt
betræk



Vandtæt, men
gennemtrængelig for
vanddamp



Optimeret
trykklindring



Bi-elastisk betræk
til minimering af
forskydningskraft



Vedligeholdsfri



Brand-
hæmmende
DIN 597 (I+II)
CRIB 5



Patientvægt:
– 140 kg

Fremstillet af



Funke Medical GmbH
Ährenfeld 10, 46348 Raesfeld
Germany
Tlf: +49 (0)2865 – 266 93 50
Fax: +49 (0)2865 – 81 33
Mail: info@funke-medical.de
www.funke-medical.de

Forhandles af



able nordic a/s
Mågevej 16, 8370 Hadsten
Danmark
Tlf: (+45) 86982499
E-mail: kr@ablenordic.dk
www.ablenordic

