

Brandhæmmende stof brugt på alle sejl designs








Vaskbart sejl og label i hele levetiden - LOLER-kompatibel




Omfattende garanti på alle sejl




BSEN10535 overholder styrkekrav


STØRRELSE	VÆGTGRÆNSE	PRODUKTKODE	FARVE	NOTER
Small	< 220 kg / 35 stone	OUS/*SPC/S		Mindre / større størrelser er tilgængelige på forespørgsel. *Indsæt relevant materiale til kode  <b>NB:</b> Herida Ouse™ sejludvalget er kompatibelt til brug med de fleste mobileløftere og loftlifte.
Medium	< 220 kg / 35 stone	OUS/*SPC/M		
Large	< 220 kg / 35 stone	OUS/*SPC/L		
X Large	< 220 kg / 35 stone	OUS/*SPC/XL		
Speciel	< 220 kg / 35 stone	OUS/*SPC/SPL		
Fås også i bariatriske størrelser op til 70 stone / 440 kg				

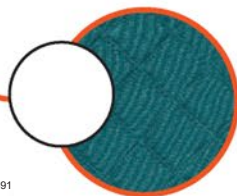


Quiltet blågrøn polyester

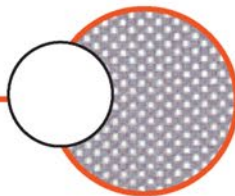


Grå mesh polyester

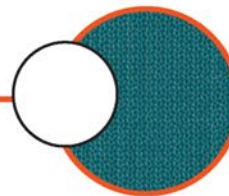

Blågrøn massiv polyester

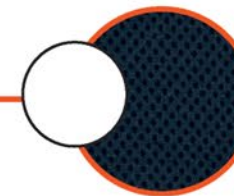

Sort afstandsstof

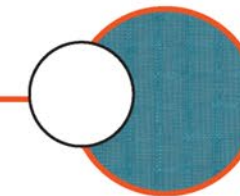

Blå faldskærmssilke

# HERIDA OUSE™

## In Situ Sejl

Forsøg ikke at løfte nogen patient under nogen omstændigheder uden den rette træning. Flytning og håndtering af sårbare patienter er af afgørende betydning, og Herida kan ikke godkende usikre procedurer eller underkvalificeret personale, der gennemfører nogen løfteproces. Hvis du er usikker, bedes du kontakte en supervisor eller afdelingsleder på din arbejdsplads, som er ansvarlig for proceduremæssigt korrekte løft og uddannelsespolitikker på stedet.

### INSTRUKTIONER



Vask ved temperatur <90°C



Rengør ikke med blegemiddel



Tørretumbles koldt



Må ikke stryges



Må ikke renses

Ingen skyllemiddel

Ingen pletfjerner

Tør ikke af med alkohol

Sørg for, at velcro®-lukninger er helt fastgjort før vask for at undgå opbygning af fnug

Brug kun ikke-biologiske vaskemidler og skyl grundigt

Sørg for, at rygstøtter (hvis de findes) altid fjernes før vask




[www.heridahealthcare.co.uk](http://www.heridahealthcare.co.uk)

**!** Brug aldrig en sejlrop med loop på en løftebøjle med studs, og brug aldrig et sejl med clips på en løftebøjle med krog.



Sørg for, at denne brugervejledning og den medfølgende "sikker sejlmontering og sikkerhedsvejledning" læses før første brug af sejlet. "En fuldstændig risikovurdering skal udfyldes af en kompetent og kvalificeret professionel".

### Sådan monteres et OUSE in situ sejl fra seng til seng eller seng til stol

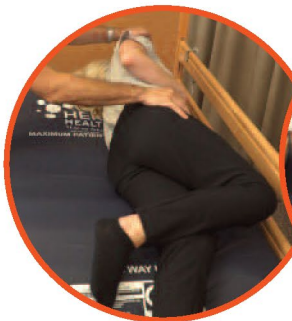

1. Rul patienten sikkert ved hjælp af passende og sikre flytnings- og håndteringsmetoder.




2. Når patienten er på plads, skal du folde eller rulle Ouse-sejlet og forsigtigt stikke det ind under patienten som vist uden at klemme huden eller kropsmassen.



3. Rul patienten til den anden side, og træk derefter forsigtigt i sejlets krop for at sikre en central position. Juster hovedet og rygdelene for at sikre, at denne position opnås.



4. Patienten skal ligge centrert i positionen som vist.

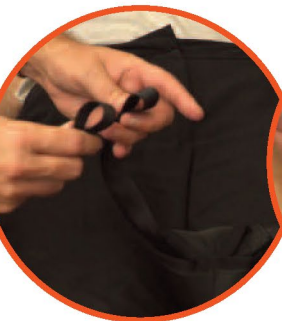

5. Før gennem benstropper gennem de centrale stropper som vist for hver bendel..



6. Sæt de farvede hoved- og benstropper ensartet på (medmindre den kliniske tilstand, som er identificeret af den kvalificerede plejer, tilsiger andet). En kortere skulder, længere ben til næsten 90 graders løft som tommelfingerregel. En længere skulder og ben giver et mere liggende løft (alt efter hvad den kliniske tilstand tilsiger).



7. Påbegynd forsigtigt løftet og kontroller, at stropperne er sikkert fastgjort til løftebøjlen, og patienten er komfortabel. Kontroller det hele vejen igennem.

### Sådan monteres et OUSE in situ sejl - for at flytte fra en midlertidig stol til stoleposition.



1. Før hver benstrop gennem de midterste stropper som vist, og gentag på hver side.



2. Sejlets ben- og midtersektioner med beskyttende polstring skal se sådan ud, før løftebøjlen sænkes.



3. Sænk forsigtigt løftebøjlen og anbring de farvede stropper på løftebøjlen. NB: Kort skulder, længere ben for et oprejst løft (bedste praksis for stol til stol). Ideelt set benlækker monteres først på løftebøjle og skulderstropper til sidst.



4. Kontroller, at alle løftestropper er forsvarligt fastgjort før løft påbegyndes (anden kontrol).



5. Løft forsigtigt under mens stropper strammes op.



6. Lift væk fra stol. Kørliften over til en ny stol og sænk forsigtigt ned i stol indtil patienten sidder. Løsn alle stropper fra løftebøjlen, og fjern sejlet hvis muligt. Alternativt kan sejl blive liggende, men placer stropper, så de ikke kommer i vejen ved brug af stol.

● Dette sejl skal sættes på i liggende stilling og ikke i stolen.

● For yderligere hjælp eller rådgivning kontakt venligst kundeservice på gratis telefon: 7027 3720

IFU-032-01 v2