

DIAZ'en er standard udstyret med:

- 8 Gear
- Dobbelt hydrauliske skivebremser
- Bagpedalbremse
- Parkeringsbremse
- Hoftesele til kørestolen og antipunkturdæk
- Cyklen er udstyret med hjælpemotor fra Bafang

Tekniske specifikationer	Cykeldel	Kørestolsdel
Krank længde i cm	17	n/a
Skridtlængde i cm	77 - 98	49-75
Dækstørrelse i tommer / ETRTO	26 x 1,75 (47 - 559)	20 x 1,75 (55 - 406)
Max. Belastning i kg	120	120
Total længde x bredde i cm	235 - 76	
Max- belastning total i kg	240 I alt	
Sæde bredde x sæde dybde i cm	n/a	45
Ryg højde i cm		48 - 55
Sæde bredde i cm		45
Sæde dybde i cm		40 - 54

FAABORG REHAB TECHNIC

+45 70 20 55 53
www.faaborg-rehab.dk



FAABORG REHAB




DIAZ

CYKEL OG KØRSTOL I ÉN

Er du afhængig af en kørestol, og vil du gerne kunne nyde det sociale udenfor? Kørestolscyklen DIAZ gør dette muligt. Med sit hollandske design kan DIAZ tage dig lige derhen hvor du ønsker. Kørestolsdelen er tilgængelig for både børn og voksne. Takket være den sofistikerede konstruktion og den uafhængige hydrauliske affjedring, vil du kunne cykle meget komfortabelt og sikkert. Vil du gerne kunne tage en pause på cykelturen? Så kan du nemt og sikkert afkoble kørestolsdelen og bruge den som en almindelig kørestol der skal skubbes. Meget praktisk hvis i vil gøre et erinde sammen eller blot vil nyde udsigten på en terrasse.

Ladning:

- Det er en fordel at lade batteriet så ofte som det er muligt.
- Hvis cyklen bruges dagligt, sæt cyklen til ladning efter endt brug.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 uge, anbefales det at tage laderen fra 24 timer efter endt ladning.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 måned skal den oplades i 24 timer 1 gang om måneden.

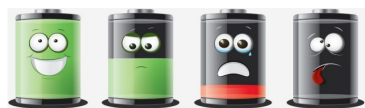

- Den bedste temperatur er ca. 20°.
- Laderen slår automatisk fra ved 0°.

Pleje af cyklen

Regelmæssig vedligeholdelse af cyklen er vigtig af hensyn til funktionssikkerheden, og for at cyklen ser pæn ud. Derfor bør følgende punkter overholdes:

- Regelmæssig vedligeholdelse udført af en fagmand gør, cyklen bevarer sin værdi. Du kan selv gøre følgende for at undgå rust og andre skader:
- Lad ikke snavs indtørre, men vask det af med det samme med vand og en blød klud eller svamp. Brug aldrig en højtryksrenser til rengøringen, da det kan beskadige lejer, lak eller finish.
- Brug ikke skræppe rengøringsmidler.
- Lakskader skal udbedres straks.
- Dele, der er følsomme over for rust, skal behandles grundigt med et egnet konserverings- og plejemiddel, særligt op til og i vinterperioden.
- Lad ikke cyklen stå udenfor uden at være overdækket, Faaborg Rehab Technic ApS frasi-ger sig ethvert ansvar for misligholdelse af cyklen.
- Tjek altid om der er luft nok i dækket før du kører en tur. For lidt luft kan gøre cyklens træk evne svag.

Bemærk:

Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget ændringer/reparationer af personer, som ikke er godkendt eller anvist af Faaborg Rehab Technic ApS

Garantien dækker ikke almene sliddele.

Garantien dækker ikke hvis det første service efter 6 mdr. ikke overholdes. Det er dit ansvar at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS, når det er tid til service.

Du har også mulighed for at lave en service aftale med os, også kontakter vi dig når det er ved at være tid..

Prisen for et almindeligt service, uden reparationer, er typisk 1200,- + moms.

Hvis du efter læsning af denne brugervejledning savner svar på yderlige spørgsmål vedrørende din nye cykel, er du altid meget velkommen til at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS

Politikken for Faaborg Rehab Technic ApS er til stadighed af at forbedre kvaliteten og drift sikkerheden af vores produkter. Vi forbeholder os derfor retten til, uden forudgående at ændre denne vejledning.

- 1 Op i hjælpe niveau
- 2 System tænd/sluk / MODE
- 3 Ned i hjælpe niveau
- 4 Batteri kapacitet
- 5 Hastighed km/t
- 6 Daglige kilometer (TRIP) - Total kilometer (ODO) - Højeste hastighed (MAX) - gennemsnitlig hastighed (AVG) - Rækkevidde (RANGE) - Energiforbrug (CAL(kun med momentsensor monteret)) - Rejse tid (TIME) - WATT ydelse (POWER)
- 7 Hjælpe niveau / gå assistance

