



Quick N' Steady

Montering & Brugsvejledning

Quick N' Steady bruger og hjælper: Læs denne manual, inden du betjener Ståhjælpen. Gem denne manual til fremtidig reference.

△ **ADVARSEL: Quick N' Steady hjælper: Betjen ikke Quick N' Steady uden først at læse og forstå denne manual. Hvis du ikke forstår advarsler, forsigtighedsregler og instruktioner, der er angivet heri, skal du kontakte din forflytningsvejleder, autoriseret distributør eller teknisk repræsentant, inden du fortsætter med brugen af dette produkt; ellers kan der opstå personskade eller skade på din Ståhjælp.**

1 INTRODUKTION	3
FORVENTET BRUG	3
2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	4
BETYDNINGEN AF SIKKERHEDSANGIVELSER..... UDTALELSER	4
ADVARSLER.....	4
3 BEHANDLINGSPROCEDURER	5
INSTRUKTIONER TIL FORSENDELSE OG TRANSPORT	5
4 FUNKTIONER.....	6
KOMPONENTER.....	6
FASTGØRELSESMIDLER OG VÆRKTØJ.....	6
5 SAMLEINSTRUKTIONER	7
6 BETJENING	10
7 VEDLIGEHOLDELSE.....	12
RENGØRING AF QUICK N' STEADY.....	12
8 BEGRÆNSET GARANTI.....	13
9 INDEKS.....	15

1 INTRODUKTION

"Vigtige sikkerheds-, betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, der kræver din opmærksomhed, er inkluderet i denne manual. Læs hele manualen omhyggeligt, inden du bruger din nye Quick N' Steady Ståhjælp, opbevar den i nærheden til fremtidig reference og konsulter den så ofte som nødvendigt for at opretholde høje ydelsesstandarder.

Quick N' Steady Ståhjælp er en manuel ståhjælp, der kræver, at patienter selv hjælper sig i Forberedelsen til transport. Patienter, der er kvalificerede til at bruge Quick N' Steady Ståhjælp, skal have tilstrækkelig armstyrke til at trække sig selv opad og tilstrækkelig benstyrke til at støtte deres egen vægt. Patienter, der opfylder disse kriterier og har vanskeligheder med at gå, vil finde Quick N' Steady Ståhjælp som en nyttig transportenhed. Funktionelt set er Quick N' Steady Ståhjælp placeret mellem en traditionel ganghjælpemiddel og en batteridrevet sæde-til-stå-lift. Quick N' Steady Ståhjælp er et bekvemt alternativ til en kørestol ved toiletbesøg. Når borgeren har placeret sig selv ombord, kan det opdelt sæde justeres, så borgeren kan sidde behageligt, mens en plejer udfører transporten. For borgere, der mangler styrke til at hjælpe sig selv, anbefaler vi en batteridrevet sæde-til-stå-lift."

Quick N' Steady Ståhjælp er i stand til følgende overførsler, når den bruges i overensstemmelse med instruktionerne:

- Fra seng til stol/kørestol
- Fra seng/stol/kørestol til toilet
- Fra rum til rum

Sikkerhedsforanstaltningerne i denne manual er generelle advarsler, der kun er beregnet til at bruges som grundlæggende retningslinjer. Det kan være nødvendigt at udvikle dine egne metoder til at løse udfordringer, der ofte opstår på en sikker måde. Konsulter igen dine professionelle medicinske rådgivere for deres anbefalinger om sikkerhedsmetoder, og tøv aldrig med at bede om deres hjælp.

Alle oplysninger og specifikationer i denne manual er aktuelle på tidspunktet for udskrivningen.

FORVENTET BRUG

Quick N' Steady Ståhjælps forventede brug er som en enhed til transportassistance.

Kontraindikation

Quick N' Steady Ståhjælp er beregnet til brug af borgere, der har styrken og stabiliteten til at løfte Og støtte sig selv.

Vi anbefaler en batteridrevet sæde-til-stå-lift til borgere med begrænset styrke og stabilitet.

⚠ ADVARSEL: Personskade - denne enhed er designet til transportassistance af individer med en højde mellem ca. 155 cm og 198 cm. Sikr dig, at den individuelle bruger af Quick N' Steady er egnet til overførsel, inden brugen påbegyndes.

2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- ⚠ **ADVARSEL:** Følg altid disse sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger din Quick N' Steady Ståhjælp. Manglende overholdelse kan resultere i personskade for dig eller andre eller skade på Ståhjælpen.

Sikkerhed kræver den konstante opmærksomhed fra brugeren og hjælperen af Quick N' Steady Ståhjælp. Det er ekstremt vigtigt at lære og altid bruge sikre metoder til udførelse af grundlæggende daglige aktiviteter. Konsulter altid dine forflytningsvejledere for at fastlægge de metoder, der er mest velegnede til borgers individuelle evner.

BETYDNING AF SIKKERHEDSANGIVELSER

Bemærk følgende specielle angivelser, der anvendes gennem hele denne manual, og deres betydning:

- ⚠ **ADVARSEL:** Angiver en potentiel farlig situation eller usikker praksis, som, hvis den ikke undgås, kunne resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
- ⚠ **FORSIGTIG:** Angiver en potentielt farlig situation eller usikker praksis, som, hvis den ikke undgås, kunne resultere i mindre eller moderat personskade.
- BEMÆRK:** Angiver en potentielt farlig situation eller usikker praksis, som, hvis den ikke undgås, kunne resultere i skade på produktet eller ejendomsskade.
- Info: Giver anbefalinger vedrørende anvendelse eller andre nyttige oplysninger for at sikre, at du får det maksimale udbytte af dit produkt.*

ADVARSLER

- ⚠ **ADVARSEL:** Kun kvalificerede plejepersonale, der er uddannet i Quick N' Steady, bør anvende den til transport af patienter.
- ⚠ **ADVARSEL:** Brug ikke Quick N' Steady til at transportere borgere, der ikke er i stand til at trække sig op og støtte deres egen vægt.
- ⚠ **ADVARSEL:** Quick N' Steady Ståhjælpens maksimale vægtpacitet er 230 kg, JÆVNT DISTRIBUTUET. Brug aldrig Ståhjælpen til at transportere en borger, hvis vægt overstiger 230 kg.
- ⚠ **ADVARSEL:** Inden du bruger Quick N' Steady til borgertransport, skal du kontrollere Ståhjælpen for at sikre, at alle komponenter er korrekt og sikkert samlet og fungerer korrekt.
- ⚠ **ADVARSEL:** Lad aldrig en borger være uden opsyn under nogen del af transporten.
- ⚠ **ADVARSEL:** Hvis komponenter er beskadigede eller mangler, kontakt straks din autoriserede distributør. BRUG IKKE erstatningsdele. Brug kun reservedele. Brug af ikke-erstatningsdele kan medføre personskade, ejendomsskade og annullering af garantien.

3 HÅNDTERINGSPROCEDURER

INSTRUKTIONER TIL FORSENDELSE OG TRANSPORT

Hvis Quick N' Steady Ståhjælp skal genfremsendes med almindelig transportør, skal den pakkes i den samme karton, den blev modtaget i.

Udpakning

△ ADVARSEL: Løftet er tungt. For at undgå personskade skal du IKKE forsøge at fjerne løftet fra kassen uden hjælp.

1. Tjek for eventuel synlig skade på kassen eller dens indhold. Hvis der er skader, skal du underrette transportøren eller din autoriserede distributør.
2. Fjern al løs emballage fra kassen.
3. Fjern omhyggeligt alle komponenter fra kassen.

Info: Medmindre Quick N' Steady Ståhjælp skal bruges med det samme, skal du beholde kasser, beholdere og emballagemateriale til opbevaring, indtil brugen af Ståhjælpen er påkrævet.

Inspektion

1. Undersøg Quick N' Steady Ståhjælpens ydre for hakker, buler, ridser eller anden skade.
2. Inspektion af alle komponenter.

Opbevaring

1. Opbevar den om-emballerede Quick N' Steady Ståhjælp et tørt sted.
2. LÆG IKKE andre genstande oven på den om-emballerede Quick N' Steady Ståhjælp.

4 FUNKTIONER

KOMPONENTER


Genstand	Beskrivelse	Mængde
	Bunden forsamlet med fodplade og hjul	1
	Side- og støttearm samling	2
	Knæpude samling	1
	Sædepude og støtteenhed med håndtagsstang og tværstangsrør	2

FASTGØRELSESMIDLER OG VÆRKTØJ


No.	Billede	Beskrivelse	Mængde
A1		Vognbolt	8
A2		Knaphovedskrue med sokkel	4
A3		Fladskive	9
A4		Spændeskive	9
A5		Egekapsel-møtrik	8
A6		Skrue	1
T1		Nøgle	1
T2		Umbraco	1

5 SAMLEINSTRUKTIONER


Værktøjer nødvendige: medfølgende nøgle, medfølgende sekstanøgle

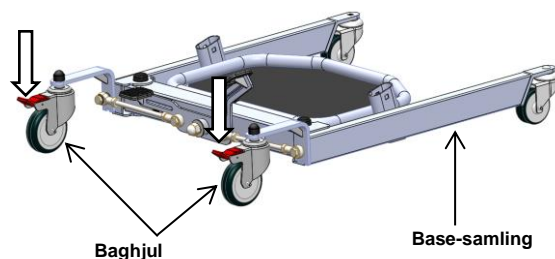


1. Placer base-samling på gulvet og lås de bageste hjul for nem montering, som vist ovenfor.

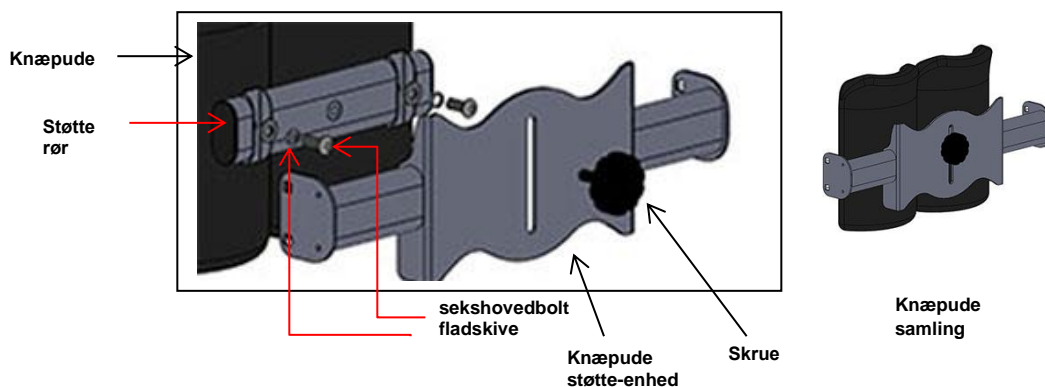


2. Monter de to sekshovedbolte gennem skiver på støtterøret og monter det derefter på knæpude-støtteenheden ved at skrue det fast, som vist ovenfor. Stram sikkert med den medfølgende nøgle. Den færdige samling er vist til højre ovenfor.

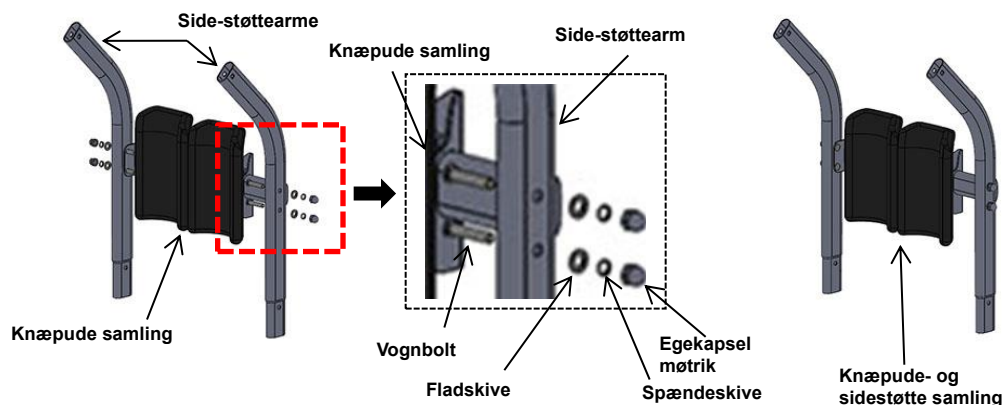

3. Fastgør knæpude-samlingen til de to side støttearme. Vend de firkantede huller på side støttearmene indad; placér hver vognbolt's firkantede skulder i det firkantede hul, og monter hver vognbolt gennem knæpude-samlingen beslag og side støttearmen indefra, som vist ovenfor. Installer fladskiven, låsemøtrikken og egekapsel-møtrikken på enden af hver vognbolt, som vist ovenfor. Stram ikke møtrikkerne; der vil være behov for noget bevægelse i denne samling for at samle hele enheden. Den færdige samling er vist til højre ovenfor.

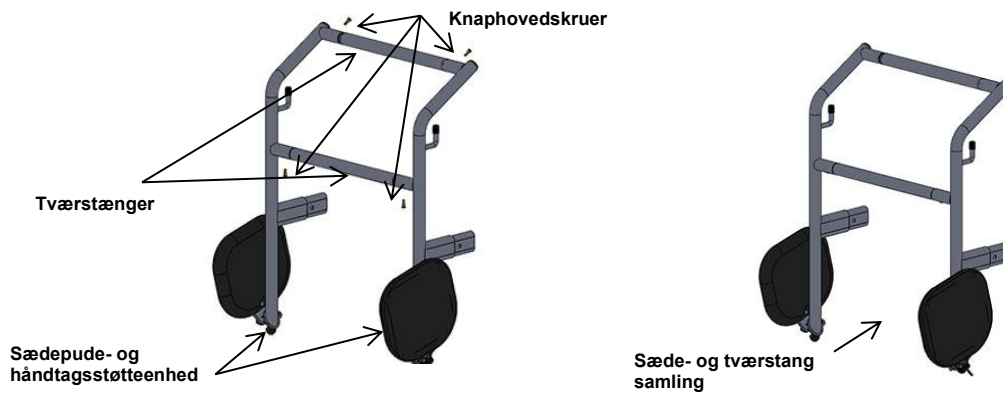


4. Indsæt de to rørformede tværstænger i hullerne på sædepude- og håndtagsstøtteenhederne, som vist ovenfor. Juster de små huller på tværstængernes undersider med hullerne i støtteenhederne. Installer de fire knaphovedskruer med sokkelgennem hovedet gennem støtteenhederne i tværstængerne. Brug umbraco til at stramme. Den færdige samling er vist til højre ovenfor.

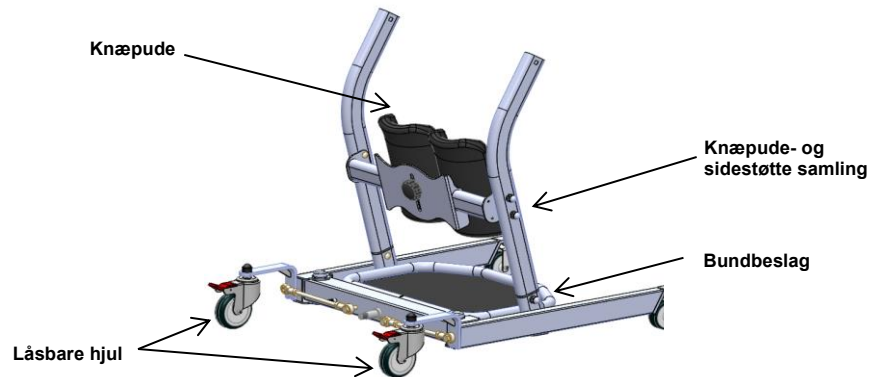

5. Indsæt knæpude side støtte samlingen i bundbeslagene, som vist ovenfor. Knæpuderne og armens bue skal vende væk fra de låsbare hjul.



6. Indsæt sæde- og tværstangs-samlingen i rørene øverst på knæpude side støtte-samlingen, som vist ovenfor.

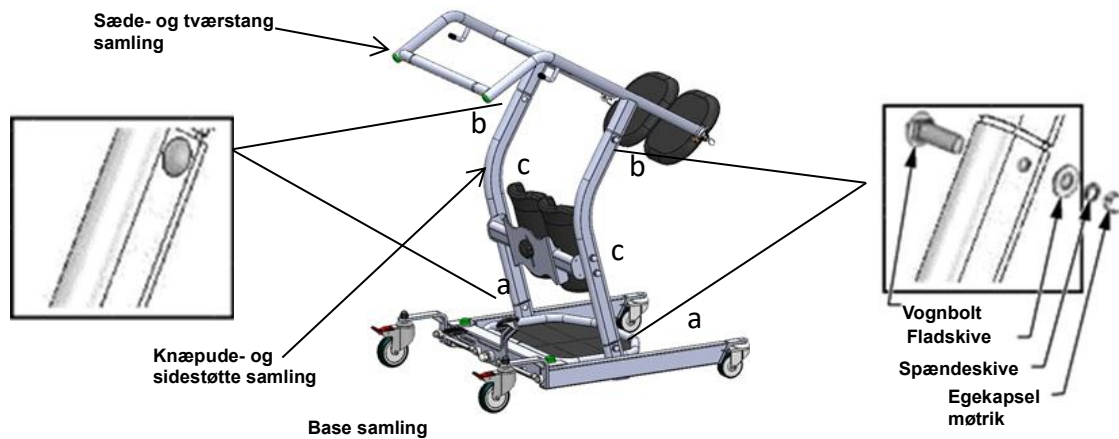

7. Fastgør sæde- og tværstangs-samlingen, knæpude side støtte-samlingen og base-samlingen sammen med vognbolte:


- a. Fastgør knæpude side støtte-samlingen til base-samlingen. Placér hver vognbolts firkantede skulder i det firkantede hul indeni base-beslaget og installer hver vognbolt gennem basen og knæpude side støtte-samlingen, som vist ovenfor. Installer fladskiven, låsemøtrikken og egekapsel-møtrikken på enden af hver vognbolt, som vist ovenfor. Stram begge møtrikker sikkert ved hjælp af den medfølgende nøgle.
- b. Fastgør sæde- og tværstangs-samlingen til knæpude side støtte-samlingen. Placér hver vognbolts firkantede skulder i det firkantede hul indeni knæpude side støtte-samlingen og installer hver vognbolt gennem knæpude side støtte-samlingen og sæde- og tværstangs-samlingen, som vist ovenfor. Installer fladskiven, låsemøtrikken og egekapsel-møtrikken på enden af hver vognbolt, som vist ovenfor. Stram begge møtrikker sikkert ved hjælp af den medfølgende nøgle.
- c. Stram de fire møtrikker sikkert, der fastgør knæpude-samlingen til de to side støttearme, som blev installeret i trin 3, ved hjælp af den medfølgende nøgle.

⚠ ADVARSEL: Før du bruger Quick N' Steady Ståhjælp, skal du sørge for, at alle komponenter er korrekt og sikkert samlet, og at alle fastgørelsesmidler er sikre.

⚠ ADVARSEL: Inden du bruger Quick N' Steady Ståhjælp, skal du læse betjeningsinstruktionerne.

6 BETJENING

De opdelte sædeenheder kan drejes opad for at muliggøre pålæsning af borgeren, og når borgeren er i en oprejst stående position, kan de sænkes for at danne en komplet to-sidet sæde.

 **ADVARSEL: Sørg for, at begge sædeenheder er fuldt sænket og danner en komplet sæde, inden borgeren sætter sig ned på Quick N' Steady Ståhjælp.**

 **ADVARSEL: Lad aldrig en borger være uden opsyn under nogen del af transporten.**

1. Løft de to opdelte sædeenheder, så de er parallelle med siden af Quick N' Steady Ståhjælp, som vist til højre.



2. Træd på fodpedalen for at åbne basen, så Quick N' Steady Ståhjælp kan flyttes tættere på borgeren.



3. Sørg for, at borgeren er positioneret ved kanten af den overflade, der skal overføres fra. Flyt Quick N' Steady Ståhjælp foran borgeren. Positionér borgeren, så hendes fødder er fast placeret på platformen, og hendes knæ og skinneben er i kontakt med de to skålede knæpuder, som vist til højre.



4. Lås hjulene ved at træde på hjulenes clips og skubbe nedad, som vist til højre.



5. Få borgeren til at gribe om tværstangen tættest på hende og bruge sin egen styrke til at trække sig op i en oprejst position sikkert på basens platform, som vist til højre.



6. Sænk begge de opdeltede sædeenheder ned i position for at danne et komplet sæde, som vist til højre.

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at begge sædeenheder er sænket og danner et komplet sæde, inden borgeren sætter sig ned på Quick N' Steady Ståhjælp.



7. Få borgeren til at sænke sig ned på sædet, samtidig med at hun holder sine knæ og skinneben i knæpuderne, og fortsat holder tværstangen med begge hænder, som vist til højre.



8. Lås hjulene op. Placer begge hænder på tværstangen længst væk fra borgeren, træd på den anden side af fodpedalen for at lukke basen, som vist til højre, og flyt Quick N' Steady Ståhjælp til den nye overflade. Sørg for, at borgeren er sikker og i korrekt position, som beskrevet i trin 7, før og under overførslen, som vist til højre.



9. Placer Quick N' Steady Ståhjælp mod den nye overflade, træd på fodpedalen for at åbne basen, og sørg for, at borgeren vil være i stand til at sætte sig fast og sikkert på overførselsoverfladen.
10. Få borgeren til at trække sig op til en fuld oprejst position.
11. Løft de to opdeltede sædeenheder, så de er parallelle med siden af Quick N' Steady Ståhjælp, som vist til højre, for at give borgeren mulighed for at sænke sig.
12. Stand beside the patient as she lowers herself down onto the new surface.
13. Sørg for, at borgeren er sikkert positioneret. Lås hjulene op, træd på den anden side af fodpedalen for at lukke basen, og flyt Quick N' Steady Ståhjælp til opbevaring.



7 VEDLIGEHOJDELSE

For at sikre sikkerhed og korrekt brug, udfør følgende trin månedligt:

- Tjek alle fastgørelsesmidler for at sikre, at de er sikkert fastgjort, og at der ikke er Slid og revner synlige. Udskift og stram eventuelle slidte fastgørelsesmidler, inden du bruger Quick N' Steady Ståhjælp.
- Tjek de to sædesamlinger for at sikre, at boltene er stramme. Udskift eventuelle Slidte eller beskadigede sædekomponenter, inden du bruger Quick N' Steady Ståhjælp.
- Tjek hjulene for at sikre, at de er korrekt monteret på Quick N' Steady Ståhjælp. Udskift eventuelle slidte eller beskadigede hjul, inden du bruger Stand Assist.

Hvis nogen vedligeholdelsesprocedure ikke er klar for dig, bed din autoriserede forhandler om hjælp.

BEMÆRK: Forkert vedligeholdelse kan forårsage driftsproblemer og påvirke din garanti.

△ **ADVARSEL: Uautoriseret ændring eller brug af erstatningsdele kan ændre Strukturen af Quick N' Steady Ståhjælp, ugyldiggøre garantien og skabe farlige forhold, der kan resultere i alvorlig personskaade.**

RENGØRING AF QUICK N' STEADY STÅHJÆLP

- Tør rammen af mindst en gang om ugen med en blød klud. Tør Quick N' Steady ståhjælp straks, hvis den udsættes for fugtighed.
- Rengør rammen hver tredje måned, og rammen behøver ikke at blive vokset.
- Rengør betrækket og plastkomponenterne med en mild sæbe- og vandopløsning.

BEMÆRK: Brug ikke opløsningsmidler, skurevoks, ætsende kemikalier eller spray-silikone til at rengøre Quick N' Steady Ståhjælp.

BEMÆRK: Brug ikke skuremidler til at rengøre Quick N' Steady Ståhjælp; de kan ridse overfladen.

BEMÆRK: Brug ikke damp eller højtryksrensere til at rengøre Quick N' Steady Ståhjælp.

8 BEGRÆNSET GARANTI

GARANTISCOPE

Vi ("") garanterer kun for den originale køber, at vi vil erstatte eller reparere komponenter efter eget skøn, der er defekte i materiale eller udførelse under normal brug og service. Alle garantier er betinget af korrekt brug af produkterne i streng overensstemmelse med god handelspraksis og gældende instruktioner og manualer, herunder korrekt brug og vedligeholdelse. I det omfang en komponent er omfattet af en garanti fra en tredjepart, overfører alle sine rettigheder under den garanti til den originale køber, i det omfang det er tilladt. Denne begrænsede garanti gælder kun for defekter, der er rapporteret til 's kundeserviceteam inden for den gældende garantiperiode, og som, efter undersøgelse af eller dens autoriserede repræsentant, viser sig at være en garantipost. Denne begrænsede garanti er ikke overdragelig.

De garantierettede komponenter og tidsperioden er angivet nedenfor:

Rammen: tre år

Dele, herunder hjul: et år

Den gældende garantiperiode begynder fra datoen for forsendelse til den oprindelige kunde, medmindre der er en udløbsdato på komponenten, i hvilket tilfælde garantien udløber på den tidligere af garantiperioden eller udløbsdatoen.

Garantien dækker ikke, og er ikke ansvarlig for følgende:

1. Defekter, skader eller andre tilstande forårsaget helt eller delvist af misbrug, forsømmelse, ændring, uheld, skadesfragt, manipulation eller manglende søgning og opnåelse af reparation eller udskiftning rettidigt;
2. Produkter, der ikke er installeret, brugt eller rengjort og vedligeholdt korrekt som krævet i den officielle manual for det relevante produkt;
3. Products considered to be of a non-durable nature including, but not limited to: filters, fuses, gaskets, lubricants, and charts;
4. Tilbehør eller dele, der ikke er leveret af;
5. Gebyrer opkrævet af nogen for justeringer, reparationer, udskiftningsdele, installation eller andet arbejde udført på eller i forbindelse med sådanne produkter, som ikke udtrykkeligt er godkendt skriftligt på forhånd af ;

6. Eventuelle omkostninger til arbejdskraft eller forsendelse, der pådrages i forbindelse Med udskiftning af dele eller reparation;
7. Omkostninger og udgifter til almindelig vedligeholdelse og rengøring; og
8. Repræsentationer og garantier afgivet af nogen person eller enhed anden end.

HELE GARANTIEN, EKSKLUSIV LØSNING OG FRASKRIVELSE AF FØLGESKADER

DENNE GARANTI ER ENS ENESTE GARANTI OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. GIVER INGEN STILTIENDE GARANTIER AF NOGEN ART, HERUNDER NOGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HVIS DER BLEV VIST EN MODEL ELLER PRØVE TIL KUNDEN, BLEV SÅDAN EN MODEL ELLER PRØVE ANVENDT BLOT FOR AT ILLUSTRERE PRODUKTETS GENERELLE TYPE OG KVALITET, OG IKKE FOR AT GIVE UDTRYK FOR, AT PRODUKTET NØDVENDIGVIS VILLE OVERHOLDE MODELEN ELLER PRØVEN I ALLE HENSEENDER. DENNE GARANTI BEGRÆNSER SIG TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DEFEKTE DELE. FUNDER DEVELOPMENT FRASKRIVER SIG ANSVAR FOR OG AFVISER HERMED EVENTUELLE DIREKTE, SPECIELLE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: SKADER PÅ FORTJENESTE ELLER INDKOMST, TAB AF BRUG, NEDETID, DÆKNING ELLER LØN, BETALINGER OG FORDELE FOR MEDARBEJDERE ELLER SELVSTÆNDIGE KONTRAKTHENTER.

De garantier, der er indeholdt heri, indeholder alle repræsentationer og garantier vedrørende emnet for dette dokument og erstatter alle tidligere forhandlinger, aftaler og forståelser vedrørende dette. Modtageren af dette dokument erkender og repræsenterer hermed, at den ikke har støttet sig til nogen repræsentation, udsagn, garanti, collateral kontrakt eller anden forsikring, undtagen dem, der er angivet i dette dokument.

For yderligere information om dette produkt eller denne garanti, kontakt venligst en kundeservicerepræsentant fra Funder Development

NOTER:

- 1) Yderligere vilkår og betingelser kan være gældende.
- 2) Fragtkrav skal noteres på de relevante forsendelsesdokumenter og skal foretages øjeblikkeligt. Internationale, føderale og statslige regler styrer specifikke krav til fragtkrav. Manglende Overholdelse af disse regler kan medføre afvisning af fragtkravet. Funder Development vil hjælpe dig med at indgive fragtkravet.
- 3) Krav vedrørende manglende forsendelse skal fremsættes inden tredive (30) dage fra fakturadatoen.

9 INDEX

A

Advarsler 4

ADVARSEL erklæring, betydning 4

B

BEMÆRK erklæring, betydning 4

Betjening 10

Betydning af sikkerhedsudtalelser 4

F

Fastgørelsesmidler og værktøjer, identifikation 6

Rengøring af Stand Assist 12

Forsendelse og transportinstruktioner 5

FORSIGTIG erklæring, betydning 4

Funktioner 6

G

Garanti 13

H

Håndteringsprocedurer 5

I

Info erklæring, betydning 4

Inspektion 5 Tilsløbet brug 3 Introduktion 3

K

Komponenter, identifikation 6

N

Nødvendige værktøjer til samling, liste 7 Transport, udfør 10

S

Samlevejledning 7

Sikkerhedsforanstaltninger 4

Sikkerhedsudtalelser, betydning af 4

Sæde-til-Stå Ballestop, valgfri 10 Opbevaring 5

U

Udpakning 5

V

Vedligeholdelse 12

Vægtkapacitet 4

Vægtkapacitet, maksimal 4

