

4G-telefon med teleslyng og SOS-nødkald

Dansk



Vigtigt: Denne telefon kan bruges af personer med nedsat hørelse. Lydforstærkning kan reguleres op til 40 dB. Personer med nedsat hørelse kan øge lydstyrken, så den tilpasses efter behov.

Indhold

Se venligst vores hjemmeside: www.geemarc.com for en opdateret brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer, du skal være opmærksom på!

Indhold	1
Før brug	5
- Tillykke	5
- Sikkerhedsforanstaltninger	6
- Opsætning af	7
• Kontroller indholdet af æsken	7
• Placering af telefon i hjemmet	7
• Installation af batteri og strømadapter	7
- Tilslutning af telefonen	8
- Vægmontering	9
- Placering af betjeningsenheder	10
- Beskrivelse af funktionstaster	11
- Beskrivelse af LCD-skærm	12
Indstillinger	14
- Telefonindstillinger	14
• Tid & Dato	14
• Sprogindstillinger	14
• Gendan fabriksindstilling	15
- Indstillinger for opkald	15
• Håndtering af telefonsvarer	15
• Omstil opkald	15
• Opkald venter	15
• Opkald spærret	16
• Svar SMS efter ubesvaret opkald	16
• Minutpåmindelse om opkaldstid	16
- Skærm	16
• Kontrast	16
• Skærmlys	16

- Sikkerhed	17
• Pin kode	17
• Blokeret telefonnr. liste.....	17
- Tilslutning.....	17
- Version.....	18
- LED kontakt	18
- Lavt batteri til SMS.....	18
- Boost indstilling.....	18
• Tone kontrol	19
• Boost lås	19
- Piltaster, lydløs tilstand	19
Profiler	20
- Indstilling af ringetoner.....	20
- Juster lydstyrken	21
- Andre alarmeringer	21
Brug af telefonen	22
- Udgående opkald.....	22
- Indgående opkald og modtagelse af et opkald (CID)	23
- Ring fra kontakter	23
- Hurtigopkald	23
- Hurtig-opkald via fototast	24
- Opkald til et nummer fra genopkaldslisten	24
- Opkald til et nummer fra listen over ubesvarede opkald ..	24
- Opkald til et nummer fra modtager opkaldslisten	24
- Dæmpning af mikrofonen	24
- Brug af lydforstærkning (Boost).....	25
- Brug af din telefon med høreapparater.....	25
- Håndfri funktion.....	25
- Tone regulering.....	25

Indhold

Telefonbog	26
- Kontakter	26
- Opret kontakter i telefonbogen	26
- Se kontakter.....	27
- Indstillinger i kontakter	27
- Gem nummer i hurtigopkald eller fototast.....	28
SMS	29
- Besked (SMS).....	29
- Send en SMS.....	29
- Modtagelse af en SMS	30
- Søg i gemte tekstbeskeder (indbakke)	30
- Udbakke.....	30
- Udkast.....	31
- Slet SMS.....	31
- Skabeloner.....	31
- Udsend meddelelser.....	32
- SMS-indstillinger	32
- Beskeder (lagerplads).....	32
Optag opkald	33
- Opkaldslistor	33
- Vis ubesvarede opkald	33
- Vis udgående opkald	34
- Vis modtagne opkald	34
- Slet alle	34
- Opkald varighed.....	34
Applikationer	35
- Søgning	35
• Alarm.....	35
• Timer.....	35
• Bluetooth.....	35
- Navngiv optagelse	36

SOS	37
- SOS-funktion	38
- SOS-nummer indstillinger	38
- SOS indtalt besked	38
- SOS-beskedoptagelse	39
- SOS-sms	39
- Parring af et nyt SOS-armbånd	39
- Udskift batteri i armbånd	40
- Rækkevidde	40
Tekniske specifikationer	41
Egenskaber	42
Fejlsøgning	43
Sikkerhedsoplysninger	45
Oplysninger om høreapparater	47
Netværkstjenester	48
Sikkerhedsstillelse	49
Direktiver om genanvendelse	50

Før brug

Tillykke

Tillykke med købet af CL9000 bordtelefon.

Læs vejledningen omhyggeligt for at lære alt om de tilgængelige funktioner, og hvordan din telefon fungerer. Dette hjælper dig med at få det bedste ud af din nye telefon.



Sikkerhedsforanstaltninger

For at forhindre enhver risiko for elektrisk stød og personskade skal du følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, før du bruger telefonen:

1. Læs og overhold omhyggeligt instruktionerne i vejledning.
2. Telefonen er i stand til at forstærke lyde til et højt niveau. Det er vigtigt at instruere alle potentielle brugere om, hvordan den fungerer korrekt. Det tilrådes at justere lydstyrken til minimums-niveau (Lav), når den ikke er i brug, og advare andre brugere om, at høreskader potentielt kan skyldes forkert brug.
3. Ved rengøring skal du først tage stikket ud af stikkontakten. Brug derefter en fugtig klud til at tørre den af. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller stærke kemikalier.
4. Anbring ikke genstande på ledningen, da dette kan forårsage skade.
5. Brug ikke denne telefon i våde omgivelser eller miljøer, hvor der er risiko for eksplosion.
6. Service må kun udføres af kvalificeret fagteknisk personale.
7. Brug kun den medfølgende strømforsyning.
8. Installer telefonen, så ingen vil træde på eller falde over ledningen.
9. Overbelast ikke stikkontakter eller forlængerledninger, da dette kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød.
10. Skub aldrig genstande gennem åbningerne i telefonen. Dette kan røre ved farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, der kan resultere i risiko for brand eller elektrisk stød.
11. Spild aldrig væske af nogen art på telefonen.

Opstart

INDHOLD I ÆSKEN

- Telefonrør med spiralledning og telefonbase
- 3.7V, 900mAh Li-polymer genopladeligt batteri
- Brugsanvisning
- SOS-armbånd til nødopkald (til batteri CR2025)
- Strømadapter (5V DC 2.0A, 10W)
- Type A til type C USB-kabel (længde 1,8 m)
- Vægbeslag

PLACERING AF I HJEMMET

Telefonen skal placeres i et område, hvor det er let at se det visuelle display og lys ved indkomne opkald.

Vælg et sted, der ikke generer dine normale daglige aktiviteter, så den ikke udsættes for skub, eller fare for at falde over ledninger.

INSTALLATION AF BATTERI OG STRØMADAPTER

For at bruge alle telefonens funktioner, f.eks. håndfri og förstærkning, er det vigtigt at telefonen er fast tilsluttet strømforsyningen eller batteriet.

Åben batteridækslet på undersiden med en mikro skruetrækker.

Tilslut det genopladelige batteri til batteristikket i batterirum. Vær opmærksom på den korrekte polaritet.


Brug kun det genopladelige batteri, der fulgte med telefonen. Luk dækslet til batterirummet.


Afbryd strømadapteren i vægstikket, når batteriet sættes i eller udskiftes.

Lavt batteriniveau: Hvis batteriniveauet er lavt, udsender telefonen et højt **BIB-tone** og viser "**lavt batteriniveau**" i displayet og sender en SMS til det registrerede telefonnummer.
Tilslut USB Type C-strømadapter til enheden.

Installation af telefonen

- Tilslut telefonrørets spiralledning (RJ9-stik) (1).
- Sæt dit **Nano-SIM-kort** i SIM-stikket bag på basen (2).
- Åben batteridækslet med en mikro skruetrækker.
Tilslut det genopladelige batteristik til telefonens batteristik (3).
I tilfælde af strømsvigt kræves batteri for at kunne ringe.
- Klik batteridækslet på plads igen og skru skruen fast.
- Tilslut USB-kablet (type A-stik) til adapteren (4).
- Tilslut adapterledningen (type C-stik) til telefonen (5).
- Tilslut adapteren til din stikkontakt (*) (6).

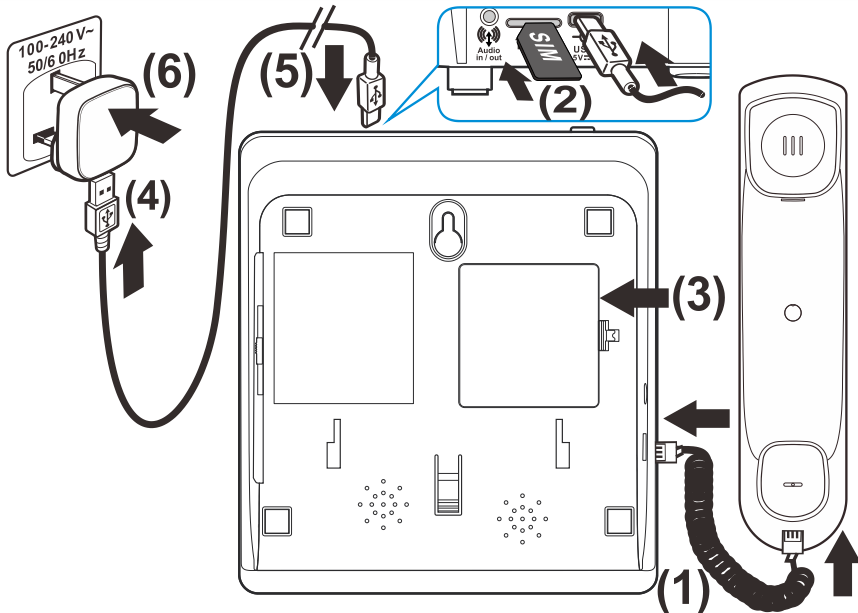

- Tryk og hold tænd/sluk-tasten nede (mute),  telefonen tændes. (*) Klassificeret "farlig spænding" i henhold til EN62368-1 standard.


Bemærk: Genopladeligt batteri er til sikkerhedskopieringsformål i tilfælde af strømsvigt, du skal tilslutte USB type C-strømadapter hele tiden.

Før brug

Vægmontering

Telefonen kan også monteres på en væg.

Du skal bruge to skruer for at fastgøre telefonen på en væg.

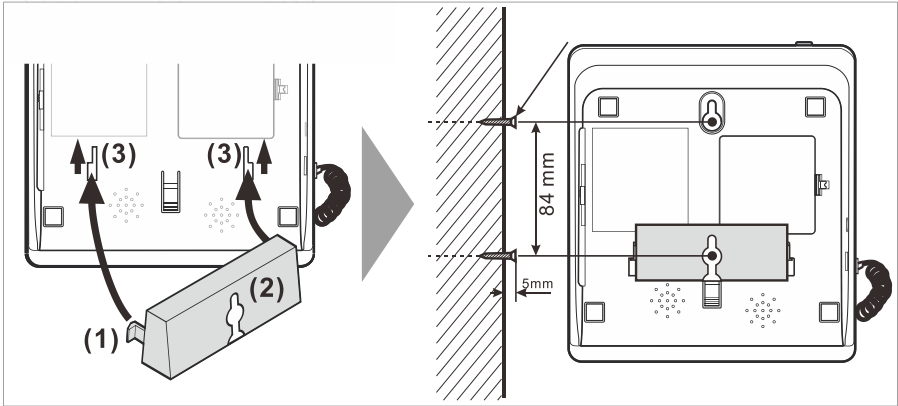


Wall mount template

84 mm
Indfør styretapperne (1) på vægmonteringsbeslaget (2) i åbningerne (3) på bagsiden af telefonen. Skub vægbeslaget (2) 10 mm opad, indtil det hørbart klikker på plads.


Advarsel: Sørg for, at der ikke er kabler eller rør m.m. skjult bag overfladen af væggen, hvor du vil bore hullerne.

Bor to huller, med en afstand **84 mm** lodret, indsæt skruerne og lad dem projicere **5 mm** fra væggen.

Placer telefonen på beslaget, monter skruerne i åbningerne og skub telefonen lidt nedad.

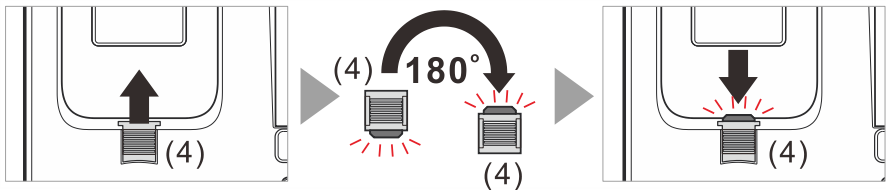

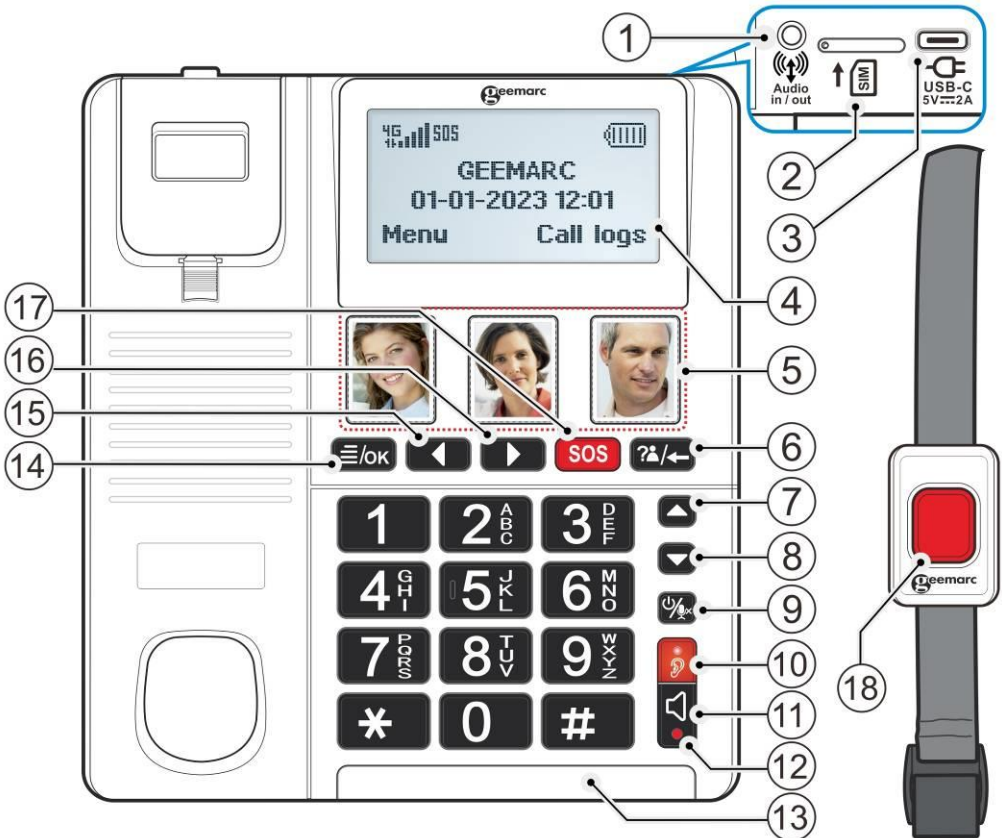

Vend tappen til rørholder (4) i rørholderen **180°**, så telefonrøret kan hænge fast.





1. Lyd ind/ud (Jack \varnothing 3,5 mm)	10. Boost tast +40 dB
2. Nano SIM-kort	11. Håndfri-tale (højtaler)
3. DC IN (type-C)	12. Håndfri-tale indikator
4. LCD-skærm	13. Indikator for nyt opkald
5. Foto Kvik-taster (x3)	14. Menu / OK tast
6. Opkaldsinfo / Historik / Slet	15. Venstre pil / kontakter
7. Op / Volume op	16. Højre pil / skriv SMS
8. Ned / Volume ned	17. SOS-tast
9. Tænd / sluk telefon (Lydløs)	18. Nødkaldsarmbånd SOS

Beskrivelse af funktionstaster


	3 x Billede-taster bruges som hurtigopkalds-taster.
	Tryk på denne tast for at åbne Menu valg -for at få adgang til funktionen Redigere , når du er i telefonbogen. -for at få adgang til funktionen Slette eller Slet alle , når du er placeret på CID -nummer. Tryk OK for at bekræfte dit valg. Tryk OK for at påbegynde et opkald, fra kontaktliste.
	Opkaldsinfo / Tilbagetast / Slet Liste over opkalds-informationer, beskrevet på side 24 . Taster du et telefonnummer, kan du trykke her for at slette de sidste cifre.
	Venstre / højre taster, genvej i standby-tilstand: Venstre tast: Liste over kontakter. Højre tast: Skriv en SMS.
	Denne tast bruges til nødopkald.
	Fremhæv eller skift mellem menuerne. Genvej: Juster lydstyrkeindstillingen op/ned
	Tænd / sluk-tast, Lydløs-tast . Langt tryk for at tænde og slukke for telefonen.
	Trykker du på denne tast under et opkald, tændes LED'en for at informere dig om, at Boost-tilstanden er aktiveret.
	Håndfri / Foretag / Besvar / Afslut opkald . Aktiverer højttalertelefonen under et opkald, som beskrevet på side 25: Håndfri . LED'en er tændt for at informere dig om, at funktionen er aktiveret.

	<p>Hashtag tast Tryk for at skifte mellem forskellige input tilstande, mens du skriver en tekstbesked eller redigerer et kontaktnavn. I standby-tilstand: Tryk og holde nede for at aktivere / deaktivere lydløs tilstand.</p>
	<p>Stjerne tast Tryk på denne tast for at indsætte et eller flere symboler, mens du skriver en besked eller redigerer navnet på en telefonbog. (flere detaljer se P22: Stjernetast).</p>

Bemærk: **Menu (OK)**  **tast og opkaldslogger (tilbage)**  -tasten fungerer også som funktionstaster, dvs. den påtager sig forskellige funktioner afhængigt af den viste menu. De aktuelle funktioner ses i nederste venstre og højre hjørner.





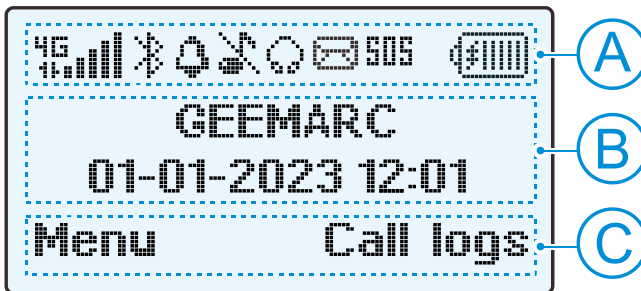











Beskrivelse af LCD

LCD-skærmen er opdelt i tre forskellige områder:



- A Ikon området (statuslinje).** Ses øverst på skærmen og viser de forskellige systemikoner, som er aktive.
- B Det vigtigste område.** Vises i midten af skærmen. Viser flg.:
 Nummer, du ringer op til.
 Oplysninger om opkalds-id
 Telefonbog
 Menu oplysninger
 I standby tilstand aktuelt klokkeslæt, dato og teleudbydernavn.
- C MENU og Tilbage.** Vises nederst på skærmen.

Før brug

	Symbol for Signalstyrke Vises altid, når telefonen er tændt. Viser den aktuelle signalstyrke. Flere søjler = mere signalstyrke. Der vises ét ikon pr. SIM.
	VoLTE Du er i 4G og kan foretage et godt opkald. E betyder, at netværket er i 2G
	Symbolet Alarm - Alarmen ringer på indstillet tidspunkt.
	Symbol for batteristatus Dette vises altid, når telefonen er tændt. Viser niveauet for batteriopladning. Flere bjælker angiver mere batteritid.
	Symbol for Roaming Et roamingopkald finder sted, dvs. internationalt opkald – udgående eller indgående.
	SMS-symbol - Der er modtaget en ny SMS (tekstbesked).
	Lydløst symbol (hold # -tasten nede for at aktivere lyd igen. Telefonen er i lydløs tilstand. Opkaldsalarm slukket.
	Symbol for headset Hovedtelefon / halsteleslynge er tilsluttet.
	Bluetooth-symbol - Når Bluetooth er tændt.
	Øre symbol Hvis Boost er slået til, vises øreikonet på statuslinjen.
	Ubesvaret opkald
	Under samtale - Du er online.
	SOS er aktiveret
	Brug kun strømadapter /  Brug kun batteri
	Opladning af batteri / Batteri fuldt opladet

Telefon indstillinger

Tid og dato

Tid og dato opdateres automatisk fra din teleudbyder. Du kan stadig indstille det manuelt.

- Tryk på **Menu/☰/OK**-tasten for at få vist hovedmenulisten.
- Tryk på tasterne **▼** for at gå til **Indstillinger** → **☰/OK** → **Telefonindstillinger** → **☰/OK** → **Tid & dato**, og tryk på **☰/OK** for at flytte til **Indstil tid**.
- Tryk **☰/OK** to gange på tasten, indtast den korrekte time og minutter med tastaturet, og tryk derefter på **☰/OK**.
- Tryk på tasten **▼** for at gå til **Indstil dato**, Tryk på **☰/OK** -tasten, indtast den korrekte dag, måned og år med tasterne **▲** / **▼** eller via tastaturet, og tryk på **☰/OK**.
- Tryk på tasten **▼** for at gå til **Tidsformat**, tryk på **☰/OK** tast, Brug **▲** / **▼** for at flytte til det ønskede dato-format **12 timer** eller **24 timer**, og tryk derefter på **☰/OK**.
- Tryk på **▼** tasten for at gå til **Dato format**, tryk på **☰/OK** tasten Brug **▲** / **▼** for at flytte til det ønskede dato-format **år-måned-dag** / **måned-dag-år** eller **dag-måned-år**, og tryk derefter på **☰/OK**.
- Tryk på tasten **▼** for at gå til **Opdater tidsindstillinger**, tryk på **☰/OK**-tasten. Brug **▲** / **▼**-tasten til at flytte til det ønskede tidspunkt for **automatisk opdatering** eller **Manuel opdateringstid**, og tryk derefter **☰/OK**.
- Tryk på **?/←** tasten for at udføre.
- Tryk på **?/←** tasten for at afslutte.

Bemærk: Hvis du har funktionen **CID** på dit netværk, indstilles datoen og timen automatisk ved det første opkald.

Indstillinger for sprog

Du kan ændre sprog. Op til 13 sprog er tilgængelige.

Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Portugisisk, Arabisk, Hollandsk, Italiensk, Hebraisk, Russisk, Polsk, Tjekkisk og Dansk.

Indstillinger

Gendan fabriksindstilling

Du kan gendanne til fabriksindstillingen. Du skal bruge en adgangskode for at fortsætte. Adgangskoden er **1-2-3-4**.

Indstillinger for opkald

Menu/OK  → Indstillinger →  → Indstilling opkald

Telefonsvarer

Telefonsvarer-funktionen giver dig mulighed for at lytte til alle telefonbeskeder, som folk måtte have indtalt til dig.

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis skal abonnere på. Kontakt din teleudbyder, hvis du er i tvivl.

Hvis din teleudbyder giver dig adgang til telefonsvareren, vil det telefonnummer, der bruges til at få adgang til telefonsvareren, normalt blive oprettet på telefonen. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt indtaste dit telefonsvarernummer her.

Fra standby kan du få adgang til telefonsvareren ved at trykke på tasten 1 og holde den nede. Du bliver forbundet til en stemmen.

Omstil opkald

Indgående opkald kan omdirigeres til et bestemt telefonnummer (evt. telefonsvarernummer). Der er 5 muligheder tilgængeligt med denne funktion:

- **Omstil alle:** Viderestiller alle indgående opkald.
- **Hvis optaget:** Viderestiller alle indgående opkald, hvis din linje er optaget.
- **Hvis intet svar:** Viderestiller alle indgående opkald, hvis du ikke besvarer opkaldet.
- **Hvis telefonen er slukket:** Viderestiller alle indgående opkald, hvis din telefon er slukket, eller du ikke besvarer/hører et opkald.
- **Annuller alle omdirigeringer.**

Opkald venter

Dette kan aktiveres, annullere eller kontrollere status. Kontroller at denne tjeneste er tilgængelig fra din teleudbyder.

Opkald spærret

Der er mange tilgængelige indstillinger:

Opkaldsspærring: Ind- og udgående opkald til og fra din telefon er begrænset. 4 muligheder tilgængelige med denne funktion:

- **Alle udgående opkald:** Du kan ikke foretage udgående opkald.
- **Alle indgående opkald:** Du kan ikke modtage indgående opkald.
- **Indgående opkald ved roaming**
 - ISD-opkald:** Ved aktivering, blokeres alle internationale udgående opkald. (Adgangskoden er **0000**).
 - Ring op, når INTL roaming:** Ved aktivering, kan du ikke foretage udgående opkald under roaming. (adgangskoden er **0000**).
- **Annuller al spærring.**

Svar SMS efter afvisning:

Hvis du har valgt **TIL** under **Omstil opkald**, vil der stå **1** ubesvaret opkald i display afviser det indgående opkald, viser displayet "**1 ubesvaret opkald**" for at informere dig om, at du har mistet et indgående opkald, vælg **Afslut**, så vises "**Svar**". Tryk på **OK**, så kan du sende en skabelon SMS-besked som svar.




Påmindelse om minut for opkaldstid

Indstil det **Til**, telefonen udsender et bip i henhold til dit valg. Tilpas, hvis du vil have en påmindelse om, hvor længe du har været på telefonen. Du kan vælge imellem: **OFF, 50, 55, 60** sekunder eller tilpasse denne gang.

Display





Menu/OK  → Indstillinger → Display

Kontrast

- Brug **tasten venstre** () / **højre** () til at flytte til den valgte belysning, tryk derefter på **Menu/OK**  for at acceptere.

Baggrundsbelysning

Displaybelysning auto sluk: (15s/30s/1min/5min), standard 15 s.

- Brug **Op** () / **Ned** ()-tasten til at flytte til det ønskede tidspunkt, og tryk derefter på **Menu/OK**  for at validere.
- Tryk på  tasten for at afslutte.

Indstillinger

Sikkerhed

Menu/OK  → Indstillinger →  → Sikkerhed

PIN-kode


Din mobiltelefon giver dig mulighed for at konfigurere pinkode for at beskytte din telefon mod uautoriseret brug.

PIN1 og PIN2-koder følger med **SIM-kortet**. PIN1-koden beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN2-koden er påkrævet for at få adgang til visse tjenester.

PUK- (PIN) og PUK2-koderne (PIN2) følger muligvis med SIM-kortet. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, kræves PUK-koden. Hvis koderne ikke medfølger, skal du kontakte din teleudbyder.

Frasortering

Du kan afvise og blokerer numre, undtagen SOS-numrene.

- **Blokerer:** Vælg **Bloker** efterfulgt af **Indstillinger**, brug  og  tast for at vælge **Ny** (indtast navn og telefonnummer) eller **Importer kontakter**, og tryk derefter for  at gyldig.
- Vælg din kontakt på listen, og tryk på  for at acceptere.
- Vælg **Markér**, og tryk derefter på  for at acceptere.
- Vælg Indstillinger, og tryk derefter på .
- Tryk på  tasten for at afslutte.

Bemærk: Du har mulighed for at slette, slette alle, redigere en kontakt eller alle kontakter på *Blokeringslisten*.

Forbindelse

Menu/OK- → Indstillinger → OK → Tilslutning

Du har mulighed for at indstille **DATA-tjeneste** eller **Dataroaming**.

Netværksvalg: Her kan du vælge din netværksoperatør.

Netværkstype: Vælg netværkstype.

VoLTE: Voice over Long-Term Evolution, denne funktion er at foretage et opkald i 4G-kvalitet.

Version

Menu/OK  → Indstillinger → OK → version

Hardware og software version vil blive vist her. Normalt er det til teknisk serviceafdeling.

LED-kontakt

Menu/OK  → Indstillinger → OK → LED-kontakt

Du har mulighed for at aktivere eller deaktivere Led-kontakten, placeret foran for at informere dig om, at du har en ny besked eller et nyt opkald.

Lavt batteri til SMS

Menu/OK  → Indstillinger → OK → Lavt batteri til SMS

Når du har aktiveret denne funktion, modtager det telefonnummer, du har indstillet, to SMS'er, en for at informere om, at batteriet er lavt og en SMS en time efter.

I dette tilfælde skal du dobbelttjekke, at strømadapteren er korrekt tilsluttet eller venter på, at strømafbrydelsen er ophører.

Boost indstilling

Menu/OK  → Indstillinger → OK → Boost-indstilling

I Vælg denne menu kan du indstille tonen i dit telefonrør og aktiveres eller fravælg boost automatisk.

Indstillinger

Tone kontrol:

Du har 3 valgmuligheder: **Normal**, **Mellem** og **Diskant**.

Diskant, øger de høje frekvenser, og **Bas**, øger de lave frekvenser. Under dit opkald kan du ændre din indstilling ved hjælp af venstre (◀) / Højre (▶) tasterne. Displayet viser dit tonevalg. Toneændringerne aktiveres kun med boost-funktionen aktiveret.

Lås Boost forstærkning

Når du aktiverer denne funktion, aktiveres lydforstærkning automatisk, hver gang du fører en samtale via telefonrøret.

Andre indstillinger

•Pil-taster

Når du trykker på en pil-tast, har du direkte adgang til disse funktioner:


Pil op (▲) : **Lydstyrkejustering (øger lydstyrken)**

Pil ned (▼) : **Lydstyrkejustering (dæmper lydstyrken)**

Højre pil (▶) : **Skriv en SMS**

Venstre pil (◀) : **Liste over kontakter**

•Lydløs tilstand

Tryk og hold **#** tasten nede for at aktivere lydløs tilstand i standby tilstand, hvis lydløs tilstand er aktiveret, vises **ikonet for lydløs tilstand** . Tryk og hold **#** tasten nede for at deaktivere lydløs tilstand (aktiver lyd).

I menuen kan du f.eks. indstille de forskellige lydstyrker på alarmer, ringetoner og samtaler.

Indstillinger af ringetoner

- Indgående ringetone
- Ringetone for beskeder
- Taler CID

Juster lydstyrken

- Indgående ringetone
- Ringetone for beskeder
- Ringetone til alarm
- Højtalerlydstyrken
- Lydstyrke for telefonopkald i håndsæt
- Power ringetone
- Talende tastatur


Andre alarmringe

- Advarsel om lavt batteriniveau

Indstillinger for ringetoner


Du har mulighed for at vælge din ringetone til det indgående opkald, SMS-besked og talende tastatur.




• Indgående ringetone

Menu/ OK /ok → Profiler → Indstillinger for ringetone
→ Indgående ringetone

Brug  og  tast til at vælge ønskede ringetone af de 10 mulige, og tryk derefter på /ok for at acceptere.


• Ringetone for beskeder

Menu/ OK /ok → Profiler → Indstillinger for ringetone
→ SMS-besked ringetone

Brug  og  tast til at vælge din beskedringetone af de 6, som du kan høre, og tryk derefter på /ok for at acceptere.

Profiler

•Talende tastatur

Menu/OK /OK → Profiler → OK → Ringindstillinger → OK → Talende tastatur

Når denne funktion er aktiveret, oplæser telefonen det nummer, du trykkede på. Numeriske taster på tastaturet. Modtager du et opkald, oplæser telefonen det indgående telefonnummer.




Juster lydstyrken



Menu/OK /OK → Profiler → Juster lydstyrken

Brug pil-tast op  for at få adgang til nedenstående funktioner:

Du har mulighed for at indstille:

- **Indgående ringetone:** Indstil lydstyrken for indgående ringetone.
- **Ringetone for beskeder:** Indstil lydstyrken, for modtaget SMS.
- **Alarmringetone:** Indstil lydstyrken for din alarm.
- **Højtalerlydstyrke:** Indstil lydstyrken på højtalertelefonen.
- **Lydstyrke i røret:** Indstil lydstyrken for telefonrøret.
- **Strømringetone:** Indstil lydstyrken på animationen, når du tænder eller slukker telefonen.
- **Talende tastatur:** Indstil lydstyrken, når du trykker på en tast.

Bemærk: Brug **venstre** () / **højre** ()-tasten til at indstille det ønskede korrekte niveau, og tryk på /OK for gyldig. Niveaupositionen 0 er at indstille lydstyrken på OFF-position.



Under en samtale: Du kan trykke på **lydstyrketasten op eller ned** ( og ) for at ændre lydstyrken i røret eller højtalerlydstyrken (hvis opkaldet er i højtalertelefontilstand).

Andre alarmklokker

Menu/ OK /OK → Profiler → Andre advarselstoner

Alarm om lavt batteriniveau: Når batteriet er lavt, sender telefonen en bib-alarminformation og 2 SMS til den ønskede kontakt.

Udgående opkald

1. Indtast nummeret, displayet viser og oplæser (hvis aktiveret) det nummer, du ringede til. Tryk på  (**Opkaldslog / Tilbage / Slet**) -tasten for at slette et forkert ciffer.
2. Løft røret op, **eller** tryk på **SPK-tasten**  (SPK-tast-LED lyser).
3. Derefter ringes dit indtastede nummer op til modtager.

ELLER

Løft røret op, **eller** tryk på **SPK-tasten** , og indtast derefter det nummer, du vil ringe til.

Noter:

*Ringer du et nummer op, kan du lægge telefonrøret i holderen eller trykke på **SPK-tasten** igen  for at afslutte opkaldet.*

Stjernetast *

Tryk på denne tast for at indsætte et eller flere symboler, mens du skriver en besked eller redigerer navnet på en kontaktperson. Brug navigationstasterne til at flytte de symboler, du vil indsætte.

Hvis du redigerer telefonnummer, skal du trykke på denne tast for at indsætte specielle cifre (f.eks. * / + / **P** (pause) / **W**).

For at foretage et internationalt opkald skal du trykke på **+** før landekoden. **Tryk blot på * -tasten to gange.**

Nogle udenlandske telefonnet har udvidelseslinjer, der ikke kan ringes op som opkald, men skal indtastes af tastaturet. For at ringe direkte til disse skal du trykke hurtigt på *** tre gange i træk** efter telefonnummeret. **P-tegnet** vises, og derefter kan du indtaste udvidelsen.


Hashtag

Tryk for at skifte mellem forskellige inputtilstande, mens du skriver en tekstbesked eller redigerer et kontaktnavn.


Brug af telefon


Indgående opkald - modtagelse af opkald (CID)

Hvis der er indgående opkald, meddeler telefonen opkaldsnummer (hvis funktionen, der taler CID, er aktiveret), telefonen ringer, og indikatoren for visuel ring blinker.

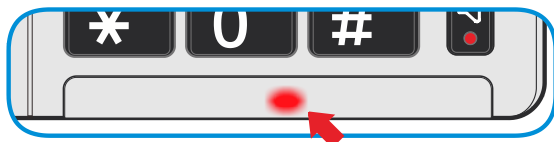


* Gå til **Menu / OK** →  **OK** → **Profiler** → **Ringindstillinger** → **Talende CID** for at aktivere talende CID-funktion.

* Gå til **Menu / OK** →  **OK** → **Indstillinger** → **LED-kontakt** for at tænde eller slukke LED-oplysningerne.



1. For at besvare et opkald skal du løfte røret, trykke på **SPK**  eller trykke på fjernbetjeningsknappen for at tale.





Trykker du på knappen eksternt SOS, er din telefon i højttalertilstand.

2. Juster lydstyrken, hvis det kræves, ved at trykke på  eller  -tasten.

3. For at afslutte opkaldet, læg røret på telefonen eller tryk på . Eller du kan trykke på den eksterne SOS-knap for kun at stoppe opkaldet i højttaler på telefonen.

Ring op fra dine kontakter

Menu / OK  **OK** → **Kontakter** → **OK**  eller **Venstre piltast**

Brug **op**  og **ned**  -tasten til at flytte til det ønskede nummer for at ringe eller trykke på de første tegn i kontaktnavnet. For eksempel på 3-tasten starter dine kontakter med D og brug derefter **op**  og **ned**  -tasten.

Tag røret op, **eller** tryk på **SPK-tasten**  (LED'en lyser).

Hurtigopkald

Du kan tildele telefonnumre til numeriske taster 2~9. Her kan du trykke og holde 2 ~ 9 tasten nede i standby tilstand for at ringe til det nummer, der er gemt i hurtigopkaldshukommelsen.

Hvis du vil gemme en hurtigopkaldstast, skal du gå til **side 28 (Gem numre i Hurtigopkald eller Fototaster)**.

Foto taster

Du kan tildele et telefonnummer en fototast (**M1-M3**). Tryk og hold fototasten nede i standby tilstand for at ringe til kontakten der er gemt i fototasternes hukommelse.



Hvis du vil gemme en billedkontakt, skal du gå til **side 28 (Gem numre i hurtigopkald eller fototaster)**.


Opkald til et nummer fra genopkaldslisten

?/← (Opkalds info) → Udgående opkald → OK **≡/ok**

Brug **▲** eller **▼** for at vælge det nummer, du vil ringe til, og tryk derefter på **SPK-tasten**  eller tag røret op.


Ring til et nummer fra ubesvarede opkaldslisten

?/← (Opkalds info) → Ubesvarede opkald → OK **≡/ok**

Brug **▲** eller **▼** til at vælge nummeret, og tryk på **SPK-tasten** , eller tag røret op for at ringe.


Opkald til et nummer fra besvarede opkaldsliste


?/← (Opkalds info) → Modtaget opkald → OK **≡/ok**

Brug **▲** eller **▼** til at vælge nummeret, og tryk på **SPK-tasten** , eller tag røret op for at ringe.

Slå mikrofonen fra




Under en samtale kan du vælge at slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med, ikke kan høre dig.

For at slå din mikrofon fra Tryk én gang på  tasten. Du har slået meddelelsen Mute til på displayet.

For at slå lyden til igen på din mikrofon skal du trykke på  tasten igen. Den du taler med, kan hører dig igen.

Brug af telefon

Brug af forstærkningsfunktionen

Du kan øge lydstyrken for at kompensere for dit høretab. Knappen  (**Boost**) gør det muligt at aktivere ekstra volumen under en samtale. Når funktionen er aktiveret, lyser det røde lys på knappen . Boost-ikonet  vises på skærmen.



FORSIGTIG: Denne telefon kan levere et meget højt lydniveau. Trinvis eksponering for forstærkningsniveauer større end 18 dB kan være skadeligt for mennesker uden høretab. Juster altid lydstyrken til lavt lydniveau efter brug af telefonen.


Brug din telefon med telespole i høreapparater

Din telefon kan bruges med høreapparater, der er udstyret med en telespole (T-spole). Vælg Telespoleprogram på høreapparatet. Sørg for at holde røret tæt på høreapparatet for at få en god modtagevolumen. **Røret må ikke røre øret!**



Håndfri

Under et opkald kan du aktivere telefonens højttaler. I denne tilstand kan du tale uden brug af telefonrør.



Aktiver højttaleren ved at trykke på  tasten under et opkald og læg røret på telefonen. Det røde LED-ikon  er aktiveret.

For at slukke for højttaleren skal du løfte røret op, og du kan fortsætte med at tale via røret. LED-ikonet  slukker.

Justering af højttalerlydstyrke

I højttalertilstand kan du justere højttalerlydstyrken ved at trykke på  eller -tasten.

Tone respons


Når boostet aktiveres under opkaldet, kan du bruge **venstre** () /**højre** () taster til at ændre tonesvaret.







Kontakter

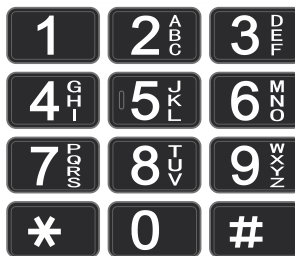Telefonnumre og navne kan gemmes i Kontakter. Disse lagres både på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Det giver dig mulighed for at gemme ofte brugte numre, så du nemt kan foretage et opkald uden at skulle huske eller indtaste nummeret. Du kan søge efter og huske numre for at foretage et opkald, sende en besked eller bruge en post som SOS nødkontakt. Telefonbogen kan indeholde mindst **500** kontakter. Hvis du forsøger at tilføje en ny kontakt, når al hukommelsen er fyldt, vises en advarselsmeddelelse. Du skal slette en eksisterende kontakt for at tilføje en ny. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, er angivet med **SIM-ikonet**. Fordelen ved at gemme på SIM-kortet betyder, at du kan overføre kontaktinfo til en ny telefon.

Opret kontakter i telefonbogen

1. **Menu**  **OK** → **Kontakter** → **OK**  → **Indstillinger** → **Nye**
2. **OK**  → **SIM** eller **Telefon**, og tryk derefter på **OK**. 
3. Tryk på **OK** under **Navn**  for at vælge **Rediger**. Opret et navn (højst 15 tegn) til telefonbog ved hjælp af det numeriske tastatur (se nedenfor) og tryk på  for at bekræfte navn.






4. Tryk på  ned-tasten for at indtaste numre, og tryk derefter på  **OK**. Indtast et tal (højst 20 cifre) til kontakt i telefonbogen, og tryk på  for at acceptere dit nummer.
5. Tryk på **Ned**  for at vælge **Standard ringetoner**, tryk derefter på **OK**,  vælg **REDIGER**, tryk derefter på  **OK**. Tildel en ringetone ud fra listen over mulige ringetoner. Du har et stort udvalg af lydfiler eller Talende navn af lydfilnavne.

Telefonbog






6. Tryk på  **OK**-tasten, tryk på  **Ned-tasten** for at vælge **GEM**, og tryk derefter på  **OK** for at acceptere.

Det numeriske tastatur har også bogstaver og tegn på tasterne. Disse tegn bruges til at indtaste tekst og ændring af telefonbogen, SMS-tekstskrivning og søgning efter en kontakt i telefonbogen.







Tryk på den tast med det relevante bogstav X antal gange for at få det bogstav, du har brug for, f.eks. for at få bogstavet **J**, tryk på 5-tasten én gang, **S** tryk på 7-tasten fire gange hurtigt efter hinanden. For at gå videre til næste bogstav skal du vente et sek., markøren vises | efter det sidste bogstav, du indtastede. Du kan nu indtaste det næste bogstav. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du bruge tasten **#**. Indgangstilstanden vises på displayet. Brug pil op- eller ned-tasten til at vælge muligheder, og tryk på  til accept. Tast **0** for at indsætte et mellemrum.

Tryk på  for at slette det sidste tegn, der blev indtastet, mens du indtastede et tal eller et navn. Tryk på funktionstasten  og hold den nede for at rydde alt tekst på skærmen.

Se Kontakter

1. **Menu**  → **Kontakter** → **Menu**  eller tryk direkte på den pil-tast  for at få adgang til kontaktlisten.
2. Brug  og  til at scrolle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt. Du kan også finde en kontakt i telefonbogen via en alfabetisk søgning. Du skal blot skrive det første bogstav i deres navn, så placeres du automatisk i den rigtige del af listen.

Indstillinger i Kontakter

1. **Menu**  → **Kontakter** → **OK**  eller tryk direkte på den pil-tast  for at få adgang til kontaktlisten.
2. Brug  og  til at scrolle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt.
3. Tryk **OK** () på funktionstast.

4. De tilgængelige indstillinger for denne kontaktpersonpost er:

- Opkald
- Detaljer
- Ny
- Hurtigopkald eller Billeder
- Slet
- Slet flere
- Skriv besked
- Kopier kontakt
- Status i hukommelsen

Gem nummer i Hurtigopkald eller Fototast

For at gemme nummer i hurtigopkald eller fototast hukommelse:


1. **Menu / OK**  **OK**  → **Kontakter** → **OK**  → **Vælg tast.**
2. Vælg **Hurtigopkald eller Billeder** og tryk derefter på  **OK** at åbne listen over indstillingsmuligheder: **M1, M2, M3 (3 fototaster), 2 ~ 9.** Brug  og  pile til at vælge.
3. Tryk på **OK**  → **Rediger** → indtast telefonnummeret, og tryk derefter på **OK** .
4. Tryk på **Afslut** .


BEMÆRK: Du kan tildele et hurtigopkaldsnummer til en kontakt i telefonbogen. Det betyder, at du let kan ringe til et nummer, blot ved at trykke på det tilknyttede nummer.

1. **Menu / OK**  → **Kontakter** → **OK**  → **Funktionstast** → **Hurtigopkald eller billeder**
2. Vælg enten **2~9, M1, M2, M3.**
3. Tryk på **OK**  → **Rediger** → **Kontakter**
4. Brug **op**  og **ned**  pile til at vælge din kontakt.
5. Tryk på **OK**  for at se telefonnummeret, hvis OK, skal du trykke på **OK**  for at acceptere.
6. Tryk på **Afslut** .


Besked (SMS)

Menu /ok → Besked → Menu /ok

Modtaget SMS-besked, vises et konvolutikon  på displayet.

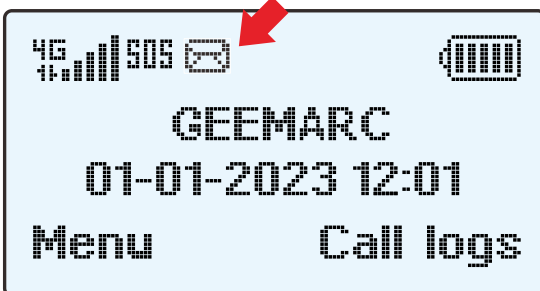



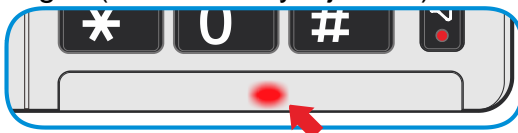







LED'en blinker også (vises midt i lysbjælken)




Bemærk: Konvolut-ikonet (og Ny besked / opkalds-LED) forbliver aktiveret, indtil du læser de NYE SMS-beskeder.



Send en SMS

En tekstbesked, afsendt fra denne telefon, kan indeholde op til 160 tegn inklusive mellemrum.




1. Menu /ok → Besked → OK → , Skriv besked → OK eller  piletast og vælg derefter Skriv besked.
2. Skriv din sms (Se tekstindtastning på **side 26: Opret en kontakt i telefonbogen**).
3. OK /ok → Send → Indtast nummer med tastaturet, eller tryk på OK, brug /ok tasten til at vælge  Kontakter, og tryk derefter på OK-tasten /ok.
4. Brug  og  pile til at vælge din kontakt, tryk på **Valg**, vælg **Markér** for kun én kontakt, eller vælg **Markér alle** for at vælge alle kontakter, og tryk derefter på **OK-tasten**. /ok
5. OK /ok → Send → OK

Modtagelse af en SMS

Når du modtager en SMS, kan du høre en advarselstone. Der vises et kuvertikon  på LCD-skærmen eller meddelelsen **1 Ny meddelelse**.

1. Tryk på **LÆS** () -tasten for at få vist meddelelsen.
2. Tryk på **OK** () tast for at se tilgængelige muligheder, der kan udføres på denne valgte tekstbesked.
3. Disse muligheder omfatter:
Slet, Besvar, Viderestil, Ring, Flyt, Føj afsender til, Detaljer

Gense gemte SMS-beskeder (indbakke)




1. **Menu** () → → **Meddelelsesindbakke** → **OK** eller  kort tast og vælg derefter **Indbakke**
2. Vælg til den besked, du vil gense.
3. Tryk på **Valg** () → **Vis** for at se.

Du har også adgang til disse funktioner:

Besvar, Slet, Slet alle, Videresend, Ring, Gem til kontakter, Slet gentagne numre, Føj til bloker kontakt




Udbakke

Udbakken gemmer sendte og gemte meddelelser.

1. **Menu** () → **Besked** → **Sent besked** → **OK** eller  kort tast og vælg derefter **Udbakke**
2. Vælg den besked, du vil gense.
3. Tryk på **Valg** () for at se alle de tilgængelige indstillinger, der kan udføres på denne valgte tekstbesked.
4. Disse muligheder omfatter: **Se, Send igen, Slet, Slet alle**.






Kladde

I *Kladde* gemmes meddelelser, som du har gemt, men endnu ikke sendt. Du får nu chancen for at sende beskeden, genoptage redigering eller slette.

1. **Menu**  → **Meddelelse** → **Kladde** → **OK** eller  pil-tast og vælg derefter **Kladde**.
2. Vælg den besked, du vil gense.
3. Tryk **Valg** () tast for at se alle de tilgængelige muligheder, der kan udføres på denne valgte tekstbesked.
4. Disse muligheder inkluderer: **Slet**, **Slet alle** og **Rediger**.

Slet SMS





Du kan slette meddelelser i **Meddelelsesindbakke**, **Udbakke**, **Kladder** eller **Sendt besked**.

1. **Menu**  → **meddelelse** eller  pil-tast.
2. Vælg enten **Indbakke**, **Kladder**, **Udbakke** eller **Sendt boks** og → **OK**.
3. Tryk på  → **Slet** eller **Slet alt** → **OK**  → **OK**  for at acceptere.

Skabeloner


Du har adgang til en liste over forskellige korte forud indtastede beskeder, som du let kan bruge, når du skriver en besked SMS.

Du har mulighed for at tilføje en ny kort besked fra listen nedenfor:

1. **Menu**  → **Meddelelse** → **Skabeloner** → **OK** eller  kort-tast, og vælg derefter **Skabeloner**
2. Rul ned, indtil du ser "**Tom**", og tryk på **REDIGER** 
3. Indtast din besked, og tryk derefter på **OK** () for at gemme din nye besked

Udsend meddelelser

Denne telefon understøtter udsendelsesmeddelelserne, dvs. informationstjenester fra din teleudbyder.

Menu  → Meddelelse → Udsend meddelelser → OK 
 → Indstillinger → Udsendelsesmeddelelse /
 Kanalindstillinger / Vælg sprog

Du kan vælge indstillinger såsom at vælge at modtage disse meddelelser, udsendelsesproget sammen med kanalindstillingen.

SMS-indstillinger

Din teleudbyder servicerer SMS-beskeder. Din mobiltelefon skal have telefonnummeret til servicecenteret programmeret i hukommelsen. Generelt vil dette allerede være konfigureret af din teleudbyder.

Der er mange indstillingsmuligheder, du kan indstille til at gemme beskederne i SIM- eller telefonhukommelse.

For andre indstillinger skal du kontakte din teleudbyder.

Du kan finde oplysningerne:

Meddelelsescenter, SMS-gyldighedsperiode, Statusrapport, Svarsti, Foretrukket lager.

Kapacitet til meddelelser

Du kan finde antallet af kontakter, der er registreret i SIM- eller telefonhukommelsen.

SIM 1/30: 1 besked i SIM-hukommelsen på maksimalt 30 tegn


Telefon 6/200: 6 beskeder i telefonens hukommelse på maksimalt 200 tegn

Bemærk: Når antal SMS er på maksimum, skal du slette én eller flere SMS'er for at få mere plads.


Opkaldshistorik

Opkaldshistorik

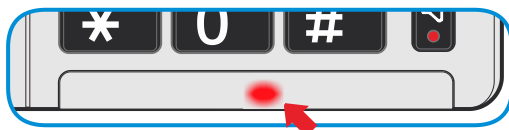


Hvis du et har ubesvarede opkald, får du besked på din skærm: **1 Ubesvaret opkald** og **Ny besked**, opkalds-LED blinker. Den nye besked-/opkalds-LED slukkes, når du har læst ubesvarede opkald.



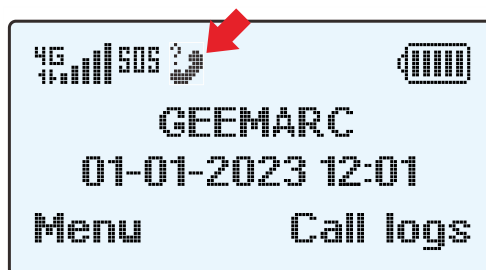




Hvis du har mistet opkaldet, vises **ikonet Ubesvaret opkald**  på displayet.









Vis ubesvarede opkald







Har du et ubesvaret opkald, vises **ikonet for** ubesvarede opkald  på displayet. Tryk på **tasten** () for at se detaljerne, når du har beskeden **1 ubesvaret opkald**, eller tryk på **Afslut** () for at afslutte. Du kan også se listen for ubesvarede opkald via menuen som følger

1. **Opkaldslogger**  → **Ubesvarede opkald** → **OK**. 
2. Brug  og  til at rulle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt.
3. Tryk på funktionstasten **Valg** () , følgende vil være tilgængeligt for at udføre på den opkaldspost:
Detaljer, Ring, Skriv besked, Tilføj til kontakter, Føj til blokeringsliste, Slet, Slet alle.




Vis udgående opkald

1. **Opkaldshistorik** → **Udgående opkald** → **OK**.  eller tryk på , og vælg **Udgående opkald** → **OK**. 
2. Brug  og  til at rulle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt.
3. Tryk på funktionstasten **Valg** () , følgende vil være tilgængeligt for at udføre på den opkaldspost:
Detaljer, Ring, Skriv besked, Tilføj til kontakter, Føj til blokeringsliste, Slet, Slet alle

Vis modtagne opkald

1. **Opkaldshistorik** → **Modtagne opkald** → **OK**.  eller tryk på , og vælg **OK for modtagne opkald** → .
2. Brug  og  til at rulle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt.
3. Tryk på funktionstasten **Valg** () , følgende vil være tilgængeligt for at udføre på den opkaldspost:
Detaljer, Ring, Skriv besked, Tilføj til kontakter, Gem i telefonbog, Føj til blokeringsliste, Slet, Slet alle

Slet alle


1. **Opkaldslogger** → **Slet alle** → **OK** → **Slet alle?** eller tryk på , og vælg **Slet alle** → **OK**. 
2. Trykke **OK** () nøgle, slettes alle opkald i opkaldsfilerne.

Opkaldets varighed

Du kan se varigheden på: sidste opkald, modtagne opkald, udgående opkald og alle opkalds varighed.

Indstillinger



Indstillinger



Menu  → Indstilling → Alarm / Timer / Bluetooth

1. Alarm


Du kan indstille eller tilføje fra 1 til 5 alarmer.


2. Timer

Nedtællingsur er tilgængeligt, Tryk på **Valg** () → **Start** → **OK** () for at starte nedtællingsuret.


Stop nedtælling ved at trykke på den korte tast **Stop**  og tryk igen  2 gange for at genstarte.

3. Bluetooth

Du kan parre med et Bluetooth headset her. Hvis Bluetooth er **Til**, vises Bluetooth-ikonet  på displayet.

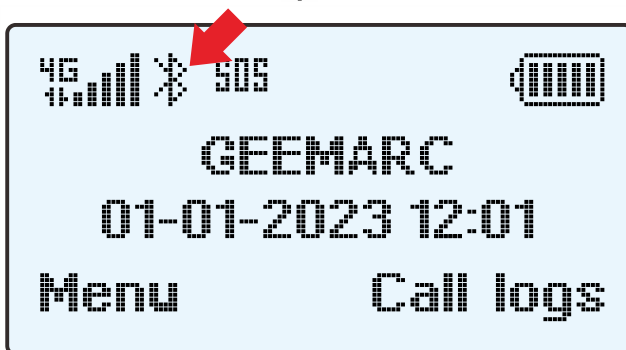









Vælg **Parret enhed** og **Tilføj ny enhed** for at søge efter den enhed, der skal parres.

Efter Vælg denne enhed, og tryk på genvejstasten **Parre**  for at parre.

Talemeddelser

Du kan optage dine egne beskeder (op til 5) og tildele dem en ringetone pr. kontakt.

Når du har optaget dine beskeder, skal du gå til **Kontakter**:

1. Brug  og  pil-tasterne til at vælge en telefonkontakten (fungerer ikke med SIM-kontakterne), og tryk på "**Indstillinger**".
2. Tryk på pil  for at vælge "**Detaljer**", og tryk på OK-tasten.
3. Tryk på "**Indstillinger**" tasten, vælg **Redigerer**, og tryk på OK-tasten.
4. Tryk på pil  for at vælge "**Standard ringetoner**", og tryk på OK-tasten.
5. Vælg **Rediger** ved at trykke på OK-tasten.
6. Tryk på  for at vælge "**Vælg fra lydfiler**", og tryk på OK-tasten.
7. Brug  og  pilene til at tildele lydfilen til din kontakt, tryk på funktionstasten Valg, vælg **OK**, og tryk derefter på OK-tasten for at gyldig.
8. Tryk på funktionstasten Valg, vælg **Gem**, og tryk på OK.
9. Tryk for  at afslutte.







SOS


Der følger et vandtæt SOS-armbånd med din CL9000. Du kan trykke på SOS-knappen fra armbåndet (eller SOS-tasten på telefonen) i nødstilfælde.


For at få dit SOS-nødopkald skal du konfigurere dine SOS-nødnumre.



Menu  → SOS

1. Tryk på  → SOS-indstilling,  Brug  og  pil-tasterne for at vælge **FRA**, "**SOS 5 numre**" eller "**Indstil callcenter**" og derefter  OK-tasten. Hvis SOS er indstillet til **ON**, vises ikonet "**SOS**"  på displayet.

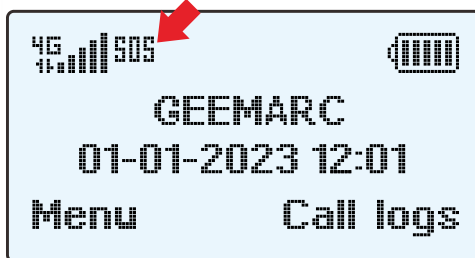

2. Gå til "**SOS-nummer**" for at indstille dine SOS-numre (max 5) eller "Nødtjeneste nummer" (Ikke brugbart i Danmark)
3. Gå derefter til "**SOS-besked**", der er en standardmeddelelse "**Jeg har udløst min SOS-nødkald. Kontakt mig med det samme**". Du kan redigere denne meddelelse. Brug **slet** (pil venstre) til at slette et tegn.
Bemærk: Under aktiveret SOS-opkaldsforløb sendes denne nødbesked også til dit SOS-nummer. (hvis nr. er indtastet)
4. Du kan nu indstille udgående nødkaldsstemme. Telefonen har en standard stemme og kan optage brugers stemme. Under nødsituationen afspilles nødstemmen til linjen.
5. Herefter kan du bruge dit SOS-armbånd eller **SOS-tast**  (på telefonen), hvis det er i nødstilfælde.

Bemærk: Hvis du vil tilføje et eller flere SOS-armbånd, kan du parre flere op til samme telefon.

SOS-funktion




I en nødsituation tryk 3 sekunder på SOS-knappen for at få hjælp. Når du trykker på **SOS-knappen**, ringer telefonen op til de indtastede kontakter med SOS-beskedene til de SOS-kontakter du har indkodet.

Der kan forudindstilles op til **5 numre** under SOS-kontaktnumre. Telefonen ringer automatisk til numre på denne SOS-liste en efter en. Hvis der registreres en optaget tone, eller et opkald afbrydes af modtager, ringes der straks til det næste nummer. Telefonen ringer til disse numre, indtil en af modtagerne tager opkaldet og trykker på "0" for at acceptere opkaldet, så SOS-opringning stoppes.

Hvis ingen trykker på **0**, ringer den gentagne gange til alle 5 numre. Hvis du vil afslutte SOS-tilstand, trykkes **3 sekunder** på **SOS-knappen** igen.

SOS-nummerindstillinger

Du kan indstille op til 5 SOS-numre eller indstille et nummer til et Callcenter.




1. Menu /OK → SOS → SOS-nummer → Vælg et SOS-nummer fra 1 til 5 → Indtast SOS-nummeret ved hjælp af det numeriske tastatur, der nu er gyldigt, tryk herefter på OK  (kontakter til hvem du gerne vil ringe til i nødstilfælde), eller
2. Menu /OK → SOS → Call center nummer → Indtast → Emergency Services-nummeret ved hjælp af det numeriske tastatur, der derefter er gyldigt ved at trykke på OK (hvis du vil foretage et SOS-opkald til nødopkaldscenter, skal du aktivere "Indstil callcenter" i SOS-tilstand → Indstil callcenter → OK.

SOS-registeret besked

Hvis du har indstillet tilstanden på callcenter, har du mulighed for at fjerne SOS-meddelelsen. Vælg **ON** for, at telefonen sender SOS-meddelelsen og **OFF** for at fjerne SOS-meddelelsen.

SOS-meddelelesesoptagelse

Optag en informativ besked, til dine hjælpere (kontakter) i nødsituationer, f.eks. "Det er Bente Hansens SOS-nødkald der ringer, jeg er faldet. Kom venligst hurtigt og hjælp mig, tryk på 0 for at acceptere opkaldet".

Menu  → SOS → Indstil udgående talebesked → Brugerdefineret → optager, tryk på OK-tasten  for at starte optagelsen. Hvis du er færdig med optagelsen, skal du trykke på Gem  (meddelelsen må max være 20 sekunder lang). Du har mulighed for at lytte til beskeden i vælg "PLAY"

Hvis du foretrækker SOS-fabriksmeddelelsen, skal du vælge "STANDARD" i stedet for brugerdefineret

SOS-SMS

Du kan indtaste SOS-tekstbeskeden. Dette sendes til det første SOS-nummer på din liste.

Menu  → SOS → SOS-meddelelse → Skriv en informativ tekstbesked → OK 

Du kan bruge "Slet" venstre softwarenøgle til at slette et tegn.

Parring af en ny SOS-fjernbetjening (armbånd)

Du har mulighed for at tilføje mere SOS-fjernbetjening.

Følg denne procedure for at parre et nyt:

Menu  → SOS → SOS-parringsindstillinger → Vælg tilføj en ny SOS-fjernbetjening → OK

Tryk på den røde knap på dit nye SOS-armbånd.

Skærmen viser "Parret med succes" for at bekræfte, at dit nye SOS-armbånd er parret.

Du har mulighed for at afinstallere din/-e SOS-fjernbetjening i vælg "Slet alle SOS-fjernbetjening", og bekræft med OK.

Udskift batteri i armbånd

Tryk kortvarigt på SOS-knappen på nødopkaldet. LED'en lyser. Hvis LED'en ikke længere lyser, når der trykkes på knappen og den holdes nede, skal du udskifte batteriet (som anvist).


- Fjern de 2 skruer på bagsiden af nødopkaldsarmbåndet ved hjælp af en lille skruetrækker med lige kærnv.
- Lågen åbnes i hakket, med en lille flad genstand.
- Udskift batteriet CR2025. Brug kun batteri af samme type. Vær opmærksom på korrekt polaritet.
- Luk lågen og placer de 2 skruer.

Rækkevidde

Din fjernbetjening har et **20-30 meter** transmissionsfelt mellem armbånd og telefonen, når der trykkes på den. Dette felt afhænger af materialerne i væggen og strålingen fra elektriske apparater.

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer

Frekvensområde	: 433 MHz (armbånd)
SOS armbånd rækkevidde	: Op til 20~30 meter (åbent område)
Armbånd vægt	: 30 gram
Driftsspænding	: Telefon base: DC 5V  2.0A, 10W : Genopladeligt Li-polymer batteri: 3.7V, 900mAh : Armbånd: 3V Li-metal Batteri CR2025
Radiofrekvens effekt	: <20 dbm

Tekniske specifikationer

Hovedtræk:

- 4G (LTE-FDD)
- 3G - CDMA: 2100 / 1900 / 900 / 850
- 2G - 850 / 900 / 1800 / 1900
- RF 433MHz SOS-armbånd
- NANO SIM-stik
- 3 x Foto taster
- Talende tastatur/opkalds-id (talenummer/bruger, der kan optages)
- SOS-besked, der kan optages af brugeren
- Plads til 500 nr. i telefonbog hukommelse
- + 90 dB høj ringetone. Ringetonen kan ændres af brugeren
- +40 dB forstærkningsvolumen med LED-indikator. Stor knap
- Stor prikmatrix-skærm (128 x 64)
- 13 LCD-visningssprog (engelsk / fransk / tysk / spansk / portugisisk / arabisk / hollandsk / italiensk / hebraisk / russisk / polsk / tjekkisk og dansk)
- 80 opkaldsinformation (tidspunkt/dag for opkald)
- 200 SMS-beskeder
- Realtids ur (12/24 timers display)
- Ny opkaldsindikation: LED og ikon
- Opkald tilbage til opkalds-id-hukommelse
- 2-vejs højttalertelefon med LED-indikation
- Sidste nummer genopkald
- Ringeindikator (rød LED)
- Høreappartskompatibel (ETS300381 optimal rækkevidde)
- Bluetooth (understøtter headset med Bluetooth)
- Skrå bordstøtte og vægmontering
- 3,5 mm stik til lyd indgang

Fejlsøgning

Telefonen vil ikke tændes

Kontroller at batteriet er isat korrekt og at strømadapteren er tilsluttet.

Der vises intet på displayet

Kontroller, at telefonen er tændt.

Kontroller, at batteriet og SIM-kortet er isat korrekt.

Kontroller, at strømadapteren er tilsluttet korrekt.

Displayet er låst, når telefonen er tændt

Indtast PUK for at låse SIM-kortet op.

Der vises ikke noget signal ikon

Der er ingen netværksforbindelse. Flyt evt. telefonen for at komme til et område, hvor der er dækning.

Kontakt din tjenesteudbyder.

Meddelelse om, at en funktion ikke er mulig

Din tjenesteudbyder leverer muligvis ikke den pågældende funktion, eller du skal muligvis abonnere på den pågældende tjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen.

Ingen visning under opladningsprocessen

Batteriopladningen er meget lav. Vent et par minutter.

Meddelelsen "Indsæt SIM" eller "Begrænset tjeneste" vises, sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.

Batteriet aflades hurtigt eller kan slet ikke oplades.

Oplad batteriet i min. 4 timer.

Manglende forbindelse til netværket

Signalet er for svagt, eller der kan være radiointerferens.

Er SIM-kortet installeret forkert eller beskadiget? SIM-kortet er beskadiget, skal du bestille et nyt kort hos tjenesteudbyder.

Kan ikke foretage et opkald

Kontroller, at dit mobilabonnement er gyldigt.

Kontroller, at SIM-kortet er gyldigt.

Sørg for, at du har trykket på knappen  .

Er SIM-kortet registreret på netværket?

Er funktionen til udgående opkald aktiveret?

Er der problemer med netværket, ring til din tjenesteudbyder.

Kan ikke besvare et opkald:

Kontroller, at dit mobilabonnement er gyldigt.

Kontroller, at SIM-kortet er gyldigt.

Er funktionen til indgående opkald aktiveret.

Er funktionen til omdirigering af opkald aktiveret.

Ingen hørbar ringetone

Sørg for, at ringetonen ikke er indstillet til lav position.

Sørg for, at telefonen ikke er i lydløs tilstand.

Ingen forstærkning

Kontroller, om forstærker-tasten er "Til". Det røde lys +40 dB lyse.

Støj, statisk, interferens under brug af telefonrør

Kontroller, at du har et korrekt netværk ved at kontrollere antallet af streger for netværk

Flyt telefonen og kontroller, om kvaliteten bliver bedre.

Opkalds-id-oplysninger vises ikke

Den, der ringer op, kan have tilbageholdt sine oplysninger.

Sikkerhedsoplysninger

Generelt

Brug kun den strømforsyning, der følger med produktet.

Brug kun det godkendte genopladelige batteri, der medfølger.

Åbn ikke telefonen (undtagen for at udskifte batteri eller SIM-kort) i basen. Kontakt forhandler for øvrige reparationer.

Bortskaf aldrig batterier i ild. Der er en alvorlig risiko for eksplosion og / eller frigivelse af giftige kemikalier.

Hvis du er sikker på, at du ikke kommer til at bruge telefonen i over en måned, skal du fjerne batteriet.

Rensning

Rengør telefonen med en blød klud. Brug aldrig polérmidler eller rengøringsmidler - de kan beskadige finishen eller elektriciteten indeni.

Miljømæssig

Udsæt ikke telefonen for direkte sollys. (eks. vindueskarme)

Sørg altid for, at der er en fri luftstrøm over telefonens overflader.

Anbring ikke nogen del af dit produkt i vand, og brug det ikke under fugtige eller fugtige forhold, f.eks. badeværelser.

Udsæt ikke telefonen for brand eller andre farlige forhold.

Telefonen er designet til at virke inden for et temperaturområde fra 5° C til 45° C.

Brug

Læs venligst nedenstående retningslinjer. Ikke at følge dem kan være farligt eller ulovligt.

TÆND SIKKERT

Tænd ikke enheden, hvis brug af trådløse telefoner er forbudt, eller når det kan forårsage interferens eller fare.

TRAFIKSIKKERHED KOMMER I FØRSTE RÆKKE

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til at betjene køretøjet under kørslen. Din første overvejelse under kørslen bør være trafiksikkerhed.

INTERFERENS

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for interferens. Dette kan påvirke ydeevnen.

SLUK PÅ HOSPITALER

Følg eventuelle begrænsninger. Sluk enheden i nærheden af medicinsk udstyr.

SLUK I FLY

Følg eventuelle begrænsninger. Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

SLUK VED TANKNING

Brug ikke enheden på et tankningssted. Brug ikke i nærheden af brændstof eller kemikalier.

SLUK I NÆRHEDEDEN AF SPRÆNGNING

Følg eventuelle begrænsninger. Brug ikke telefonen, hvor sprængningen er i gang.

Oplysninger om høreapparater

Hvis der er trykt "**Kompatible med høreapparater**" på æsken på denne model, gælder følgende forklaring: Aktivér telespolefunktion i høreapparaterne og hold telefonrøret ud for øret, for direkte lydmodtagelse,

Når nogle mobiltelefoner bruges i nærheden af nogle høreapparater (høreapparater og Cochlear implantater), kan brugerne registrere en summende eller hvinende støj. Nogle høreapparater er mere immune end andre over for denne interferensstøj, og telefoner varierer også i mængden af interferens der genererer.

Den trådløse telefonindustri har udviklet vurderinger for nogle af deres mobiltelefoner for at hjælpe høreapparatbrugere med at finde telefoner, der kan være kompatible med deres høreapparater. Ikke alle telefoner er blevet bedømt. Telefoner, der er klassificeret, har klassificeringen på deres kasse eller en etiket på kassen. Vurderingerne er ikke en garanti. Resultaterne varierer afhængigt af brugerens høreapparat og høretab. Hvis dit høreapparat er sårbart over for interferens, kan du muligvis ikke bruge en klassificeret telefon korrekt. At prøve telefonen med dit høreapparat er den bedste måde at vurdere den til dine personlige behov.

Netværkstjenester

Hvis du vil bruge telefonen, skal du tilkøbe eller abonnere på en netværkstjeneste. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af funktioner i det trådløse netværk. Disse netværkstjenester er muligvis ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal muligvis lave specifikke aftaler med din tjenesteudbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Din tjenesteudbyder skal muligvis give dig yderligere instruktioner til deres brug og forklare, hvilke gebyrer der gælder. Nogle netværk kan have begrænsninger, der påvirker, hvordan du kan bruge netværkstjenester. For eksempel understøtter nogle netværk muligvis ikke alle sprogafhængige tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at visse funktioner deaktiveres eller ikke aktiveres på din telefon. I så fald vises de ikke i enhedens menu. Din telefon kan også være specielt konfigureret. Denne konfiguration kan omfatte ændringer i menu-navne, menu rækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Garanti

Geemarc produkter er produceret og testet i henhold til seneste produktion metoder. Gennemførelsen af nøje udvalgte materialer og stærkt udviklede teknologier sikrer en problemfri funktion og lang levetid. Garantien er 2 år, gælder ikke for de genopladelige batterier eller strømforsyninger. Skader forårsaget som følge af forkert drift, håndtering, ukorrekt anvendelse eller opbevaring, forkert tilslutning eller installation, er force majeure eller anden ydre påvirkning er ikke omfattet af betingelser for garanti. Ved en reklamation, forbeholder vi os ret til at reparere eller udskifte defekte dele eller give en erstatningsenhed. Geemarc garantien begrænser på ingen måde dine juridiske rettigheder.

Yderligere informationer kan læses på www.geemarc.com.

VIGTIGT: DIN KVITTERING gælder som garantibevis og skal opbevares og fremvises i tilfælde af et garantikrav.

Bemærk: Garantien gælder kun for Danmark

ERKLÆRING: Geemarc Telecom SA erklærer hermed, at denne CL9000 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i radioudstyrsdirektivet 2014/53/UE.

Overensstemmelseserklæringen kan hentes på:
www.geemarc.com.

Direktiver om genanvendelse

Elektrisk forbindelse: Telefonen er designet til at fungere fra en 230V 50Hz forsyning. (Klassificeret som »farlig spænding« i henhold til EN62368-1 standard). Telefonen slukkes ved at afbryde strømmen, på stikkontakten eller bag på telefonen. Når du installerer telefonen, skal det være i nærheden af en stikkontakt.

SAR Test:

Head : 0.01 W/kg

Body : 1.647 W/kg

LIMBS : 2.977 W/kg

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er blevet indført for produkterne, når deres levetid er genanvendt på den bedste måde.

Når dette produkt er opbrugt, må du ikke lægge det i din husholdningsaffaldsspand.



Brug en af følgende bortskaffelsesmuligheder:

- Deponér produktet i en offentlig genbrugsstation under elektronikaffald.
- Eller aflever det gamle produkt til forhandleren. Hvis du køber en ny, skal de acceptere den.

Så hvis du respekterer disse instruktioner, sikrer du beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

Made for Geemarc Telecom S.A. in China



UGCL9000_En_V0.9



Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

E-mail: help@geemarc.com

Telephone: 01707 387602

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

www.geemarc.com

geemarc™
Hear the Difference

CL9000



Dansk importør og forhandler af CL9000 Mobil bordtelefon

SCANTONE
Dansk Høredesign

Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup - Tlf. 4619 5100

E-mail: info@scantone.dk

www.scantone.dk