



GEWA Maxi

Brugervejledning

Art. nr: 461130

DK 7.0

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Om GEWA Maxi	3
Erklæret formål	3
Om dette dokument	3
Oversigt over GEWA Maxi	4
Inkluderede dele	4
Inkluderede dokumenter	4
Kom i gang med GEWA Maxi	5
Lav et overlay	5
Tilføj et overlay	5
Isæt batterier	6
Ændre de grundlæggende indstillinger	6
Påsæt plastikhætter	8
Fastgør velcrobåndene	9
Program GEWA Maxi	10
Feedback-signaler	11
Makroindspilning	11
Indspille et signal	12
Brug GEWA Maxi	15
Vedligeholdelse	15
Opladning af batterierne	15
Rengøring GEWA Maxi	16
Gendan til fabriksindstillinger	16
Fejlfinding	17
Opbevaring og bortskaffelse	18
Opbevaring	18
Bortskaffelse	18
Produktspecifikationer	19
Tilbehør	19
Vigtig information	20
Kontaktoplysninger	23

Introduktion

Om GEWA Maxi

GEWA Maxi er en fjernbetjening med store knapper, der kan mærkes med billeder eller symboler til kognitiv støtte. Et indbygget fingerstyr gør det nemt at trykke på den højre knap.


Produktet anvendes til dagligdags opgaver som:

- Styring af IR-betjent hjemmeelektronik.
- Styring af lamper, ventilatorer, gardiner, strømudtag og døre med GEWA-LINK IR.
- Styring af døre på en sikker måde med et 4096-kodet signal.

Erklæret formål


GEWA Maxi er en stor og brugervenlig fjernbetjening, der er beregnet til at støtte personer, der ikke kan bruge en standardfjernbetjening på grund af motoriske eller kognitive problemer eller synsnedsættelse. Enheden kan hjælpe brugeren med at styre elektronisk udstyr i hjemmet, herunder TV-apparater, belysning samt vindues- og dørgreb. Enheden er beregnet til indendørs brug.

Om dette dokument

 Læs de vigtige oplysninger på side 20, inden produktet tages i brug.

Denne brugervejledning beskriver opsætning og anvendelse af produktet. Den henvender sig til teknikere og supportpersoner, der skal konfigurere produktet og lære brugeren at bruge det. Instruktionerne i denne brugervejledning forudsætter, at læseren har kendskab til konceptet med infrarøde (IR-) signaler.

Oversigt over GEWA Maxi

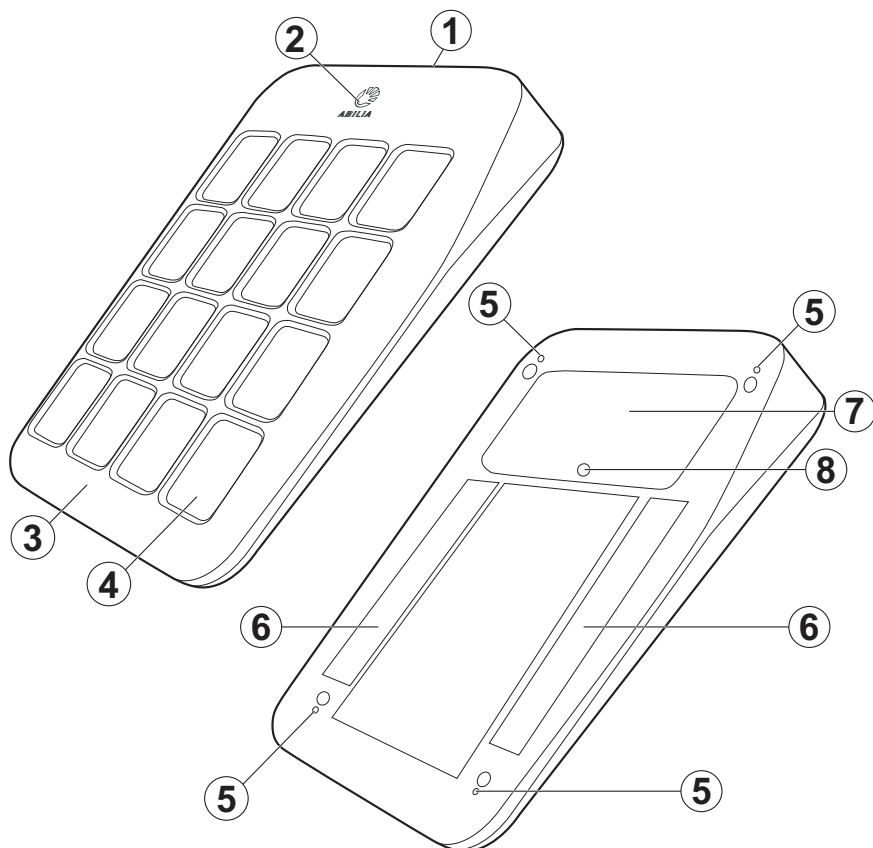

1. IR-modtager
2. LED-indikator
3. Fingerstyr
4. 16 programmerbare knapper
5. Bagpladeskruer
6. Plads til velcrobånd
7. Batterirum
8. Batterirumsskrue

Inkluderede dele

- GEWA Maxi
- 4 AA-batterier
- 16 plastikhætter
- 8 velcrobånd
- 1 plastiksleeve

Inkluderede dokumenter

- Brugervejledning (dette dokument)
- Overlay-print

Kom i gang med GEWA Maxi



Lav et overlay

Med et overlay kan du tilpasse GEWA Maxi knapperne til kognitiv støtte. Overlays kan oprettes og udskrives på www.gewa.se/overlay, eller du kan tegne et.



Tilføj et overlay

Før du skifter overlay, skal du sørge for at have disse ting ved hånden:

- Et printet overlay
- En flad skruetrækker

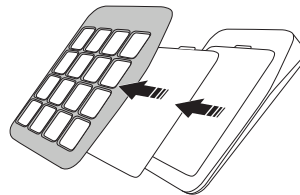
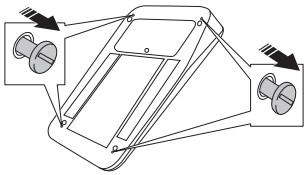


1. Løsn skruerne helt, indtil du hører skruerne klikke.
2. Tag fronten og plastiksleeve af.

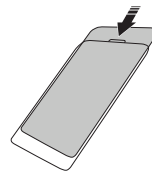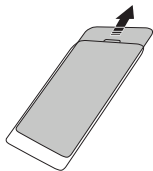

3. Tøm plastiksleeve.

4. Indsæt det nye overlay i sleeve.

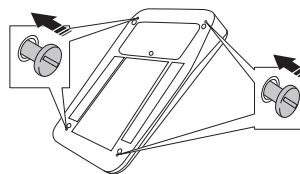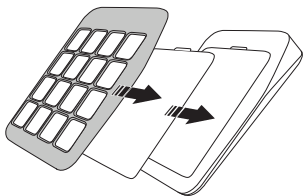

5. Sæt sleeve og fronten på igen.

6. Stram skruerne godt til.

Isæt batterier

Se *Opladning af batterierne* på side 15.

Ændre de grundlæggende indstillinger

TIP: Brug overlay-printet, der følger med, GEWA Maxi til at se indstillingsknapperne på enheden.

Der er fem forskellige grundindstillinger for : GEWA Maxi


- **Lydstyrke:** Lydstyrken, når du trykker på en knap.
- **Tone:** Tonen af feedback fra GEWA Maxi.
- **Knapforsinkelse:** Den tid, du skal holde en knap nede for at udløse en handling.
- **LED:** LED-indikatorens lysstyrke.
- **Vibration:** Vibrationernes styrke, når der trykkes på en knap.

Hver indstilling har fire værdier. Naviger gennem værdierne ved at trykke på indstillingsknappen gentagne gange. LED'en skifter farve for hver værdi som vist i tabellen. Standardindstillingsværdien er fremhævet med **fed**.

Indstilling

Lydstyrke	Fra	Lav	Normal	Høj
Tone	Lav	Medium	Høj	Højeste
Knapforsinkelse	Fra	0,3 sekunder	0,6 sekunder	1 sekund
Vibration	Fra	Lav	Normal	Høj



For LED-indstillingen skifter LED'en lysstyrke fra lav til høj. Den kan indstilles til Fra, Lav, Normal (standard) og Høj.

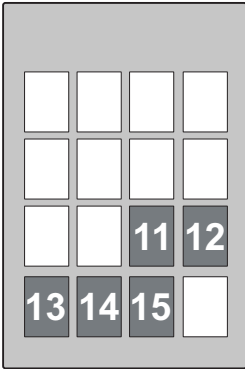


Indstillingsknapper

- 11 Lydstyrke
- 12 Tone
- 13 Knapforsinkelse
- 14 LED
- 15 Vibration



Gør følgende for hver indstilling, du ønsker at ændre:

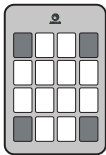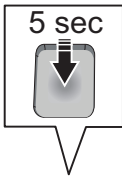

1. Hold alle fire knapper nede, indtil LED'en lyser hvidt.

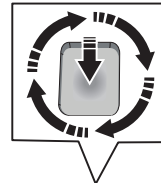

2. Tryk på indstillingsknappen gentagne gange for at navigere til den ønskede værdi.

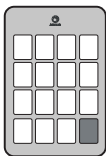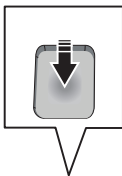


3. Tryk Enter for at gemme. LED'en blinker grønt.


Påsat plastikhætter

Når du ikke bruger alle knapper på overlay'et, kan du skjule de ubrugte med de medfølgende *plastikhætter*. Plastikhætterne gør knapperne usynlige, og overfladen føles glat.


BEMÆRK: Sørg for, at alle indstillingsændringer er foretaget, før du anbringer plastikhætterne. Plastikhætterne kan blokere en eller flere af indstillingsknapperne.

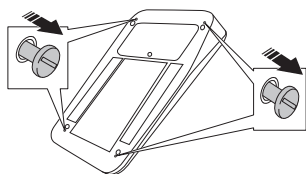


1. Løsn skruerne helt, indtil du hører skruerne klikke.

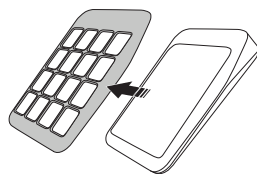


2. Tag fronten af.

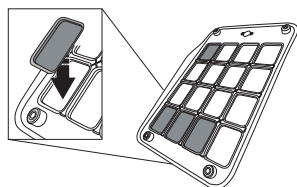

3. Vend fronten og tryk plastikhætterne på plads.

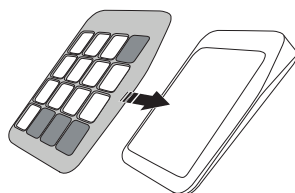


4. Sæt fronten på igen.

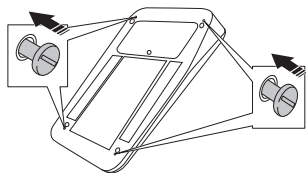


5. Stram skruerne godt til.

Fastgør velcrobåndene


GEWA Maxi leveres med otte velcrobånd, som du kan fastgøre i bunden for at sikre, at produktet bliver liggende på bordet.

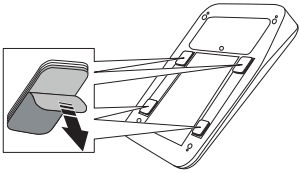

1. Sørg for, at to strimler hænger sammen. Træk beskyttelsespapiret af en af strimlerne, og sæt dem på bagsiden.

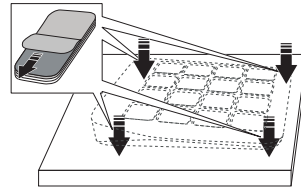

2. Træk de andre beskyttelsespapirer af, og sæt dem GEWA Maxi fast på den overflade, du ønsker at bruge dem på.

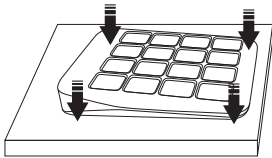

3. Tryk godt til for at fastgøre strimlerne, og lad dem være i fred i 30 minutter for bedre vedhæftning.

Program GEWA Maxi

⚠ FORSİGTİGHED: Må ikke anvendes GEWA Maxi sammen med medicinsk udstyr, der er af en højere klasse end klasse 1.

TIP: Brug det overlay-print, der følger GEWA Maxi med, til at se de knapper, der bruges til programmering på enheden.

De 16 knapper på GEWA Maxi er forprogrammeret med GewaLink-kanalerne 16-31: Den første knap er kanal 16, den anden er kanal 17 osv. Det betyder, at GEWA Maxi kan bruges direkte. Hver knap kan dog omprogrammeres efter brugerens behov.




GEWA Maxi kan programmeres til følgende indgangssignaler.

Signal	Brug	Eksempel på anvendelse
IR	Alle typer IR-sendere.	Fjernbetjening til TV eller kabelboks.
GewaLink	Ethvert af Abilias IR-modtagere.	Andromeda Socket eller vinduesåbner.
4096	Fungerer med streng adgangstilladelse.	Døre til en lejlighed eller et hus.

BEMÆRK: GEWA Maxi afslutter automatisk indspilningstilstanden efter 30 sekunders inaktivitet. Fejlsignalet afspilles, og ændringerne gemmes ikke.

Feedback-signaler

Under programmeringen giver GEWA Maxi feedback med LED-indikatorens farve og forskellige signaler for at angive forskellige meddelelser.



Signaltype	Tone	Forklaring af toner
Indstilling		Tre stigende toner
Succes		Tre positive toner
Fejl		Otte negative toner

Makroindspilning



Hver knap på GEWA Maxi kan programmeres til at udføre en enkelt handling eller en serie af flere handlinger med et klik (en makro). For eksempel kan en række handlinger være at tænde TV'et og kabelboksen og derefter gå til kanal 4 med et enkelt tryk på en knap.

I *Indspille et signal* på side 12 er der mulighed for at programmere en makro.

Indspille et signal

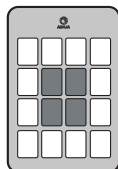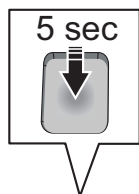


1. Hold de fire knapper nede, indtil LED-indikatoren blinker grønt for at skifte til indspilningstilstand.

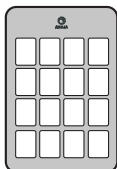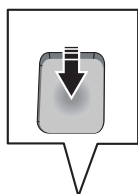

2. Tryk på den knap, du vil indspille til. LED-indikatoren lyser konstant grønt.





3±1 cm

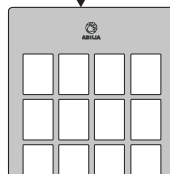



3. For IR: Placer senderen, der skal indspilles, f.eks. en TV-fjernbetjening, ca. 3 cm fra IR-vinduet.

4. Vælg en af de følgende muligheder:

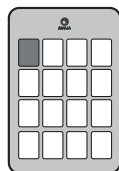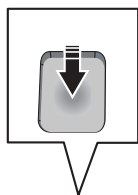



For IR:

Tryk på knap 1. En tone angiver, at GEWA Maxi er klar til indspilning.

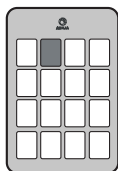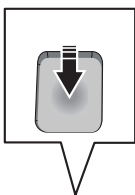

For GewaLink:


Tryk på knap 2. Vent, indtil LED-indikatoren lyser konstant hvidt.

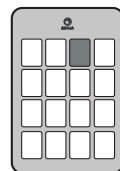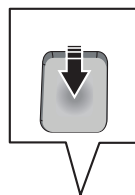

For 4096:

Tryk på knap 3. Vent, indtil LED-indikatoren lyser konstant blå.

5. Vælg en af de følgende muligheder:

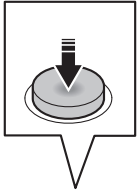


For IR:

Tryk på den knap, du vil indspille, og hold den inde på senderen.

Slip knappen, når LED-indikatoren lyser rødt.


Gentag, indtil LED-indikatoren blinker gult.

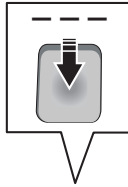

For GewaLink:

Indtast den 3-cifrede kode (000–128) på enheden, der skal indspilles.

Indstillingsmelodien afspilles, og LED-indikatoren blinker gult.

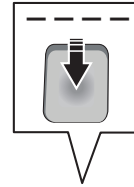


For 4096:

Indtast den 4-cifrede kode (0000–4095) på enheden, der skal indspilles.

Indstillingsmelodien afspilles, og LED-indikatoren blinker gult.


TIP: Hvis optagelse af IR mislykkes:

- Ændr afstanden mellem fjernbetjeningen og GEWA Maxi.
- Sørg for, at intet lys, f.eks. stærkt sollys, forstyrrer GEWA Maxi.
- Udfør proceduren igen, men tryk på og slip fjernbetjeningsknappen i stedet for at holde den inde.

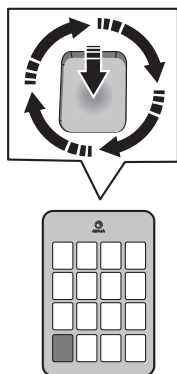

6. Vælg en af de følgende muligheder:

- Hvis du vil indspille en anden handling:
 - a. Tryk på Forsinkelse gentagne gange for at indstille forsinkelsen indtil næste handling. LED-indikatorens blinkende mønster angiver forsinkelsen indtil næste handling.
 - b. Tryk på Enter én gang for at gemme og fortsætte til næste del af indspilningen.
 - c. Gentag trin 3–6.
- Hvis du er færdig med at indspille, skal du gå til næste trin.

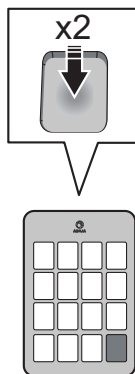

7. Tryk på Enter én gang for at gemme indspilningen.

8. Tryk på Enter for at forlade indspilningstilstand.

Brug GEWA Maxi


Brug GEWA Maxi i samme rum som den enhed, du ønsker at styre. GEWA Maxi er ikke følsom over for den retning, den peges i.

Vedligeholdelse


Opladning af batterierne

Når batterierne skal udskiftes, blinker LED-indikatoren rødt, og et langt og tre korte bip gentages to gange.


Før du går i gang, skal du sørge for at have følgende ting ved hånden:

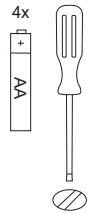

BEMÆRK: Brug ikke-genopladelige, alkaliske batterier til GEWA Maxi. Andre batterier er ikke stærke nok til at levere strøm. GEWA Maxi

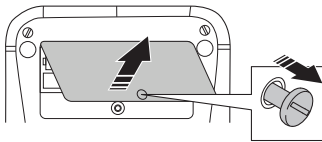


1. Løsn skruen, og åbn batterirummet.

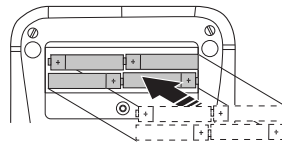

2. Fjern de gamle batterier, og sæt de nye i.

BEMÆRK: Pluspolerne skal flugte korrekt.

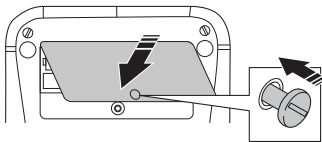





3. Luk batterirummet, og stram skruen.

Rengøring GEWA Maxi

Rengør GEWA Maxi med en mikrofiberklud og lidt vand. For at rengøre det plastiksleeve, der rummer overlayet, skal man løsne de bageste skruer og fjerne fronten.

Gendan til fabriksindstillinger

Det kan være nødvendigt at nulstille GEWA Maxi i forbindelse med renovering af produktet eller fejlfinding. Gendannelse til fabriksindstillinger fjerner al programmering og alle indstillinger.

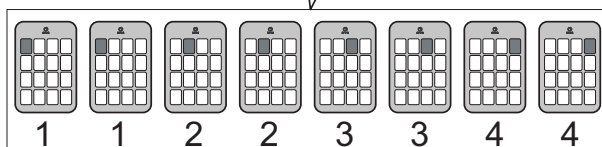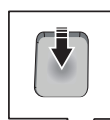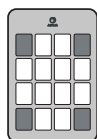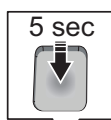

1. Hold de fire knapper nede, indtil LED'en lyser hvidt.

2. Tryk på knapsekvensen 11223344 for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne.

Resultat: LED'en blinker grønt i et par sekunder, og succes-signalet høres, hvis nulstillingen er lykkedes.

Fejlfinding

Hvis du har brug for support til GEWA Maxi, kan *Kontaktoplysninger* du se på sidste side i denne brugervejledning eller gå ind på www.abilia.com.

Problem	Årsag	Løsning
Programmering GEWA Maxi mislykkedes.	Batteriniveauet i senderen er lavt.	Udskift batterierne i senderen.
	Batterierne i GEWA Maxi er flade eller næsten afladede.	Udskift batterierne i GEWA Maxi, se <i>Opladning af batterierne</i> på side 15.
Programmering GEWA Maxi af IR-signaler mislykkedes.	Senderen er for tæt på eller for langt væk fra IR-modtageren på GEWA Maxi.	Øg eller reducer afstanden mellem GEWA Maxi og senderen.
	GEWA Maxi genkender eller modtager ikke sendersignalerne.	Gentag proceduren i <i>Indspille et signal</i> på side 12, men tryk og slip knappen i stedet for at holde den inde i trin 5.
	Senderen bruger radio- eller Bluetooth-signaler.	Sørg for, at senderen ikke bruger radio- eller Bluetooth-signaler. Kun IR-signaler kan programmeres.
	Eksterne kilder til infrarødt lys, såsom stærkt sollys, forstyrrer GEWA Maxi.	Beskyt GEWA Maxi mod udefrakommende kilder til infrarødt lys.
Fronten kan ikke tages af.	Bagpladens skruer er ikke skruet helt ud.	Bliv ved med at løsne skruerne på bagpladen, indtil du hører et klik.
Pladen til batterirummet kan ikke tages af.	Skruerne i batterirummet er ikke skruet helt ud.	Fortsæt med at løsne skruerne i batterirummet, indtil du hører et klik.

Opbevaring og bortskaffelse

Opbevaring

Produktet skal opbevares indendørs ved stuetemperatur og må ikke udsættes for fugt.

Opbevar produktet ved mellem -10 og 50 °C.

 **FORSIGTIGHED:** Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode.

Bortskaffelse



Produktet indeholder elektriske komponenter, der skal genanvendes. Bortskaf produktet på et egnet sted.

Produktspecifikationer

Mål, LxBxH	242 x 160 x 42 mm
Vægt	540 g
Temperatur (opbevaring)	-10-50 °C
Temperatur (brug)	5-40 °C
Batteritype	4 ikke-genopladelige AA-alkaliske batterier
Batteritid:	2 år, baseret på 100 transmissioner om dagen
IR-rækkevidde	Maks. 50 m
Omverdenskontrol	GewaLink, GEWA 4096 og indspillede IR-signaler
Anslået levetid	5 år

Tilbehør

Du kan finde flere oplysninger om GEWA Maxi og tilbehør hertil på www.abilia.com/intl/our-products/environmental-control/controllers/gewa-maxi eller ved at scanne QR-koden.





Scan mig!

Vigtig information

Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne brugervejledning.

Sikkerhedsdefinitioner

 **ADVARSEL:** Der er risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges.

 **FORSIGTIGHED:** Der er risiko for beskadigelse af produktet, hvis instruktionerne ikke følges.

BEMÆRK: Oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

TIP: Yderligere oplysninger, der kan forbedre brugen af produktet.

Alvorlige hændelser

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal denne rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i dit land. En hændelse anses for alvorlig, hvis den direkte eller indirekte har medført eller kunne have medført en patients, brugers eller en anden person død, midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers eller en anden persons helbredstilstand eller en alvorlig trussel mod folkesundheden.

Overensstemmelse med krav til medicinsk udstyr

GEWA Maxi markedsføres som et teknisk hjælpemiddel til personer med handicap og er i overensstemmelse med alle nødvendige krav, bestemmelser og direktiver vedrørende medicinsk udstyr.

Produktansvar

Produktet er udviklet og risikovurderet i henhold til ISO 14971. Manualen og de tekniske specifikationer er udarbejdet i henhold til sikkerhedsvurderingerne i risikoanalysen. Tag altid højde for sikkerheden ved brug af produktet. Abilia AB er ikke ansvarlig for konsekvenser som følge af forkert brug eller installation af produktet. Enhver form for skade eller manipulation med produktet giver bortfald af rettigheder og fra beskrivelse af leverandørens ansvar. Produktets estimerede levetid gælder, når det anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner.

Kontaktoplysninger

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Det Forenede Kongerige

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Det Forenede Kongerige
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

