

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, stof og plastik efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe.

Ordre:

År: 2024

Produkt: Zoe

CE



EN21856:2022, testet efter standarden EN71-3



Hvilestolen Zoe er specielt designet til personer, der ofte oplever fysisk spænding og rastløshed. Hvilestolen hjælper med til, at give afslapning og lindring i hverdagen. Det som Soe giver, er ro til kroppen og følelsen af, at få en omfavelse, da de tunge arme ligger hen over kroppen. Skal bruges til stille stunder og timeout.

Sørg for at gemme denne originale brugsanvisning til senere brug.

Zoe hvilestol

Dansk design - produceret i EU - www.oliz.dk

Oliz/ Koko-Nora - Orionvej 2A- 7430 Ikast -DK -tlf +45 20 78 79 54



Vigtige instruktioner før brug af produktet:

Oliz/Koko-nora® hvilestolen Zoe er en fremragende støtte til at reducere stress og slappe af i kroppen, beregnet til brug i et stille rum, når man har brug for en pause. De tunge arme hviler på kroppen og frigiver oxytocin, hvilket reducerer stress. Det kræver to personer at flytte stolen. Flyt ikke stolen alene! Læg evt. armene på sædet, når stolen flyttes for at undgå revneskader. Se vedlagte oplysninger. Oliz Koko-Nora® hvilstolen er designet til personer fra +15 år, maksimal vægt 95 kg.



Dimensioner: længde inkl. puf 2000 mm - længde puf 50 cm - bredde 870 mm - højde 850 mm

Vægt: 10 kg - Hvert armlæn vejer 4 kg

Materiale på stoffet: 100% kunstlæder/PU-materiale

Materiale indeni armlænet: 100% polyethylen

Materiale indeni kroppen: 100% EPS-pellets Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Andre praktiske oplysninger:

Rengør Oliz/Koko-Nora® stolen med en blød klud og brug et rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel, der er egnet til kontakt med kroppen. Rengør stolens overflade med en klud med rent vand for at undgå skader på stoffet ved brug af midler, der indeholder meget alkohol. For at beskytte materialet bør Oliz/Koko-Nora® stolen kun bruges indendørs. Hold stolen væk fra skarpe/varme genstande og åbne flammer. Oliz/Koko-Nora® ville virkelig ønske, at vi kunne garantere, at vores produkter tåler alle former for bid, men det kan vi ikke. Tænder betragtes som meget skarpe genstande, så hvis en person bider i produktet, kan der komme et hul i det. Det anbefales at bruge begge hænder, når produktet flyttes, og ikke trække i den. Hvis produktet transporteres i et køretøj, skal det sikres for at undgå, at den flytter sig og skader nogen. Hvis der er et hul, skal man straks rejse sig fra stolen. Stolen skal regelmæssigt kontrolleres for eventuelle skader, da løse genstande og indhold kan være farlige for børn under 3 år. Sørg for, at gulvet under stolen er rent, da sand og andre genstande vil beskadige stoffet. Denne skade vil ikke være dækket af garantien.

Vigtig:

Sørg for, at produktet anvendes korrekt, og følg de instruktioner, der er angivet i det separate dokument. Det er vigtigt at holde øje med personen under brug, da produktet er tungt og kan have fysiske virkninger på kroppen. Et Oliz/Koko-nora® produkt skal kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet og afviser det gentagne gange, skal produktet fjernes og ikke bruges til den pågældende person. Hvis produktet accepteres, skal det betragtes som et hjælpemiddel mod uro og stress og anvendes i begrænsede tidsintervaller afhængigt af personens behov. Når man begynder at bruge dette produkt, er det godt at prøve det i 5-10 minutter for at vurdere effekten, og derefter øge tidsintervallet baseret på behov. Hvis personen vænner sig for meget til produktet, mindskes effekten. Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes forsigtigt. Smid ikke med armene, da deres vægt kan forårsage skader både på produktet og på personer i nærheden af den.

Advarsel:

Hvis personen er alvorligt begrænset af motoriske og/eller fysiske tilstande, skal produktet anvendes med særlig forsigtighed. Brug ikke produktet, hvis personen ikke er i stand til at fjerne det selv! Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi generelt, at personer, der bruger et Oliz/Koko-Nora® produkt, er under opsyn under brugen. Efter brugen af produktet skal personer, der har behov for opsyn, holdes uden for produktets rækkevidde. Sørg for, at luftvejene holdes frie under brug af produktet. Hvis personen har vejrtrækningsproblemer, må produktet ikke placeres på brystet, da vægten kan have en negativ effekt på vejrtrækningen og forårsage kvælningssfare. Alle produkter med vægt skal anvendes med forsigtighed, da vægten kan forårsage blokering af blodcirkulationen. Et Oliz/Koko-Nora® produkt må ikke anvendes i nærheden af vand, da det kan forårsage drukning. Hvis personen har hjerte- eller lungesygdomme, skal man kontakte sin læge, hvis man ønsker at bruge dette produkt.