



medemagruppen



# Brugsanvisning Fitform 576 Nordic2



# Indholdsfortegnelse

Forord	4
1. Advarsler og generel information	5
2. Monteringsanvisning af stol før brug	7
3. Brugsanvisning 576 Nordic2	9
4. Brugsanvisning fit-MOTION	12
5. Brugsanvisning tilbehør	15
6. Fejlsøgning	21
7. Rengøring	21
8. Vedligeholdsanvisning	21
9. Opbevaring	22
10. Indstilling af stolen	22
11. Tekniske data	24

# Forord

Tillykke med den nye Fitform 576 Nordic2 stol som vi tror du vil få meget glæde af. Fitform Nordic produceres efter de højeste kvalitetsstandarder når det gælder funktionalitet, holdbarhed, sikkerhed og exceptionel siddekomfort.

Denne manual er skrevet til alle brugere af stolen, både for den som sidder i stolen samt eventuelle pårørende, plejepersonale og terapeuter.

LÆS MANUALEN GODT FØR BRUG. I tillæg til anbefalinger og advarsler og generel brugsanvisning, vil du også finde information om tilbehørsløsninger og rengøring. Følger du anvisningerne nøje, vil du få glæde af stolen i mange år.

# 1. Advarsler og generel information

Din Fitform 576 Nordic2 stol er blevet nøje kontrolleret af producenten Wellco ([www.wellco.nl](http://www.wellco.nl)) og importøren Medema Norge AS ([www.medema.no](http://www.medema.no)) og vil blive leveret klar til brug. Tjek dog at ryggen er korrekt monteret (se anvisning side 7).

Læs og følg denne del af manualen nøje, da den indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Kontroller for en sikkerheds skyld at stolen er helt monteret før brug.



## Løftemekanismen

**ADVARSEL:** Stolen er udstyret med en løftemekanisme med kraftige motorer. Før brug må du altid forvise dig om, at intet kan komme i konflikt med eller sætte sig fast i mekanismen – vær specielt opmærksom hvis det er små børn eller dyr i nærheden.



## Placering af stolen

- Stolen må placeres så alle stolens reguleringer kan bruges uden at stolen rammer noget.
- Påse at ledningen ligger fornuftig og ikke medfører fare for at snuble
- Påse at stolen eller noget andet ikke står på stolens ledninger.
- For at undgå tipperisiko må stolen altid stå på et plant underlag.
- Undgå glat eller ujævnt underlag som stolen kan glide på
- Stolen må placeres så man altid kan tage ledningen fra.
- Fitform Nordic er kun beregnet til indendørs brug

## Brug af stolen



- Stolen er konstrueret til brug af en person
- Maksimal brugervægt er angivet på stolens skilt
- Brug ikke stolen hvis bruger vejer mere end angivet maksimal brugervægt
- Belast ikke motorerne unødvendig, eller kontinuerligt.
- Vær specielt opmærksom når det er børn i nærheden, forlad da ikke stolen uden tilsyn
- Undgå at sætte dig hårdt ned i stolen, men brug gerne stolens oprejsningsfunktion i modsat rækkefølge - når du sidder dig. Følg stolens bevægelser ned i siddende stilling, dette vil skåne stolen (specielt vigtig ved tunge brugere)
- Stolen må ikke modificeres på nogen måde uden leverandørens godkendelse
- Stå aldrig på sædet eller på fodbrættet
- Det er kun sædet der er beregnet til at sidde på, sid aldrig på fodbrættet, armlæen osv.
- Leverandør og producent har intet ansvar for uautoriseret brug
- Selv om stolen er grundig testet efter alle gældende normer, kan man aldrig se helt bort fra at den kan reagere på elektromagnetiske felter som f.eks. alarmsystemer, mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr. Stolen må i så fald frakobles umiddelbart.



## Transport

Det er ikke meningen at stolen skal transporteres efter at den er leveret til din adresse. Skal den flyttes et andet sted hen må det ske med samme varsomhed som for andre møbler. Påse at stolen ikke kan rykke sig under transporten. Wellco anbefaler at stolen transporteres i oprejst stilling, ikke med benstøtten ude eller ryggen bagover. Helt nede er bedst. Beskyt stolen mod meget høje eller lave temperaturer, høj fugtighed eller anden negativ effekt fra vejret. For bedst mulig beskyttelse mod støv og urenheder bør den tildækkes, gerne med et tæppe. Stolene bør bruges, transporteres og lagres indenfor følgende forhold:

Temperatur: 10-40 °C

Relativ fugtighed: 30-75%

Luftryk: 70kPA -106kPA



## Ved driftstop eller fejl på stolen

Tjek altid først at ledningen/stikket er koblet til kontakten. Ved alle andre typer fejl på stolen, f.eks. skade på ramme, motorer, løftmekanisme eller elektriske komponenter, bør man tage stikket ud af kontakten og kontakte Hjælpemiddelcentralen/forhandler, som vil stå for reparation snarest mulig.

Producent/forhandler er ikke ansvarlig for nogen skade som opstår på grund af uforsigtig eller forkert brug, ref brugermanualen.



## Vedligehold

For at sikre at mekanismen ikke tørrer ud, anbefaler vi at du sprayer bevægelige dele med ikke aggressive smøremidler som f.eks. siliconespray eller tynd olie. Dette kan købes i butikkerne. Specielt gælder dette hvis man hører lyde fra mekanismen. Vi anbefaler at man min. 1 gang årligt kontrollerer stolen vedrørende sikkerhed og vedligehold. Reparationer af stolen skal kun udføres af kyndige personer autoriseret af leverandør eller producent.

## Tekniske specifikationer





Fitform Nordic er testet og godkendt i henhold til følgende standarder: EN12182:2012, EN16139:2013, EN1021-1 2014/EN1021-2 2014, EN60601-1(3rd edition) EN60601-1-2:2007 + Cor (Mar 2010)

Produktet er CE mærket i henhold til ovennævnte i kombination med tilhørende dokumentation, som denne manual og procedurer i henhold til EØS direktiv 93/42/EEC.

## 2. Monteringsanvisning af stol før brug

Fitform 576 Nordic2 leveres færdig monteret og tilpasset fra leverandør. Eventuelle efterjusteringer foretages på stedet ved levering. Senere justeringer eller tilpasninger bestilles af din hjælpemiddelcentral eller ansvarlig leverandør.

Kontroller for en sikkerheds skyld at stolen er helt monteret før brug. Tjek specielt at ryggen er helt monteret, da den i nogen situationer leveres løst eller skubbes frem ved transport.

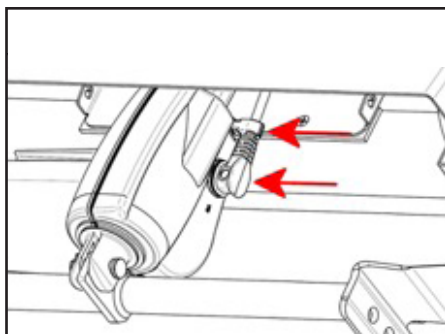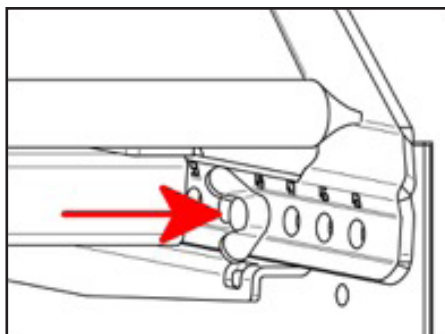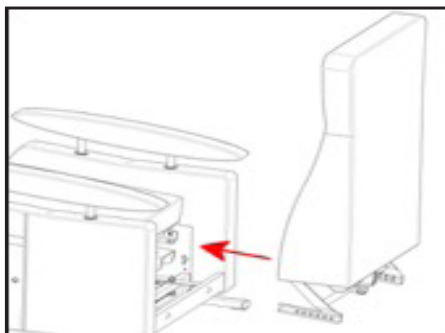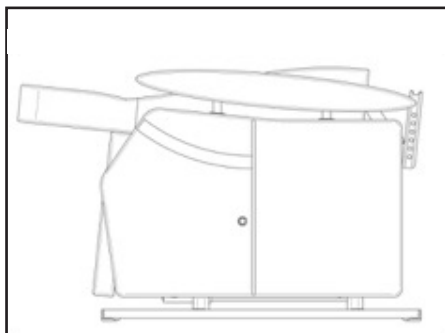

Levering af stol med svingbart understel:

For at forhindre transportskader er Fitformstolen med svingbart understel blevet monteret på en plade og to strips forhindrer den i at rotere under transporten. Stolens oprejsningsfunktion er også løftet lidt op så svingfunktionen låses automatisk.

Gør følgende før brug første gang:

- Læg stolen forsigtig på siden og påse at betjeningspanelet ikke skades
- Fjern 4 skruer som svingskiven er skruet til pladen med.
- For at beskytte gulvet mod skader, kan de medfølgende beskyttelsesstrips sættes på undersiden af svingskiven, der hvor hjulene roterer.

Kontroller ALTID at stolen er helt monteret før den tages i brug. Tjek specielt at ryggen er helt monteret og at rygmotoren er tilkoblet, da ryggen i en del situationer leveres løst eller vipet frem ved transport, blandt andet når stolen sendes i standard emballage.



# 3. Brugsanvisning

## 3.1 Fitform 576 Nordic2

Tilslut ledningen i kontakten med 230 V.

Fitform 576 Nordic2 kan nu betjenes med håndbetjeningen.

### A. Benstøtte ned

Når knap A trykkes ind kører benstøtten ned igen.

### B. Benstøtte op

Når knap B trykkes ind vil benstøtten køre op. Hvis du vil have fodbrættet højere end endeposition kan knap D trykkes ind. Hele sædeenheden tiltes da bagover. Benstøtten kan ikke reguleres når stolen er i oprejsningsstilling. Hvis benstøtten ikke kører op, tjek at stolen er helt nede (knap D).

### C. Oprejsning og tilt regulering (hvis stolen har tilt)

Når knap C trykkes ind kører stolen fra liggende til siddende stilling (tilt). Holdes knappen inde starter stolen oprejsningsfunktionen. Benstøtten kører da ned før oprejsningen begynder.

### D. Fra stående til siddende og tilt regulering (hvis stolen har tilt)

Når knap D trykkes ind kører stolen tilbage fra stående til siddestilling og stopper. Tryk og hold knappen inde, så starter tilt funktion til hvileposition. Hvis knap A så trykkes ind, kører benstøtten ud og du får en komfortabel hvilestilling.

Efter dette, tryk på knap B for at hæve benstøtten for perfekt hvileposition.


### E. Regulere ryg fremover

Dette giver en mere oprejst siddestilling.

### F. Regulere ryg bagover

Denne knap kan benyttes til to formål: I. Ryg kan reguleres til ønsket vinkel

II. Hvis stolen er tiltet bagover (hvilestilling) kan ryggen reguleres videre bagover til sovstilling.

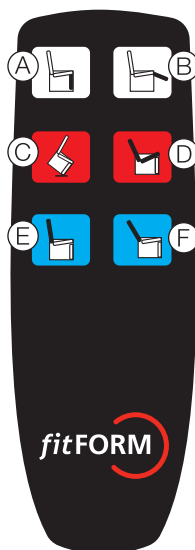

### 3.2.1. Brug af stol med manuelt betjent rotation (svingskive)

Er stolen udstyret med manuelt betjent rotation, kan denne roteres f.eks. ved brug af fødderne, af sikkerhedsmæssige grunde begrænset til max 180 grader sidevejs. Stolens rotation er i udgangspunktet låst. For at rotere stolen, trækkes håndtaget på siden af stolen opover. Rotationen låses når håndtaget slippes.

Stolens rotationshåndtag kan flyttes fra højre til venstre side af stolen, og visa versa. Den kan også indstilles i ønsket vinkel.



Stolen kan ved nylevering også leveres med elektrisk betjent rotation.

NB! Pas på at stolens ledning ikke kommer i klemme.

Stolens ledning er sikkert fastgjort på indersiden af sidepanelet så ledningen ikke kommer i klemme under stolen. Men hvis ledningen hænger på ydersiden af stolen, kan den komme i konflikt med stolens mekanisme når oprejsningsfunktionen bruges.

Stikkontakten bør derfor være på samme side af stolen som ledningen. Hvis ledningen kommer ud fra højre side af stolen, bør benyttet stikkontakt også være på højre side af stolen.

VÆR MEGET OPMÆRKSOM HVIS DETTE IKKE ER MULIG.

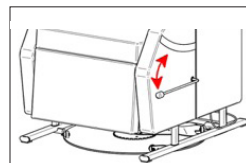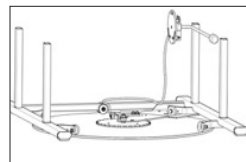

### 3.2.2. Brug af svingskive med automatisk låsning

Svingskiven gør det muligt at stolen let kan roteres ved hjælp af føddene op til 180 grader sidevejs. Svingfunktionen låses af sikkerhedsmæssige hensyn automatisk idet man begynder at løfte oprejsningsfunktionen. Det anbefales derfor at stolen hæves marginalt til den låses når man forlader stolen, da vil den også være låst når man skal sætte sig igen.


Stolen kan således kun roteres i nederste stilling og er altid låst og sikker når oprejsningsfunktionen benyttes.

Svingskiverne kan alternativt leveres med mekanisk håndbetjent lås.

NB! Vær opmærksom på ved oprejsning, at håndbetjeningen og stolens ledninger ikke kommer i konflikt med stolens mekanisme.



### 3.3. Regulere vinkel på øverste del af ryg (hovedstøtte)

Dette gøres kun med håndkraft ved at vippe øverste del af ryggen bagover/fremover. Ledningen sidder ca 30 cm fra toppen. Kan leveres med elektrisk regulering som tilbehør.

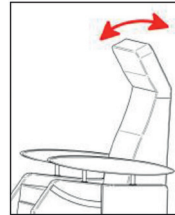

### 3.4. Lændestøtte , luftreguleret og højderegulerbar.

Udviklet for at give max støtte på nederste del af ryggen. Hvis den er på stolen (indgår i standard udførelse), finder man håndpumpen og et højdereguleringsrat bag lynlåsen bag på ryggen. Ved at løsne reguleringsrattet kan man hæve og sænke lænderygpuden, tykkelsen reguleres med håndpumpen ved at pumpe luft ind eller slippe luft ud med trykknappen på håndpumpen. Lændepuden må være tom for luft for at kunne reguleres i højden. Kan også leveres i elektrisk reguleret udgave.

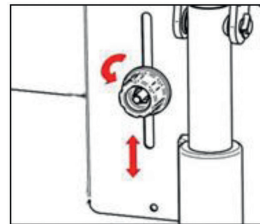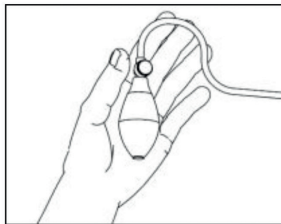

### 3.5 Transporthjul

Det er monteret transporthjul bag på stolens fødder. Kræver at stolen vippes bagover og balancerer når stolen skal flyttes. Stolen står støt når dette ikke gøres.



## 4. Brugsanvisning fitMOTION

### Manuel styring HB3 (M3) med FitMotion!

Din nye Fitform lænestol kan leveres med FitMotion, som er et nyskabende bevægelsessystem. Systemet aktiveres automatisk så snart du sætter dig i stolen. (NB Systemet virker ikke uden at man sidder i stolen)

**Trykafastning:** Når bevægelsesmodulet aktiveres tiltes stolen 2 x 2 grader bagover og derefter 2 x 2 grader fremover i retning startposition. Denne proces gentages kontinuerlig. Forskning viser at bevægelserne kan give store helsemæssige fordele. Det er også et godt hjælpemiddel til at forebygge tryksår, ved øget cirkulation og flytning af trykpunkt når du sidder.

**Slow Motion/Gyngefunktion:** Dette bevægelsesmodul aktiveres automatisk når du sidder i stolen med benstøtten løftet frem. Stolen afgiver hvert 15. minut et vibrationssignal og indikerer på denne måde at bevægelse vil være hensigtsmæssigt. Stolen starter så bevægelsen. Hvis du ikke justerer stolen eller står op, bevæger stolen sig automatisk i sagte bevægelser (en komfortabel afslapningsposition). Fra dette modul går stolen til 30% af den vanlige motorhastighed i en sagte gyngende bevægelse. Denne bevægelse udføres i 15 minutter, med mindre du afbryder den ved at trykke på en hvilken som helst tast på håndbetjeningen.

#### A. Træk benstøtten tilbage

Aktiveres den hvide knap A køres benstøtten tilbage.

#### B. Løft benstøtten frem

Den hvide knap B kører benstøtten frem/op. Hvis stolen står i oprejst stilling, kan benstøtten ikke betjenes. Tjek om stolen står op fra gulvet (knap D)

#### C. Til siddeposition eller til stående stilling med den røde knap

Aktivering af knap C sætter gang i tilt bevægelse af stolen fra hvilepositionen tilbage til siddeposition. Hvis man holder knappen konstant inde, vil lænestolen fortsætte til oprejst stilling. Benstøtten trækkes så automatisk tilbage. Med denne knap vil bruger løftes jævnt fra stolen.

#### D. Til siddeposition eller til hvilestilling


Med den røde knap D kører stolen tilbage til siddestilling. Holdes tasten nede, vil stolen bevæge sig automatisk til hvilestilling.

#### E. Ryg fremover

Med den blå knap E bevæges rygstøtten fremover. Justering af rygvinkel kan udføres uanset hvilken position stolen står i.

#### F. Ryg bagover

Med knap F kan du kører ryggen bagover. Justering af rygvinkel kan betjenes uanset hvilken position stolen er i.

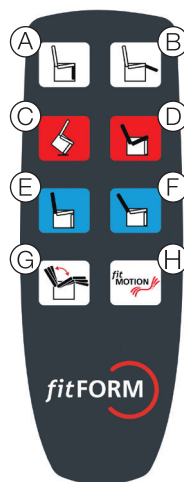

### G. Aktivering af slow motion bevægelsen

Med denne kan du aktivere funktionen uafhængig. Hvis LED lyser, er slow motion bevægelsen aktiveret.

### H. FitMotion-systemet på eller af

### I. LED-lampen lyser, det er det automatiske bevægelsessystemet


Kære kunde

Du har nu modtaget din Fitform løftestol udstyret med det dynamiske fitMotion sidde- og antidecubitusystem. Hvis man har valgt indstillingen «standard on», begynder systemet at fungere så snart man sidder i stolen. Du kan deaktivere systemet ved hjælp af håndbetjeningen ved at trykke på knappen med fitMotion logo. Hvis man har valgt indstillingen «standard off», må man trykke på knappen med fitMotion logo for at aktivere systemet. Vær opmærksom på, at man må sidde i stolen for at fitMotion systemet skal fungere.

fitMotion består af to bevægelsesmoduler:

**TRYKAFLASTNING:** Dette bevægelsesmodul bliver automatisk sat i gang når man sidder med benene på gulvet (benstøtten kørt ned). Hvert minut tiltes stolen 2x2grader bagover, og derefter 2x2grader tilbage igen til udgangspositionen. Dette gentager sig kontinuerlig.

**SLOW MOTION GYNGEFUNKTION:** Dette bevægelsesmodul bliver automatisk aktiveret når benstøtten er kørt op. Stolen varsler da hvert 15 minut med et vibrationsignal at bevægelse sættes i gang. Man kan da vælge at bruge stolens oprejsningfunktion og rejse sig selv. Sker dette ikke sætter stolens tiltfunktion igang i en langsom gyngebevægelse, med 30% af vanlig hastighed på motorerne. Stolens rygvinde forbliver uændret. Slow-motion bevægelsen kan man selv sætte igang eller deaktivere med betjeningsboksen ved at trykke på knappen nederst til venstre.

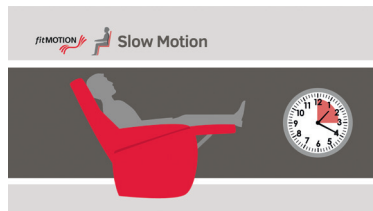

Hvad gør man hvis fitMotion systemet ikke fungerer og håndbetjeningen blinker kontinuerlig?

Tjek at stolen er sænket helt til siddende stilling. Af sikkerhedsmæssige grunde virker fitMotion ikke hvis stolen er i oprejsningsfunktion, det er nok at oprejsningsbevægelsen er påbegyndt. Hvis dette ikke er tilfældet, så prøv at gå ud af stolen ca 1 minut og se om fitMotion vil starte efter det. Tag kontakt med hjælpemiddelcentralen/leverandøren hvis systemet fortsat ikke virker.

Ved knirkende lyd fra en af motorerne når man trykker på håndkontrollen?

Dette betyder at den aktuelle motor har mistet sit referancepunkt og må resettes. Du kan gøre dette selv ved at køre den aktuelle funktionen helt u og helt ind. Er det f. eks. rygreguleringen, kør ryggen max bagover og så max forover. Er det oprejsning/tilt funktionen, kør stolen helt i oprejst stilling og derefter max bagover i tilt. Tag kontakt med hjælpemiddelcentralen/leverandøren hvis fejlen fortsætter.

Hvorfor fit-MOTION

Det er altid sundere for kroppen med bevægelse end at sidde stille og med FIT-MOTION får brugere som måske ellers sidder meget stille, bevægelse med faste tidsintervaller. FIT-MOTION har vist sig at have positiv effekt på blodomløb. Slow-motion funktionen bidrager også til at forhindre hævelser i benene. Bevægelserne bidrager også til trykforandring som kan have positiv effekt ved forebyggelse og lægning af tryksår. Gyng bevægelserne med FIT-MOTION (og andre tilsvarende stole med gyng bevægelse) har også vist sig at have beroligende effekt på bl.a demente og personer med smerte. FIT-MOTION's positive effekter er videnskabelig underbygget. (bl.a. Roessingh Research & Developement, Enschede og Dr. Ir. D. van Deursen en Dr. L.L.J.M. van Deursen)

# 5. Brugsanvisning tilbehørs løsninger

## 5.1 Batteridrift

Med batteridrift slipper du for at have en ledning fra nærmeste stik liggende på gulvet. For at sikre at batteridriften fungerer tilfredsstillende er det vigtigt at følge instruktionerne i denne manual.


Vigtigheden af at lade batterierne i tide

Når du hører et højt bip med korte intervaller når du betjener stolen må stolen lades i ca. 10 timer (det er ingen fare for overladning selv om denne tid overskrides).

**BEMÆRK:** Hvis du hører indikatorlyden med korte intervaller er batteriniveauet kritisk lavt. For at undgå fuldstændig afladning og skader på batteriet, må batteriet lades i minimum 10 timer.

Hvordan lades batteriet

- Åben lynlåsen bag på stolryggen
- Tag ledningen frem
- Sæt stikket i stikkontakten
- Batterierne vil nu oplade og du kan benytte stolen som normalt under opladningen

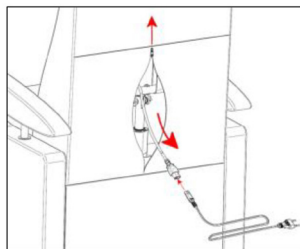

## 5.2 Ryg ILP og ILPM (tilpasningsrygge)

Ryg ILP

ILP-ryggen har et løst betræk som kan løftes op. Bagved kan man placere forskellige sidestøttepuder på valgfrit sted ved hjælp af velcro og på denne måde give brugeren ønsket støtte/siddestabilitet. Vi anbefaler at tilpasningerne udføres af kvalificeret/udlært personale.

1. Åben betrækket ved at trække det ud ved top/bagende af sædepuden.
2. Vælg sidestøttepuder og fastgør dem ved hjælp af velcro
3. Træk betrækket ned igen og lås det. (ved top/bagenden af sædepuden)
4. Tjek at tilpasningerne er rigtige for brugeren, evt repeter proceduren.



## ILPM tilpasningsryg

Denne, vor mest solgte tilpasningsryg, kombinerer tilpasningsmulighederne fra både ILP-ryggen og Multitilpasningsryggen og giver meget gode muligheder og nem tilpasning ved afvigende kropsform og behov for meget støtte samt blød siddekomfort. ILPM-ryggen som har specielt blødt skum i midterdelen er vor blødeste rygmodel.



## Multitilpasningsryg (kyfoseryg)

Ryg med ryggramme som kan vinkles to steder pr side og justerbare velcrobånd. Special skumpolstring med specielt blødt skum i midten. Muliggør god og komfortabel tilpasning f.eks for brugere med kyfotisk kropsform.



## Tilpasning af ryggen:

Åben lynlåsen bag på rygbetrækket. Løft velcroen så du kan se mekanismen under. Ca 30 cm op af rygrørerne på hver side findes reguleringsskruer som muliggør ændring af vinkel på rygrørerne. En tilsvarende tilpasningsmulighed findes længere oppe af rygrørerne for overdelen på ryggen. Tilpas ønsket vinkel på begge sider både oppe og nede og skru godt til.



## ILPM Plus tilpasningsryg med ekstra stabile sidestøtter

Ny avanceret tilpasningsryg, med egenskaberne som ILPM-ryggen men med ekstra afstivede og stabile sidestøtter, som nemt kan højderreguleres ved hjælp af rat bag på ryggen. Man kan også vælge tykkelse på sidepolstrene. Leveres kun med specialstofferne Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) som har meget stretch.





### 5.3 Hjulsæt Safety

Beregnet til at kunne køre bruger i stolen over kortere afstande.

For at stolen garanteret er låst ved forflytning, må man aktivt skubbe kørebøjlen bag på ryggen ned for at aktivere hjulene og køre stolen. Med dette undgår man risikoen for uheld ved at bruger glemmer at låse hjulene før forflytningen/oprejsningen foretages.

Systemet er ikke konstrueret til at forcere dørtæskler eller til brug på bløde tæpper.



### 5.4 Hjulsæt Autobrake

Beregnet til lettere at kunne flytte stolen, men ikke med bruger i stolen. Hjulsystemet aktiveres med et håndtag som findes under lynlåsen bag på ryggen.

For at stolen garanteret er låst ved forflytning, må man aktivt skubbe håndtaget ba på ryggen ned, for at aktivere hjulene og køre stolen. Med dette undgår man risikoen for uheld hvis bruger glemmer at låse hjulene før forflytningen/oprejsningen foretages.

Systemet er ikke konstrueret til at forcere dørtæskler eller til brug på bløde tæpper.


NB! Ved levering er stolen udstyret med transportsikring som må fjernes før stolen tages i brug.



### 5.5 Opklappelig sidevange på stolen

Med denne løsning kan hele sidevangen på stolen vippes bagover. Dette forenkler sidevejs forflytning ind og ud af stolen. For at undgå transportskader er løsningen udstyret med transportsikring ved levering af stolen og som må fjernes før brug.

- Kør benstøtten helt ud og ryggen max bagover
- Helt foran på stolen vil du finde 2 transportskruer mærket med rødt/orange mærke. Disse må fjernes før brug. Kan også leveres i elektrisk betjent udførelse.

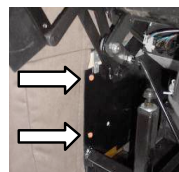

## 5.6 Håndbetjening EASY

Stolen kan, hvis man ønsker en nemmere betjening udstyres med håndbetjening EASY med kun 2 knapper. Stolen programmeres så oprejsningsfunktion, tiltfunktion og benstøtte bliver sammenkoblet. (elektrisk rygvinkling vil da udgå) Denne løsning leveres kun fabriksmonteret.



## 5.7 Håndbetjening Light Touch (alternativt betjeningspanel)


Et alternativt og endda mere letbetjent betjeningspanel velegnet for personer med nedsat hånd/fingerfunktion. Knapper som kun kræver meget let tryk.

Betjenes forøvrigt som standard håndbetjening, se side 9.



## 5.8 Sædepude Intelligel (alternativ trykafastende siddepude)

Det er nemt at bytte sædepuder i Fitform helt uden brug af værktøj. Fjern standard puden og læg alternativ pude i istedet. Sædepude Intelligel er en gelbaseret højrisikopude som kan lægges i stolen uden nogen form for indstillinger. For at få optimal trykafastende beskyttelse bør man vælge et betræk med specielt god stretch og god åndbarhed i stedet for stolens standard betræk i stof eller skind, eksempelvis Sarcotex betræk eller Uni-form betræk.

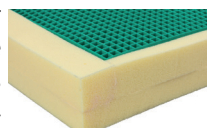

## 5.9 APPR Luftbaseret siddesystem til trykaflastning og positionering

Sæde og evt ryg leveres så med indebyggede trykaflastende og positionerende luftelementer. I sædet benyttes den velkendte Roho Quadro Select AD pude. I ryggen er der forskellige kamre som kan reguleres for helt individuel komfort og støtte. Alle puder/kamre kan reguleres ved hjælp af en lille håndpumpe. For at opnå max effekt af de trykaflastende puder/kamre anbefaler vi at benytte betræktypen Uniform på stolen som har meget stretch i alle retninger. Ved fare for inkontinens kan anbefales betræktypen Sarcotex (Dartex). APPR systemet kan ikke kombineres med andre reguleringer af sæde/ryg og kan ikke leveres til større sædebredde end 69 cm eller lavere sædehøjde end 40 cm.



Anvisninger for brug:

Sæde

Foran på sædepuden, ved overgangen mellem sæde og benstøtte, finder du luftventilen på Roho-puden. Under sædet finder du Iso Flow Memory Control Unit. Følg så instruktionerne som du kan finde demonstreret på internet (fra trin 4)


Se link: <http://www.therohogroup.com/products/seat%20cushions/properadjust/instruction.html>



Ryg

Bag lynåsen bag på ryggen finder du 4 forskellige slanger/ventiler med 4 forskellige farver:

- Den gul-grønne ventil er til lændestøtten
- Den blå ventil er til at justere sidestøtte.
- Den brune slange er til at justere den øvre del af ryggen (f.eks støtte ved kyfpose)
- Den sorte ventil er for puden forrest på ryggen.

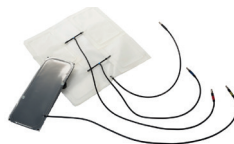

Trykket i de forskellige puder/kamre ændres ikke hurtigt. Det er dog vigtigt at tjekke hyppigt at indstillingerne fortsat er rigtige for brugeren.



## 5.10 Memory-kit (med elektrisk justerbar lændestøtte, elektrisk betjent rygoverdel, varme og memoryfunktion)

Ved hjælp af memoryfunktionen kan du gemme op til to favorit siddestillinger.

Justering af memoryfunktionen

Juster stolen til ønsket position. Hvis du ønsker at gemme denne position, tryk på den blå knap MEM to gange, fulgt af at trykke på den blå knap 1 (eller 2). Positionen er nu gemt, du behøver nu kun at trykke på den blå knap 1 til ønsket position er nået. Du kan således gemme en alternativ position med blå knap 2

Betjeningspanelet:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Benstøtte ned             | 8. Rygdel (hoveddel) fremover |
| 2. Benstøtte op              | 9. Lændestøtte                |
| 3. Oprejnsningfunktion (op)  | 10. Lændestøtte               |
| 4. Sidde ned/tilt            | 11. Varme                     |
| 5. Ryg fremover              | 12. Memoryfunktion            |
| 6. Ryg bagover               | 13. Memory valg1              |
| 7. Rygdel (hoveddel) bagover | 14. Memory valg2              |

Billedet viser betjeningspanel som er klargjort til elektrisk betjent lændestøtte (2 lyseblå knapper) og varme (rød knap).

Funktionsfejl:

Stolen er udstyret med censorer som kan resettes ved funktionsfejl.

Dette kan gøres ved at tage håndbetjeningens stik ud, mens man samtidig kører motoren ved at holde en valgfri gul knap inde.

Så snart stikket er taget ud, stop med at trykke gul knap. Sæt stikket på plads igen og et blåt lys vil blinke på betjeningspanelet.

Tryk så på MEM knappen til alle motorer er stoppet.

Det blinkende blå lys vil stoppe og stolen er resat.



## 6. Fejlsøgning

Fejlindikator	Tiltag
Stolen kan ikke reguleres	1. Tjek at ledning er tilsluttet stik med 230V 2. Kontakt hjælpemiddelcentralen eller ansvarlig leverandør.
Stolen går trægt eller "knirker"	1. Smør bevægelige dele i stellet som beskrevet i punkt 7 i brugervejledning. 2. Kontakt hjælpemiddelcentralen eller ansvarlig leverandør.
Stolen bevæger sig rykvis	Kontakt hjælpemiddelcentralen eller ansvarlig leverandør.
Stolen er ustabil	Tjek at stolen står plant på underlaget.

Stolen må ikke benyttes hvis mekanismen er defekt eller man har mistanke om dette!

## 7. Rengøring

Alt betræk på standard modellen er let at tage af og på med velcro. Stofbetrækket kan maskinvaskes ved vasketemperatur på 40°C. Horisontal tørring anbefales. Vaskeanvisning er påsyet hvert enkelt stk betræk. Skindbetrækket og mekanismen rengøres med fugtig klud og mild sæbe, støvsuger kan benyttes. For at holde stolen så pæn som muligt anbefales ugentlig støvsugning. Pletter bør altid fjernes hurtigst muligt. Hvis man kan undgå at udsætte stolen for stærkt sollys over tid, vil man også længere kunne opretholde farverne (undgå blegning).

## 8. Vedligehold

Der er normalt ikke behov for at bruger udfører andet vedligehold end vanlig rengøring/støvsugning se punkt 6 Rengøring. Bevægelige dele i stellet kan ved behov smøres med ikke aggressive smøremidler som siliconspray eller tynd olie (f.eks. symaskineolie). Man bør ikke benytte teflonspray da denne udtørre lakerede dele og kan forårsage at led bevæger sig trægere. Øvrig vedligehold udover rengøring skal udføres af fagkyndig personale. Ved fejl på stolen skal hjælpemiddelcentralen eller leverandør kontaktes. Stolen må da ikke bruges. For periodisk vedligehold og genbrug se egen service-information.



# 9. Opbevaring

Fitform stolen skal opbevares i et tørt og rent lokale, og bør beskyttes mod stærkt lys så stof/skind ikke bleges. Vi anbefaler at stolen køres ned til laveste position og tildækkes med et tæppe hvis den skal stå ubenyttet over længere tid.

# 10. Indstilling af stolen – ændre mål



## 10.1 Ændre sædehøjde

1. Kørs stolen i oprejsningsstilling
2. Læg forsigtigt stolen på en af siderne. Vær forsigtig så håndbetjeningen ikke skades.
3. Løs de 4 reguleringskrue på stolens fødder. (tilsvarende på stole med rotation)
4. Tilpas fødderne til ønsket højde og brug skalaerne på indersiden af fødderne for at få samme højde på begge sider.
5. Skru reguleringskrue til igen.
6. Stolen rejses op igen og kan tages i brug

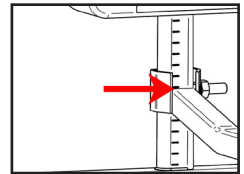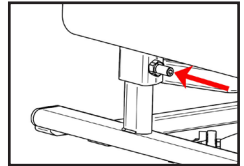

## 10.2 Ændre sædedybden


1. Løs betrækket bag på stolen
2. Løs skruerne på rygbeslagene på begge sider
3. Sædedybden kan justeres ved at skubbe ryggen forover/bagover i længderetningen og at vælge ønskede monteringshul. Ryggen kan da justeres i 2cm intervaller.
4. Skrue skrues til igen, i samme position på begge side af stolen, se skala.

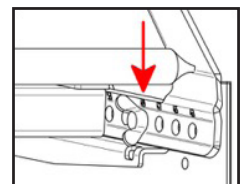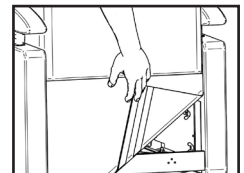

## 10.3 Ændre armlænsenhøjde

Dette kan nemt reguleres af brugeren, siddende i stolen



1. Åben lynlåsen på siden af stolen
2. Find reguleringsrattet og løs det
3. Ændre til ønsket højde
4. Skru til igen, og luk lynlåsen.

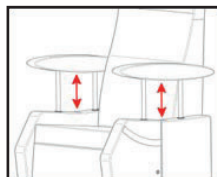

## 10.4 Ændre længden og vinkel på fodbrættet



### Ændre længden på fodbrættet

1. Kør benstøtten helt op med håndbetjeningen
2. Løs betrækket bagpå og på siderne, det er lukket med velcro
3. Løs justeringskruerne i U-profilerne på hver side.
4. Juster til ønsket længde. NB Påse at benstøtten ikke berører gulvet i nederste stilling, tilpasset efter aktuell sædehøjde.
5. Skru skruerne til igen og luk betrækket (med velcro). Benstøtte forlænger på 8 cm kan evt. bestilles som tilbehør

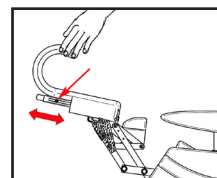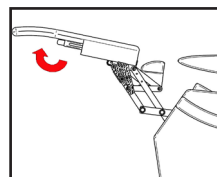

### Ændre vinkel på fodbrættet

1. Vinklen på benstøtten kan reguleres ved at montere den afrundede justerings enhed (højre og venstre side) i en af dens tre monteringshuller. På ill. er det vist i højeste position. Benstøtten kan sænkes ved at bruge et af de andre huller  
NB. Benstøtten må ikke berøre gulvet i nedslået stilling (min. 1 cm afstand til gulv).
2. Skru skruerne til igen og luk betrækket igen.

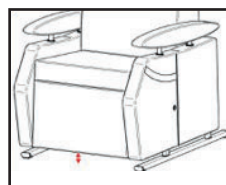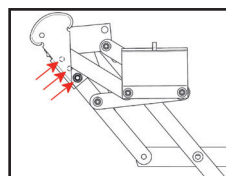

## 10.5 Ændring af løftevinkel

Løftevinklen på oprejsningsfunktionen kan justeres til 4 forskellige bevægelser, fra lige løft (helt vertikalt) til forskellige grader af tilt forover. Dette bør gøres af en uddannet person og er beskrevet i service manualen.

# 11. Tekniske data

Fitform 576 Nordic2	
Sædebredde standard størrelser	45, 51, 57, 63cm
Sædebredde specialstørrelser	69, 75, 81 , 87cm
Sædedybde std modeller	43-53cm (38-59cm m tilbehør)*
Sædedybde dyb model	49-59cm (evt m tilbehør)
Sædehøjde u rotation	40-60cm ( fra 36cm m tilbehør)
Sædehøjde m rotation	41-61cm ( fra 37cm m tilbehør)
Ryghøjde	84cm (72,94,104cm m tilbehør)
Ryghøjde model Mini	72cm
Armlænsøjde regb u værktøj	15-29cm (fra 12cm m tilbehør)
Benstøttelængde (justerbar)	44-55cm (+8cm m tilbehør)
Max. højde benstøtte fra gulv	83-103cm (afhængig af sh)
Højde retløft oprejst	59-79cm (afhængig af sh)
Højde skråløft oprejst	60-80cm (afhængig af sh)
Max. brugervægt sb45 og 51	150kg
Max. brugervægt sb57	175kg
Max. brugervægt sb63-87	250kg
Tilt	5-35 grader
Rygvinkling	95-135 grader
Rotation	automatisk låsning, evt manuelt låsbar m håndtag
Rygoverdel	regulerbar u værktøj (evt el betjent)
Betræk std	gråt stof/sort skind
Nakkepude	std

\* Kortere sædedybde på forespørgsel











**medemagruppen**

Forhandler: Medema A/S - Enggårdvej 7, Snejbjerg - 7400 Herning - Tlf.: 67 06 49 00

Udleveret af:  
Serviceværksted:

