

Firkantet badetaburet LM

TILTÆNKT BRUG: Firkantet badetaburet LM tillader øget uafhængighed under den daglige brug af badeværelset, reducerer muskeltræthed ved stående stilling samt mindsker risiko for at glide og falde. På grund af dets fleksibilitet kan badetabureten placeres selv på ujævne og uregelmæssige overflader, og badetabureten kan nemt flyttes takket være dens lette vægt.

INDIKATIONER OG KONTRAINDIKATIONER: firkantet badetaburet LM er beregnet til ældre mennesker, mennesker med nedsat mobilitet i lænden, knæet eller hoften og til alle, der har svært ved at opretholde stående stilling under den daglige brug af badeværelset. Brugeren skal have god balance under siddende og stående procedurer samt have tilstrækkelig evne til at blive siddende. Stolen må ikke bruges, hvis brugeren har balance- eller perceptionsforstyrrelser.

SIKKERHEDSADVARSEL OG INDIKATIONER:

- Den maksimale brugervægt angivet i monteringsvejledningen må ikke overskrides(120kg.).
- Før hver brug skal du sikre, at badeværelsesstolen er korrekt samlet og står stabilt.
- Badeværelsesstolen kan kun bruges på fri forhindringsfri overflader.
- Under montering skal du nøje følge, hvad der er vist i brugermanualen.
- Risikoen for at klemme fingre kan opstå under montering.
- Sving ikke på badeværelsesstolen, da dette kan føre til at man glider, vælter eller synkning af benene. Hold altid brusebadet på sine 4 ben.
- Modificer ikke badeværelsesstolen og dens komponenter på nogen måde.
- Brug ikke badeværelsesstolen, hvis den er beskadiget eller ændret på nogen måde. Revner og deformationer kan stærkt påvirke ydelsen og sikkerheden af enheden.
- Efter brug skal badeværelsesstolen fjernes fra brusebakken for at undgå forhindringer.
- Brug ikke badeværelsesstolen til et andet formål end det tiltænkte.
- Badeværelsesstolen må ikke opbevares udendørs.

VEDLIGEHOLEDSEINFO: Produktets vedligeholdelse består af rengørings- og sanitetsprocedurer. For at sikre sikker brug og tilstrækkelig hygiejnestandard bør brugeren udføre disse procedurer før hver brug. Brugeren skal sikre sig produktets og dets komponenters strukturelle integritet. For rengørings- og sanitetsprocedurer, følg trinnene nedenfor:


1. Handsker skal bæres.
2. Fjern den åbenlyse snavs, før du fortsætter med den mest nøjagtige desinfektion.
3. Brug vand eller ikke-aggressiv rengøringsmiddel til rengøringsproceduren.
4. Aftør med en tør og ren klud.

Alternativt kan produktet rengøres i husholdningsopvaskemaskiner ved maksimale temperaturer.

GENBRUGSKRAV: Produktet er egnet til genbrug af andre brugere. Før genbrug af andre skal produktet rengøres og desinficeres korrekt. Før overførsel af produktet til andre skal produktet kontrolleres af kvalificerede forhandlere.

KORREKT BORTSKAFFELSESPROCEDURE: Bortskaf ikke produktet i almindeligt husholdningsaffald. Spørg din lokale myndighed på forhånd for den korrekte og miljøvenlige måde at bortskaffe det på.

HÆNDELSESRAPPORTERING: Hvis der sker en hændelse med dette produkt, bedes du kontakte virksomheden, hvor du har købt dette produkt på info@botved.dk, som er ansvarlig i dit land.

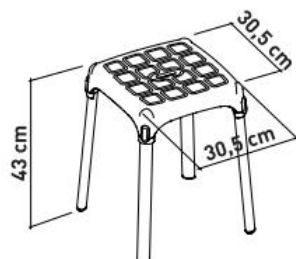


1



x1




x4

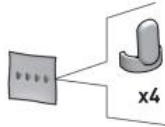


x4

2

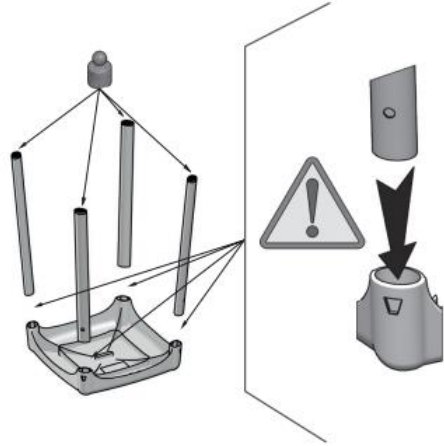

3

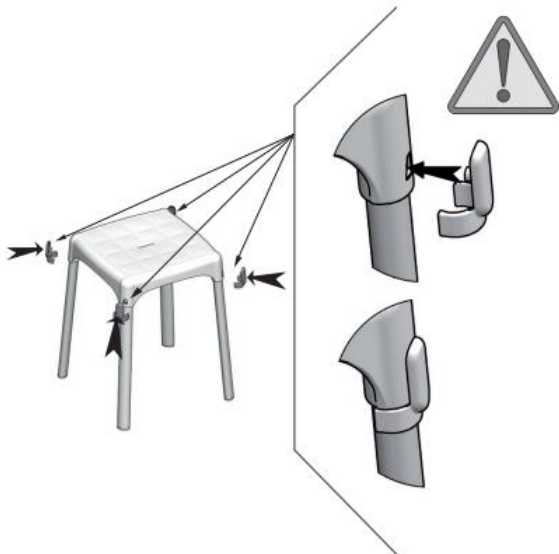

4



MAX USER
WEIGHT:
120 kg
265 lb

MADE IN ITALY



2 YEARS
GUARANTEE

16 of 2023/12