




SÅDAN BRUGER DU COMFI sansevest

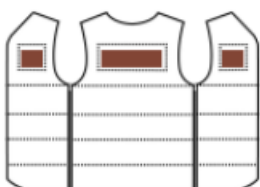

Start med vægt i bryst & ryklommer

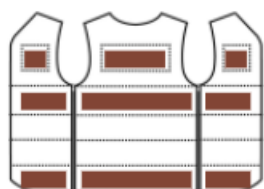

Forøg vægten symmetrisk, så vægten i for & bagside er forholdsvis ens

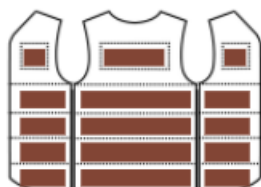

Mærke efter om fordelingen af sandposer føles behageligt.

Juster eventuelt på rækkefølgen af vægtklasser



COMFI Sandposer er mærket med en farve der indikerer posens vægt,

25 g	50 g	100 g	150 g	200 g
300 g	400 g	500 g	600 g	700 g



Alle vægtposer har samme brede og kan derfor bruges i samtlige COMFI produkter



	4-7 år	7-10 år	Small	Medium	Large	X - Large
A Brystmål	80 cm	90 cm	98 cm	106 cm	112 cm	130 cm
B Ryglængde	46,5 cm	59,5 cm	69,5 cm	69,5 cm	73,5 cm	73,5 cm
C Sidelængde	29 cm	38,5 cm	39 cm	39 cm	43 cm	43 cm



4-7 år	7-10 år	Small	Medium	Large	X - Large
1000 g	1500 g	1500 g	1500 g	3000 g	3000 g
1200 g	2000 g	2000 g	2000 g	3500 g	3500 g
1500 g	2500 g	2500 g	2500 g	4000 g	4000 g
	3000 g	3000 g	3000 g	4500 g	4500 g
			3500 g		5000 g
			4000 g		

