

**KRYKKE FLEX ERGO,**

GRÅ Varenr.: **127200, 127250, 127300, 127350, 127400, 127450, 127500, 127550, 127600, 127650**

### Tilsigtet anvendelse:

Krykken er kun beregnet til at blive anvendt som gangstøtte til bevægelseshæmmede.

### ⚠ Sikkerhedsinstruktioner:

- Produktet må ikke anvendes på anden måde end den tilsigtede.
- Rådfør dig med sundhedspersonale før brug.
- Produktet skal tilpasses til den enkelte brugers særlige behov og justeres af kompetent personale (f.eks. fysioterapeut eller andet personale med ordinationsret).
- Brug ikke overdreven kraft, når skruen til håndtagsjustering strammes. Brug kun håndkraft, ellers kan skruen gå i stykker.
- Krykken må aldrig bruges til f.eks. at stoppe en elevatordør eller lignende med.
- Dupskoens bør kontrolleres regelmæssigt. Beskadigede eller slidte dupsko kan give et dårligere greb og skal udskiftes med nye, som kan bestilles hos Swereco.
- Hvis genstande (f.eks. papir, affald osv.) sidder fast under dupskoens, skal disse straks fjernes, da det kan forringe grebet.
- På glat underlag skal dupskoens suppleres med ispig, og der skal udvises stor forsigtighed.
- Hvis der er tegn på, at højdejusteringen er løs, eller at produktet på anden måde er slidt, bør produktet tages ud af brug.
- Den angivne maksimale brugervægt gælder også ved brug af to krykker.



127200, 127250



127300, 127350,  
127500, 127550



127400, 127450,  
127600, 127650

### Teknisk specifikation

Art nr.: <b>127200</b> Lige, blød Maks. Vægt: 140 kg Justerbar højde: 75-97cm Vægt: 0,55 kg	Art nr.: <b>127250</b> lige, blød, lang Maks. Vægt: 120 kg Justerbar højde: 90-112 cm Vægt: 0,62 kg	Art nr.: <b>127300</b> Ergo, højre Maks. Vægt: 140 kg Justerbar højde: 75-97cm Vægt: 0,56 kg	Art nr.: <b>127350</b> Ergo, højre, lang Maks. Vægt: 120 kg Justerbar højde: 90-112 cm Vægt: 0,63 kg	Art nr.: <b>127400</b> Ergo, højre, blød Maks. Vægt: 140 kg Justerbar højde: 75-97cm Vægt: 0,56 kg
Art nr.: 127450 Ergo, højre, blød, lang Maks. Vægt: 120 kg Justerbar højde: 90-112 cm Vægt: 0,64 kg	Art nr.: <b>127500</b> Ergo, venstre Maks. Vægt: 140 kg Justerbar højde: 75-97cm Vægt: 0,56 kg	Art nr.: <b>127550</b> Ergo, venstre, lang Maks. Vægt: 120 kg Justerbar højde: 90-112 cm Vægt: 0,63 kg	Art nr.: <b>127600</b> Ergo, venstre, blød Maks. Vægt: 140 kg Justerbar højde: 75-97cm Vægt: 0,56 kg	Art nr.: <b>127650</b> Ergo, venstre, blød, lang Maks. Vægt: 120 kg Justerbar højde: 90-112 cm Vægt: 0,64 kg

Materiale: Aluminiumsrør, PA (øverste del), TPE (håndtag blødt) PP (håndtag hårdt), naturgummi (dupsko)

**Symboler:** Forklaring af symbolerne på produktet og i brugervejledningen.



Maksimal sikker brugervægt.



Vaskes ved maks. 85 °C i maks. 3 minutter.



Visuel inspektion



Kan vaskes med alkalisk sæbeopløsning, pH 5-9.



Produktet overholder (EU) MDR 2017/745 og 2007/47/EC for medicinsk udstyr.

Fremstillet af:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda




Telefon: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

## Anvendelse:

1. Juster højden på krykken med trykknappen. Højden på krykken skal tilpasses til den enkelte bruger og bør anvises af fysioterapeut/ordinationsansvarlig.
2. Kontroller jævnligt trykknappen til højdejustering. Hvis trykknappen er løs, skal brugen af krykken straks ophøre, og produktet sendes til service.
3. Vinklen på håndtagets sammenføjning kan justeres ved at løsne håndtagsskruen og trække håndtaget af. Brug en femkrone eller andet egnet værktøj. Drej til den ønskede vinkel, og sæt håndtaget på igen. Skru skruen i håndtaget. Brug kun håndkraft, og stram ikke for hårdt. Skruen kan gå af, hvis den strammes for hårdt.
4. Kontroller dupskoene før brug. Beskadigede eller slidte dupsko skal udskiftes med nye.

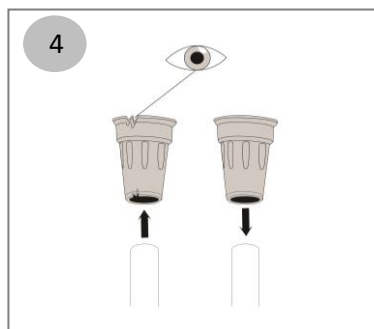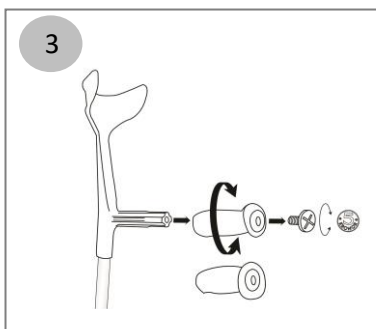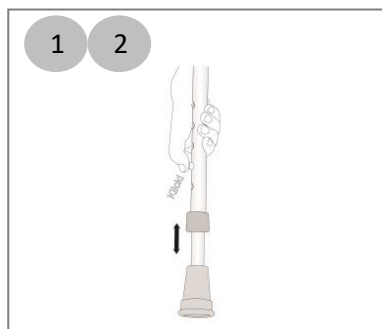

**Vedligeholdelsesanvisning:** Rengøres jævnligt ved behov (min. 1x/måned) med sæbeopløsning, ph 5-9. Ved skift af bruger skal produktet desinficeres, autoklaveres ved maks. 85 ° i maks. 3 minutter. Aftør alternativt med 70 % isopropanol. Ved istandsættelse bør dupskoen udskiftes med en ny. Nye dupsko bestilles hos Swereco.

**Genbrug:** Når produktet er udtjent, genvindes det som metalkrot og plastaffald. Emballagen består af bølgepap og genbruges derefter.

## Tilbehør:

Arter. nr. 123300, Ispig-spids  
 Arter. nr. 123350, Ispig krone  
 Arter. nr. 124885, Krykkehoder FLEX  
 Arter. nr. 124889, Gummifod Stabil

## Reservedele:

Arter. nr. 120750, Dupsko  
 Art.nr. 12720002, Håndtag lige, blødt  
 Art.nr. 12730002, Håndtag højre, hårdt  
 Art.nr. 12740002, Håndtag højre, blødt  
 Art.nr. 12730003, Krykkeskrue  
 Art.nr. 12750002, Håndtag venstre, hårdt  
 Varenr. 12760002, Håndtag venstre, blødt

3127200

1. Alvorlige hændelser, der opstår under brug, skal rapporteres til Swereco