

BRUGERVEJLEDNING

Kindkontakt

INDHOLD

Anvendelse.....	2
Oversigt.....	2
Monter super clamp.....	3
Opret kindkontakt i ic pro appen.....	5
Rengøring.....	5
Specifikationer.....	5



Anvendelse

Kindkontakt kan anvendes, hvor borgeren ikke er i stand til at aktivere en alarm med træksnor eller trykknop. Kindkontakten placeres tæt på borgerens hoved. Kindkontakten leveres med indbygget kaldetryk.

Det indbyggede kaldetryk oprettes i Intelligent-CARE, på samme måde som et almindeligt kaldetryk.

ALARM

Aktivering af alarm sker med et let tryk. Alarmen aktiveres blot borgeren drejer hovedet mod den, og kommer i berøring med den hvide kugle.

FEATURES AND BENEFITS

- Monteres med flexarm
- Slidstærk og sensitiv
- Nem installation
- Kan monteres på rørstel eller plade
- Alle komponenter undtagen alarmtryk, tåler rengøring med sæbevand og afspritning.




OVERSIGT

SÆTTET BESTÅR AF

- 1 stk. Super Clamp.
- 1 stk. Flexarm med kindkontakt.



Kindkontakt

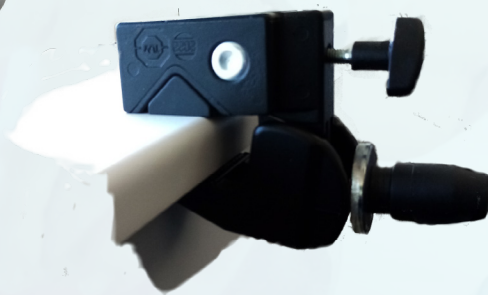

Super Clamp:

Super Clamp er holdepunkt for flexarmen og kan monteres på rørstel eller plader.

Monter super clamp


MONTER PÅ RØR:

Super Clamp åbnes ved at dreje den store pind, mod uret, til åbning kan gå ind over rør.

Drej den store pind med uret indtil Super Clamp sidder forsvarligt fast.



MONTER PÅ PLADE:

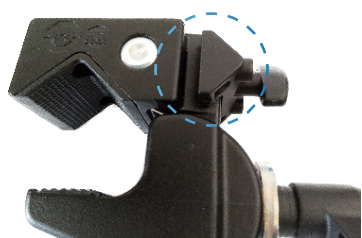

1. Under den lille vinge skrue, sidder en plastik indsats, som skal indsættes i Super clampens vinkel. Løsn vinge skruen, og udtag plastik indsats.
2. Indsatsen skubbes på plads - de 2 stag op i huller i vinklen. Super Clamp åbnes ved at dreje den store pind, mod uret, til åbningen kan gå ind over pladen.
3. Drej den store pind med uret indtil Super Clamp sidder forsvarligt fast på pladen.

ISÆT SVANEHALS I SUPERCLAMP

Flexarmen har i modsat ende af kind kontakten, en messing kobling. Denne passer i Super Clamp-ens store fikserings hul.

Begynd med at løsne vingeskruen, indtil gevindet ikke længere stikker ind i fikseringshullet.


Tryk snap-låsepinden på siden af Super Clampen ind. Før forsigtigt messingkoblingen ned i fikseringshullet.

Slip snap-låsepinden og stram vingeskruen, indtil flexarmen sidder fast og ikke kan røkke.



INDSTIL FLEXARM/KINDKONTAKT

Flexarmen drejes på plads, så kind kontakten er rettet så vinkelret som muligt, mod brugeren. Dette sikrer bedste kontakt funktion.

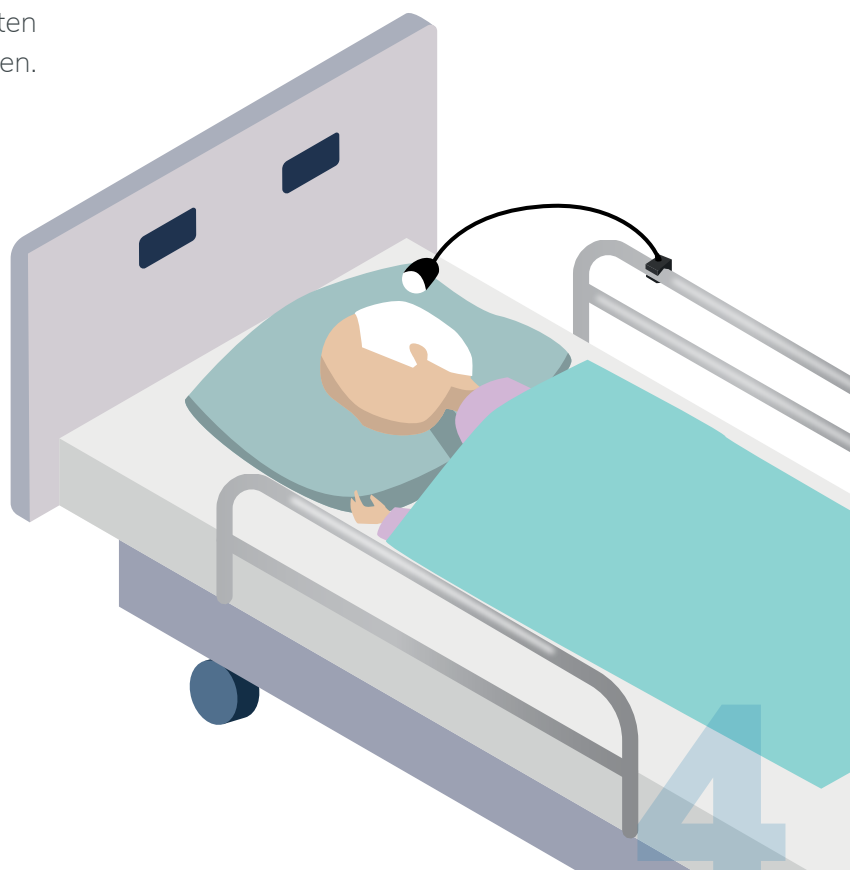

Opret kindkontakt i ic pro appen.

Kindkontakten leveres med indbygget kaldetryk. Det indbyggede kaldetryk oprettes i Intelligent-CARE, på samme måde som et almindeligt kaldetryk.

Tryk på bolden for at aktivere et kald. Find Kindkontaktens ID nr. i menuen, Administrer enheder.

Tildel borger til enhed og navngiv enhed som Kindkontakt.

ID nr. findes på label inde i kindkontakt. og på posen den er pakket i. Kindkontakten er 2 delt og kan skrues fra hinanden.

Hold med en hånd på bagerste, runde del, og med den anden hånd, drejes yderste del med bold, mod uret, indtil adskillelse.

OBS. bold kan falde ud.



Rengøring

Alle komponenter undtagen alarmtryk, tåler rengøring med sæbevand og afspritning.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	90142	Driftstemperatur	0° til +45° C
Frekvens	869 MHz	IP-klassifisering	IP67
Batterilevetid	Op til 9 år eller max. 4.000 tryk		