



Hjælpemiddel til påtagning af kompressionsstrømper med åben tå

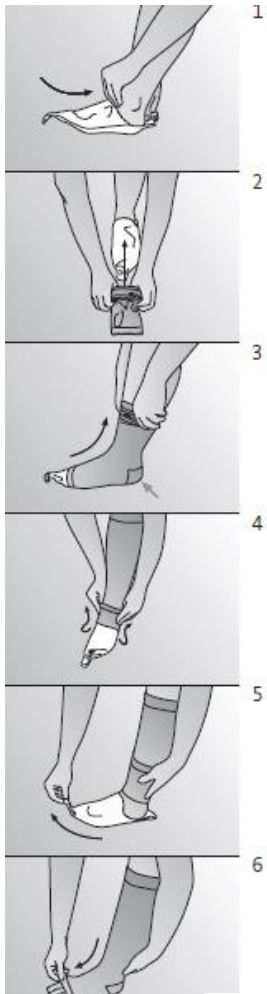

1. Træk glidesokken på forfoden
2. Træk din kompressionsstrømpe med åben tå udover glidesokken.
3. Træk kompressionsstrømpen op over vristen og helt op på underbenet.
4. Hvis glidesokken ryger for langt op, kan du løfte kompressionsstrømpen ved forfoden, for at hjælpe glidesokken ud.
5. Træk i spidsen af glidesokken, mens du holder på kompressionsstrømpen med den anden hånd.
6. Når glidesokken er trukket ud masseres kompressionsstrømpen på plads på benet. Denne procedure sikrer at kompressionen fordeles korrekt og at strømpen ikke folder. Denne afsluttende procedure er yderst vigtig i forhold til at strømpen bliver siddende og ikke glider ned.

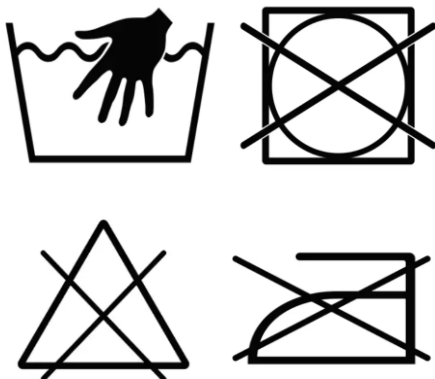

Varenr	Varebudgetgruppe	Varebeskrivelse	Katalognr	Stregkode
402728	Medi Hjælpemidler	medi glidesokker	6900002000/6900022000	4026398157542