

# Lemco Mobility

**Quick Guide**  
**Sådan bruger du BIKE-VR**



**Brug de indbyggede video guider i**  
**BIKE-VR**  
**eller Ring +45 3325 4002**

## OM BIKE VR

### Tillykke med dit BIKE-VR

Vi har brugt de sidste mange år på at indhente information om at skabe de bedste virtuelle ruter målrettet Pleje og omsorg således at træning bliver sjovere og man dermed får trænet længere - og som resultat bliver mere selvhjulpne.

Vi kender allerede nogle af de områder vi ønsker at forbedre.

1. Vi ønsker at man kan afspille en komplet lokation hvor man kan se total tid for destinationen alle videoerne på lokationen eks. København og lave en liste over ruter der er populære og giver stjerner for hver enkelt rute.
2. Vi arbejder på yderligere destinationer til foråret.
3. Vi ønsker på sigt muligheden for at koble til BIKE VR sammen med en Bluetooth sensor - selvom BIKE-VR netop er eå enkel at bruge da der ikke skal kobles ting og sager sammen. Flere optimeringer er undervejs.

Vi håber at I får mange gode timers træning og ruterne inspirerer og motiverer til ekstra lang træning - socialt sammenhold styrkes ligeledes da ruterne inspirerer til dialog om destinationerne, menneskerne på ruterne og oplevelser tidligere i livet (remniscens.)

Venlig hilsen

Carsten Lemche, CEO & Opfinder



## HURTIG GUIDE

Tryk Tænd knap hvis systemet er slukket  
Vælg HDMI på fjernsynet - Typisk HDMI 1

Ved opstart af boks - vælg BIKE VR hvis ikke autostartet. Pil op / ned vælg land  
Pil t.h. / t.v. Gå til lokationer  
Pil retur går tilbage  
Højtaler knapper er inaktive - Home Benyttes ikke p.t.

Når video afspilles kan der skiftes hastighed (pil op / pil ned )

Der kan spoles frem og tilbage med pil t.h. og pil t.v.

Tænd sluk knap.  
Præferencer og  
Statistik



Returknapp  
(tilbage i  
hieraket)

PS: Hvis knapperne ikke reagerer trykkes på musse-knappen og knapperne virker igen.

# Lemco Mobility

Mere Mobilitet med Virtuelle Ruter



Dansk Velfærds-Teknologi • Produceret i Helsingør

Producent og opfinder  
**LEMCO MOBILITY**  
Fabriksvej 3 - DK-3000 Helsingør  
Tlf: +45 3325 4002  
info@lemco.dk / www.lemco.dk