

Bruger- vejledning



Ansvarsfraskrivelse

CountAir® tæller udelukkende antallet af resterende inhalationer i en inhalationsspray.

CountAir® påvirker ikke inhalationssprayens funktion og påvirker ikke den kraft, der kræves for at inhalere en dosis.

CountAir® er et medicinsk udstyr.

CountAir® er et registreret varemærke.


Vi anbefaler, at du beholder CountAir®-emballagen. Referencenummeret på emballagen er påkrævet, hvis du ønsker at indberette en klage.

Revisionsdato: november 2023

Hvis der er opstået en alvorlig hændelse med CountAir®, skal dette straks rapporteres til både producenten og de nationale myndigheder.



Spruyt hillen bv, Venkelbaan 101,
2908 KE Capelle aan den IJssel,
The Netherlands
www.countair.com

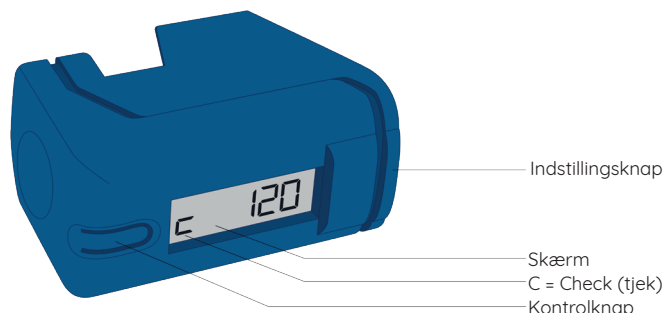


Hvad er CountAir®?

CountAir® er et medicinsk udstyr specielt udviklet til KOL- og astmapatienter, der bruger en inhalationsspray, der ikke har indbygget dosistæller. Sprayen, der indeholder den medicin, du i øjeblikket tager, kaldes en dosisaerosol. Den omtales ofte også som en inhalationsspray.

CountAir® tæller antallet af inhalationer som du har tilbage i din inhalationsspray. Countair® tæller ned.

Brug én CountAir® pr. inhalationsspray.

Kan bruges i kombination med følgende inhalationsspray: scan QR-koden for en opdateret oversigt.

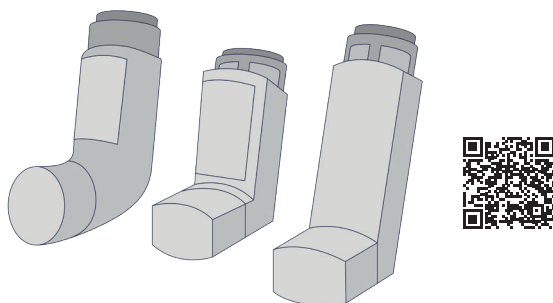


1 Opsætning af CountAir®

CountAir® har ingen tænd- eller slukknop og er klar til brug umiddelbart efter opsætning.

Noter omhyggeligt antallet af inhalationer på pakken eller på din inhalationsspray. Husk dette nummer.

Hvis CountAir®-skærmen er tændt, skal du vente 10 sekunder, indtil den slukker.

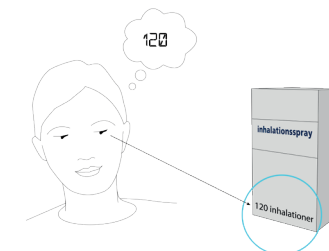

Trin 1

Tryk og hold CountAir®-indstillingsknappen nede.

Trin 2

Tryk nu på kontrolknappen én gang. Du vil nu se tal passere på skærmen. Disse tal er 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220.

Trin 3

Slip indstillingsknappen når det korrekte tal (antallet af inhalationer) vises. Du har nu indstillet CountAir®.


Trin 4

Du kan nu trykke på kontrolknappen for at kontrollere, at det korrekte antal er indstillet. Kontroller, at bogstavet C er på venstre side af skærmen.


Så kan du være sikker på, at du læser CountAir® korrekt. Hvis det ikke lykkedes, skal du gentage ovenstående trin.

Du kan indstille CountAir® når som helst. Dette gælder også hvis der vises et resterende antal inhalationer på skærmen.

Som standard er CountAir® indstillet til højrehåndede brugere. For venstrehåndede kan skærmen vises omvendt. Dette er nemt at ændre. Vent, indtil skærmen er blank. Tryk nu på kontrolknappen og hold den nede. Tryk nu på indstillingsknappen én gang, indtil skærmen er drejet 180 grader.



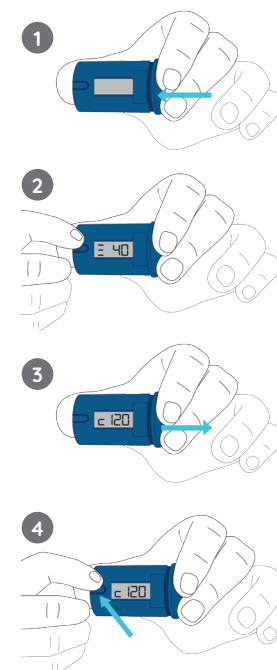


2 Placering af inhalationsspray

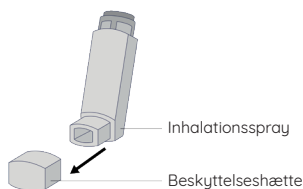

Fjern beskyttelseshætten fra din inhalationsspray og placér sidstnævnte i CountAir®.

Kontroller, at din inhalationsspray sidder ordentligt fast i CountAir®, og sæt beskyttelseshætten på mundstykket.

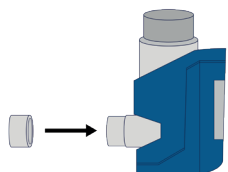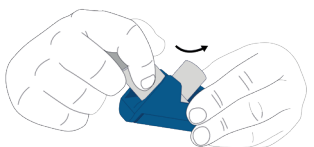
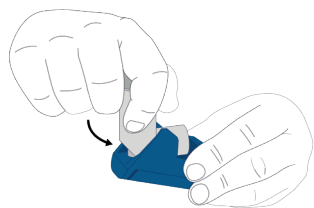


3 Klar til brug

Din inhalationsspray er nu klar til brug som instrueret af dit apotek, læge eller sygeplejerske. Bemærk venligst eventuelle instruktioner for om din inhalationsspray skal rystes før brug eller om tre pust skal trykkes ud i luften inden brug.

Hvis du bruger en indåndningsbeholder/spacer, kan du bruge den som normalt.

Når du har taget en inhalation, kan du se på skærmen efter 10 sekunder, hvor mange inhalationer der er tilbage. Du kan også trykke kort på kontrolknappen for at se, hvor mange inhalationer der er tilbage.

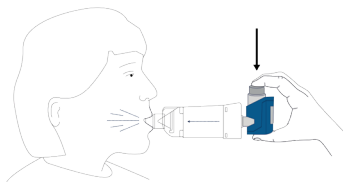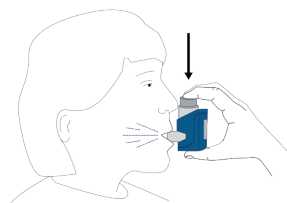


4 Udskiftning af inhalationsspray

Efter hver inhalation tæller CountAir® ned indtil inhalationssprayen er tom og der ikke er flere inhalationer tilbage. Fire streger vil så dukke op ved siden af hinanden på skærmen, og inhalationssprayen skal derefter udskiftes.





Fjern beskyttelseshætten fra inhalationssprayen og tag den ud af CountAir®.

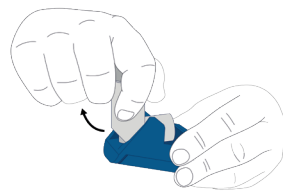

Du indstiller nu antallet af inhalationer igen som lige forklaret (se trin 1 til 4). Tjek nøje om antallet af inhalationer er det samme som sidste gang eller om du nu har fået en anden inhalationsspray med et andet antal inhalationer.

5 Sådan opbevares CountAir® med inhalationsspray sikkert

CountAir® er altid klar til brug efter at inhalationssprayen er blevet placeret og vil ikke blokere i akutte situationer. Dette er et bevidst valg. I tilfælde af en akut situation vil CountAir® være klar til brug. Opbevar CountAir® med inhalationssprayen i for eksempel et etui. Dette forhindrer kontaminering eller uønsket aktivering af CountAir® og inhalationssprayen.

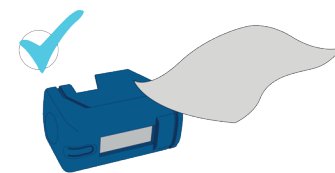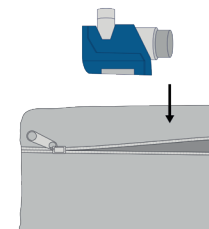

Rengøringsvejledning

Rengør om nødvendigt CountAir® med en fugtig klud. BEMÆRK! Vask ikke med vand, da CountAir® ikke er vandtæt.

Batteriets levetid

Batteriet holder i cirka to år ved gennemsnitlig brug.

Når batteriet er næsten tomt, vises to lodrette streger på skærmen.

Det er nu tid til at udskifte CountAir®. Ellers risikerer du at CountAir® ikke længere viser det korrekte antal resterende inhalationer.

Batteriet kan ikke udskiftes. Du kan aflevere CountAir® som elektronisk affald hos din kommune.

