



Alert-iT personsøger

Brugermanual

Dette dokument gælder for;

Model: **P202 (4-kanals og 128-kanals medicinsk personsøger)**

Produktversion: **v1**

Firmware: **v1.0.***

Alert-iT og Alert-iT-logoet er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende iTs Designs Ltd.

Ophavsret © 2025 iTs Designs Ltd.

Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side	Side
INDLEDNING	4	Batteristatus 14
Produktbeskrivelse	4	YDERLIGERE FUNKTIONER 14
Tilsluttet brug	4	Nulstilling af alarmer fra utilgængelige skærme 14
Indikationer for brug	4	Standard- og diskret tilstand 14
Tiltænkte brugere og brugsmiljø	4	Assistanceopkald (kun 128-kanals) 14
Tilsluttet patientpopulation	4	Hjælpeopkald (kun 128-kanals) 14
Kontraindikationer	4	ANBEFALEDE KONFIGURATIONER 15
Enhedens levetid	5	Privat ejendom med enkelt skærm 15
SIKKERHED	5	Lille plejested med flere skærme og Enkelt personsøger 15
Vigtig information	5	Medium plejehjem med flere skærme og flere personsøgere 15
Sikkerhedsdefinitioner	5	PARRING AF SKÆRME 16
Alvorlige hændelser	5	Oversigt over parring 16
Overholdelse af krav til medicinsk udstyr	5	Forståelse af navne og steder 16
Utlåst justering af indstillinger	5	Tilføjelse af en ny skærm 16
Produktansvar	6	Fjernelse af en skærm 16
Sikkerhedsforanstaltninger	6	Deaktivering af en skærm 17
Konsultation med en sundhedsperson	7	AVANCEREDE PERSONSØGERINDSTILLINGER 17
Forklaring af de markeringer, der anvendes på enheden og i dokumentationen	8	BATTERIET LEVETID 18
PAKKENS INDHOLD	9	RENSNING 18
Kompatible produkter	9	PRODUCENTENS ANSVAR 18
SYSTEMOVERSICHT	9	BORTSKAFFELSE AF ENHEDEN EFTER BRUG 18
Alert-iT personsøger	9	OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER 19
Statuslamper	9	RUTINEKONTROL 19
Personsøgerfunktioner	10	Daglige kontroller 19
Alarmnotifikationer	11	Ugentlige kontroller 19
Nulstilling af alarmer	11	ALERT-IT BEGRÆNSET GARANTIERKLÆRING 20
Forløbetid	11	TEKNISKE SPECIFIKATIONER 22
Brug af "Standard" og "Diskret" tilstand	12	
Fejlsikker radio	12	
INDLEDENDE OPSÆTNING	12	
Brug af bælteclipsen og snoren	12	
Opladning	12	
Rækkeviddetestning	13	
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER	13	
Tænd for personsøger	13	
Vækker skærmen	13	
Slukning af personsøger	13	
Reaktion på alarmmeddelelser	13	

1 INTRODUKTION

Denne 'brugsanvisning' beskriver brugen af Alert-iT **"Pager"**.

Den/de **"Produktversion(er)"**, som disse instruktioner gælder for, er vist på forsiden af dette dokument. Dette skal refereres til og sammenlignes med **"Produktversion"** -nummeret, der er vist på produktinformationsmærkatet, der findes øverst på din enhed. Hvis dette dokument ikke er egnet til dit produkt, henvises der til afsnittet 'support' på vores hjemmeside for alternative instruktioner.

- Følg alle instruktioner i dette dokument vedrørende første opsætning, brug, rengøring og bortskaffelse af enheden.
- **"Pageren"** er et medicinsk udstyrstilbehør.

1.1 Produktbeskrivelse

"Pageren" bruges til at advare plejepersonale om alarm- og fejlmeddelelser fra parrede monitorer og sendere.

Denne brugermanual forudsætter, at personsøgeren er blevet konfigureret af en leder/primær omsorgsperson inden brug til at fungere med alle monitorer i dit "hjem" eller "plejehjem", og at den korrekte driftsprotokol er aktiveret. Denne bog giver detaljer om en række standardprotokoller, der kan være relevante, samt mere generelle kontrolfunktioner, der er tilgængelige for de to brugerniveauer.

Plejepersonale underrettes via visuelle, hørbare og vibrerende alarmer (hvis aktiveret).

Driftsmiljøet er typisk et soveværelse i et familiehjem eller på et plejehjem.

1.2 Tilsigtet brug

Alert-iT-personsøgeren er beregnet til at hjælpe med plejen ved at give plejeren besked om at komme og se patienten for at bekræfte deres velbefindende.

1.3 Indikationer for brug

Denne enhed er designet og fremstillet som et socialt hjælpemiddel, der udelukkende er beregnet til at blive brugt som et hjælpemiddel for en plejeperson.

Har til formål at forbedre plejepersonalets årvågenhed over for de ubehagelige bivirkninger af forskellige lidelser og individuelle plejebehov. Systemet overvåger ikke vitale fysiologiske processer og bør ikke forventes at diagnosticere nogen sygdom eller forudsige symptomernes opståen.

1.4 Tiltænkte brugere og brugsmiljø

Produktet er beregnet til at blive brugt som et hjælpemiddel til plejepersonale. Brugeren kan være lægmand eller sundhedspersonale.

Produktet er beregnet til brug i en række forskellige miljøer, herunder hjemmet og inden for professionel pleje.

1.5 Tilsigtet patientpopulation

Brugen af produktet er ikke begrænset til nogen specifik patientgruppe.

1.6 Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer.

1.7 Enhedens levetid

Den typiske forventede levetid for personsøgeren ved normal hjemmebrug er **"5 år"**.

Udskift personsøgeren efter dette eller tidligere, hvis;

1. på anden måde instrueret; eller
2. hvis der observeres nogen form for skade på enheden.

Se **"side 18"** for vejledning i genbrug. Hvis der observeres revner eller strukturelle skader, skal brugen af personsøgeren ophøre og straks udskiftes.

2 SIKKERHED

2.1 Vigtig information

Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne brugermanual.

2.2 Sikkerhedsdefinitioner



ADVARSEL: Risiko for alvorlig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.



ADVARSEL: Risiko for beskadigelse af produktet, hvis instruktionerne ikke følges.



BEMÆRK: Oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

2.3 Alvorlige hændelser

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat/det land, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

'Alvorlig hændelse' betyder enhver hændelse, der direkte eller indirekte har ført til, kunne have ført til eller kunne føre til et af følgende:

- dødsfald af en patient, bruger eller anden person
- den midlertidige eller permanente alvorlige forværring af en patients, brugers eller en anden persons tilstand sundhed
- en alvorlig trussel mod folkesundheden.

Producentens kontaktoplysninger kan findes på bagsiden af dette dokument.

2.4 Overholdelse af krav til medicinsk udstyr

Alert-iT Medical Pager markedsføres som et teknisk hjælpemiddel til plejepersonale. Den overholder alle nødvendige krav, regler og direktiver for medicinsk udstyr.

2.5 Utsigtet justering af indstillinger

Ændring af radioadressen (uden også at ændre den på modtagerudstyret) vil resultere i en RF-fejlmeddelelse på modtagerudstyret, og eventuelle resulterende alarmmeddelelser vil ikke længere blive modtaget.

2.6 Produktansvar

Dette Alert-iT-produkt er designet med behørig hensyntagen til pålidelighed og integritet. Selvom det tilbyder en yderst årvågen alarmmetode, er det altid muligt, at en nødsituation kan gå uopdaget hen af forskellige årsager (herunder funktionsfejl), og i livstruende situationer tilrådes det at bruge Alert-iT-systemet sammen med yderligere teknikker. Hverken producenten eller dennes repræsentant kan påtage sig juridisk ansvar for at levere et system, der er ufejlbarligt.

Produktet er udviklet og risikovurderet i henhold til ISO 14971. Manualen og de tekniske specifikationer er udarbejdet i henhold til sikkerhedsvurderingerne i risikoanalysen. Overvej altid sikkerheden ved brug af produktet. Alert-iT påtager sig intet ansvar for konsekvenser som følge af forkert brug eller installation af produktet. Enhver form for beskadigelse eller manipulation af produktet ugyldiggør garantien og fraskriver sig producentens ansvar. Produktets forventede levetid gælder, når den bruges i overensstemmelse med den tilsigtede brug og vedligeholdelsesinstruktioner.

2.7 Sikkerhedsforanstaltninger



ADVARSEL:

- Hvis en ekstern kraft ødelægger AC-adapteren, og dele forbliver i stikkontakten, kan det resultere i elektrisk stød.
- Sørg for, at strømkablet er ført og fastgjort for at undgå risiko for at snuble, blive viklet ind i det eller blive viklet ind i det. kvælning.
- Plejepersonalet må aldrig afbryde en alarm uden at kontrollere patientens tilstand.



ADVARSEL: I henhold til 60601-1-2 EMC

- Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet oven på andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i forkert drift. Hvis sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr observeres for at sikre, at de fungerer normalt.
- Brug af andet tilbehør, transducere og kabler end dem, der er specificeret eller leveret af producenten af dette udstyr, kan resultere i øget elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og resultere i forkert drift.
- Bærbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive periferiudstyr såsom antennekabler og eksterne antenner) bør ikke anvendes tættere end 30 cm (12 tommer) på nogen del af Alert-iT Pageren, inklusive kabler specificeret af producenten. Ellers kan det resultere i forringelse af udstyrets ydeevne.



ADVARSEL: I henhold til 60601-1 Sikkerhed

- Det er ikke tilladt at modificere dette udstyr.



FORSIGTIGHED:

- Må ikke anvendes, hvis personsøger eller monitorer er i stykker.
- Brug ikke udstyret i stærke elektromagnetiske felter.
- Brug ikke produktet i miljøer med brandfarlige anæstetikblandinger, ilt eller lattergas oxid.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Brug kun personsøgeren med tilbehør, der er godkendt til brug, og kun i overensstemmelse med instruktionerne.
- Forsøg ikke at reparere enheden selv.
- Fjern batterierne, når enheden ikke er i brug, eller når den opbevares i længere tid.
- Brug ikke ikke-genopladelige batterier. Alkaliske batterier indebærer risiko for overophedning og ødelæggelse. enheden.

i NOTE:

- Denne enhed er kun beregnet til at blive brugt som et hjælpemiddel af plejepersonale. Produktet må ikke erstatte menneskeligt tilsyn.
- Sørg for, at brugsanvisningen dækker den enhed, der anvendes, dvs. det samme varenummer, der er angivet på forsiden.
- Apparatet bør kun bruges af kyndige plejepersonale og må ikke bruges af operatører som ikke forstår indholdet i denne manual.
- Plejepersonalet er ansvarlig for at vurdere risiciene ved at bruge dette udstyr og eventuelle indstillinger vedrørende det.
- For at oplade personsøgernes batterier skal personsøgeren være tilsluttet en 5V USB-strømforsyning, der er kompatibel med leverer mindst 500mA.
- Brug ikke denne enhed til andre formål end det, der er angivet af producenten.
- Justering af lydstyrken kan medføre, at notifikationslyden ikke kan høres.
- Test altid enheden, før du bruger den, og når indstillingerne justeres.
- Test regelmæssigt apparatet som beskrevet i denne brugsanvisning. Sørg ved test for at Alarmmeddelelser modtages på plejepersonalets(e) lokation(er). Se **side 19**.
- Der skal udføres en risikovurdering for at afgøre, om systemets pålidelighedsniveau er tilstrækkeligt, eller om der er behov for yderligere udstyr. Der skal tages hensyn til patientens sandsynlighed for, at systemet bliver manipuleret.
- Vedligeholdelse af produktet er ikke tilladt under brug.
- Rengør og desinficer hver genstand efter behov i overensstemmelse med oplysningerne på **side 18**.
- Noget tilbehør er forsynet med små skruer og har plastikposer. Sørg for, at disse ikke kommer i besiddelse af sårbare personer, som kan blive kvalt i dem.
- Som med alt elektronisk udstyr er der risiko for, at udstyret kan forstyrre eller blive påvirket af interferens fra andre elektriske eller elektroniske enheder. Undgå derfor at placere enheden, sensoren eller tilslutningskablet/-kablerne i umiddelbar nærhed af følsomme elektroniske enheder eller enheder, der producerer stærke elektromagnetiske felter, såsom radiosendere, mobiltelefoner eller strømkabler.
- For at opretholde grundlæggende sikkerhed og essentiel ydeevne med hensyn til elektromagnetiske forstyrrelser I den forventede levetid kræves der ingen instruktioner.

2.8 Konsultation med en sundhedsperson

Ring til nødtjenester, hvis der er behov for øjeblikkelig lægehjælp.

Det er vigtigt at konsultere en sundhedsperson:

- hvis du er usikker på, om enheden (eller den compatible skærm) er egnet til patientens tilstand.
- hvis patienten oplever forskelle i sine symptomer, for eksempel symptomtype eller varighed.

2.9 Forklaring af de markeringer, der anvendes på enheden og i dokumentationen

	Se disse instruktioner før brug.
	Dette er et medicinsk udstyr.
	Unik enhedsidentifikation.
	Batchkode.
	Serienummer.
	Katalognummer
	Fabrikant.
	Fremstillingsdato.
	Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union.
	Holdes tørt.
	Skrøbelig, håndter med forsigtighed.
	Temperaturbegrænsning.
	Fugtighedsbegrænsning.
	Begrænsning af atmosfærisk tryk.
IP64	Angiver niveauet af indtrængningsbeskyttelse for enheden.
	Jævnstrøm.
	Forsigtig: Se sikkerhedsoplysningerne i denne brugsanvisning.
	Se brugsanvisningen. Se brugsanvisningen.
	CE-mærke. (Produktet overholder de generelle sikkerheds- og ydeevnekrav i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745).
	UKCA-mærket (produktet overholder de væsentlige krav i UK Medical Device Regulations 2002).
	Symbol for det europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) 2019/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
RoHS	Angiver, at produktet er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (almindeligvis omtalt som direktivet om begrænsning af farlige stoffer eller RoHS).
	Importøroplysninger.

3 PAKKEINDHOLD

Din pakke vil indeholde følgende:

1x **Alert-iT personsøger**

[Varenummer: P202]

2x **AAA genopladelige batterier [Ni-MH 1.2V]** (medfølger)

[Varenummer: P160G]

1x **bælteklips**

[Varenummer: P204A]

1x **Snor**

[Varenummer: P204B]

1x **5V USB-oplader** (inkluderer 1,5 m USB Type-C-kabel)

[Varenummer: P167*B]

3.1 Kompatible produkter

Personsøgeren er kompatibel med alle Alert-iT's Safelink™ radiomonitorer og -sendere.

Bemærk: Kontakt venligst din udstyrsleverandør for yderligere information.

4 SYSTEMOVERSIGT

4.1 Alert-iT personsøger



4.2 Statuslamper

Strømstatus: Blinker grønt = Oplader.

Konstant grøn = Fuldt opladet.

Blinkende rødt = Kritisk batteri.

Monitorstatus: Blinkende gul = Fejl/Lav/Mellem prioritetsalarm.

Blinkende rød = Alarm med høj prioritet.

Personsøgerstatus: Blinker gult = Fejl i radioforbindelse.

Blinkende rødt = Aktivt assistance- eller hjælpeopkald.



4.3 Personsøgerfunktioner

Alert-iT-personsøgeren er specielt designet til hjemme- og professionelle plejemiljøer.

De specifikke funktioner for dette er;

- Stor baggrundsbelyst skærm med detaljerede alarmindikationer.
- Annuller ved kilden for fuldstændig overholdelse af omsorgspligten.
- Lang radiorækkevidde.
- Lang batterilevetid, der dækker over 24 timers kontinuerlig brug på én opladning.
- Tre alarmniveauer (plus fejlindikation).
- Konfigurerbar til individuel eller gruppebrug.
- Lydsignaler med justerbar lydstyrke, der angiver alvorlighedsgraden.
- Nem omprogrammering af monitornavn og placering.

Ved normal brug har alle omsorgspersoner en meget simpel protokol:

- Personsøgeren angiver alarmens placering og alvorlighedsgrad.
- Indikationen kan ledsages af en hørbar alarm og/eller vibration.
- Plejepersonalet kan midlertidigt afbryde lyden/vibrationen med et enkelt tastetryk.
- Plejepersonalet tager sig af patienten og nulstiller alarmen på deres værelse.
- Personsøgeren nulstiller automatisk sig selv.

Der er nogle meget simple grundparametre, som plejeren kan ændre, afhængigt af det niveau, der er godkendt af supervisoren.

Alle brugere kan:

- Nulstil alarmer, der kan være blevet fastlåst, hvis skærmen er beskadiget eller ikke længere er på stedet.

Hvis brugere med tilladelse kan:

- Skift grundlæggende grænsefladefunktioner såsom skærmens lysstyrke og tastebip.
- Skift mellem "standard" og "diskret" lydstyrke- og vibrationsindstillinger.
- Tilføj, fjern og rediger parrede skærme.

Som standard kan brugerne **"Slukke"** personsøgeren, men kan ikke **"Administrere skærme"**.

Note:

*Muligheden for at slukke personsøger kan skjules fra indstillingsmenuen **"Bruger"** via skærbilledet **"Avanceret"** > **"Yderligere indstillinger"** > **"Bruger"** ved at indstille **"Sluk"** til **"Afvis"**.*

*Muligheden for at administrere parrede skærme kan skjules fra indstillingsmenuen **"Bruger"** via skærbilledet **"Avanceret"** > **"Yderligere indstillinger"** > **"Bruger"** ved at indstille **"Administrer skærme"** til **"Skjul"**.*

4.4 Alarmnotifikationer

Når en alarmmeddelelse modtages, vil personsøgeren afspille en hørbar alarmtone og/eller vibrere. Skærmen vil automatisk vågne op og vise årsagen til alarmen.

Alarmmeddelelsen vil vise:

- Navn på skærmen.
- Skærmens placering.
- Den type monitor, der sendte alarmen.
- Den alarmtilstand, som monitoren har registreret.
- Forløbet tid siden personsøgeren modtog alarmen.

Alarmnotifikationer er rangeret efter prioritet, så hvis flere alarmer er aktive, vises alarmer med højere prioritet frem for advarsler med lavere prioritet.

Alarmprioritet angives med farven på alarmkanten:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| • Høj prioritet • | = | Rød kant. |
| Mellem prioritet = • Lav | | Orange kant. |
| prioritet | = | Gul kant. |
| • Fejl | = | Grå kant. |

Ventende alarmnotifikationer kan enten være **"Acceptor"** eller **"Snoozed"**.

Bemærk 1 : Hvis du "accepterer" en alarm, afbrydes alarmen på alle andre personsøgere, der er parret med den pågældende monitor.

Bemærk 2 : Hvis personsøgeren kun er parret med én skærm, vil der ikke være mulighed for at "slumre" alarmer.

Hvis du vælger enten **"Acceptor"** eller **"Snooze"**, lydløses alarm i **"5 minutter"**.

Bemærk 3 : Denne periode kan justeres i indstillingsmenuen.

Kun 128-kanals personsøgere:

Hvis **"Tillad bruger at foretage assistanceopkald"** er aktiveret i menuen med avancerede indstillinger, vil valg af **"Acceptor"** give brugeren mulighed for at ringe efter yderligere assistance ved at trykke på knappen **"Assist"**.

4,5 Nulstilling af alarmer


Alert-iTs monitorer er typisk **"Annuller ved kilden"**. Det betyder, at brugeren skal besøge patientens placering for at nulstille monitoren og rydde alarmen fra personsøgeren.

4.6 Forløbet tid

Alarmmeddelelsen på personsøgeren viser den **"forløbne tid"**, siden alarmen blev modtaget af personsøgeren.

Det er ofte nyttigt at vide, hvor længe patienten har været i en nødlidende tilstand. Når alarmen nulstilles på monitoren, fjernes alarmmeddelelsen fra personsøgerskærmen, den forløbne timer stoppes, og hændelsen skrives til alarmhistorikloggen.

Hvis man ønsker at vide, hvor længe alarmtilstanden er aktiv, bør brugeren derfor ikke nulstille alarmen, når de kommer. I stedet bør de afbryde alarmen på deres personsøger ved at trykke på knappen **"Acceptor"**, tage sig af patienten, kontrollere patientens tilstand og derefter notere den **"forløbne tid"**, når alarmtilstanden ophører, før monitoren nulstilles.

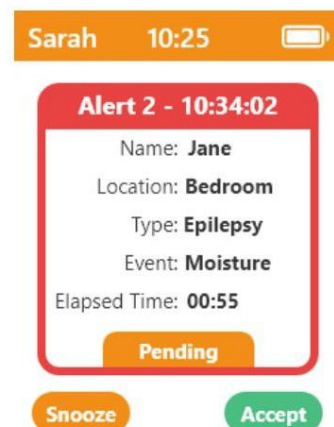

4.7 Brug af "Standard" og "Diskret" tilstand

Person søgeren kan skiftes mellem **"Standard"** via softkey'en  og en **"diskret"**  tilstand på startskærmen ved siden af ikonet.

4.8 Fejlsikker radio

Mange af Alert-iTs sikkerhedskritiske skærme har en aktiveret funktion kaldet **"Securelink"**.

I denne tilstand sender monitoren en almindelig radiotransmission for at danne et fejlsikkert 'hjerteslag', der gør det muligt for modtagende udstyr at underrette plejepersonalet, hvis de er uden for rækkevidde, eller hvis enheden har svigtet på grund af en eller anden årsag.

Hvis personsøgeren er parret med en **"Securelink"** -aktiveret monitor, vil den udløse en **"Radioforbindelse"** -fejl, hvis den ikke har modtaget nogen radiotransmissioner i **2 minutter**.

Denne fejl udløses typisk af:

- Personsøgeren er uden for senderens rækkevidde.
- Senderen er blevet slukket.
- Senderen har en fejl og fungerer ikke korrekt.

Hvis radiatorækkevidden er et problem, kan radiorepeatere bruges til at udvide systemets radiatorækkevidde.

Flere radiorepeatere kan "daisy-chaines" for at udvide rækkevidden yderligere.

5 INDLEDENDE OPSÆTNING

5.1 Brug af bælteclips og snor

Person søgeren er forsynet med en aftagelig bælteklips og en snor, der kan bruges til at fastgøre personsøgeren til brugerens tøj.



5.2 Opladning

Person søgeren skal oplades før første brug.

Person søgeren kan oplades med en USB Type-C-oplader.

Typisk opladningstid er 2-3 timer.

Bemærk: Nogle USB-porte kan ikke levere tilstrækkelig strøm til at oplade personsøgeren. Personsøgeren skal være tilsluttet en USB-oplader, der kan levere mindst 500 mA. Personsøgeren vil automatisk registrere og forhindre opladning, hvis den tilsluttes en port, der ikke kan dette.

5.3 Rækkeviddetestning

Det er vigtigt at kontrollere, at alle monitorer kan nå personsøgerens radio. I helbredskritiske situationer bør monitoren konfigureres til at fungere i Securelink (Failsafe)-tilstand. Se den enkelte monitors instruktioner for, hvordan du aktiverer dette.

6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

6.1 Tænding af personsøger

Sådan tænder du personsøgeren:

- Hold en vilkårlig knap nede i 3 sekunder.

Ved opstart viser personsøgerens skærm softwareversion, antal kanaler og radiobånd i 5 sekunder.

*Bemærk: Hvis batterierne fjernes i længere tid, vil klokkeslæt og dato gå tabt. Alle logføringsfunktioner vil blive suspenderet, indtil klokkeslæt og dato indstilles igen via menuen "**Avancerede indstillinger**".*

6.2 Vække skærmen

For at spare strøm slukker displayet efter en kort periode med inaktivitet.

Sådan vækker du skærmen:

- Tryk kort på en vilkårlig knap for at vække displayet.

Bemærk: Timeout-tiden for visning kan justeres i menuen med avancerede indstillinger.

6.3 Slukning af personsøger

Sådan slukker du personsøgeren:

- Væk skærmen ved at trykke kort på en vilkårlig knap.
- Tryk på den venstre valgknap for at åbne indstillingsmenuen.
- Brug tastaturet til at vælge "**Brugerindstillinger**" eller "**Avancerede indstillinger**".
- Rul ned, indtil du ser "**Sluk personsøger**".
- Tryk på den højre valgknap for at slukke personsøgeren.

*Bemærk: Muligheden for at slukke personsøger kan skjules fra indstillingsmenuen "**Bruger**" via skærbilledet "**Avanceret**" > "**Yderligere indstillinger**" > "**Bruger**" ved at indstille "**Sluk**" til "**Afvis**".*

6.4 Reaktion på alarmmeddelelser

Når en alarmmeddelelse modtages, vil personsøgeren afspille en hørbar alarmtone og/eller vibrere. Skærmen vil automatisk vågne op og vise årsagen til alarmen.

For at afbryde alarmen skal brugeren trykke på knappen "**Accepter**", hvis de skal til at tage sig af brugeren. Eller trykke på knappen "**Snooze**", hvis de er optaget af en anden alarm, eller hvis en anden er til stede.

*Bemærk: Hvis der kun er én skærm parret med personsøgeren, vil "**Snooze**"-knappen være skjult.*

6.5 Batteristatus

Person søgeren har en typisk batterilevetid på 24 til 36 timer.

Når batteriet er lavt, vises en advarsel om **"Batteri lavt"** på skærmen. Person søgeren skal oplades. snart.



Når advarslen **"Batteriniveau kritisk"** vises, skal person søgeren oplades med det samme!

7 YDERLIGERE FUNKTIONER

7.1 Nulstilling af alarmer fra utilgængelige skærme

Hvis en monitors **"Nulstil"** -knap ikke kan bruges til at nulstille en alarm, eller fordi en parret monitor er blevet slukket og er konfigureret til at sende fejlen **"Skærm fra"**, kan du nulstille alle aktive alarmer ved at:

- Tryk på venstre valgknap for at åbne menuen.
- Vælg **"Brugerindstillinger"** eller **"Avancerede indstillinger"**.
- Brug tastaturet til at rulle ned, indtil du ser **"Nulstil alle alarmer"**.
- Tryk på den venstre valgknap for at slette alle aktive alarmer fra person søgeren.

Bemærk: Hvis monitoren stadig er tændt og i alarmtilstand, vil person søgeren udløse en ny alarm inden for ~2 minutter for enheder uden SecureLink eller ~10 sekunder for enheder med SecureLink.

7.2 Standard- og diskret tilstand

Person søgeren kan hurtigt skifte mellem en **"Standard"** -knap og to konfigurerbare lydstyrke- og vibrationsindstillinger.



og en **"diskret"**



tilstand til hurtigt

7.3 Assistanceopkald

(Kun tilgængelig på 128-kanals person søger)

I miljøer med flere person søgere kan du give brugeren mulighed for at tilkalde hjælp med en bestemt alarm.

Bemærk: Andre person søgere modtager kun denne hjælpealarm sammen med placeringen af den pågældende skærm, hvis den pågældende person søgere også er parret med skærmen.

Sådan aktiverer du:

- Gå til **"Avancerede indstillinger > Yderligere indstillinger"**.
- Indstil **"Tillad assistanceopkald"** til **"Tillad"**.

Når det er aktiveret, kan brugeren foretage et assistanceopkald ved at:

- Tryk på **"Accepter"** på en alarm.
- Tryk derefter på **"Assist"** på alarmen.

Sådan annullerer du:

- Tryk på knappen **"Accepter"**.

7.4 Hjelpeopkald

(Kun tilgængelig på 128-kanals person søger)

I miljøer med flere person søgere kan du give brugeren mulighed for at sende et generelt **"hjelpeopkald"** til andre person søgere i området, hvis de har brug for hjælp.

Bemærk: Hjelpeopkald skal også være aktiveret på alle de andre person søgere, du ønsker skal modtage hjelpeopkaldet.

Sådan aktiverer du:

- Gå til **"Avancerede indstillinger > Yderligere indstillinger"**.

-
- Indstil **"Tillad hjælpeopkald"** til **"Til"**.

Når det er aktiveret, kan brugeren foretage et hjælpeopkald ved at:

- Vækker skærmen ved at trykke på en vilkårlig knap.
- **Hold** den midterste **valgknap nede i 5 sekunder**, og tryk derefter på den øverste højre knap for at bekræfte.

Sådan annullerer du opkaldet:

- Tryk på knappen **"Annuller"**.

8 ANBEFALTE KONFIGURATIONER

På grund af den store variation i miljøer, personsøgeren bruges i, er det vigtigt, at lederen/den primære omsorgsperson konfigurerer personsøgeren korrekt til deres miljø.

Følgende afsnit beskriver typiske miljøer og foreslåede indstillinger, der bør konfigureres.

8.1 Privat ejendom med enkelt skærm

Vi anbefaler, at du overvejer:

- Indstilling af tid og dato for at aktivere logføringsfunktioner.
- Indstilling af **"Tillad brugere at "Administrere skærme""** til **"Til"**.

8.2 Lille plejested med flere skærme og enkelt personsøger

Vi anbefaler, at du overvejer:

- Indstilling af tid og dato for at aktivere logføringsfunktioner.
- Indstilling af **"Visningstilstand"** til **"Ny først"**.
- Indstilling af **"Tillad brugere at "Administrere skærme""** til **"Fra"**.
- Indstilling af **"Tillad brugere at "Sluk""** til **"Fra"**.
- Skift standardadgangskoden for at forhindre adgang til menuen med avancerede indstillinger.

8.3 Medium plejested med flere skærme og flere personsøgere

Vi anbefaler, at du overvejer:

- Indstilling af tid og dato for at aktivere logføringsfunktioner.
- Indstilling af **"Visningstilstand"** til **"Prioritet"**.
- Kun parring af personsøger med skærme, som brugeren af denne personsøger skal reagere på.
- Parring af personsøger med monitorer i deaktiveret tilstand (se **afsnit 9.5**), så assistanceopkald kan give placeringsoplysninger.
- Indstilling af **"Tillad brugere at "Administrere skærme""** til **"Fra"**.
- Indstilling af **"Tillad brugere at "Sluk""** til **"Fra"**.
- Indstilling af **"Tillad brugere at aktivere "Hjælpeopkald""** til **"Til"**. **(Kun tilgængelig på 128-kanals personsøger)**
- Indstilling af **"Tillad brugere at foretage "Hjælpeopkald""** til **"Til"**. **(Kun tilgængelig på 128-kanals personsøger)**
- Skift standardadgangskoden for at forhindre adgang til menuen med avancerede indstillinger.

9 PARRING AF SKÆRME

9.1 Oversigt over parring

Person søgeren er typisk parret med de medfølgende skærme, når den leveres som et system. Hvis der er behov for yderligere skærme, eller hvis du har en erstatningsperson søger, skal du parre skærmen med person søgeren før brug.

Skærme, der er slukket i løbet af dagen for at forhindre generende alarmer, kan deaktiveres på person søger (se afsnit 9.5).

9.2 Forståelse af navne og placeringer

For at gøre det nemmere at identificere alarmkilden kan hver monitor mærkes med et "Navn" og en "Sted".

Du kan frit bestemme, hvordan du bedst grupperer skærme, for eksempel:

- For én bruger med flere skærme

Navn: Johannes.	Placering: Soveværelse.
Navn: Johannes.	Sted: Stuen.
Navn: Johannes.	Placering: Badeværelse.
- For flere brugere på én lokation:

Navn: Johannes.	Sted: Lounge.
Navn: Jane.	Sted: Lounge.
- For skærme, der ikke er tildelt brugere:

Navn: Fernie House.	Beliggenhed: Hoveddøren.
---------------------	--------------------------



9.3 Tilføjelse af en ny skærm

- Vælg "**Administrer skærme**" i menuen.
- Tryk på knappen.
- Indtast et "**Navn**".
- Vælg navnet fra listen "**Navne**".
- Tryk på knappen for at tilføje en skærm.
- Indtast en "**Placering**".
- Indtast "**Radioadressen**".
- Vælg skærmtypen "**Type**" fra rullelisten.
- Tryk på knappen "**Flyt**" for at gemme skærmen.

9.4 Fjernelse af en skærm

- Vælg "**Administrer skærme**" i menuen.
- Tryk på centerknappen for at vælge "**Navn**" på den skærm, du vil slette.
- Tryk på centerknappen for at vælge den "**Skærm**", du vil slette.
- Tryk på knappen for at fjerne skærmen.
- Tryk på knappen "**Flyt**" for at bekræfte.

9.5 Deaktivering af en skærm

For midlertidigt at stoppe med at bruge en skærm kan du indstille indstillingen **"Alarmstatus"** for den pågældende skærm til **"Fra"** i menuen **"Administrer skærme"**.

10 AVANCERET MENU > PERSONSØGERINDSTILLINGER

Følgende afsnit indeholder vejledning til indstillingerne i **"Avanceret"** > **"Person søgerindstillinger"** menu.

Lysstyrke

Dette justerer skærmens lysstyrke for den aktuelt valgte tilstand (Standard / Diskret). Bemærk, at højere lysstyrkeindstillinger vil reducere batteriets levetid.

Tastebip

Dette er en hørbar lyd, der udsendes, hver gang der trykkes på en knap på tastaturet i standardtilstand.

Se oplysninger

Denne skærm viser grundlæggende oplysninger om enheden og kan være nyttig under supportopkald til at identificere enheden og den softwareversion, den kører.

Person søgernavn

Et personsøgernavn kan konfigureres for at hjælpe med at identificere personsøgeren. Dette navn vises på titellinjen på hovedskærmen, f.eks. personsøger **"Dag"/ "Nat"**.

Dato og klokkeslæt

Person søgeren har to logge: En **"Alarm- og fejlhistorik"** og en **"Systemhistorik"**.

Bemærk: Logføring kræver, at tid og dato indstilles, før logføring kan begynde. Hvis disse logfiler ikke er nødvendige, behøver tid og dato ikke at indstilles.

Standard- og diskret tilstand

Du kan justere lydstyrken og vibrationsindstillingen for hver af disse tilstande her.

Snooze-timer

Denne indstilling konfigurerer, hvor længe personsøgerens lydløshed er aktiveret, når en alarm accepteres eller udsættes for slumretilstand.

Fejl snooze

Denne indstilling konfigurerer, hvor længe personsøgerens funktion er lydløs, når en fejl afvises.

Skærmtimeout

Denne indstilling konfigurerer, hvor længe skærmen forbliver tændt. Hvis du øger denne indstilling, reduceres batterilevetiden, især i travle miljøer med hyppige alarmer.

Visningstilstand

Denne indstilling skifter mellem:

- **Prioritet:** Alarmer med højest prioritet vises øverst.
- **Ny først:** De seneste alarmer vises øverst.

Adgangskode

Standardadgangskoden til avancerede indstillinger er **"1009"**.

Adgangskoden kan ændres her, hvis det er nødvendigt.



Et Windows-pc-program er nødvendigt for at nulstille denne adgangskode, hvis den glemmes.

11 BATTERIETS LEVETID

Enheden bruger 2 genopladelige AAA-batterier af høj kvalitet på 1,2 V Ni-MH, der holder i flere år, før de skal udskiftes.

Bemærk: Tid og dato skal nulstilles, hvis batterierne har været fjernet i en længere periode, før logføringsfunktionerne starter.

Batterilevetiden vil variere mellem 24 og 40 timer afhængigt af de aktiverede funktioner, hyppigheden af alarmer og hvor hurtigt der reageres på alarmer.

Skærmens baggrundsbelysning er den mest strømkrævende funktion.

Når batterierne er lave, viser skærmen **"BATTERI LAVT"**.

Når batterierne er meget lave, viser skærmen **"BATTERINIVEAU KRITISK"**, og der vil blive afgivet en lyd, indtil batterierne er udskiftet.



Frakobl alle opladningskabler, før du åbner batteridækslet.

12 RENGØRING

Du kan tørre personsøgeren af med en fugtig klud, et neutralt rengøringsmiddel eller et mildt desinfektionsmiddel.



Undgå at få væske ind i USB-stikket eller lydhullet.



Frakobl altid opladningskablet, inden du rengør enheden. Tør alle dele grundigt efter rengøring.

13 PRODUCENTENS ANSVAR

iTs Designs Ltd. (T/A Alert-iT Care Alarms) er ansvarlig for at sikre enhedens sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, forudsat at:

- enheden er installeret, brugt og rengjort i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning til bruge.
- eventuelle ændringer af enheden, vedligeholdelse og reparationer udføres af en person, der er uddannet af Alert-iT, eller dets repræsentanter.
- alle anvendte reservedele eller tilbehør er godkendt af Alert-iT.

14 BORTSKAFFELSE AF ENHEDEN EFTER BRUG



I overensstemmelse med direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) skal enheden indsamles separat og returneres til et godkendt indsamlingssted. Ejeren skal aflevere enheden på det affaldsindsamlingssted, der er angivet af de lokale myndigheder.

For yderligere information om bortskaffelse af enheden, kontakt venligst de relevante myndigheder.

15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER

Producenten, iTs Designs Ltd., erklærer hermed, at dette produkt overholder de relevante krav i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 og den britiske forordning om medicinsk udstyr fra 2002.

Producenten, iTs Designs Ltd., erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med Radio Equipment Regulations (UK) 2017 og Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.alert-it.co.uk/support/

Elektromagnetisk overholdelse

- Overholder IEC 60601-1-2 klausul 4.3, 7 og 8.
- Emissionsklasse IEC 55011: Klasse B.
- Immunitetstestniveau: 10V/M. Ydelseskriterier: B. •

Emissionsgrænser og immunitetstestniveauer anvendt til IEC 60601-1-11 Hjemmeplejemiljø.

16 RUTINEKONTROL

16.1 Daglige kontroller

Tændt

Væk displayet, og sørg for, at personsøgeren er tændt, inden du starter din vagt.

Batteriniveau

Sørg for, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, inden du starter din vagt.

Normal/Diskret tilstand

Sørg for, at personsøgeren er indstillet til den korrekte tilstand inden brug.

16.2 Ugentlige kontroller

Kablernes tilstand

Kontroller kablernes tilstand.

Alarmaktivering

Sørg for, at plejepersonalet modtager alarmmeddelelserne. Udløs en alarm manuelt, hvis det er nødvendigt.

17 ALERT-IT BEGRÆNSET GARANTIERKLÆRING

I det usandsynlige tilfælde, at dit produkt har brug for garantiservice, bedes du kontakte din leverandør, distributør eller producent. For at undgå unødvendig ulejlighed for dig anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt, før du søger garantiservice.

DIN GARANTI

Med denne garanti garanterer Alert-iT, at produktet er fri for defekter i materialer og udførelse på den oprindelige købsdato i en periode på tre (3) år fra denne dato.

Hvis det inden for garantiperioden konstateres, at produktet er defekt (på datoen for det oprindelige køb) på grund af forkerte materialer eller udførelse, vil Alert-iT, uden beregning for arbejdskraft eller reservedele, reparere eller (efter Alert-iTs skøn) erstatte produktet eller dets defekte dele i henhold til nedenstående vilkår og begrænsninger.

Alert-iT kan erstatte defekte produkter eller dele med nye eller istandsatte produkter eller dele. Alle beholdte produkter og udskiftede dele bliver Alert-i's ejendom.

VILKÅR

Garantiydelser ydes kun, hvis den originale faktura eller salgskvittering (med angivelse af købsdato, modelnavn og forhandlernavn) fremvises sammen med det defekte produkt inden for garantiperioden. Alert-iT kan nægte gratis garantiydelse, hvis disse dokumenter ikke fremvises, eller hvis de er ufuldstændige eller ulæselige.

Denne garanti gælder ikke, hvis modelnavnet eller serienummeret på produktet er blevet ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt.

Denne garanti dækker ikke transportomkostninger og risici forbundet med transport af dit produkt til og fra Alert-iT.

Denne garanti dækker ikke:

- a. tilstedeværelsessensorer eller fugtsensorer (se de enkelte produkters garantier).
- b. periodisk vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele på grund af slitage.
- c. forbrugsvarer (komponenter, der forventes at skulle udskiftes regelmæssigt i løbet af levetiden af et produkt såsom batterier).
- d. skader eller defekter forårsaget af brug, betjening eller behandling af produktet i strid med normal
brug.
- e. skader på eller ændringer af produktet som følge af:
 - i. misbrug, herunder:
 - behandling, der resulterer i fysisk, kosmetisk eller overfladeskade eller ændringer af produktet.
 - manglende installation eller brug af produktet til dets normale formål eller i overensstemmelse med Alert-iT's instruktioner om installation eller brug.
 - manglende vedligeholdelse af produktet i overensstemmelse med Alert-iTs instruktioner om korrekt vedligeholdelse.
 - installation eller brug af produktet på en måde, der er uforenelig med tekniske eller sikkerhedsmæssige love eller standarder i det land, hvor det er installeret eller brugt.
 - ii. tilstanden af eller defekterne i systemer, som produktet anvendes eller indarbejdes i, undtagen andre Alert-iT-produkter, der er designet til brug sammen med produktet.

iii. brug af produktet med tilbehør, periferiudstyr og andre produkter af typen, anden tilstand og standard end foreskrevet af Alert-iT.

iv. reparation eller forsøg på reparation udført af personer, der ikke er autoriseret af Alert-iT.

v. justeringer eller tilpasninger uden Alert-iT's forudgående skriftlige samtykke, herunder:

- opgradering af produktet ud over de specifikationer eller funktioner, der er beskrevet i brugsanvisningen, eller ændringer af produktet for at overholde nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsstandarder i andre lande end dem, som produktet specifikt er designet og fremstillet til.

vi. forsømmelse

vii. ulykker, brand, væsker, kemikalier, andre stoffer, oversvømmelse, vibrationer, overdreven varme, for høj eller forkert forsynings- eller indgangsspænding, stråling, elektrostatiske udladninger, herunder belysning, andre eksterne kræfter og påvirkninger.

Denne garanti dækker kun produktets hardwarekomponenter.

UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Med undtagelse af ovenstående giver Alert-iT ingen garantier (udtrykkelige, stiltiende, lovpligtige eller på anden måde) vedrørende produktets eller den ledsagende eller indgående softwares kvalitet, ydeevne, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed til et bestemt formål eller på anden måde. Hvis denne udelukkelse ikke er tilladt eller fuldt ud tilladt i henhold til gældende lov, udelukker eller begrænser Alert-iT kun sine garantier i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov. Enhver garanti, der ikke kan udelukkes fuldt ud, vil være begrænset (i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov) til denne garantis varighed.

Alert-iTs eneste forpligtelse i henhold til denne garanti er at reparere eller udskifte produkter, der er underlagt disse garantivilkår og -betingelser. Alert-iT er ikke ansvarlig for tab eller skader i forbindelse med produkter, tjenester, denne garanti eller andet, herunder - økonomiske eller immaterielle tab - prisen betalt for produktet - tab af fortjeneste, indtægter, data, nydelse eller brug af produktet eller tilhørende produkter - indirekte, tilfældige eller følgeskader. Dette gælder, uanset om tabet eller skaden vedrører: forringet eller manglende drift af produktet eller tilhørende produkter på grund af defekter eller utilgængelighed, mens produktet var i brug hos Alert-iT, hvilket forårsagede nedetid, tab af brugertid eller driftsafbrydelse, unøjagtighed i output fra produktet eller tilhørende produkter.

Dette gælder for tab og skader i henhold til enhver juridisk teori, herunder uagtsomhed og andre erstatningsretlige handlinger, kontraktbrud, udtrykkelig eller stiltiende garanti og objektivt ansvar (selv hvor Alert-iT er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader).

Hvor gældende lov forbyder eller begrænser disse ansvarsfraskrivelser, udelukker eller begrænser Alert-iT kun sit ansvar i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov. For eksempel forbyder nogle lande udelukkelse eller begrænsning af skader som følge af uagtsomhed, grov uagtsomhed, forsætlig forsømmelse, bedrag og lignende handlinger.

Alert-iTs ansvar i henhold til denne garanti vil under ingen omstændigheder overstige den pris, der er betalt for produktet, men hvis gældende lov kun tillader højere ansvarsbegrænsninger, gælder de højere begrænsninger.

DINE JURIDISKE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES

Forbrugere har juridiske (lovbestemte) rettigheder i henhold til gældende national lovgivning vedrørende salg af forbrugerprodukter. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder, rettigheder, der ikke kan udelukkes eller begrænses, eller rettigheder mod den person, du har købt produktet fra. Du kan gøre dine rettigheder gældende efter eget skøn.

18 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Udstyret er til kontinuerlig drift.

Kontrolenhed

Model:	P202.
Batterier:	2x AAA 1,2V Ni-MH genopladelig 800mAh (HR03).
Batterilevetid:	Op til 40 timer (typisk 24 til 36 timer).
Strømindgang:	5VDC @ 500mA.
Opladningstid:	~2 timer.
Indgangs- og udgangsstik:	USB Type-C (strøm- og dataport).
Kontakter og kontroller:	Tastatur med 7 trykknapper.
Signallys:	Strømstatus (Rød / Grøn) Monitorstatus (Rød / Gul / Grøn) Personsøgerstatus (Rød / Grøn)
Lydtryksniveauområde:	50-54 dBA @ 1 m.
Forsinkelsestid fra ALARMTILSTAND til SIGNALUDGANG:	< 1s.
Maksimal fjernalarm FORSINKELSE AF SIGNALGENERERING:	< 1s.
Hukommelsesretention:	Al hukommelse bevares efter strømsvigt.
Målinger:	122 x 72 x 20 mm (HxBxD).
Vægt:	160 g (inklusive batterier).
Farve:	Hvid.
Hus:	ABS-plast.
IP-klassificering:	IP64.
Levetid:	5 år.

Radiofrekvens:	434,0750 MHz.
Radioudgangseffekt:	< 10 mW.
Radiatorækkevidde:	450 meter (sigtelinje).

ELLER

Radiofrekvens:	869,2125 MHz.
Radioudgangseffekt:	< 10 mW.
Radiatorækkevidde:	450 meter (sigtelinje).

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur:	5°C til 40°C (bruges indendørs).
Fugtighedsgrænse:	5% til 90% maks. Ikke-kondenserende.
Atmosfærisk tryk:	700 hPa til 1060 hPa.
Opbevaringstemperatur:	-30°C til 50°C.



ITs Designs Ltd.
T/A: Alert-iT Care Alarmer
Fernie House (enhed 3)
Coalville Erhvervspark
Jackson Street
Leicester, Storbritannien
LE67 3NR

www.alert-it.co.uk



Leisner ApS
Korsvangcentret
DK - 5610 Assens
Danmark

Kontakt venligst din udstyrsleverandør for support.

EU-importøren skal tilføje oplysninger her, hvor det er relevant.

