

Bide Instruktioner



Tak, fordi du har købt Bide! Vi brænder for at støtte folk ved at forsøge at reducere deres risiko for at falde om natten. Vi håber, at disse oplysninger er nyttige til opsætning og brug af Bide.


Om Bide og om, hvordan Bide fungerer

Bide er en enhed designet til at hjælpe folk om natten.

Når Bide er tilsluttet, vil den indstille sig selv til at være klar til brug, når det er mørkt, og når der ikke har været nogen bevægelse i 10 minutter.

Biden reagerer, når en person bevæger sig for at stå ud af sengen, eller når et lys tændes.

Den personlige besked vil derefter afspilles sammen med et "trafiklyssystem" og afgive et dæmpet lys, der hjælper dig med at stå mere sikkert ud af sengen.

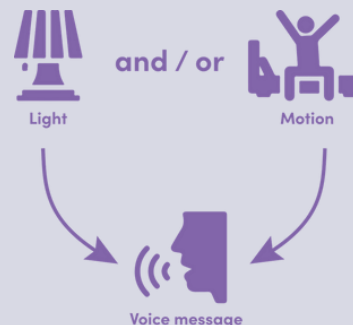

Hvor skal Bide placeres?



Placér venligst Bide ved siden af sengen, for eksempel på et natbord. Den skal helst være i samme højde som madrassen eller lidt højere.

Bide bruger ikke batterier og bør forblive tændt og isat ved stikkontakten - det betyder, at den altid kan hjælpe dig om natten, når du har mest brug for det.

Optagelse af en besked

Stemmeoptagelser på Bide bør være mindst 3 sekunder lange, og ideen er at optage den besked, du føler er mest nyttig for den pågældende person, der skal have Bide stående ved sengen.

Vi anbefaler, at enheden placeres på en hård overflade, når du optager, og at der er en begrænset baggrundsstøj. Du kan optage op til 5 beskeder, og disse afspilles tilfældigt, når sensoren aktiveres.


For at optage en talebesked: Tryk på den røde optageknap og følg stemmevejledningen.

Her er nogle forslag:

- "Mor, det er Sanne, tag dig god tid, når du står ud af sengen - og glem ikke at bruge din stok. Elsker dig!"
- "Mormor, det er Mathias og Emma her, husk nu at tage dine hjemmesko ordentligt på, inden du rejser dig fra sengen. Vi elsker dig!"
- Eller på et plejehjem kunne beskeden være: "Louise, det er Joanne, din omsorgsperson, tryk venligst på tilkaldeknappen, så vi kan komme og hjælpe dig med at komme sikkert på toilettet og tilbage. Tryk venligst på tilkaldeknappen nu, Louise."



Trafiklyssystemet

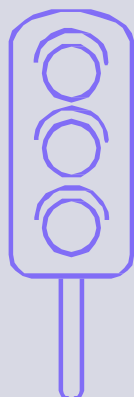

Bide har et trafiklyssystem, der skifter fra rød, gul og til grøn.

Den lyser rødt og derefter gult, mens den indspillede besked afspilles, og den skifter derefter til grønt i slutningen af beskeden.

Efter yderligere et minut skifter lyset til et blødt, hvidt lys for at hjælpe personen med at komme sikkert ud af sengen og kunne orientere sig i rummet.

Den dæmpede belysning forbliver tændt i 10 minutter efter, at det har været aktivt, og det slukker derefter.

Lyset kan til enhver tid slukkes ved at trykke på Bide-knappen i midten.



Hvis enheden går i gang for ofte eller registrerer bevægelser hos en anden person i sengen, kan du dreje Bide op til 180 grader til venstre eller højre, hvilket ændrer bevægelsessensorens følsomhed.

Du kan også hæve eller sænke Bide ved siden af sengen eller flytte den lidt væk fra sengen, så sensorerne ikke er så tæt på sengen.

Hvis du ønsker at slå talebeskeden fra på lydløs måde, kan du trykke på den store Bide-knap under afspilningen af beskeden.

Du kan til enhver tid kontrollere, om Bide fungerer, ved at trykke på den store Bide-knap, hvorefter en af de optagede talebeskeder vil blive afspillet.

For at slette en talebesked skal du trykke på Bide-knappen og holde den nede i 3 sekunder under afspilning.

For at slette ALLE talebeskeder skal du trykke på og holde Bide-knappen nede i 10 sekunder.

Bide er designet til kun at udløses om natten, men vil lejlighedsvis udløses på andre tidspunkter, hvis det er lidt mørkt i rummet, og hvis den registrerer bevægelse.