

Brugervejledning Merkur regnslag

Let og åndbart regnslag til elektriske kørestole, hvor ryglænet er højt og evt. har nakkestøtte. Fås i børne- og voksenstørrelser. Fremstillet i et blødt, vind- og vandtæt kvalitetsmateriale med tapede sømme og mange funktionelle detaljer.



Vandtæt



Vindtæt



Åndbar



Tapede sømme



Vaskbar



Varenr. (voksne): 4-15X

Varenr. (børn): 4-155XX

Kære kunde,

Tak fordi du valgte et produkt fra DARO. Vi håber du bliver glad for det og får mange gode oplevelser ude i det fri.

Læs denne brugervejledning, inden du bruger regnslaget.



Sikkerhedsregler

-  Brug kun et regnslag, der passer til brugerens størrelse.
-  Brug kun regnslaget sammen med en elektrisk kørestol, hvor ryglænet er højt og evt. har nakkestøtte.
-  Brug **aldrig** regnslaget, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler. Der er fare for, at det kan sætte sig fast i hjulene.
-  Immobile eller plejekrævende brugere må **ikke** lades alene eller være uden opsyn, når regnslaget er på.
-  Vær opmærksom på brugerens temperatur og reguler påklædningen derefter. Dette for at undgå overophedning.
-  Benytter brugeren sele, skal denne **altid** være fastspændt ved brug af regnslaget, således brugeren ikke glider ned.

Reklamationsret

DARO yder 2 års reklamationsret i henhold til dansk købelov. Det omfatter materiale- og produktionsfejl og således **IKKE** ved:

- Forkert brug.
- Forkert vask.
- Forkert vedligehold.
- Uautoriseret indgreb.
- Almindelig slidtage.

Regnslagets funktioner

- Vandtæt op til 10.000 mm.
- Åndbarhed på 5.000g/m².
- Tapeede sømme.
- Justerbar hætte.
- Skyggekant på hætte, der beskytter ansigtet mod regn, slud og sne.
- Vandafvisende lynlås ved halsåbning med et vandtæt underfald.
- Hænger i lynlåsskyderen, så brugeren nemmere kan få fat i den.
- Rummelig facon som dækker hele brugerens krop og går ned om stole-ryggens bagside.
- Indsyet elastik rundt i hele kanten, så regnslaget slutter tæt om kørestolen.
- Sikkerhedsreflekser foran og bagpå samt reflekslogo på brystet for bedre synlighed i mørke.
- Lomme foran som også kan fungere som praktisk pakkepose til regnslaget.

Sådan bruges regnslaget

Bemærk: Dette regnslag er kun beregnet til elektriske kørestole, hvor ryglænet er højt og evt. har nakkestøtte.

1. Lyn lynlåsen ned og tag regnslaget over hovedet. Det skal dække hele brugerens krop.
2. Træk regnslaget ud over ryggen på kørestolen, samt ned om brugerens fødder. Dette således, at regnslaget placeres **mellem** brugers fødder og kørestolens fodplade.
3. Kontroller at regnslaget slutter til og **ikke** går ind i hjulene.

OBS! Regnslaget skal være helt tørt, inden det pakkes ned.



Lomme og pakkepose i et.

Skyggekant.

Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisning **SKAL** følges. Vaskes produktet forkert, er der risiko for beskadigelse og forkortet produktlevetid.
- ⚠ Anvend **IKKE** skyllemiddel, iblødsætning, vaskemiddel med blegestoffer eller vaskemiddel i pulverform.

TIP! Den mest skånsomme måde at vaske et DARO-regnslag på er, at skylle synligt snavs af under rindende vand. Dermed bevarer regnslaget sine egenskaber længst muligt. Brug ikke børste eller klud ved synligt sand, da det vil ødelægge den vandtætte belægning. Lad regnslaget lufttørre.

Vask i maskine

1. Skyl løst mudder og snavs af regnslaget under rindende vand. Lyn lynlåsen op og læg regnslaget i tromlen med vrangen ud.
2. Benyt kun en lille mængde flydende vaskemiddel **uden** blegestoffer.
3. Vask regnslaget ved **max. 40°C** og undgå centrifugering.
4. Regnslaget må **IKKE** tørretumbles, men skal dryp-/lufttørre på eks. en bøjle.



Ingen blegemiddel



Skånevask max. 40°C



Ingen tørretumbling



Dryptørring anbefales



Rens er muligt

OBS! For hver maskinvask nedbrydes en lille del af den vandtætte belægning, hvilket vil forkorte regnslagets levetid.

Vedligehold

- Tjek jævnligt regnslaget for skader.
- Brug **aldrig** regnslaget, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.
- Sørg for at regnslaget er helt tørt, inden det pakkes ned.

Materiale

- OEKO-TEX® 100-certificeret.



- 100% polyester med PU-coating.

Teknisk info

- Vandsøjletryk: 10.000 mm.
- Åndbarhed: 5.000g/m².
- Kvadratmetervægt: 135g/m².

DARO

by able 

able nordic a/s
DARO
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk
www.daro.dk

DARO - dansk producent af tøj til alle typer handicap

Hos DARO brænder vi for at lave tøj til alle typer handicap - tøj, som kan give dig en øget livskvalitet, komfort og lette din hverdag. DARO har mere end 40 års erfaring med at designe og sy moderigtigt og funktionelt tøj til både børn og voksne. Vi kan specialtilpasse tøjet præcis til dig og hjælper gerne med nye løsninger, hvis du har specifikke behov. Se hele DAROs produktudvalg på www.daro.dk.

DARO er tøj til DIG og tøj med omtanke. 