

my Board Buddy

my Board Buddy AIR | my Board Buddy CAM | my Board Buddy GO

Dansk brugervejledning udgivet af
InSight Synshjælpemidler ApS



Hej.

Du skal have tusind tak for at vælge os som leverandør, og vi håber du enten allerede er eller bliver glad for dit nye synshjælpemiddel. Dette dokument er brugervejledningen til synshjælpemidlet som du har i hænderne, eller snart modtager. Skulle du få brug for yderligere assistance er du altid velkommen til at kontakte os. Vi assisterer gerne. Det kan være i form af henvisninger til afsnit i en brugervejledning, det kan være henvisning til præsentationsvideoer eller direkte support via telefon eller e-mail.

Mange venlige hilsner,

InSight Synshjælpemidler ApS

Kontakt os.

Du er velkommen til at ringe på telefonnummer [39 39 30 04](tel:39393004).

Du kan også sende en e-mail til vej@synsh.dk.

InSight Synshjælpemidler ApS

Islevdalvej 184, 1. Sal
2610 Rødovre
CVR-nr.: 45592839

Besøg os på websitet www.synshjælpemidler.dk.

*Udgivet *indsæt måned år**



my Board Buddy

Skab et tilgængeligt klasseværelse

Brugervejledning

my Board Buddy AIR | my Board Buddy CAM | my Board Buddy GO

Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- eller firmanavne, der nævnes i dette dokument, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Version: 2.0.

Producent kontaktinformationer

Sensotec NV - Vlamingveld 8 - BE-8490 Jabbeke info@sensotec.be - www.sensotec.com

Hovedkontor

Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke

T +32 50 39 49 49

Indholdsfortegnelse

Hej.....	2
Kontakt os.....	2
Producent kontaktinformationer.....	4
my Board Buddy varianter.....	6
Arbejd med my Board Buddy.....	6
Pakkerne indeholder.....	7
my Board Buddy GO pakken:.....	7
my Board Buddy CAM pakken (stand alone).....	7
my Board Buddy CAM Pakke (tilføjelse til AIR).....	7
Vedligeholdelse og forholdsregler.....	8
Board Buddy komponenter.....	8
Præsentation af Sender (AIR samt GO).....	8
Præsentation af Modtager (AIR samt CAM).....	8
Præsentation af Kontrolpanel (AIR samt CAM).....	8
Præsentation af my Board Buddy CAM.....	10
Tilslutning af Sender (ved AIR og GO).....	10
Montering af my Board Buddy CAM - hvis aktuelt.....	11
Tilslutning af Modtager (til AIR og CAM).....	11
Installation og brug af my Board Buddy applikationen (GO).....	12
Installation af applikationen.....	12
Opret forbindelse.....	13
Brug af my Board Buddy applikationen.....	13
Håndtering af skærbillede.....	14
Gennemse og håndter Snapshots.....	15
Garanti.....	15
Teknisk support.....	15
Service & Support.....	16

Hvad er my Board Buddy?

Tusind tak for at have tillid til og valgt my Board Buddy systemet. Med my Board Buddy AIR og GO kan du trådløst duplikere billedet fra en digital projektor, computer eller smartboard til brugerens plads i klasseværelset eller på arbejdspladsen. Derudover kan brugeren også se på en traditionel tavle eller omgivelserne i et klasseværelse, med my Board Buddy CAM.

my Board Buddy er en selvstændig eller supplerende løsning til undervisningsmiljøer, der bruges børn og studerende med reduceret syn. Enheden er også ideel til professionelle arbejdsmiljøer, hvor den kan bruges til at deltage i møder og følge med i præsentationer.

my Board Buddy er intuitiv at bruge og meget tilgængelig, hvilket gør den velegnet til alle, inklusive meget små børn fra 6 år.

my Board Buddy varianter

Denne brugervejledning dækker følgende tre varianter:

- **my Board Buddy AIR:** Komplet sæt med Sender og Modtager.
- **my Board Buddy GO:** Kun Sender, med en iPad, som kører med my Board Buddy applikationen, der således fungerer som modtager.
- **my Board Buddy CAM:**
 - a Stand alone: Komplet sæt med Kamera, Modtager og Kontrolpanel.
 - b. Som tilføjelse til en my Board Buddy AIR: Kamera og Kontrolpanel.

Vigtigt: Kontrolpanelet til my Board Buddy CAM med hele ni knapper er nødvendig for at kunne justere på selve kameraet, og erstatter det almindelige AIR kontrolpanel, som kun har fem knapper. Brugere af my Board Buddy AIR kan også bruge deres enhed som en GO! Hvis du har købt AIR varianten, kan du også bruge Senderen med en iPad og my Board Buddy applikationen, ud over den medfølgende Modtager. Dette giver dig maksimal fleksibilitet på forskellige steder. Tilføj en Sender to my Board Buddy CAM og bliv i stand til at se det digitale tavleskærm-billede også!

Bemærk venligst: Der skal være en my Board Buddy Sender i hvert klasseværelse eller rum, hvor du gerne vil bruge din my Board Buddy AIR eller GO. En Sender kan også købes separat til brug i flere klasseværelser.

Arbejd med my Board Buddy

my Board Buddy er designet med brugervenlighed og tilgængelighed for øje, selv for meget små børn. Den simple betjening sikrer, at brugerne hurtigt bliver fortrolige med enheden. Når my Board Buddy Sender er tilsluttet en kilde, eksempelvis en bærbar computer eller en digital skærm, kan en my Board Buddy Modtager eller my Board Buddy applikationen automatisk oprette forbindelse, uden behov for tredjepartsintervention.

Når forbindelsen er oprettet, er my Board Buddy CAM klar til brug med det samme. For at bruge kameraet skal brugeren blot tilslutte my Board Buddy CAM til Modtageren. Ingen yderligere installation er nødvendig. Kameraet tændes derefter og kan betjenes med det samme, ved hjælp af my Board Buddy CAM Kontrolpanel. Kameraet kan bevæges frit 360 grader rundt, og kan på den måde se hele vejen rundt.

Brugeren har mulighed for at forstørre billedet og justere farverne for optimal læsbarhed.

Pakkerne indeholder

my Board Buddy AIR pakken:

- my Board Buddy Sender
- my Board Buddy Modtager
- my Board Buddy Kontrolpanel (Fem knapper)
- Strømforsyning
- VESA Beslag + Rem
- Micro HDMI til HDMI kabel
- HDMI til HDMI kabel
- Brugervejledning

my Board Buddy GO pakken:

- my Board Buddy Sender
- Strømforsyning
- HDMI til HDMI kabel
- Brugervejledning

Bemærkning til brugere af GO: For at kunne bruge my Board Buddy GO skal du have en Apple iPad enhed, og installere my Board Buddy applikationen fra App Store.

my Board Buddy CAM pakken (stand alone)

- my Board Buddy Modtager
- my Board Buddy CAM Fjernkamera
- my Board Buddy Kontrolpanel (ni knapper)
- Strømforsyning og kabel
- VESA Monteringsplade samt rem
- Micro HDMI til HDMI kabel
- Brugervejledning

Tip: Hvis du også kunne have fordel i at gøre den digitale tavle oppe forrest i lokalet læsbare, kan du tilføje en my Board Buddy Sender.

my Board Buddy CAM Pakke (tilføjelse til AIR)

- my Board Buddy CAM Fjernkamera
- Håndtering
- Strømforsyning inklusive kabel
- Brugervejledning

Ikke inkluderet: Modtager (brug den Modtager som du allerede har fra dit eksisterende my Board Buddy AIR system).

Det anbefales at du altid tjekke om du har modtaget alle de effekter, som er beskrevet i afsnittet ovenfor.

Vedligeholdelse og forholdsregler

- Rengør my Board Buddy med en fugtig, godt vredet klud (brug ALDRIG en VÅD KLUD). Brug ikke ætsende produkter: Disse kan forårsage uoprettelig skade på kabinettet.
- Opbevar den originale emballage til my Board Buddy. Udstyret må kun transporteres i denne emballage.
- Sørg for tilstrækkelig plads (plus minus 10 centimeter) omkring my Board Buddy, så luft kan cirkulere gennem ventilationsåbningerne. Tildæk aldrig ventilationsgitteret: Dette kan medføre, at enheden overophedes. Brug kun den medfølgende strømforsyning. Brug af en forkert strømforsyning kan beskadige udstyret og resultere i, at garantien ikke længere er gældende.
- Sørg for aldrig at tænde for enheden hvis den har været udsat for vand eller andre væsker.
- Sørg for at placere og montere alle kabler til og fra enhederne så ingen falder over eller vikles ind i dem.

Board Buddy komponenter


Præsentation af Sender (AIR samt GO)

1. Tænd / Sluk knap
2. LED Indikator for aktuel status
3. Port til strømforsyning
4. HDMI port (4K kompatibel)
5. HDMI Output



Præsentation af Modtager (AIR samt CAM)

1. USB C port til strømforsyning
2. Micro HDMI udgang
3. USB Tilslutning for Kontrolpanel og Kamera

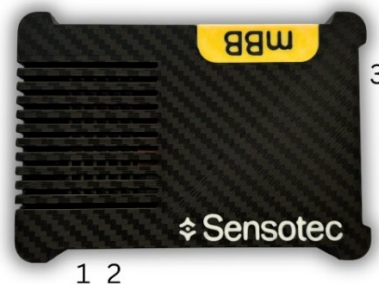

Bemærk venligst: Det er ikke muligt at slukke for my Board Buddy tager helt, med en knap - dens lave energiforbrug gør det unødvendigt.

Mod-

Præsentation af Kontrolpanel (AIR samt CAM)

Kontrolpanel til AIR samt CAM har et børnevenligt design, med et enkelt joystick til venstre, og fem (AIR) eller ni (CAM) farvede knapper i højre side.



my Board Buddy AIR

Kontrolpanel med fem knapper



my Board Buddy CAM

Kontrolpanel med ni knapper

- De gule knapper med **+** plus og **-** minus symbolerne justerer på forstørrelsen: Den øverste knap forstørrer skærbilledet op, den nederste zoomer ud.
- Joysticket gør det let at navigere rundt i skærbilledet, når din rette forstørrelse er fundet. Kameraet justeres også ved brug af joysticket.
- Den hvide knap aktiverer farveinvertering samt højkontrast tilstand, som kan være til gavn ved læsning af bestemte tekster.
- Den røde knap skifter mellem skærbilledet i gråtone eller ægte farver.
 - Den grønne knap gendanner skærbilledet til fuld skærmvisning, blot med et enkelt tryk. Her vil kameraet zoome helt ud.
 - Den blå knap, som kun findes på CAM Kontrolpanelet (ni knapper), giver brugeren mulighed for at skifte mellem billedet fra den digitale tavle og kameraet, eller omvendt.
 - En foretrukken og gemt kamera position kan blive tildelt til hver af de tre sorte knapper.

Særlige kombinationer:

- Tryk ned på joystick **og** den grønne knap samtidigt: Skift mellem fuldskræm forstørrelse og delvis forstørrelse med et virtuelt forstørrelsesglas.
- Tryk ned på joystick **og** den hvide knap samtidigt: Fryser skærbilledet. Benyt samme kombination igen for at vende tilbage til live skærbillede.
- Tryk ned på joystick **og** den gule knap samtidigt: Justerer på kontrasten med højkontrast tilstand aktiveret. Dette kan hjælpe i miljøer med ringe belysning eller svag kontrast.
- Tryk på joystick **samt** en af de tre sorte knapper: Fastlåser en specifik kamera position.
- Tryk på joystick **samt** den røde knap samtidigt i mindst fire sekunder: Genetablerer forbindelsen mellem Afsender og CAM.

Bemærk venligst: my Board Buddy CAM Kontrolpanel erstatter det medfølgende my Board Buddy AIR Kontrolpanel, så snart CAM enheden er tilsluttet.

Kombination med bærbar computer eller dokument kamera

For brugere, som også ønsker at bruge den tilsluttede skærm med en bærbar computer eller et dokumentkamera, tilbyder my Board Buddy en fleksibel skiftefunktion. Dette gør det muligt at bruge begge applikationer skiftevis på en enkelt skærm.

Hvis skærmen har flere HDMI eller DVI indgange og er kompatibel med indgangsskift via my Board Buddy, skal denne funktion først aktiveres. For at aktivere funktionen skal du holde joystick til venstre og samtidigt trykke det ned, i mindst ti sekunder. Når funktionen er aktiveret, vises en bekræftelsesmeddelelse i skærbilledet.

Du kan herefter skifte mellem de tilgængelige indgange ved at holde joysticket nede i to sekunder. Skærbilledet skifter automatisk til den anden tilsluttede indgang, når du har haft joysticket trykket ned i de to sekunder. For optimal ydeevne anbefaler vi at bruge en skærm med maksimalt to indgange. VGA tilslutninger understøttes ikke.



Præsentation af my Board Buddy CAM


1. Kamera
2. Strømforsyning med kabel via USB
3. Bordklemme til at fastmontere kameraet til bordet

Tilslutning af Sender (ved AIR og GO)

1. Tilslut signalet fra kilden (computer, tablet, smartboard eller lignende), til HDMI IN porten.
2. Såfremt en skærm (smartboard eller anden præsentationsskærm) var tilsluttet kilden, kan du nu tilslutte det til HDMI OUT porten.
3. Tilslut nu 12V strømforsyningen.
4. Tryk på Tænd / Sluk kontakten.

my Boar Buddy Sender enheden vil nu begynde at starte op. Såfremt en ekstern skærm er tilsluttet til HDMI udgangsporten, vil du i skærbilledet kunne se et Sensotec logo, efterfulgt af et Kilde (source) signal. Så snart begge LED indikatorer lyser er Sender enheden startet op og klar til brug.

Connecting the transmitter

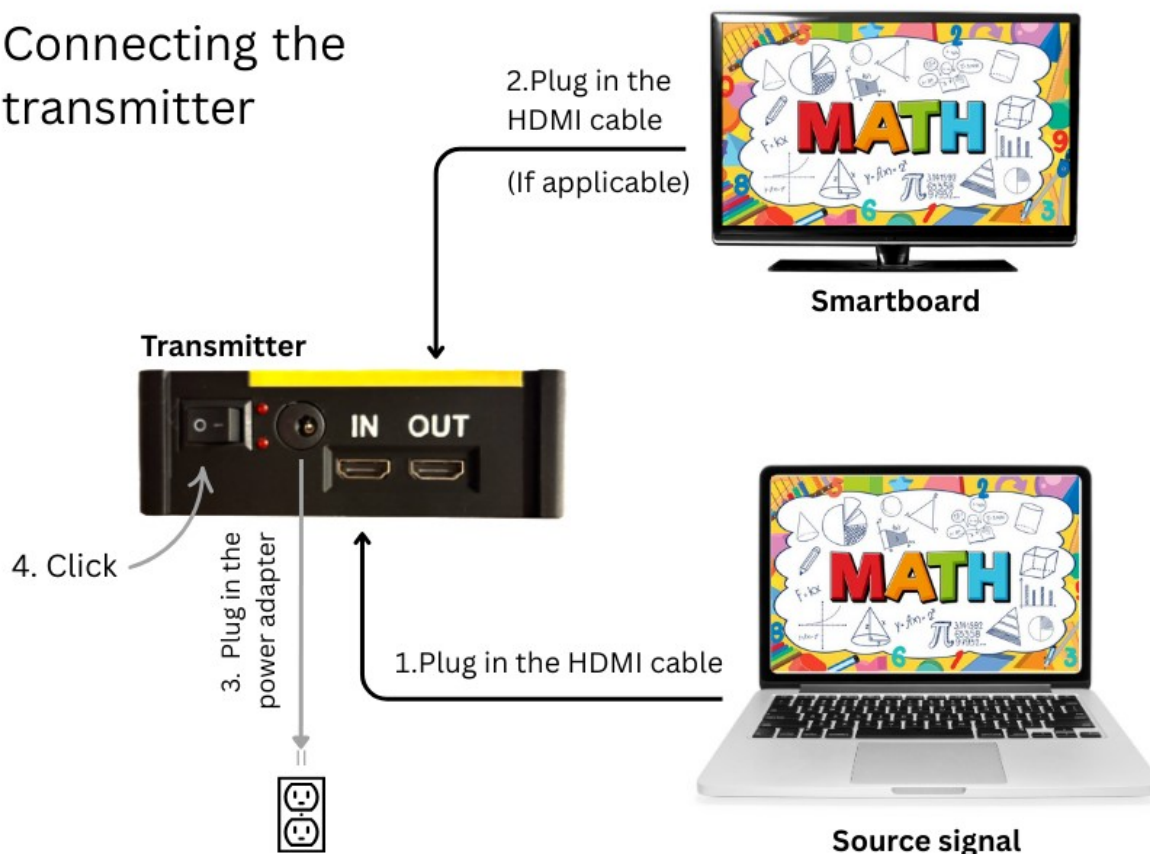

Montering af my Board Buddy CAM - hvis aktuelt

1. Monter kameraet på elevens bord ved hjælp af bordklemmen, og stram det godt fast.

➔ Vær sikker på at kameraet kan bevæge sig frit rundt, og har et frit udsyn, så hele lokalet eller tavlen tydeligt kan ses.

Sørg for at der er plads rundt om kameraet (ingen bøger, kasser eller lignende, som støder til). Undgå direkte belysning (eksempelvis direkte ved siden af et vindue), og ellers roter eller flyt installationen en smule, hvis nødvendigt.

➔ Sørg for en stabil og sikker palcering, og sørg for, at ingen drejer eller rykker i kamerahovedet manuelt, mens det er i brug. Det kan beskadige kameraet.

2. Tilslut strømforsyning og sæt det i stikkontakten.

Tilslutning af Modtager (til AIR og CAM)


Valgfrit: Hvis du ønsker det kan du montere my Board Buddy Modtager på bagsiden af skærmen - du skal bruge VESA adaptoren og den medfølgende rem.

1. Sørg for at elevens skærm er tændt.
2. Tilslut skærmen til HDMI porten ved hjælp af det medfølgende Micro HDMI kabel.
3. Tilslut Kontrolpanelet til en af de to USB porte.
4. Tilslut strømforsyningen til USB C porten og indsæt stikket i en stikkontakt.
5. Hvis du har købt my Board Buddy CAM, skal du montere det på bordet som beskrevet tidligere, og tilslutte det til den ledige USB port på my Board Buddy Modtager, og sætte strømforsyningen til stikkontakten.

Såfremt opsætningen er korrekt vil du i skærbilledet kunne se my Board Buddy logo indenfor få sekunder. Hvis der er en my Board Buddy Sender i nærheden, og som har et tilgængeligt billedsignal, oprettes der automatisk en forbindelse efter et par sekunder. Hvis my Board Buddy CAM er tilsluttet, vises den også automatisk.

Illustration -

Connecting the receiver

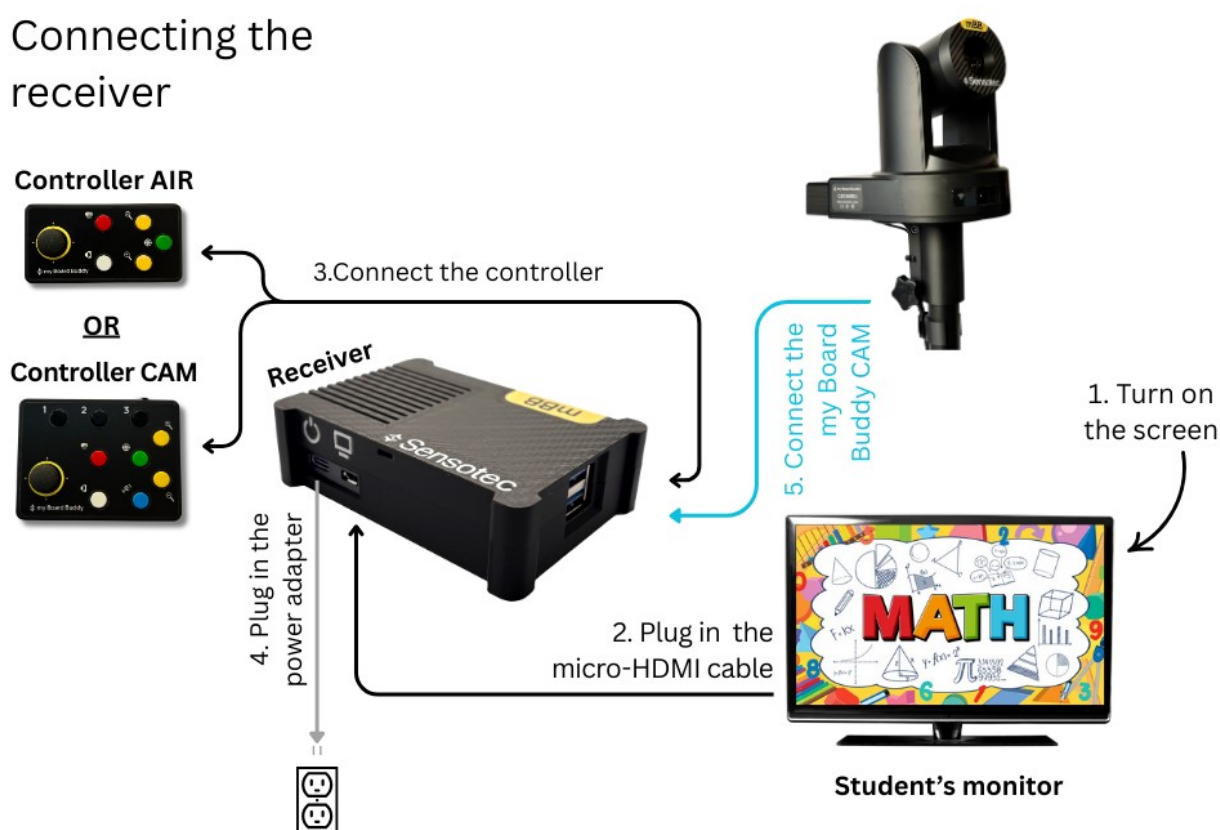

Installation og brug af my Board Buddy applikationen (GO)

For my Board Buddy GO eller for AIR brugere, som også ønsker at bruge iPad funktionaliteten:

Installation af applikationen

1. Tilgå App Store på din iPad.
2. I søgefeltet skal du skrive "my Board Buddy" og påbegynde søgningen.
3. Download og installer applikationen.
4. Når installationen er gennemført kan du gå videre til næste skridt.

Opret forbindelse

1. Tjek bare allerede nu at din my Board Buddy Sender er tændt og indenfor rækkevidde.
2. Tilgå og åben op for my Board Buddy applikationen på din iPad.
3. Berør den store, tydelige "Forbind automatisk" knappen som du finder i skærbilledet.
4. Denne simple og brugervenlige funktion søger automatisk efter det stærkeste signal fra en my Board Buddy Sender, i dit nærområde, og forbinder til det, uden behov for avanceret opsætning.
4. Så snart forbindelse er oprettet vil skærbilledet fra my Board Buddy Sender blive vist i skærmen på din iPad.

Brug af my Board Buddy applikationen

Menulinjen



Applikationen har øverst en menulinje med forskellige funktioner:

- Du kan midlertidigt skjule menulinjen ved at berører skærbilledet et tilfældigt sted.
- Berør skærbilledet for at få præsentere menulinjen.
- Brug låseknappen for at låse menulinjen, så den ikke forsvinder automatisk.

Tilgængelige funktioner i menulinjen:

	Farveinvertering: Denne funktion vender farverne for at øge læsbarheden af visse tekster.
	Gråtone: Konverterer skærbilledet til gråtone.
	Skærbillede: Tag et skærbillede af det aktuelle visuelle billede.
	Optag video: Påbegynd videooptagelse af det visuelle billede.
	Sort pil: Vender tilbage til applikationens Hjemmeskærm.

Navigation i applikationen

Nederst på applikationens startskærm finder du to faner:

1. **Forbindelse:** Til oprettelse af forbindelse til my Board Buddy Sender.
2. **Snapshot:** Herunder vil du finde alle de skærbilleder samt optagelser som du har lavet.

Håndtering af skærbillede

Akkurat som med det fysiske kontrolpanel kan du direkte i applikationen gøre følgende:

- Forstørre skærbilledet og zoome ud ved at bruge to fingre som samles, eller spredes, ved at berøre skærmen.
- Flytte rundt i skærbilledet ved at trække med en finger, på skærmen.

- Benytte knapperne i menulinjen til at aktivere de forskellige funktioner.

Gennemse og håndter Snapshots

1. Berør Tilbage pilen i menulinjen for at returnere til Hjemmeskærmen.
2. Naviger til og vælg "Snapshots" fanen som visuelt er placeret i bunden af skærbilledet.
3. Her finder du alle de skærbilleder og videooptagelser som du har lavet.
4. Berør en af filerne for at se det, dele det eller slette det.

Garanti

Når du har købt en af my Board Buddy enhederne gælder lokal garantipolitik for produktet. Skader forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssig brug er under ingen omstændigheder omfattet af garantibestemmelserne. Vedligeholdelse og reparation er eksklusivt forbeholdt teknisk personale certificeret af eller ansat hos Sensotec NV. Ingen af enhederne må åbnes op af brugere eller andre. Sker det er der grundlag for at garantien ugyldiggøres uden yderligere forpligtelser, hverken for producenten eller din lokale forhandler.

Teknisk support

Benyt brugervejledning som retningslinje for anvendelse af enhederne. Sørg for at IT afdelingen er tilstrækkeligt bekendt med håndteringen af udstyret. Har du brug for teknisk support bør du kontakte din lokale forhandler. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål i denne brugervejledning, eller lykkedes det ikke at løse problemet, er du velkommen til at kontakte producenten via e-mail adressen (support@sensotec.be), eller via telefonnummeret: +32 50 40 47 47.

Gennemgå denne vejledning samt anbefalinger til fejlfinding via følgende QR kode:



Har du tekniske eller praktiske spørgsmål omkring dette produkt?
Kan du ikke finde svaret i denne brugervejledning?

I så fald vil vores Service & Support team gerne hjælpe dig videre!

Service & Support

+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be

Producenten

sales@sensotec.com | www.pro.sensotec.com

Sensotec Belgium

Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

Sensotec The Netherlands

Kalfjeslaan 38
NL-2623 AJ Delft
T+31 15 262 59 55





InSight Synshjælpemidler ApS

Synshjælpemidler til hele Danmark.

39 39 30 04 // vej@synsh.dk