


2022-07-01

00.5163~B

Table Clamp

- 12.1735 TC-OH Light
- 12.1730 TC-OH
- 12.1740 TC-OH HD

MADE MOUNTING
EASY

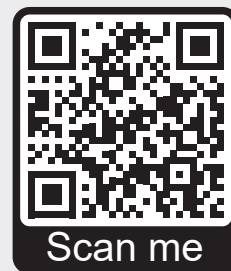

Scan me

Sicherheitshinweise
Safety Instructions





Montage
Assembly Instructions





Handhabung
Handling




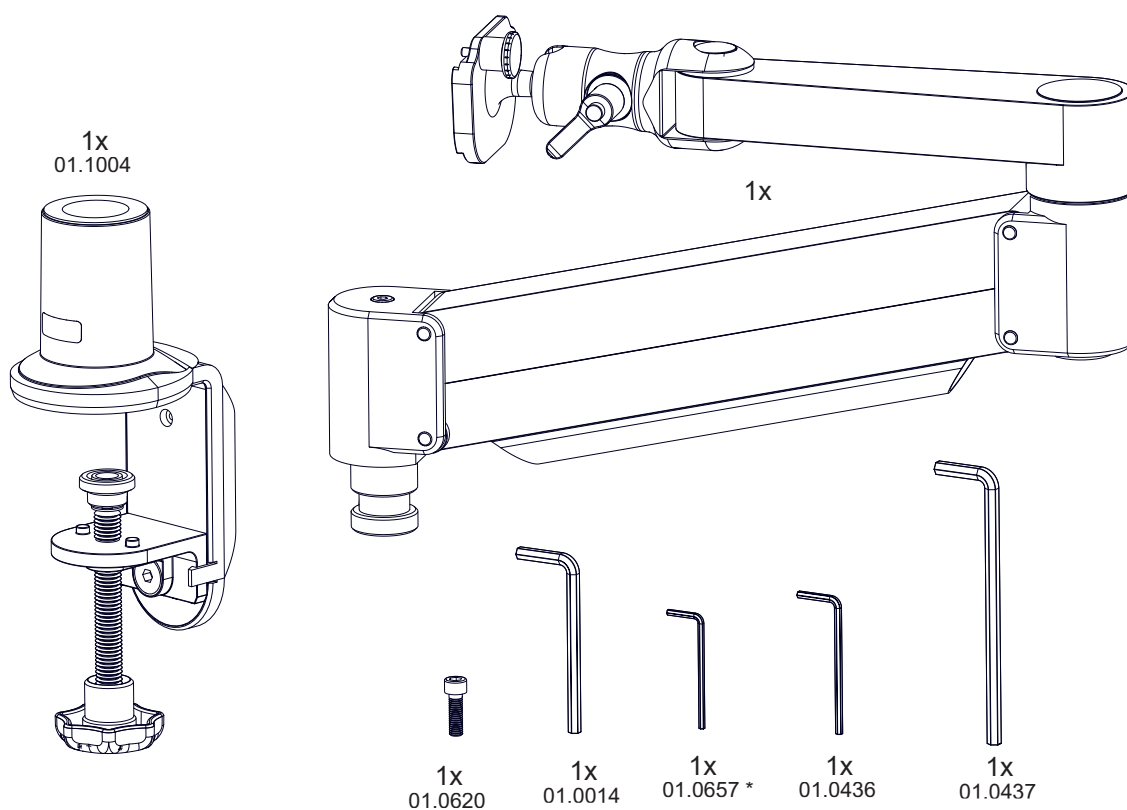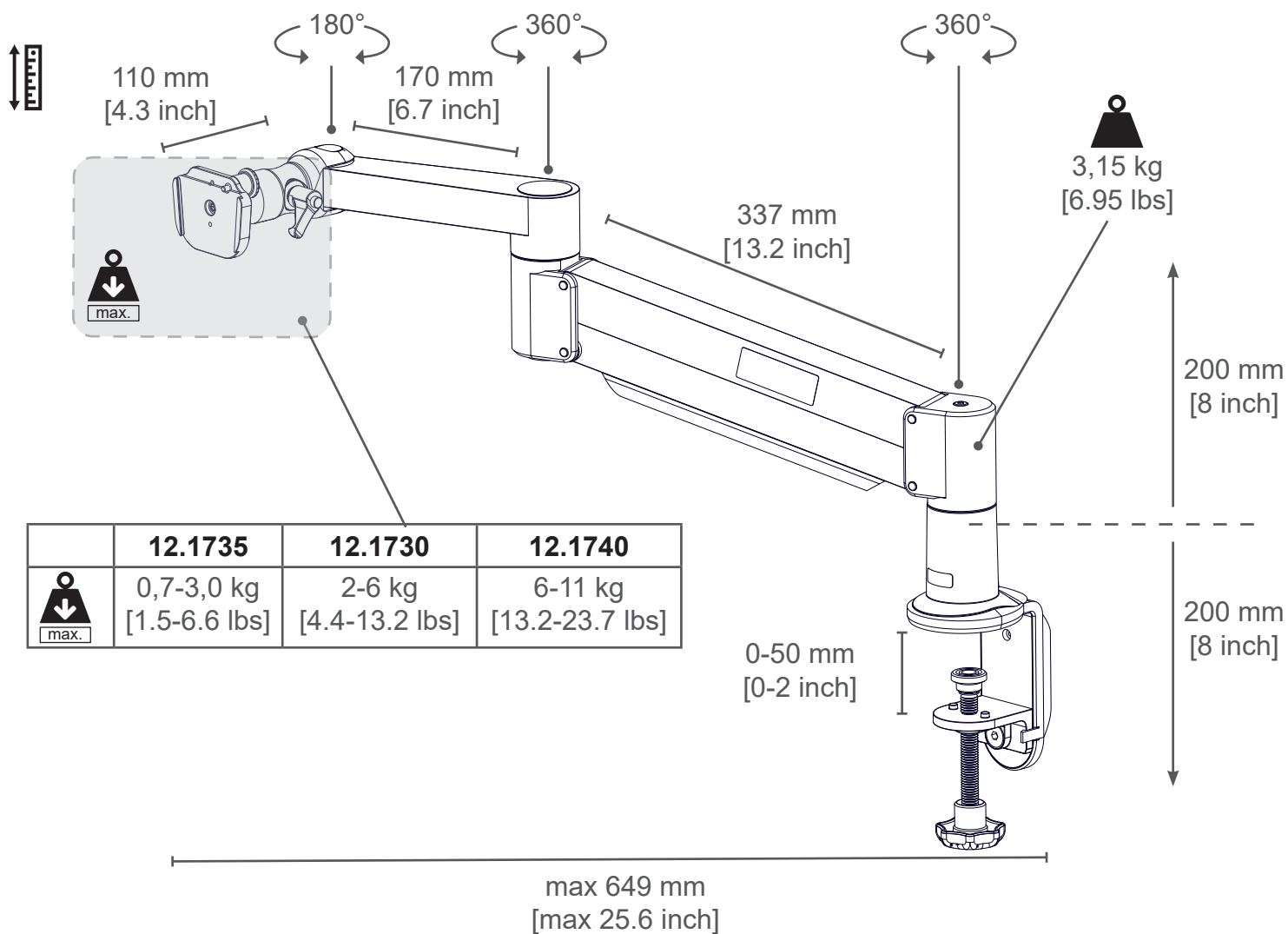


* 12.1735

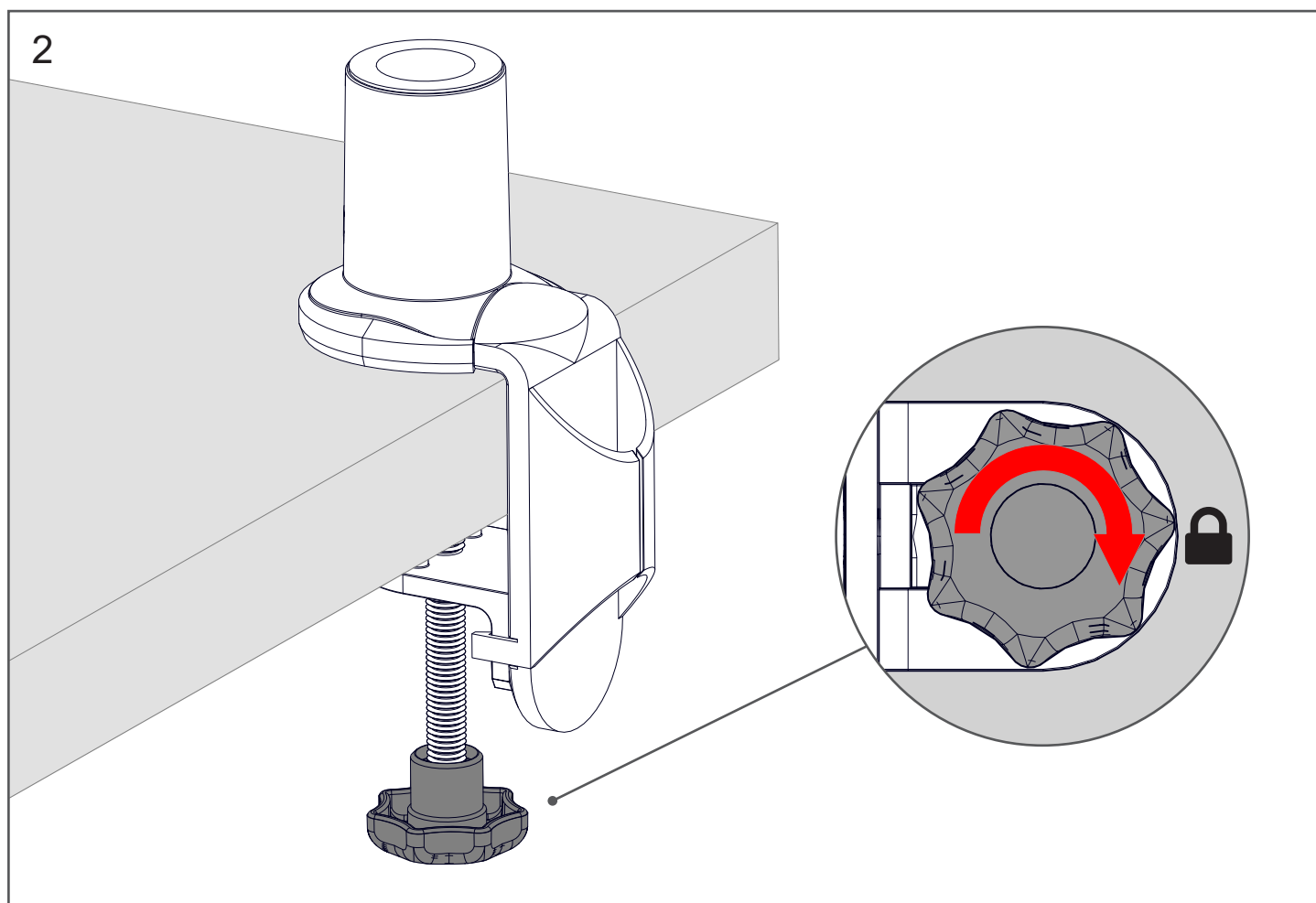
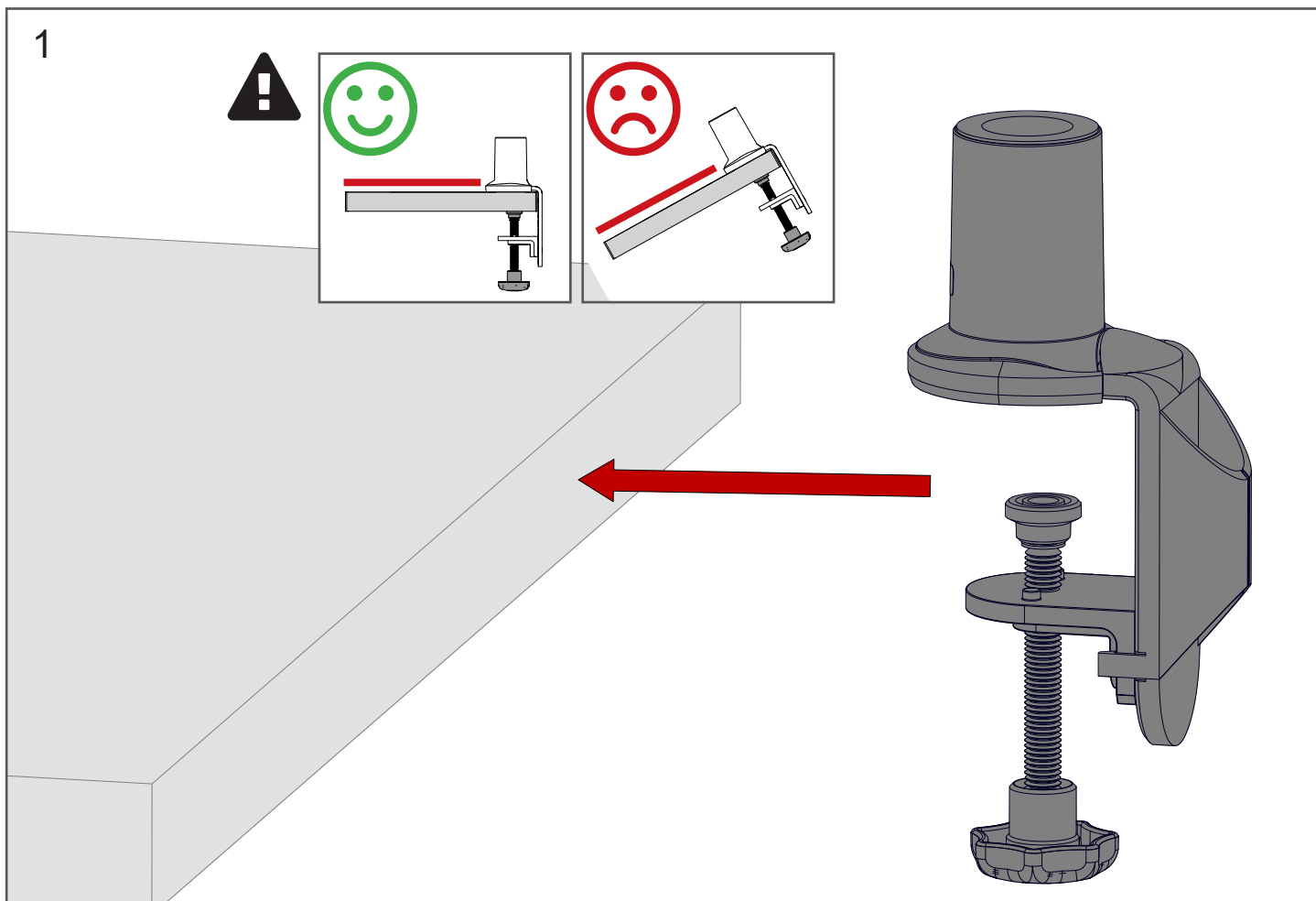


3

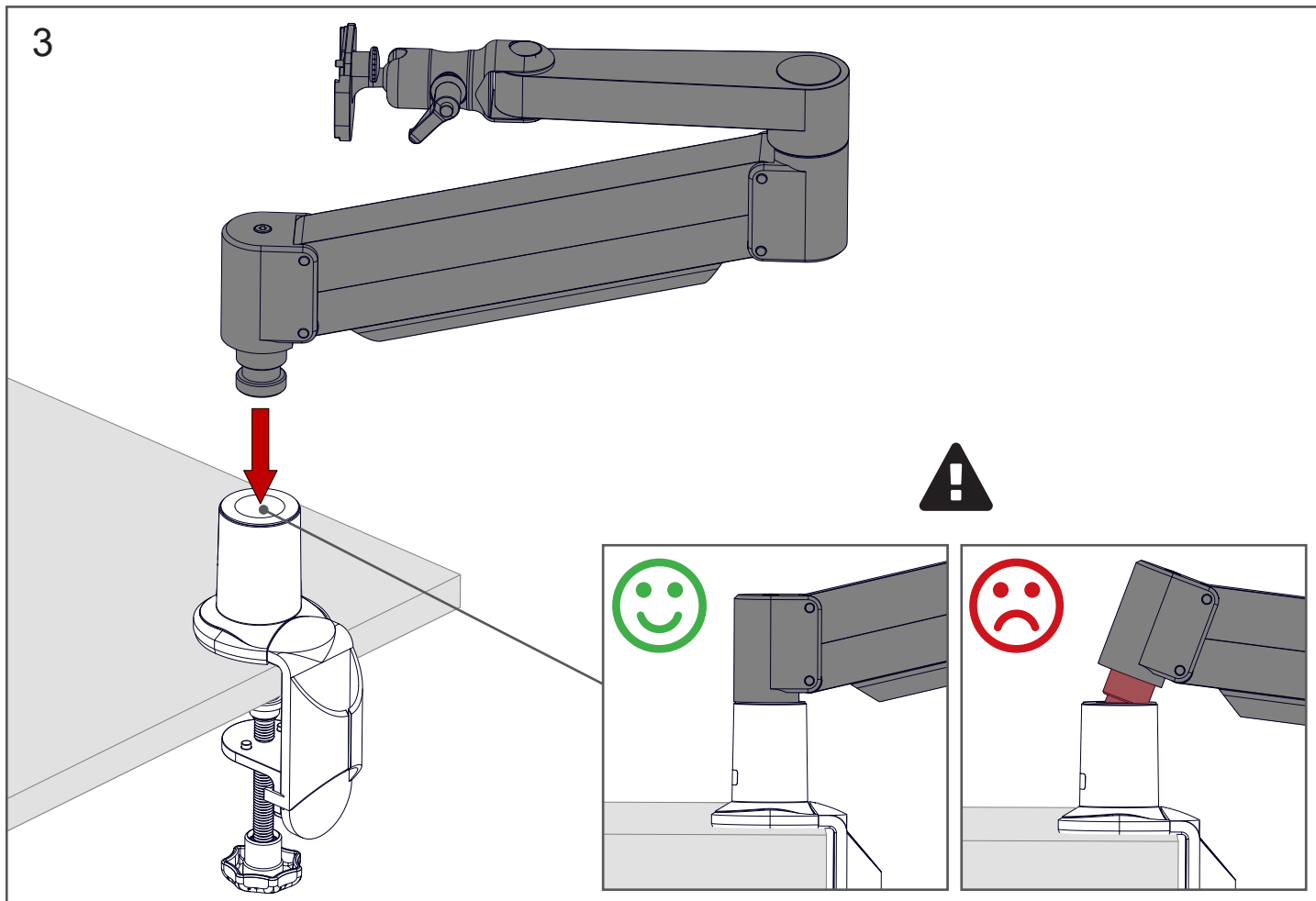

4

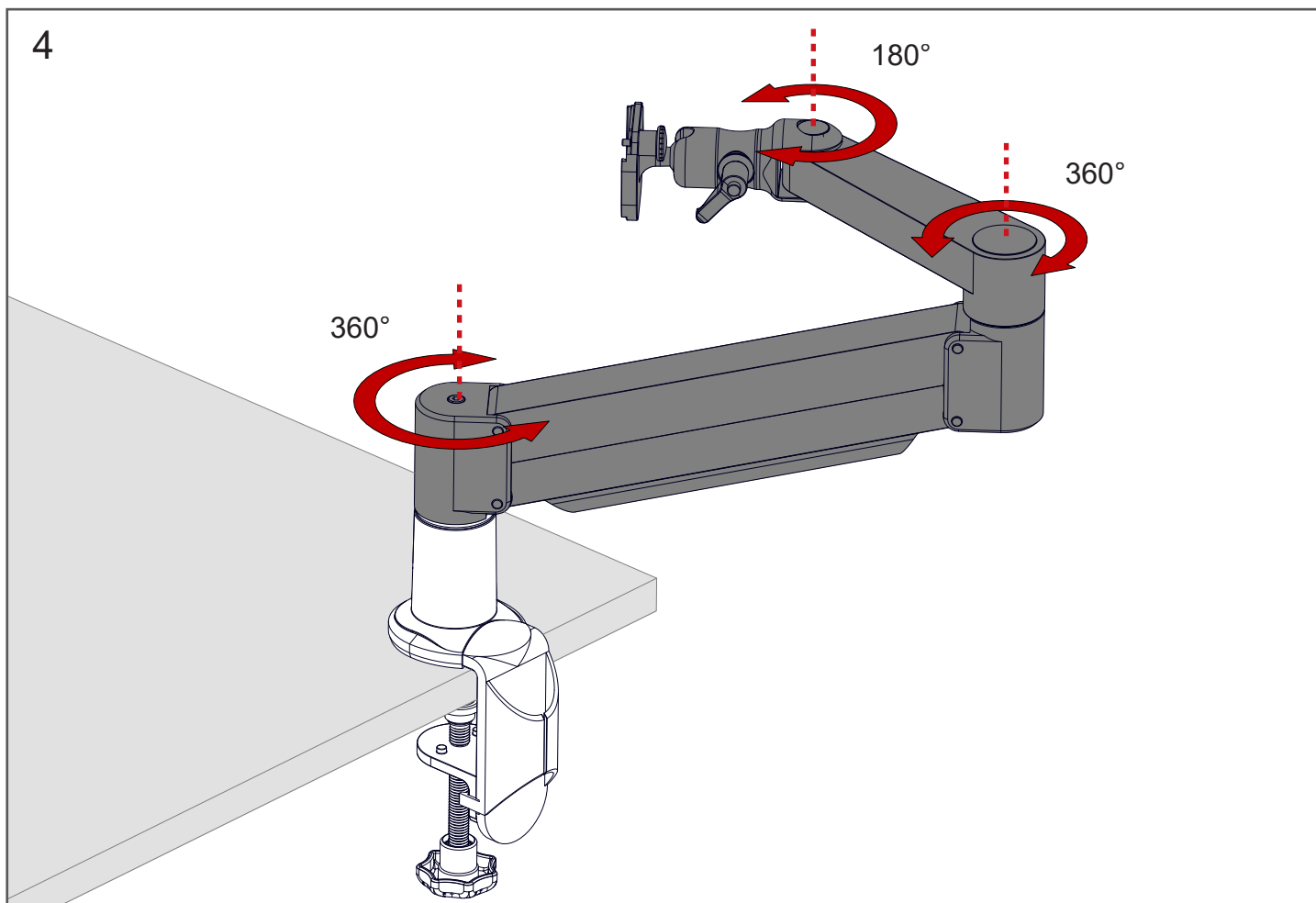

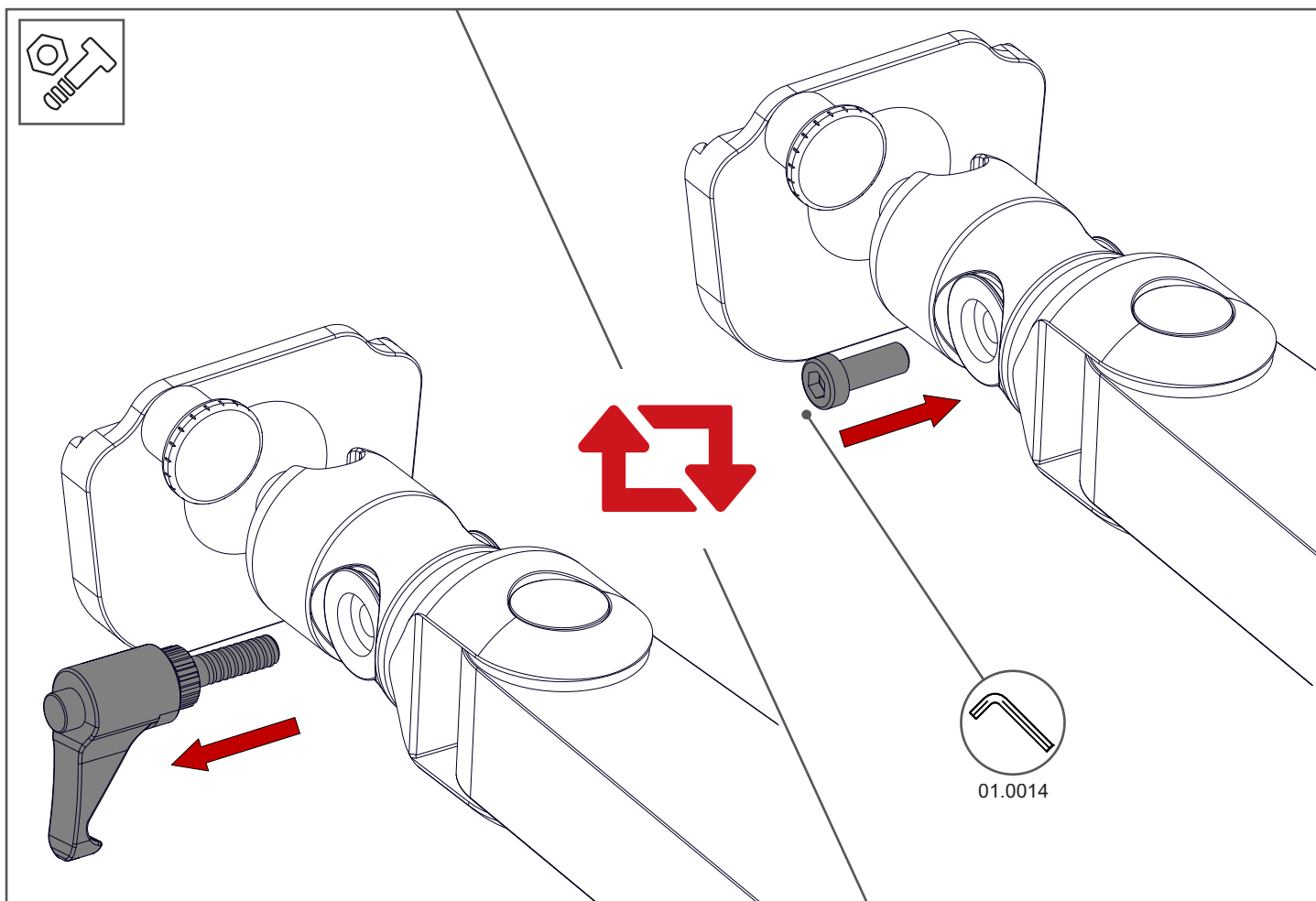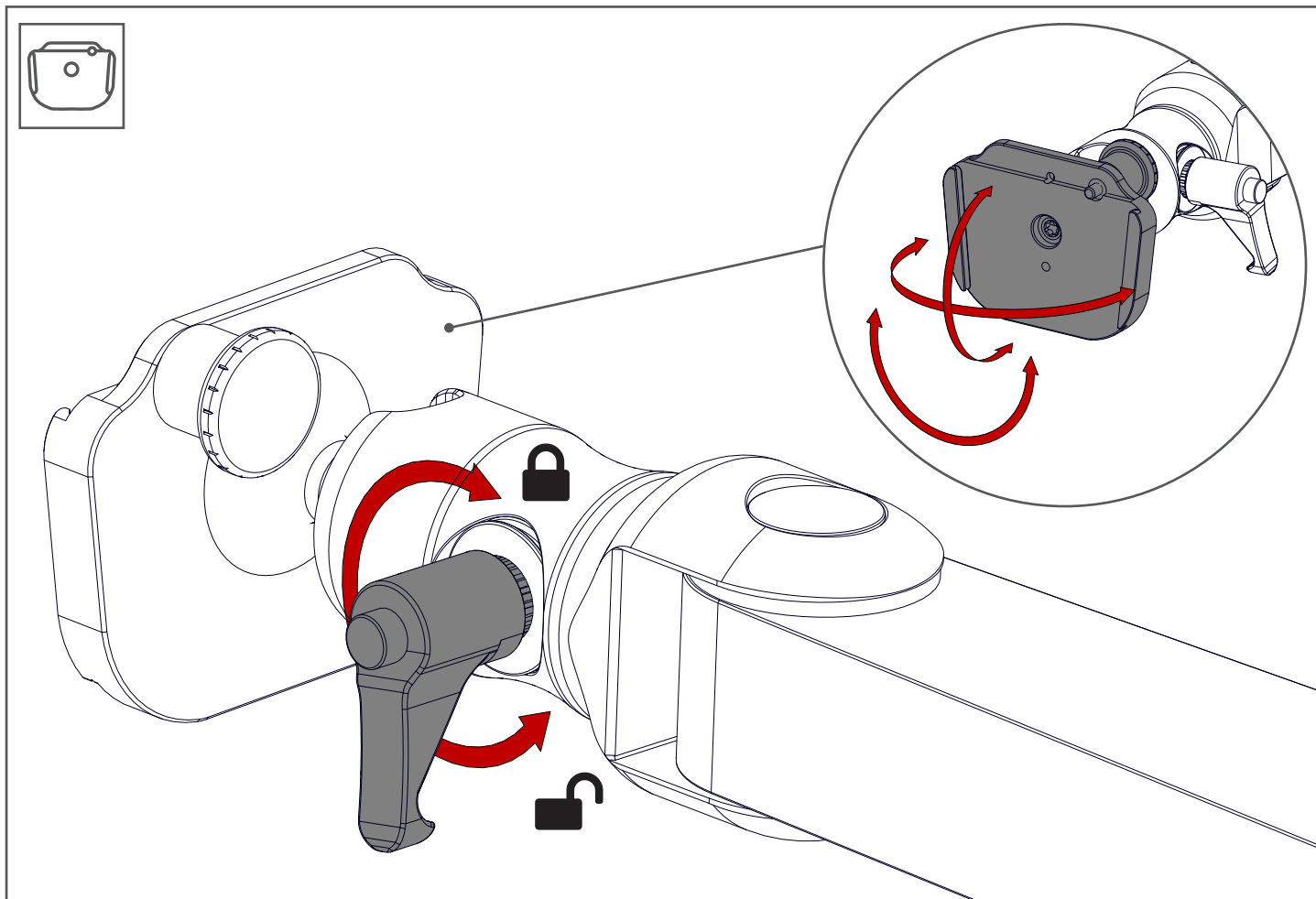


**IMPORTANT!**


- Device must be on arm
- Arm must be in mount

Bring the arm to a position approximately **horizontal** prior to turning the strength adjustment screw.

If the arm **drifts upward**, turn the adjustment screw clockwise.

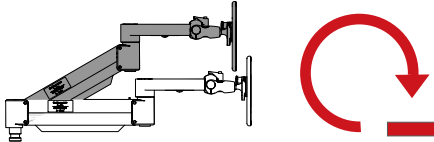

If the arm **drifts downward**, turn the adjustment screw counter-clockwise.

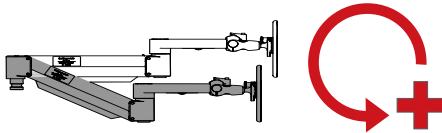


Depending on the weight of your device, **you may have to make 15-20 turns**.

**WICHTIG!**


- Gerät muss montiert sein
- Arm muss in Halterung sein

Vor dem justieren der Einstellschraube drücken Sie den **Arm nach unten bis er ungefähr parallel zur Grundfläche ist**.

Wenn der Arm **nach oben driftet**, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn.




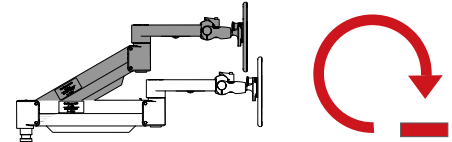


Wenn der Arm **nach unten driftet**, drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.

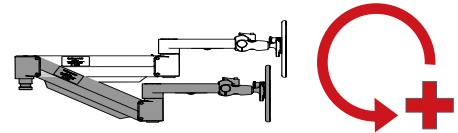

Abhängig vom Gewicht Ihres Gerätes, müssen Sie möglicherweise **15-20 Umdrehungen durchführen**.

1

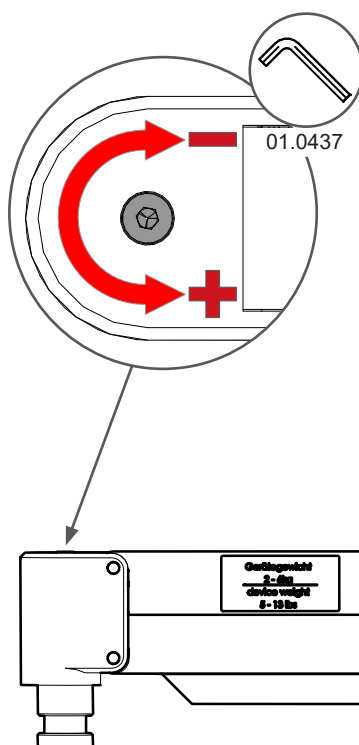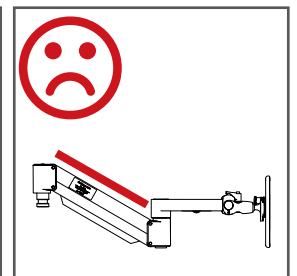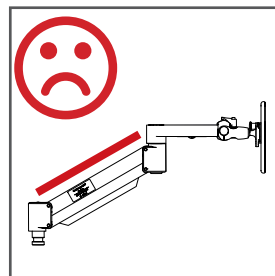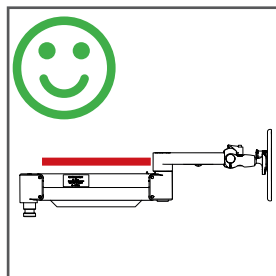


EN


In some instances, further counterbalance adjustments are needed to allow the arm's instant height adjustment function to work properly.

If your arm is not staying in position after performing step1, follow these steps:

With arm in raised position, tighten set screw **(A)**

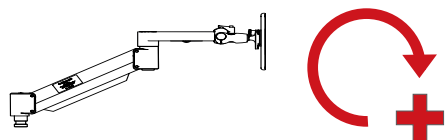

With arm in horizontal position, tighten set screw **(B)**

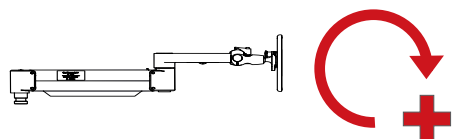


Do not overtighten the screws.

DE


In einigen Fällen sind weitere Gegengewichtseinstellungen notwendig, damit die korrekte Höheneinstellung des Arms möglich ist.

Wenn dein Arm nach der ersten Variante nicht in der gewünschten Position bleibt, folge diesen Schritten:

Mit erhobenem Arm, Stellschraube anziehen **(A)**

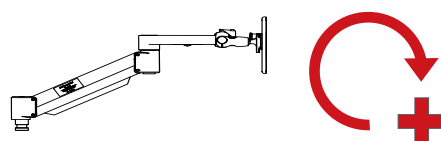

Mit Arm in horizontaler Position, Stellschraube anziehen **(B)**

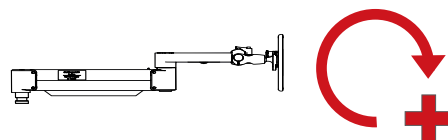


Schrauben nicht zu fest anziehen.






2









12.1730 - TC-OH
12.1740 - TC-OH HD

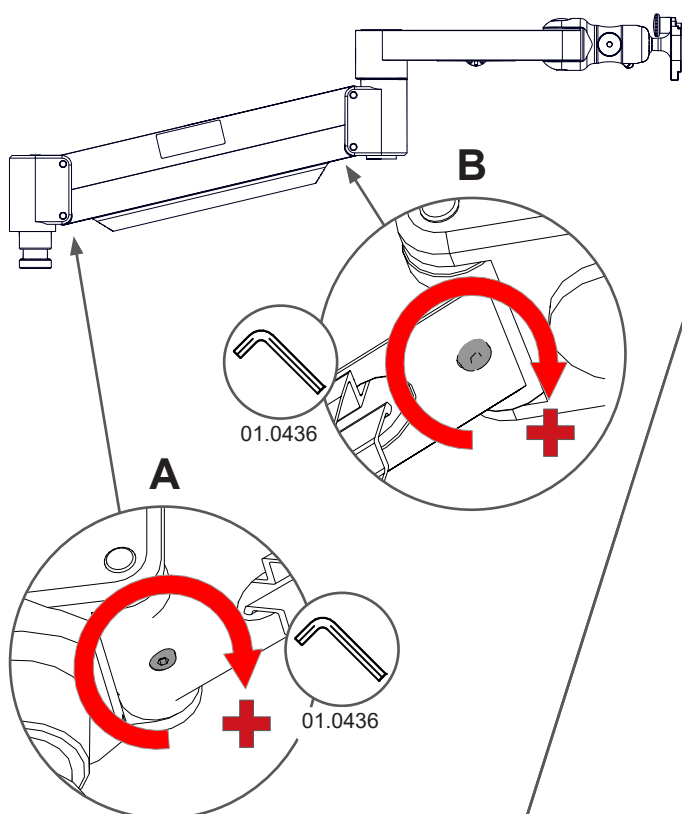


12.1735 - TC-OH Light

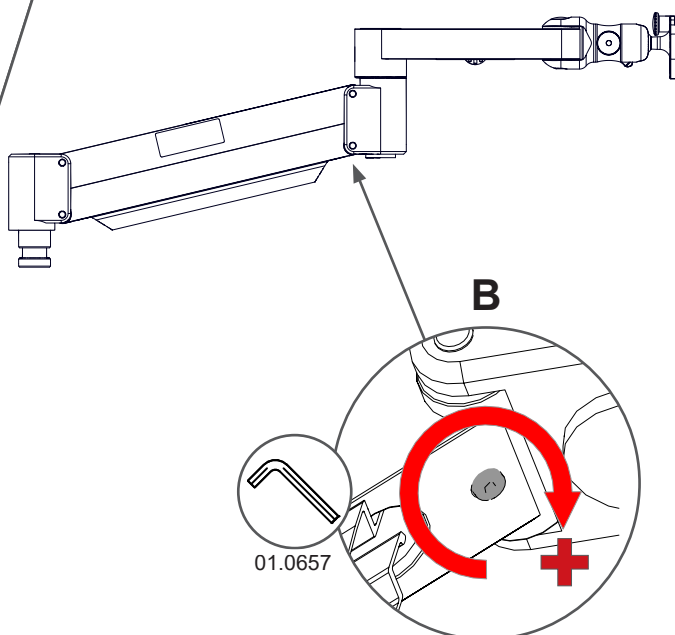

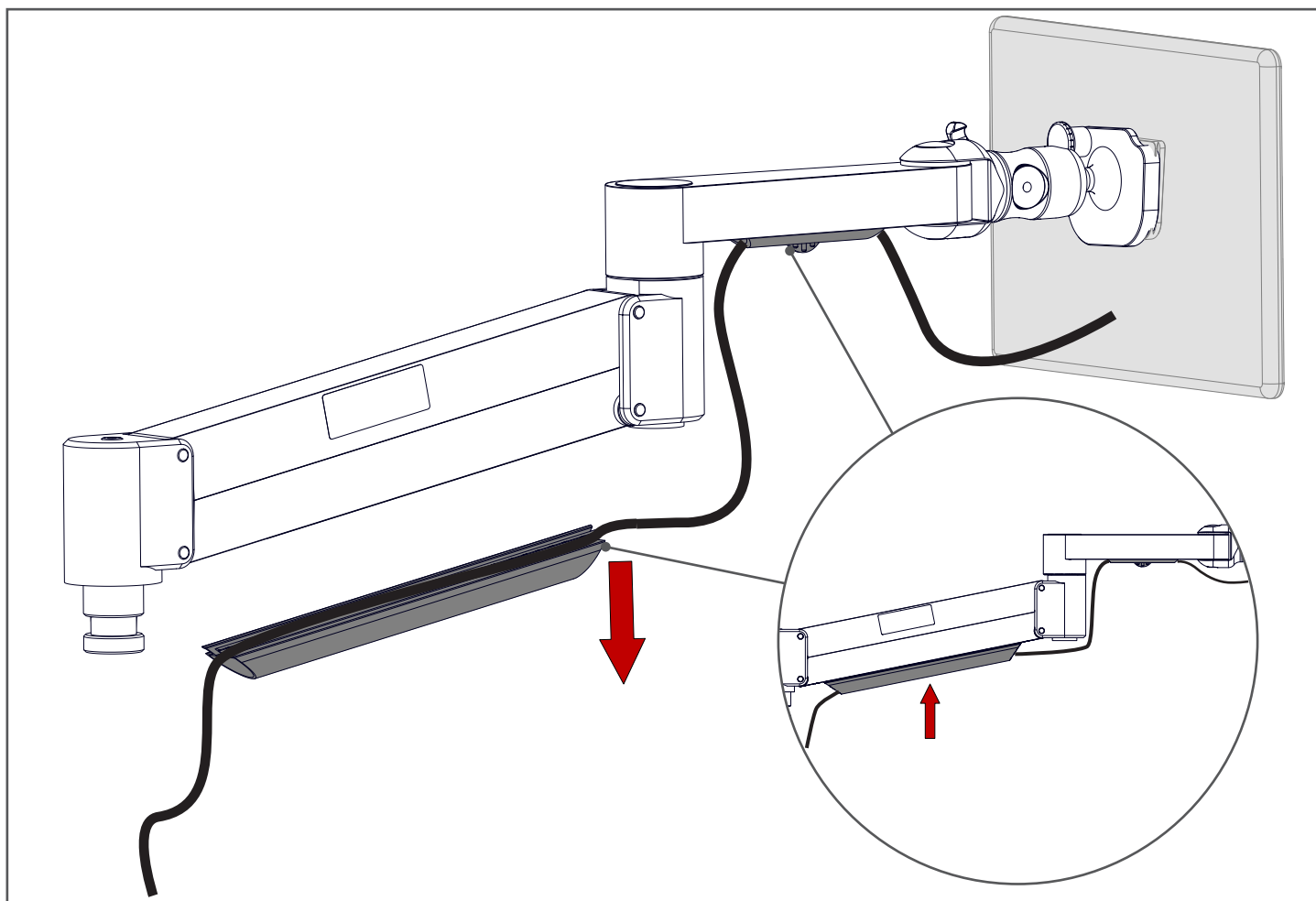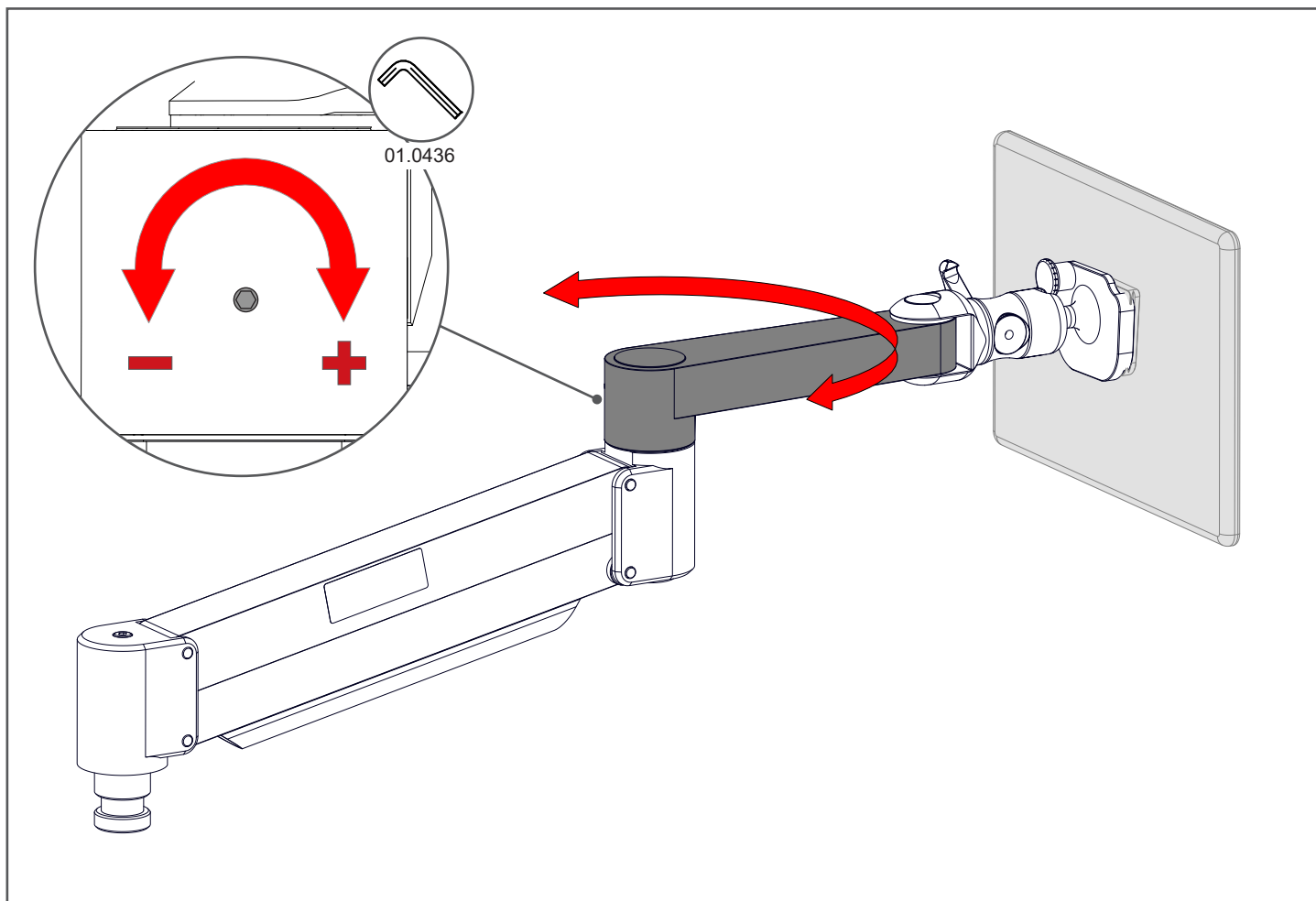

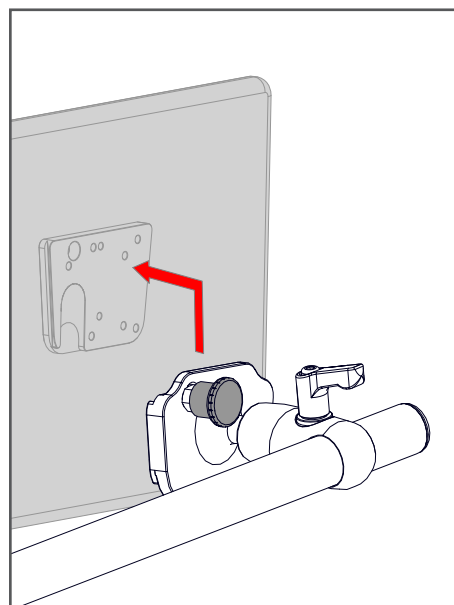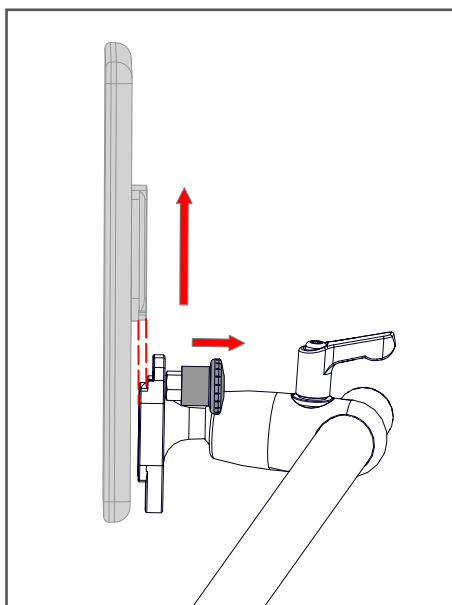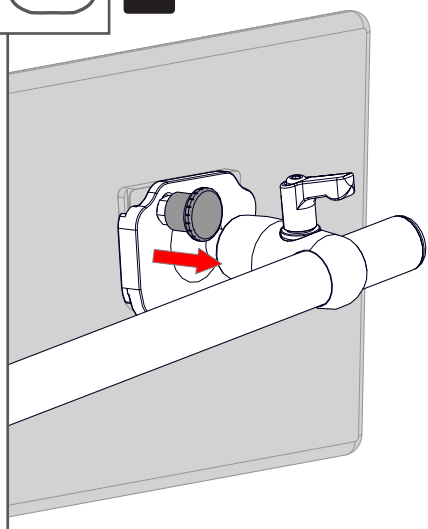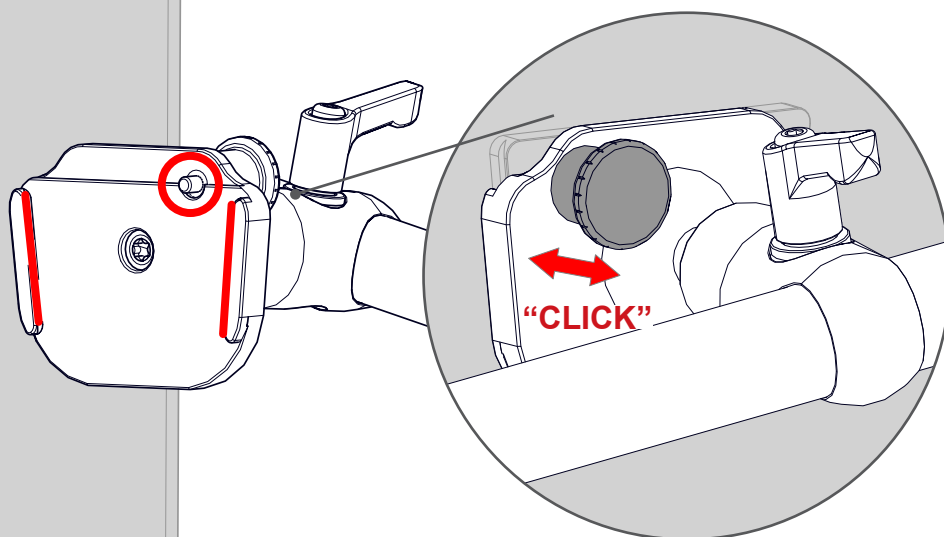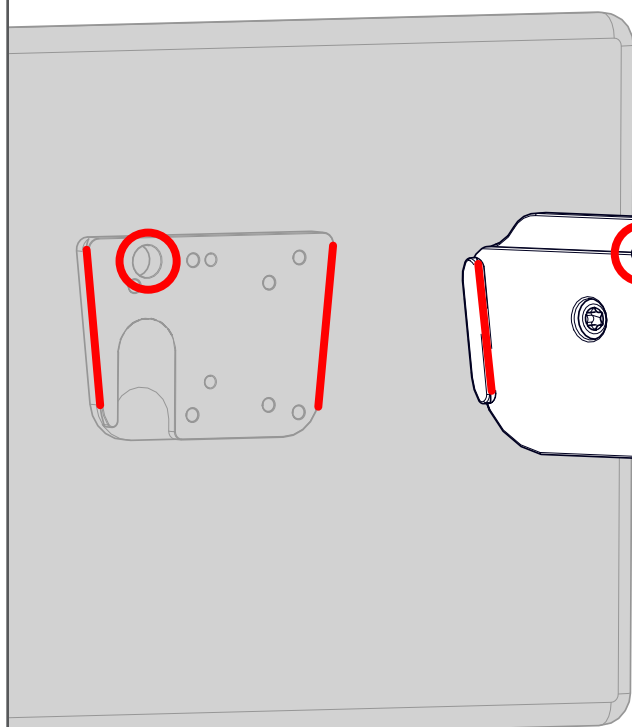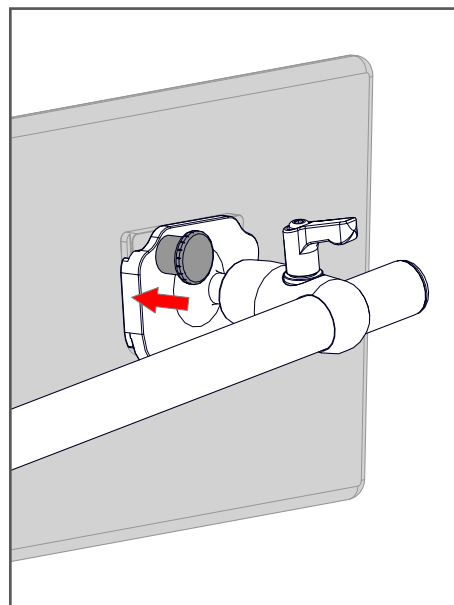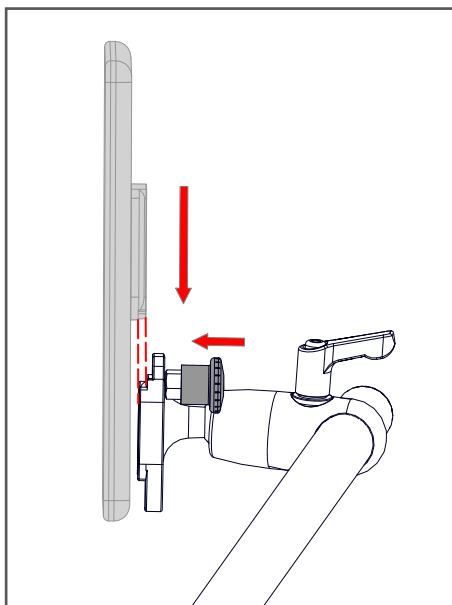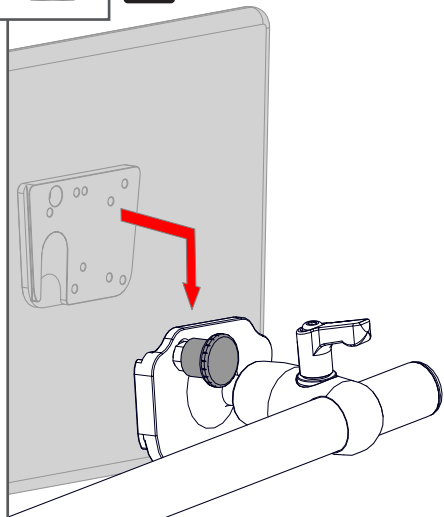

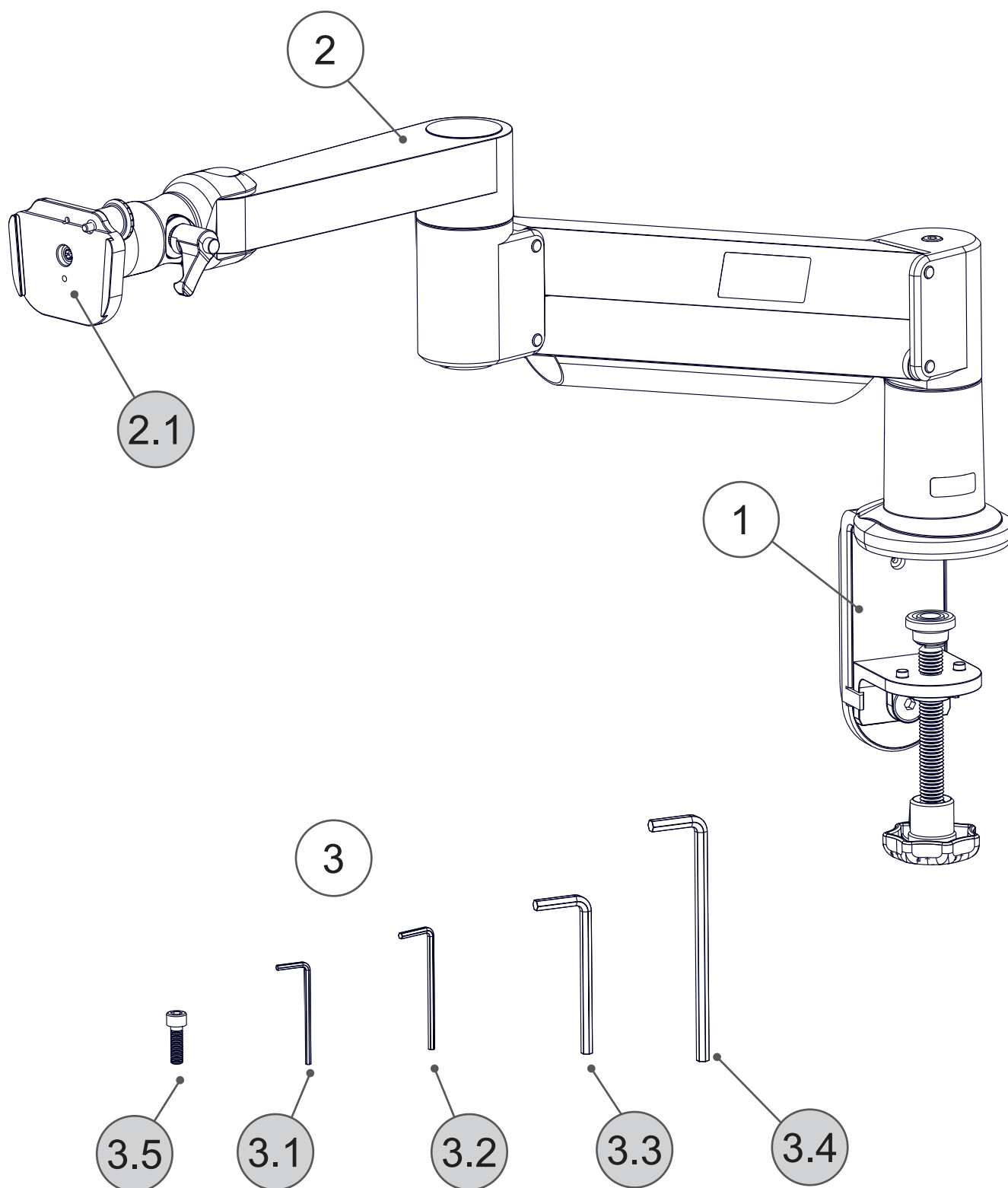

Pos.	No.	Bezeichnung	Description
1	01.1004	Klemme FloatArm	Clamp FloatArm
2*	17.9614	FS Arm Float Light	FS Arm Float Light
2**	17.9610	FS Arm Float	FS Arm Float
2***	17.9611	FS Arm Float HD	FS Arm Float HD
2.1	16.1070	UGA Float QuickShift	UDS Float QuickShift
3		Montagekit	Mounting kit
3.1	01.0436	Innensechskantschlüssel 3/32"	Allen wrench 3/32"
3.2*	01.0657	Innensechskantschlüssel 1/8"	Allen wrench 1/8"
3.3	01.0014	Innensechskantschlüssel 5mm	Allen wrench 5mm
3.4	01.0437	Innensechskantschlüssel 7/32"	Allen wrench 7/32"
3.5	01.0620	Zylinderschraube M6x20	Cylinder Head Bolt M6x20

* **12.1735** TC-OH Light
 ** **12.1730** TC-OH
 *** **12.1740** TC-OH HD

We ♥ your
feedback



Rehadapt Engineering
GmbH & Co. KG

📖 Heinrich-Hertz-Str. 104
34123 Kassel, Germany

☎ Tel.: +49 561 220 717 0
📠 Fax: +49 561 220 717 99

✉ officeteam@rehadapt.com
🌐 <https://rehadapt.com>



Rehadapt
North America

📖 40 Oser Ave, Suite 40-01
Hauppauge, NY 11788

☎ Tel.: 1 (888) 635-6962
📠 Fax: 1 (888) 635-6962

✉ officeteam.na@rehadapt.com
🌐 <https://rehadapt.com>