



Lyd- og videoovervågning med blitz, høje alarmer og pudevibrator



SCANTONE
Dansk Høredesign

Brugervejledning

Lyd- og videobabyalarm med shaker, blitz og høje alarmer


Se venligst vores hjemmeside: www.geemarc.com for en opdateret brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer, du skal være opmærksom på.

Bemærk: Denne brugervejledning giver dig alle de oplysninger, du har brug for, for at få mest muligt ud af din Amplical Sentinel 1 videoovervågningsudstyr. Vi anbefaler at du indsætter og oplader batteriet helt i modtagerskærmen, inden du tager den i brug. Så fungerer den som trådløs modtager af alarmgiver. Læs venligst sikkerhedsinstruktionerne på side 2, før du installerer enhederne.

AC Sen1 (AMPLICAL™ Sentinel 1)

Æskens indeholder:

- 1 Modtagerenhed med skærm
- 1 Overvågningskamera
- 2 AC/DC-strømadaptere
- 1 Foldbart stativ til kamera
- 2 velcro bånd
- 1 pudevibrator
- 1 brugermanual

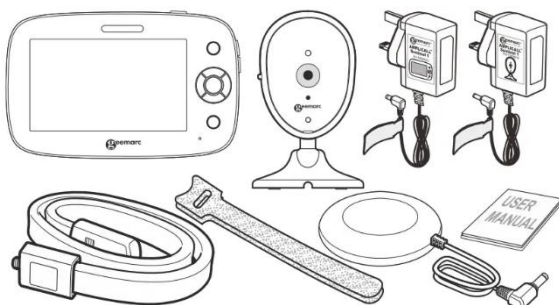

Indholdsfortegnelse

1. Oversigt over din babyalarm	2
2. Sikkerhedsinstruktioner	3
3. Opsætning af din videobabyalarm	4
4. Ikoner på overvågningsskærmen	5
5. Menu funktion (Modtagerskærm med alarm)	6-10
6. Tekniske funktioner	11
7. Garanti	11
8. Erklæringer	12


1. Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Denne babyalarm overholder alle relevante standarder vedrørende elektromagnetiske felter og er, når den håndteres som beskrevet i brugervejledningen, sikker at bruge. Læs derfor altid instruktionerne i denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger enheden.

- Samling af en voksen er påkrævet. Hold små dele væk fra børn under samlingen.
 - Dette produkt er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med det.
 - Denne babyalarm erstatter ikke ansvarligt voksenopsyn.
 - Placer ikke kameraet eller kablerne i sengen eller inden for babyens rækkevidde (mindst 1 meter væk).
 - Hold ledningerne utilgængeligt for børn.
 - Brug ikke babyalarmen i nærheden af vand eller en varmekilde.
 - Brug kun de medfølgende strømadaptere.
 - Rør ikke ved stikkontakterne med skarpe eller metalgenstande.
-

2. Oversigt over din babyalarm

- A1. Blitz/indikatorer A6. OK-knap
A2. Tænd/sluk-knap A7. Højttaler
A3. Menu/Tilbage-knap A8. Tale-/Zoom-knap
A4. Lydstyrke +/- A9. Mikrofon
A5. Navigationstast

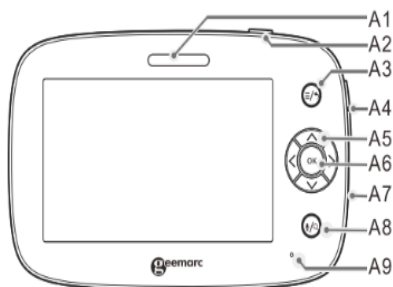


Babyalarm – Grundlæggende betjening af tastene

	Tænd/sluk-knap	Tryk og hold knappen nede i 3 sek. Skærm Søvn/Vågn - Tryk én gang
	Menu-knap	Giver adgang til forskellige funktioner
	Tilbage-knap	Tryk for at gå tilbage til forrige mappe
	Navigationsknap	Tryk for at flytte op, ned, venstre, højre for at vælge valgfrit element på skærm
	OK-knap	Tryk for at bekræfte eller acceptere valget
	Tale-knap	Tryk og hold nede for at tale
	Zoom-knap	Tryk for digital zoom
	+/- knap	Tryk for at justere lydstyrkeniveauet

Kamera:

- B1. Tænd/sluk-knap
- B2. Lyssensor
- B3. Linse
- B4. Indikator
- B5. Temperaturføler
- B6. Højttaler
- B7. DC-indgang
- B8. Parringsknap

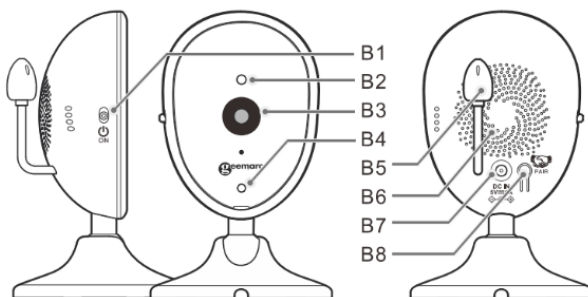

Kamera – Grundlæggende betjening af tastene


 Tænd/sluk-knap: Skub for at tænde/slukke	 PAR-knap: Tryk for at parre babyalarmen
--	---

Bemærk: Det medfølgende kamera er allerede parret. Du behøver ikke at registrere det igen, medmindre kameraet mister forbindelsen til babyalarmen.
Se afsnittet "5.1 Kamera" for yderligere oplysninger.

3. Opsætning af din videobabyalarm

3.1 Kameraets strømforsyning

- Tilslutning af strømadapteren til kameraet.
- Tilslut adapterens lille stik til kameraet og den anden ende til strømstikket.
- Brug kun den medfølgende adapter (5V DC/1 A).

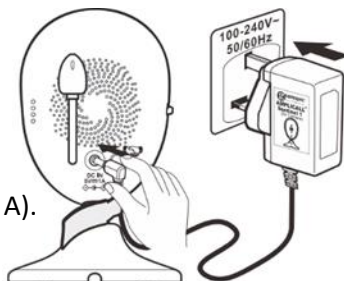


ADVARSEL:

Placer ikke kameraet eller kablerne i sengen eller inden for babyens rækkevidde (mindst 1 meter væk).

3.2 Strømforsyning til babyalarmen

- Tilslutning af strømadapteren til babyalarmen, hvis batteriniveauet er lavt.
- Tilslut adapterens lille stik til babyalarmen og den anden ende til strømstikket.
- Brug kun den medfølgende adapter (5V DC / 1,5A).
- Tryk og hold POWER-knappen på babyalarmen nede for at tænde den.

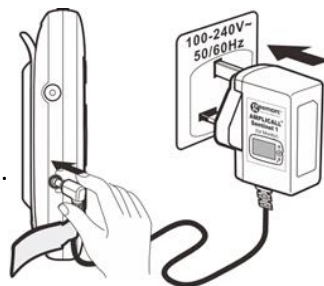

4. Ikoner på overvågningsskærmen


- C1. Indikator for signalstyrke
C2. Kameranummer
C3. Stemme-/lydløs tilstand
C4. Vuggeviser
C5. Bevægelsesdetektering
C6. Fodringstimer
C7. VOX-tilstand
C8. Temperaturalarm
C9. Temperatur i babyrummet
C10. Tid
C11. Batteriindikator



5. Menu funktion (Babyalarm)


5.1 Kamera (Der kan højst tilføjes 4 kameraer).

- Vælg "Kamera" > Vælg "Tilføj kamera" > Tryk på "OK" > Tryk på parrings-knappen på kameraet.

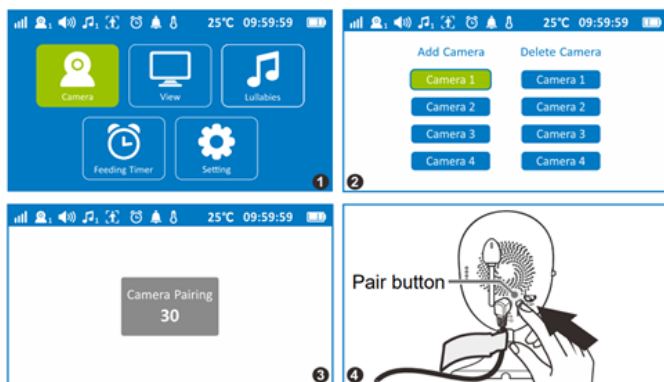


5.2 Visning

Du kan ændre visningen af forskellige kameraer (hvis der tilføjes forskellige kameraer).

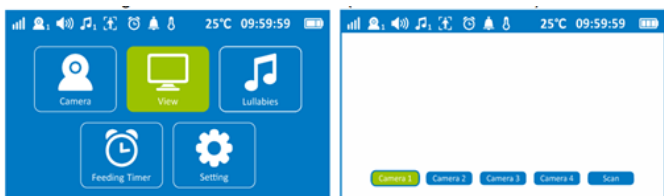

5.3 Vuggeviser

Du kan vælge en melodi fra vuggeviselisten. Den vil automatisk afspille melodien én gang. Hvis du vælger Alle, vil den automatisk gentage alle vuggeviser. Tryk på OK-knap for at bekræfte dit valg.

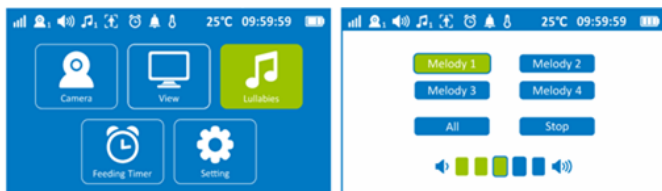


5.4 Timer for mad/medicin påmindelse

Du kan tilvælge en alarm for at minde om evt. mad/medicin til barnet. Efter valget vises en nedtællingsbjælke i videovisningsgrænsefladen. Når den foruddefinerede tid er nået, vil skærmen udløse en alarm i 5 sek. Tryk på OK-knappen for at bekræfte dit valg.




5.5 Indstilling

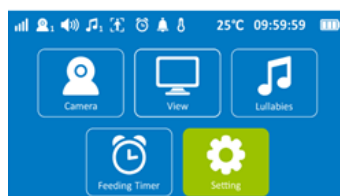

5.5.1 Sprogindstilling


Inkluderer 5 sprog (engelsk, spansk, fransk, tysk, hollandsk).

Tryk på OK-knappen for at bekræfte dit valg.

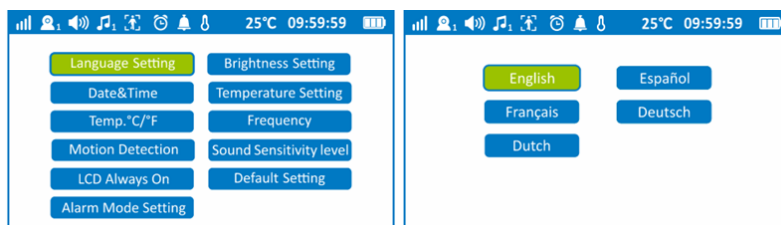

5.5.2 Lysstyrkeindstilling


Vælg lysstyrkeniveau (1~5 niveauer), brug højre eller venstre pil til at indstille dit niveau. Tryk på OK-knappen for at bekræfte dit valg.

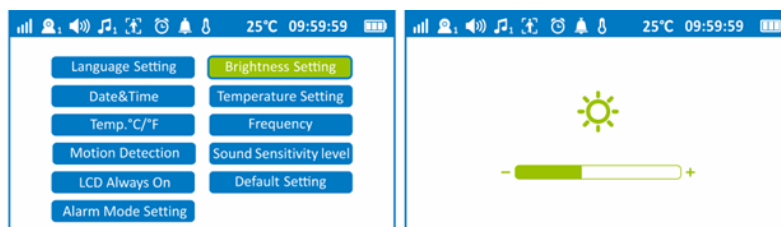

5.5.3 Dato og tid


Indstil dato (År / Måned / Dag) og tid (Timer/minutter/ sekunder).

Tryk på pil op eller ned for at indstille datoen, og brug højre eller venstre pil til at navigere indstillingen. Tryk på OK-knappen for at bekræfte din indstilling.

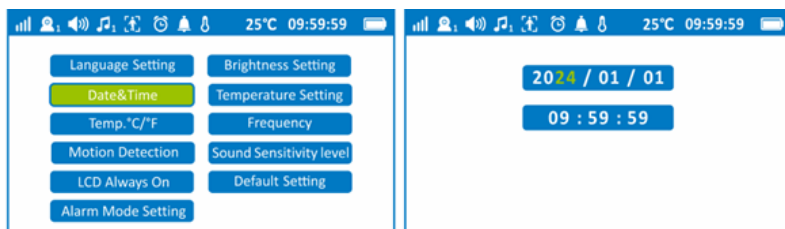

5.5.4 Temperaturalarm


Kameraet kan registrere temperaturen i rummet. Du kan indstille temperaturgrænsen. Alarm i 5 sek., når den er over/under grænserne. Tryk på pil op eller ned for at indstille temperaturen, og brug højre eller venstre pil til at bevæge dig i indstillingen. Vælg TIL, og tryk på OK-knappen for at aktivere funktionen.

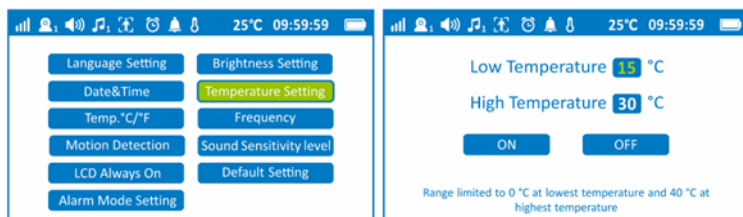

5.5.5 Temp. °C / °F


Vælg temperaturvisning med Celsius / Fahrenheit (°C / °F).

Tryk på OK-knappen for at validere din indstilling.

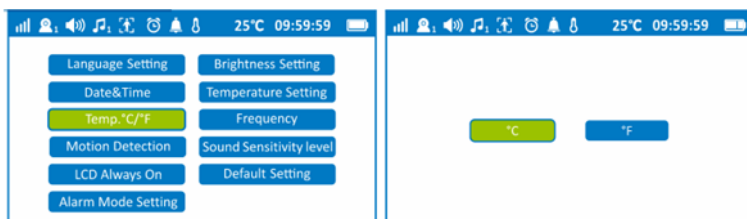


5.5.6 Frekvens

Du kan skifte trådløs frekvens mellem 60Hz / 50Hz. 60Hz er mere jævnt end 50Hz, men bruger mere batteri. Tryk på OK-knappen for at validere din indstilling.

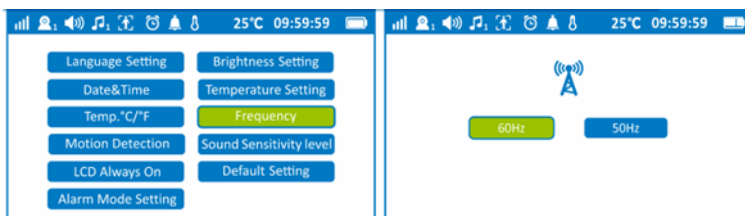


5.5.7 Bevægelsesdetektion

Når denne funktion er aktiveret, kan brugeren høre en alarm, når der sker bevægelse. Tryk på OK-knappen for at validere din indstilling.

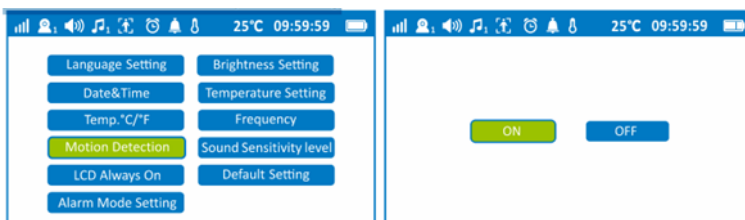


5.5.8 Lydfølsomhedsniveau

Vælg følsomhedsniveau (Høj: meget høj følsomhed, Mellem: Standard, Lav: meget lav følsomhed) med piletasterne op eller ned. Brugeren kan høre en alarm, når der registreres unormal lyd eller støj. Tryk på OK-knappen for at bekræfte dit valg.

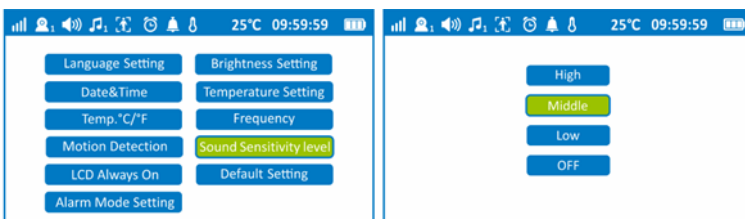


5.5.9 Skærmindstillinger

Vælg TIL eller FRA med højre eller venstre piletast. Tryk på OK-knappen for at bekræfte. Hvis TIL er valgt, forbliver skærmen TIL. Hvis FRA er valgt (batteriikonet bliver orange), vender skærmen automatisk tilbage efter 40 sekunder i inaktiv tilstand. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde skærmen igen.

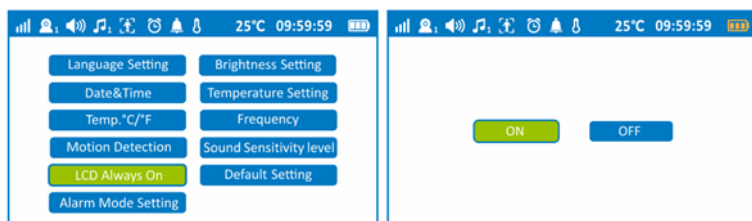


5.5.10 Standardindstilling

Vælg TIL/FRA for at gendanne fabriksindstillingerne med højre eller venstre piletast. Tryk på OK-knappen for at bekræfte din indstilling.

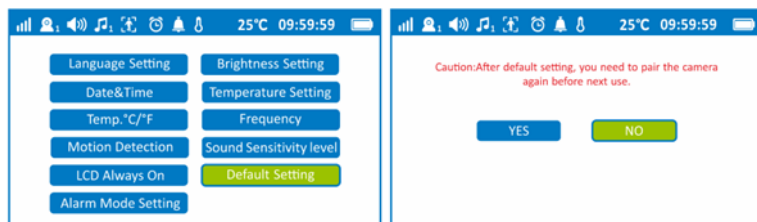

5.5.11 Indstilling af alarmtilstand

Indstil alarmlydniveauet (Fra, 1 til 5 niveauer) ved hjælp af højre eller venstre pil. Tryk på pil ned for at vælge Blitzlys. Vælg TIL/FRA med højre eller venstre piletast. Tryk på OK-knappen for at bekræfte dit valg.

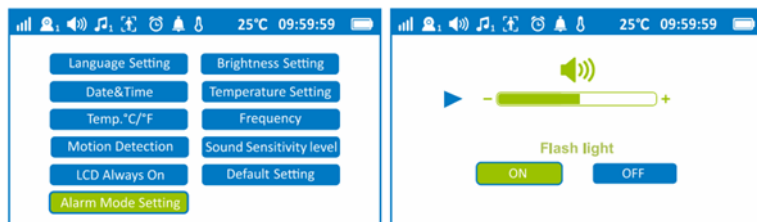

Bemærk: De to indstillinger vil blive anvendt på 3 alarmdetekteringstilstande: Temperatur, bevægelsesdetektering og lydfølsomhed.

6. Tekniske funktioner

Funktioner	Parametre
Tovejshøjttaler	Monitor: Højttaler: 1W Mikrofon: -42±3dB Kamera: Højttaler: 1W Mikrofon: -34±3dB
Temperatur detektion	0°C-40°C
H/F temperatur alarm	Lav temperatur: 15°C Høj temperatur: 30°C
Frekvensjustering	50Hz / 60Hz
Lydfølsomhed niveau	Høj / Mellem / Lav
Bevægelsesdetektion	TIL / FRA
Timer for mad/medicin	2t, 3t, 4t, 5t interval
Vuggeviser	4 vuggeviser
Lysstyrke	5 niveauer
Lysbjælke	5 niveauer
Lydstyrke	5 niveauer
Antal sprog (5)	Engelsk, spansk, fransk, tysk, hollandsk
Omvendt visning	Drej 180°
LCD altid tændt	LCD-skærmen sover automatisk i 40 sekunder i inaktiv tilstand, når den er indstillet til OFF.
Pudevibrator	Vibrationsspænding: 5V
Zoom	x 2
RF-effekt	< 250mW

Bemærk: Kamera og modtager er ikke vandtætte eller varmebestandige. Hold kamera og modtager i en afstand på mindst ½ meter fra dette.

7. GARANTI

2 års garanti fra købsdato på Geemarc AMPLICALLTM Sentinel 1 (AC Sen1). Opstår der funktionsfejl på produktet, skal du kontakte din forhandler. Produktet skal fremsendes til din forhandler, der vil håndtere reklamation for dig. Reparationer udføres kun under garanti, ledsaget af en kopi af forhandlerens faktura / købskvittering. Angiv altid produktets serienummer ved reklamation. Garantien dækker ikke ulykker, uagtsomhed eller brud på enhederne. Produktet skilles ad af uautoriserede teknikere. Geemarc-garantien begrænser på ingen måde dine juridiske rettigheder.

Bemærk venligst: Garantien gælder kun for Danmark.

Bortskaffelse af brugt elektrisk, elektroniske enheder og batterier

Symbolet på produkterne angiver, at det skal returneres til et kommunalt indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektroniske enheder. – Batterier skal deponeres særskilt dem i en passende WEEE-container. Overholder du disse instruktioner, sikrer du menneskers sundhed og miljøbeskyttelse.

8. ERKLÆRINGER:

UKCA-direktiver Geemarc Telecom SA erklærer hermed, at denne AMPLICALL™ Sentinel 1 (AC Sen1) overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i radioudstyrsdirektivet 2014/53/UE.

UKCA-overensstemmelses-erklæringen kan læses på www.geemarc.com

Dette udstyr er testet og godkendt til at overholde grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne.

Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens repræsentant.

Bemærk: Disse to indstillinger vil blive anvendt på 3 alarmdetekteringsmods.

OG (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC ID: 2A9CR-AMPLICALL - IC: 29704-AMPLICALL



For product support and help visit our website at www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com

telephone **01707 387602**

Lines are open from **10:00-12:00** then **13:00-14:30** Mon. to Fri.

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
France

Made for Geemarc Telecom S.A. in China



Dansk importør:



Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup

Tlf. 46 19 51 00 – info@scantone.dk – www.scantone.dk