



Indhold

Ophavsret

Indledning

Hurtigstart

Nyheder

Hovedvindue

Kontrolknapper

Tastatur

Ordforudsigelsestaster

Slet seneste ord

Specialtaster

Indstillinger

Udseende

Layout

Ordforudsigelse

Ordbog

Tekstmakroer

Klik-tilstand

Diverse

Information

Avanceret

© 2006-2025 M.Jürgens

www.be-enabled.de



Skærmtastatur
Brugervejledning

Version 2.x

beENABLED® er et registreret varemærke tilhørende "M.Jürgens,
Krefeld" i Tyskland
© 2006-2025 M.Jürgens www.be-enabled.de



Skærmtastatur

Ophavsret

Den foreliggende dokumentation er beskyttet af ophavsretsloven. Alle rettigheder forbeholdes, særligt retten til oversættelse, foredrag, reproduktion, mangfoldiggørelse på fotomekanisk eller anden måde og lagring i elektroniske medier.

De i denne dokumentation nævnte software- og hardwarebetegnelser er i de fleste tilfælde også registrerede varemærker og underlagt som sådan de lovmæssige bestemmelser.

Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande
 Windows Vista® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande



Skærmtastatur



1. Indledning

Skærmtastaturet **beKEY®** er en softwareløsning, der kan overtage alle funktioner fra et "rigtigt" tastatur. Brugere er personer, der på grund af fysiske begrænsninger ikke kan anvende et konventionelt tastatur, men også brugere af tablet-pc'er eller andre touch-screen-styrede enheder.

Især vores nyudviklede ordforudsigelsesteknologi vil gøre det muligt for dig at øge din skrivehastighed mærkbart. For vores ordforudsigelse giver ikke kun forslag til **færdiggørelse** af det ord, du er ved at skrive, men også til det **komplette næste ord!**

Betjeningen kan ske via en mus eller en mus-kompatibel (f.eks. Head-Mouse, øjenstyring osv.) styring. Den nye **beKEY®** version, **beKEY® SCAN** kan også betjenes i scanning-tilstand (1 eller 2 knapper).

beKEY® blev udviklet og videreudvikles med hjælp fra personer, der bruger det dagligt. Samarbejdet med brugere af vores software er meget vigtigt for os. Hvis du savner en bestemt funktion eller har yderligere forslag, bedes du kontakte os. Email: support@be-enabled.de

Som et lille udviklerteam er vi i stand til hurtigt og fleksibelt at imødekomme brugerønsker. Hjælp med at forbedre vores produkter til din egen og alle andre brugeres fordel, som eventuelt kan drage fordel af dine forslag.



Skærmtastatur

1.1 Hurtig introduktion til beKEY®

For straks at kunne arbejde med **beKEY®** uden først at skulle læse hele vejledningen, her de to vigtigste ting, du skal vide, som ikke er umiddelbart synlige:


Hvor er indstillingerne?

For at åbne indstillingsvinduet skal du klikke på dette ikon  i nederste højre hjørne af tastaturvinduet.

Hvordan kan jeg flytte tastaturet?

Når du klikker på dette ikon  vises tasterne til at flytte tastaturet i højre del af tastaturet.


Tastaturet ser da sådan ud:

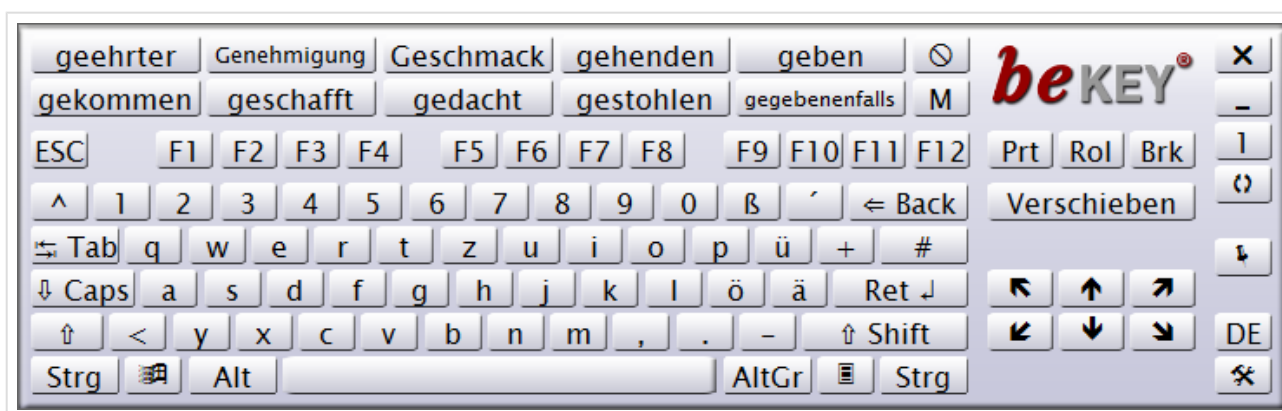

Et klik på FLYT-tasten "hæfter" tastaturet til musemarkøren, så du hermed kan flytte tastaturet på skærmen. Endnu et klik løsner tastaturet igen, og det forbliver så på dette sted på skærmen.

Meget ofte vil man dog blot flytte tastaturet til et af de fire hjørner af skærmen, hertil bruges de med pile markerede taster nedenfor.

Endnu et klik på lag-skift-tasten  lader det numeriske tastatur vises. Tastaturet ser da sådan ud:

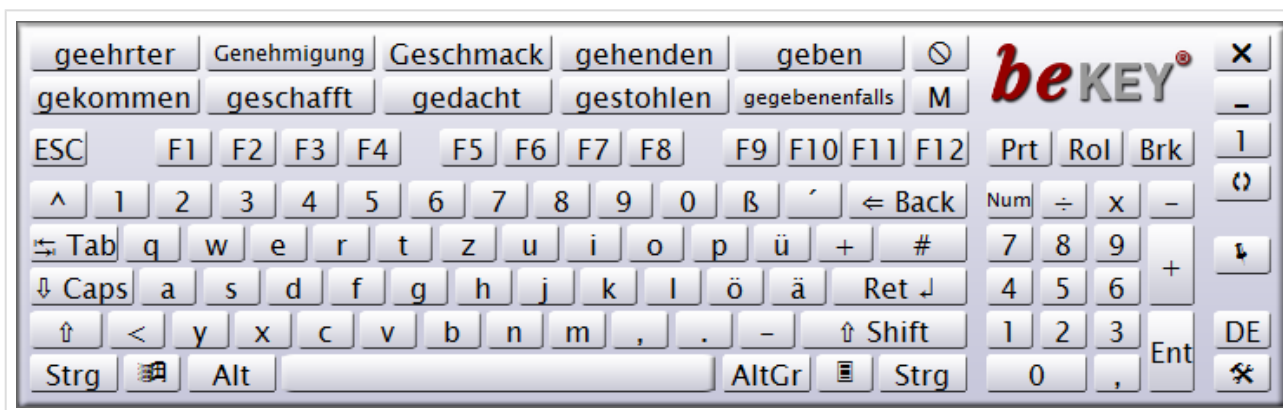

Endnu et klik på lag-skift-tasten  lader de oprindelige taster vises igen.

beKEY®

Skærmtastatur

1.2 Nyheder

De vigtigste ændringer siden beKEY® Version 1.3.3.5:

- Understøttelse af eksterne dialogtekster på andre sprog
- 21 nye ordbøger (f.eks. fransk, italiensk, spansk, russisk osv.)
- Ordbøger kan redigeres
- Makrotaster, der kan tildeles egne tekster og tekstblokke
- Automatisk tastaturlayout, der overtager den respektive indstilling fra operativsystemet
- beKEY® kan bruges på Windows® login-skærmen (Windows® 2000 og XP)

beKEY®

Skærmtastatur

2. Hovedvindue

Applikationens hovedvindue er designet efter et konventionelt tastatur, så funktionen af de fleste taster burde være bekendt for dig. Afhængigt af den indstillede **farveskema** og **tastatur-layout** kan udseendet hos dig afvige lidt.

Nyt er dog de på billedet rødt markerede områder: **Ordforudsigelsestasterne**, **kontrolknapperne**, **slet seneste ord-tasten** og **specialtasterne**.



2.1 Kontrolknapper



På det sted, hvor normalt de Windows®-typiske ikoner til at lukke og minimere vinduet sidder, vises ved vores skærmtastatur nogle ikoner, der ser lidt anderledes ud, hvoraf de første to burde forekomme dig bekendte.

Denne udeladelse af den Windows®-typiske titellinje på vinduet tjener til at udnytte pladsen på skærmen optimalt.

2.1.1 Afslut-tast

 Et klik på dette ikon afslutter programmet. Afhængigt af **indstillingerne** vil du forinden blive spurgt, om du virkelig vil afslutte programmet.

2.1.2 Minimer-tast

 Et klik på dette ikon minimerer tastaturet, et klik på det tilsvarende symbol i Windows®-proceslinjen lader det vise sig igen.


2.1.3 Profil skift-tast

1 Et klik på dette ikon skifter mellem to forskellige profiler. En profil gemmer alle indstillinger vedrørende tastaturets udseende, især størrelse, position, synlighed af ordforudsigelsestasterne osv. Dermed har du muligheden for hurtigt at skifte mellem to forskellige anvendelsesområder. F.eks. en stor version af tastaturet, der udnytter hele skærm bredden i profil #1. Og et lille, kompakt tastatur uden ordforudsigelsestaster i nederste højre hjørne af skærmen i profil #2.

Ikonet viser nummeret på den aktuelt aktive profil, altså enten "1" eller "2"

2.1.4 Lag-skift-tast

Et enkelt klik på dette ikon skifter tasterne i højre del af tastaturet, så tasterne til at flytte tastaturet vises. Tastaturet ser da sådan ud:

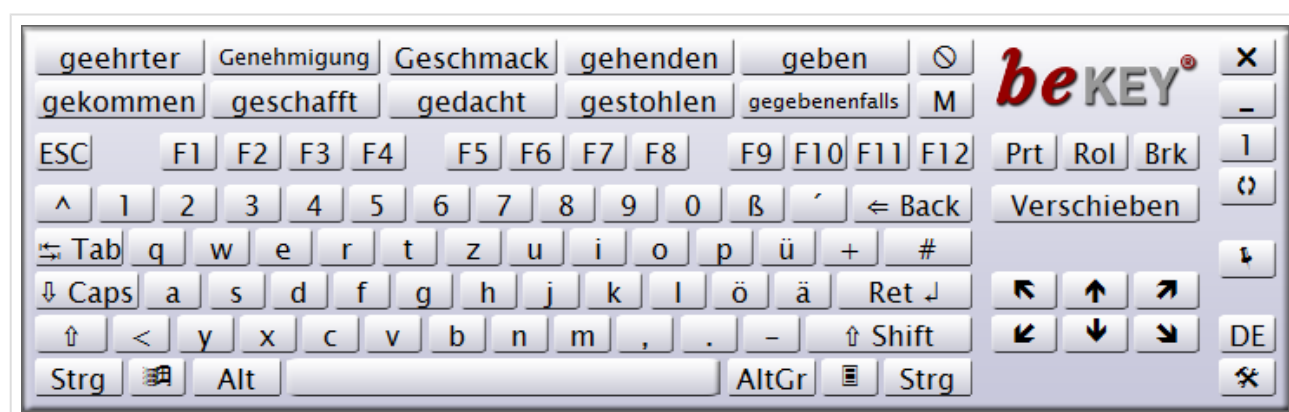


Et klik på FLYT-tasten "hæfter" tastaturet til musemarkøren, så du hermed kan flytte tastaturet på skærmen. Endnu et klik løsner tastaturet igen, og det forbliver så på dette sted på skærmen.

Da denne form for betjening ikke er mulig med en touchscreen, kan du tænde for **Touchscreen tilstand**. Så opfører FLYT-tasten sig, som du er vant til, dvs. tryk på tasten, hold den nede, flyt tastaturet på skærmen, slip så tasten.

Meget ofte vil man dog blot flytte tastaturet til et af de fire hjørner af skærmen, hertil bruges de med pile markerede taster nedenfor.

Endnu et klik på lag-skift-tasten  lader det numeriske tastatur vises. Tastaturet ser da sådan ud:

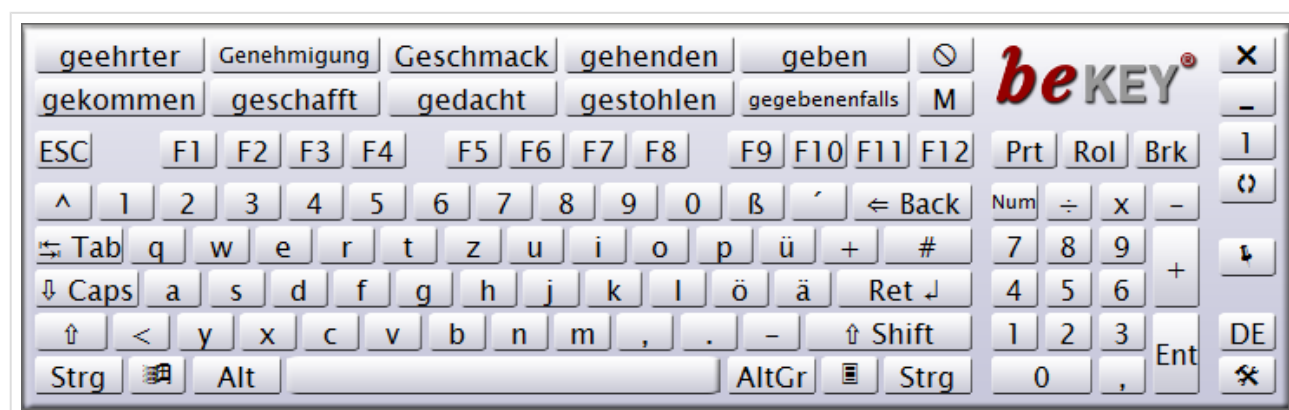

Endnu et klik på lag-skift-tasten  lader de oprindelige taster vises igen.

2.1.5 Hurtig flytning

 Et klik på dette ikon "hæfter" tastaturet til musemarkøren, så du hermed kan flytte tastaturet på skærmen. Endnu et klik løsner tastaturet igen, og det forbliver så på dette sted på skærmen. Dette ikon er som standard slukket og kan aktiveres i **indstillingerne**.

2.1.6 Ordbog-sprog skift

 Et klik på dette ikon skifter sproget for den anvendte ordbog mellem tysk (DE) og engelsk (EN). Dette er nyttigt, når du f.eks. skriver breve eller e-mails på flere sprog og hurtigt vil skifte ordbog. Dette ikon er som standard slukket og kan aktiveres i **indstillingerne**.

2.1.7 Indstillinger-tast


 Et klik på dette ikon åbner **indstillingsvinduet** (hhv. lukker det igen, hvis det allerede var åbnet).

2.2 Tastatur

Når du bevæger musemarkøren over tastaturet, vises den respektive tast under musemarkøren **rødt**. Et museklik "trykker" denne tast, og det tilsvarende tastetryk sendes til den aktuelt aktive applikation.

SHIFT-, CONTROL- og ALT-tasterne "låses fast" ved klik, dvs. de trykkes ned og først efter aktivering af en anden tast "slippes" de igen.

2.3 Ordforudsigelsestaster

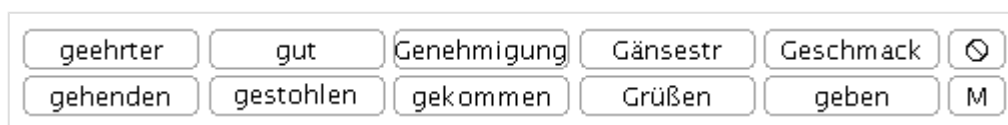

Mens du skriver med tastaturet, ændres ordforudsigelsestasterne konstant og fyldes med de respektive mest sandsynlige ord. Udvælgelsen og sorteringsrækkefølgen af de foreslåede ord kan du selv **indstille**.

De forudindstillede værdier er dog efter vores erfaringer optimale, og normalt behøver du ikke at ændre dem.

Et klik på en af ordforudsigelsestasterne "skriver" dette ord i den aktuelt aktive applikation. Afhængigt af **indstillingerne** tilføjes der automatisk et MELLEMRUM efter hvert ord fra ordforudsigelsen.

2.3.1 Skift læring til/fra


 Når denne tast er aktiv, er læringstilstanden for ordforudsigelsen slukket. Dette kan være

fornuftigt, når du f.eks. indtaster adgangskoder eller lignende eller foretager rettelser i en eksisterende tekst.

2.3.2 Skift makrotaster

 Med denne tast skifter du mellem ordforudsigelsestaster og makrotaster. Makrotasterne kan du tildele vilkårlige ofte brugte tekstblokke. Yderligere information i det tilsvarende kapitel: **Tekstmakroer**.

2.4 Slet-seneste-ord-tast

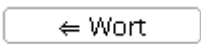 Et klik på denne tast sletter det sidst skrevne ord.

Det skal dog bemærkes, at skærmtastaturet ikke "husker", når du flytter tekstininput-markøren. Hvis du f.eks. netop har skrevet et ord på 10 tegn og så flytter markøren og derefter trykker på *Slet-seneste-ord-tasten*, så slettes de sidste 10 tegn på det sted, hvor markøren aktuelt befinder sig!

2.5 Specialtaster / Multimedietaster

(Kun tilgængelig i **beKEY® deluxe** versioner)



Disse specialtaster giver dig adgang til nogle ofte brugte funktioner i dit Windows® system:

Bemærk venligst, at disse taster ganske vist fungerer på de fleste systemer, men desværre ikke på alle!

 Lydstyrke til/fra

 Lydstyrke lavere

 Lydstyrke højere

 Start medieafspilning

 Pause medieafspilning

 Afspil forrige nummer

 Afspil næste nummer



Browser 'fremad'



Browser 'genindlæs'



Start browser hhv. vis startside



Start e-mail-program



Vælg medier



Skærmtastatur

3. Indstillinger

Her kan du foretage indstillinger og tilpasse **beKEY®** til dine personlige behov.

Vælg venligst et af undertemaerne:

- **3.1 Udseende**
 - **3.2 Layout**
 - **3.4 Ordforudsigelse**
 - **3.5 Ordbog**
 - **3.6 Tekstmakroer**
 - **3.7 Klik-tilstand**
 - **3.8 Diverse**
 - **3.9 Information**
 - **3.10 Avancerede indstillinger**
-




Skærmtastatur

3.1 Udseende

Her kan du foretage indstillinger vedrørende udseendet af **beKEY®**:

Funktionen af de respektive knapper forklares nedenfor, men det nemmeste er, hvis du afprøver dem, deres funktionsmåde burde da være indlysende.

Position, Farveskema, Størrelse, Sideforhold, Tastekant, Skriftstørrelse, Afrunding af taster, Gennemsigtighed

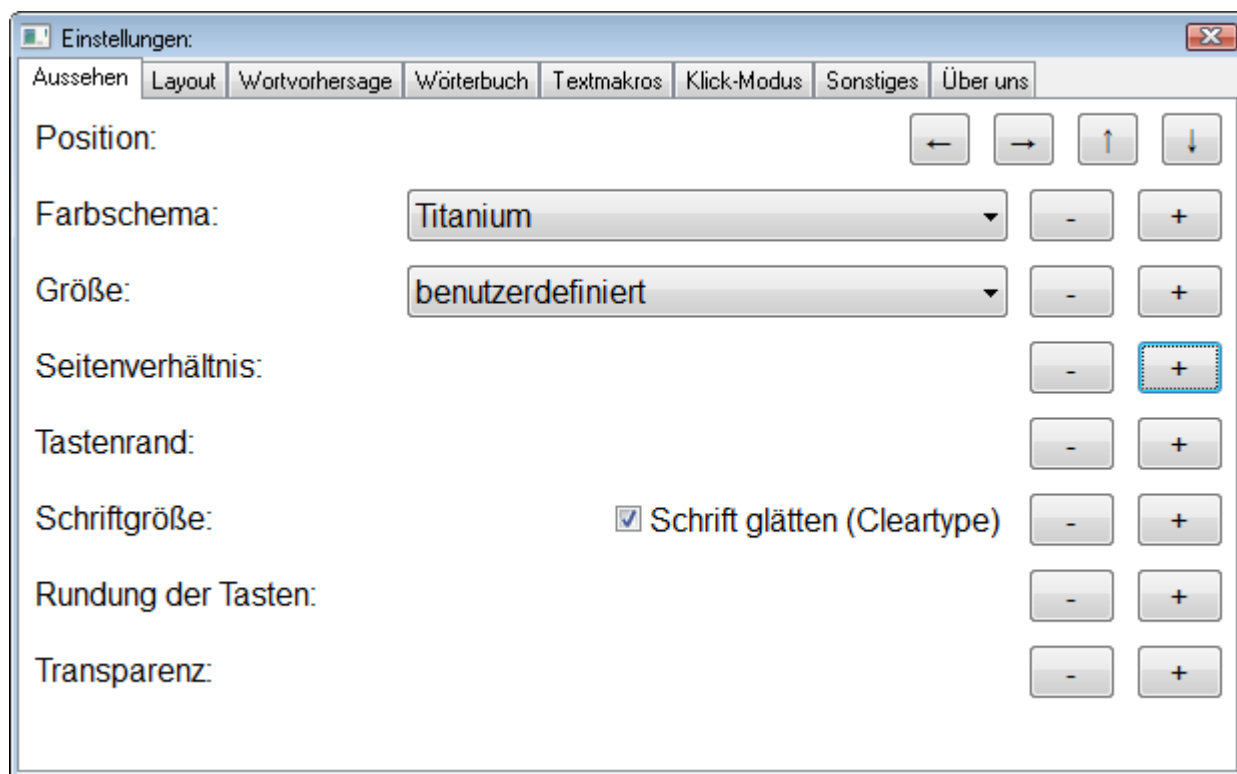

3.1.1 Position

Med de fire knapper kan du ændre positionen af **beKEY®**-hovedvinduet.

3.1.2 Farveskema

Ved hjælp af valgmenuen eller + (plus) og - (minus) knapperne kan du ændre farveskemaet. Der er pt. 8 forskellige farveskemaer, du kan vælge imellem. I **beKEY® deluxe** versionerne kan du også selv bestemme farverne.

3.1.3 Størrelse

Ved hjælp af + (plus) og - (minus) knapperne kan du ændre tastaturets størrelse. Derved forbliver **sideforholdet** altid det samme.

3.1.4 Sideforhold

Ved hjælp af + (plus) og - (minus) knapperne kan du ændre tastaturets sideforhold. Derved

betyder et klik på + (plus) knappen, at tastaturets højde forøges, og bredden forbliver den samme.

3.1.5 Tastekant

Ved hjælp af + (plus) og - (minus) knapperne kan du ændre størrelsen af tasternes kant. En større mellemrum mellem tasterne reducerer sandsynligheden for at trykke på en forkert tast betydeligt.

3.1.6 Skriftstørrelse

Ved hjælp af + (plus) og - (minus) knapperne kan du ændre skriftstørrelsen på tastebeskriftningen.

3.1.6.1 Glatning af skrift (Cleartype)

Med denne kontakt kan du tænde for en særlig form for tegnvisning. Ligesom "Anti-Aliasing" kan denne forbedre visningen af små skrifttyper.

3.1.7 Afrunding af taster

Ved hjælp af + (plus) og - (minus) knapperne kan du ændre "afrundingen" af tasterne. Dette har udelukkende indflydelse på udseendet, men ikke på tastaturets funktion.

3.1.8 Gennemsigtighed


Ved hjælp af + (plus) og - (minus) knapperne kan du ændre gennemsigtigheden, altså tastaturets transparens. Dette har udelukkende indflydelse på udseendet, men ikke på tastaturets funktion.



Skærmtastatur

3.2 Layout

Her kan du foretage indstillinger vedrørende tastaturlayoutet for **beKEY®**:

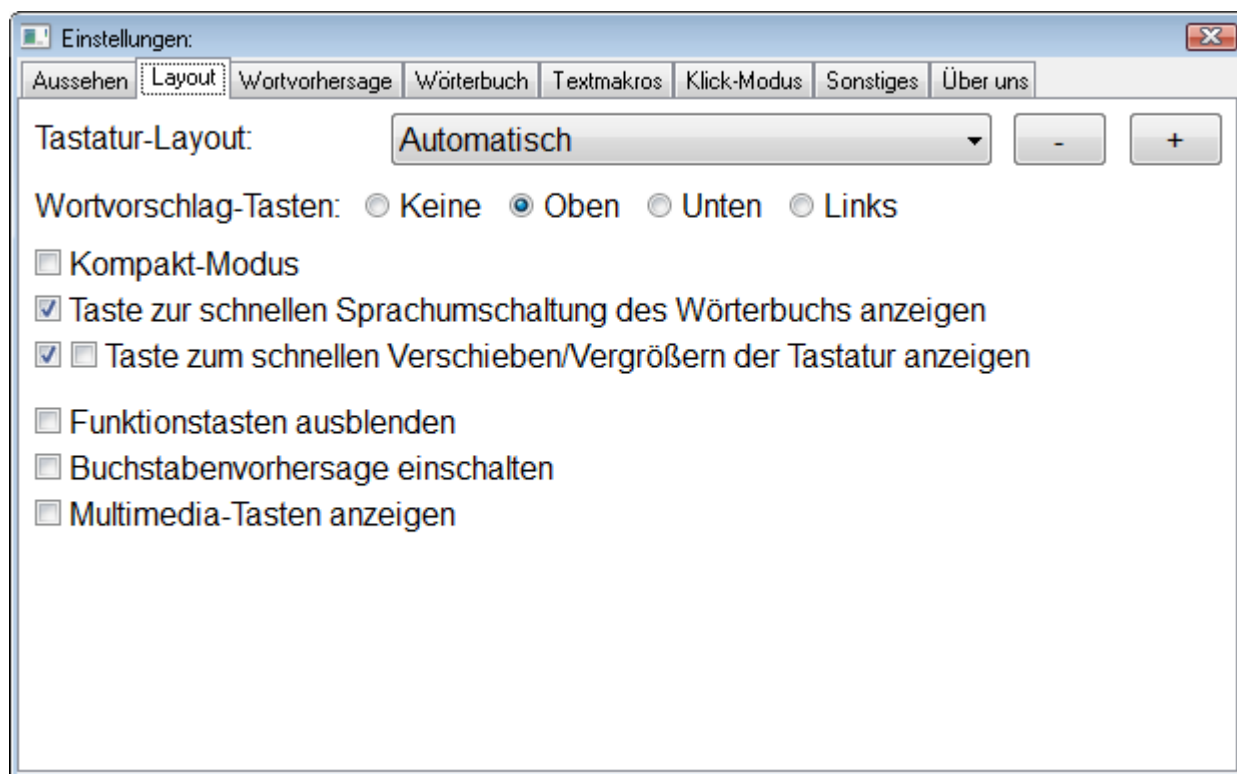

3.2.1 Tastatur-layout

Ved hjælp af valgmenuen eller + (plus) og - (minus) knapperne kan du ændre det anvendte tastatur-layout.

Her gælder det især at skelne mellem det tyske **QWERTZ** og det amerikansk **QWERTY** layout.

Ved layouts med tillægget **BLOKLAYOUT** i navnet er tasterne arrangeret i et rektangulært gitter og ikke, som ved et konventionelt tastatur, forskudt.

De layouts, der er markeret med "Automatisk", bruger automatisk det i operativsystemet indstillede tastaturlayout.

3.2.2 Position af ordforudsigelsestaster

Her fastlægger du, om de 10 ordforudsigelsestaster skal vises øverst på tastaturet, nederst på tastaturet, til venstre for det eller slet ikke.

3.2.3 Kompakt-tilstand

I kompakt-tilstand skjules den del af tastaturet, der normalt indeholder piletasterne eller det numeriske tastatur.

3.2.4 Tast til hurtig sprogskit

Her fastlægger du, om tasten til hurtig sprogskit skal vises.

3.2.5 Tast til hurtig flytning/forstørrelse af tastaturet

Her fastlægger du, om en tast til hurtig flytning/forstørrelse af tastaturet skal vises.

3.2.6 Vis vindue til gendannelse

Når denne kontakt er aktiv, vises ved minimering af beKEY® et lille vindue med beKEY®-logoet. Ved at klikke i dette vindue kan beKEY® vises igen.

3.2.7 Tænd for bogstavforudsigelsestaster

(Kun tilgængelig i **beKEY® deluxe SCAN** version)

Denne funktion kan kun tændes, når ordforudsigelsen ikke er slukket (se ovenfor)

Når du tænder for bogstavforudsigelsen, vises der under ordforudsigelsestasterne en yderligere række med taster, hvorpå de sandsynligvis næst benyttede bogstaver vises.

3.2.8 Skjul funktionstaster

Hermed kan du skjule funktionstaster. De øvrige taster vises da tilsvarende større.

De følgende funktioner er kun tilgængelige i beKEY® deluxe versionerne:

3.2.9 Vis specialtaster


Hermed bestemmer du, om **specialtasterne** skal vises.



Skærmtastatur

3.4 Ordforudsigelse

Her kan du ændre ordforudsigelsens funktionsmåde.

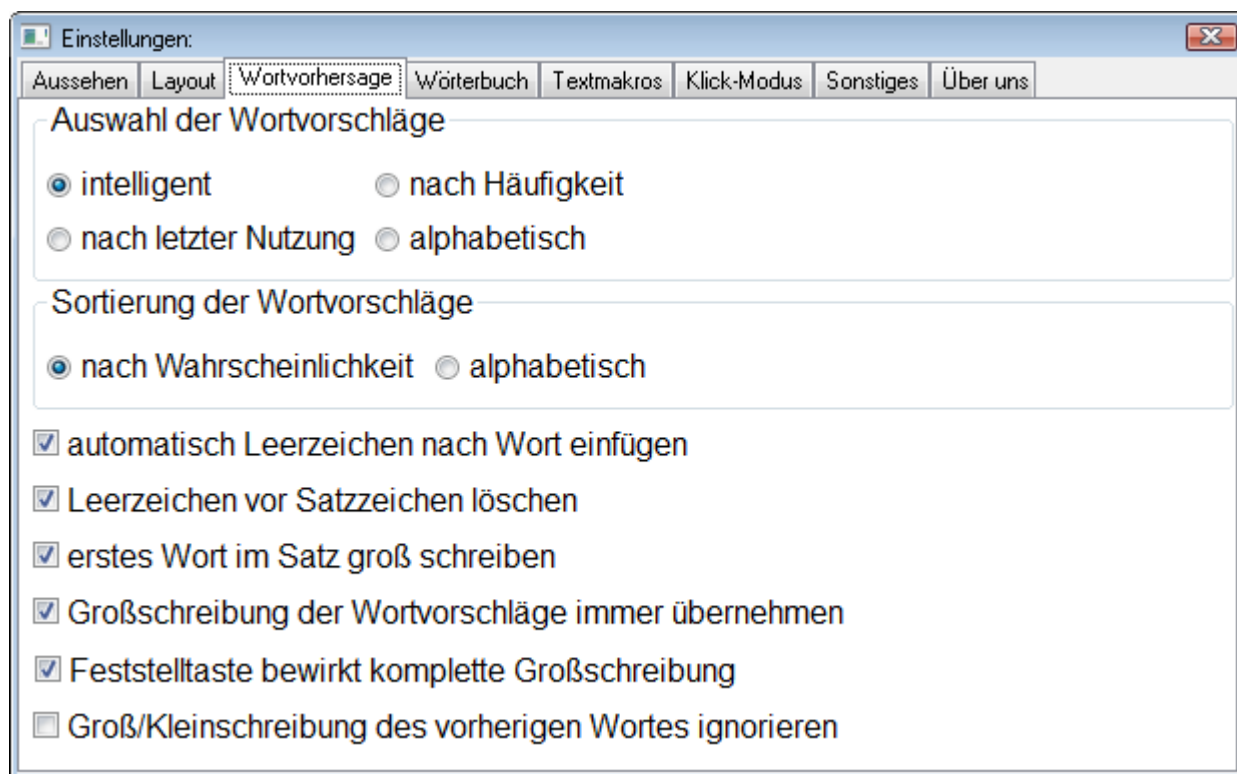

3.4.1 Udvælgelse af ordforslag

Her fastlægger du, efter hvilken metode ordene udvælges, som tilbydes dig i ordforudsigelsestasterne.

intelligent - Herved udvælges ordene efter en speciel, af os udviklet algoritme. Dette er under næsten alle betingelser den bedste indstilling. De andre indstillinger tilbydes egentlig kun af hensyn til fuldstændighed overhovedet.

efter hyppighed - Herved udvælges ordene efter, **hvor ofte** du har brugt dem i fortiden.

efter sidste brug - Herved udvælges ordene efter, **hvornår** du sidst har brugt dem.

alfabetisk - Herved udvælges ordene efter deres rækkefølge i alfabetet.

3.4.2 Sortering af ordforslag

Her fastlægger du, i hvilken rækkefølge de 10 ordforudsigelsestaster, der er udvalgt ved hjælp af den ved **Udvælgelse af ordforslag** indstillede metode, vises.

efter sandsynlighed - Herved sorteres ordene efter en sandsynlighed, der bestemmes i en af os udviklet algoritme. Først står altså det ord, der er mest sandsynligt. Denne er ligeledes under næsten alle betingelser den bedste indstilling og bør kun i enkelte tilfælde slukkes.

alfabetisk - Herved sorteres ordene efter deres rækkefølge i alfabetet.

3.4.3 indsæt automatisk mellemrum efter ord

Når denne indstilling er tændt, indsættes der automatisk et mellemrum efter hvert ord, du skriver ved hjælp af ordforudsigelsestasterne.

3.4.4 slet mellemrum før tegnsætning

Denne indstilling hænger sammen med den forannævnte, **indsæt automatisk mellemrum efter ord**.

Normalt er det fornuftigt at skrive et mellemrum efter hvert ord. I slutningen af en sætning, eller mere præcist, før et tegnsætningstegn er dette dog uønsket, da dette fordærver sætningsbilledet.

Når denne indstilling er tændt, fjernes mellemrum, der tidligere automatisk blev indsat, igen, hvis du umiddelbart derefter skriver et tegnsætningstegn.

Som tegnsætningstegn gælder: , (komma), . (punktum), ! (udråbstegn), ? (spørgsmålstegn), : (kolon) og ; (semikolon)

3.4.5 skriv første ord i sætning med stort

Når denne indstilling er tændt, skrives det første ord efter et sætningssluttegn automatisk med stort.

Som sætningssluttegn gælder: . (punktum), ! (udråbstegn), ? (spørgsmålstegn) og : (kolon)

3.4.6 overtag altid stor begyndelsesbogstav i ordforslag

Eksempel: Du skriver bogstaverne "dan" og som ordforslag vises "Danmark". Hvis denne indstilling er sat, slettes "dan" og erstattes med "Danmark". Ellers får du "danmark".

3.4.7 ignorer stor/lille begyndelsesbogstav i foregående ord


Eksempel: Du har skrevet ordet "flyve". Hvis denne indstilling er sat, foreslås også ord, som du ville have fået for ordet "Flyve".



Skærmtastatur

3.5 Ordbog

Her kan du redigere ordbøgerne.

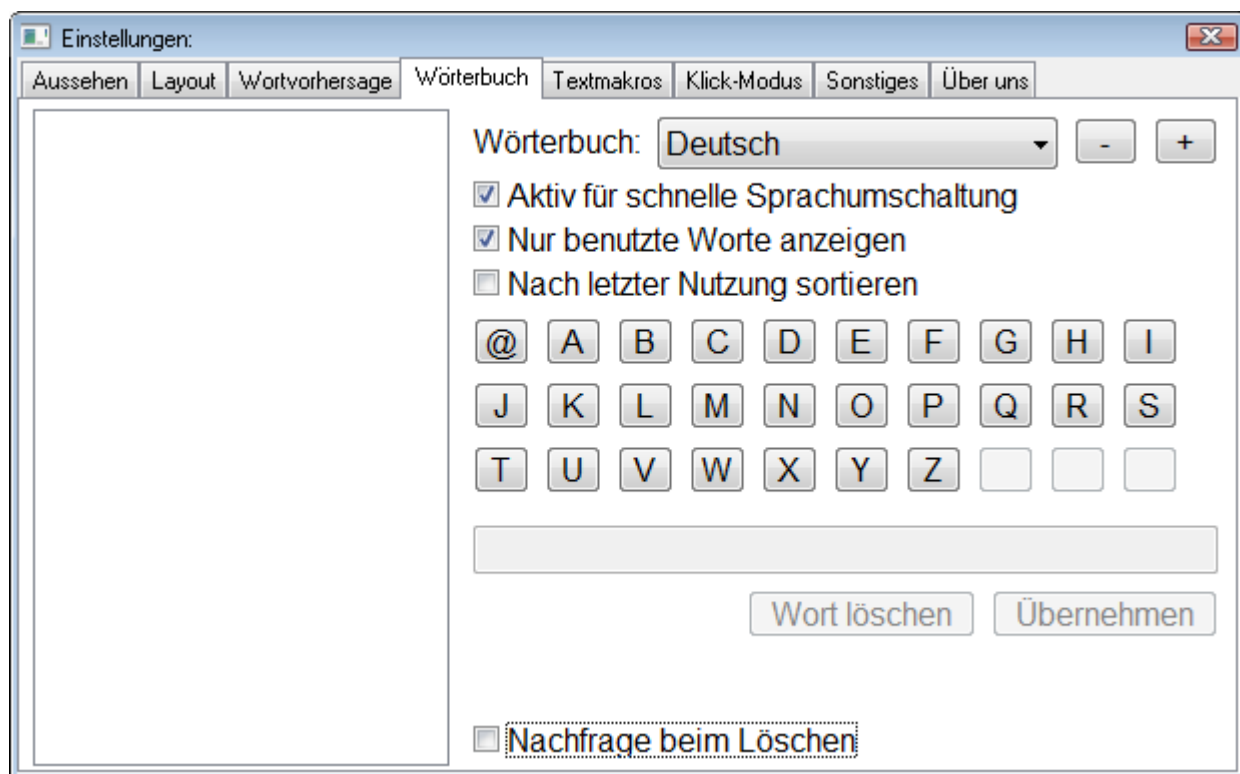

3.5.1 Aktiv for hurtig sprogsift

Når denne kontakt er aktiv, bruges den respektivt indstillede ordbog til hurtig sprogsift.

3.5.2 Vis kun brugte ord

Når du tænder for denne funktion, vises kun de ord fra ordbogen i listen, som du allerede engang har brugt. Normalt vises da væsentligt færre ord, så bladringen går lidt hurtigere.

3.5.3 Sorter efter sidste brug

Normalt sorteres ordene alfabetisk. Hvis denne indstilling er sat, vises sidst brugte ord først.

Taster @ til Z - Et klik på en af disse taster fastlægger, hvilke ord der vises i listen til venstre. @-tegnet står derved for alle ord, der **ikke** begynder med et bogstav, altså f.eks. tal.

Så snart du har udvalgt et ord fra listen ved klik, overtages ordet i tekstfeltet, så du kan redigere det. Ved klik på knappen **Overtag** overtages ændringerne.

Slet ord - det udvalgte ord slettes fra ordbogen.

Overtag ord - Det ændrede ord fra tekstinputfeltet overtages i ordbogen.


Forespørgsel ved sletning - Før sletningen af et ord vises en sikkerhedsforespørgsel.



Skærmtastatur

3.6 Tekstmakroer

Her kan du definere op til ti tekstblokke, som du kan kalde via ordforudsigelsestasterne. Det kan f.eks. være dit navn eller dit telefonnummer, men også længere flerlinjetekster som f.eks. din komplette adresse.

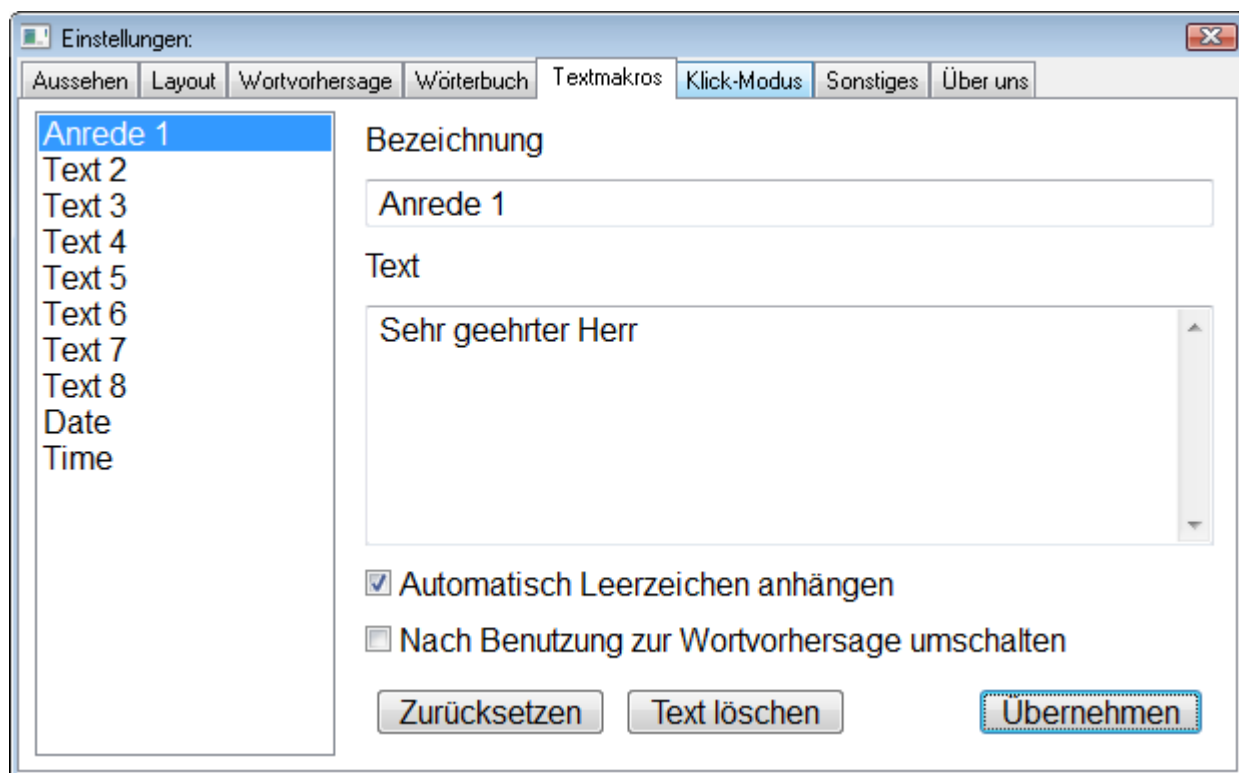

Betegnelse

Her indtaster du den tekst, der senere vises på den tilsvarende tast, f.eks. "Navn".

Tekst

Her indtaster du den tekst, der skrives, når du klikker på den tilsvarende tast.

Tilføj automatisk mellemrum

Hvis denne indstilling er sat, tilføjes der automatisk et mellemrum ved brug af tekstmakroen.

Skift til ordforudsigelse efter brug

Hvis denne indstilling er sat, skiftes der automatisk til ordforudsigelse efter brug af tekstmakroen.

Nulstil

Med denne kontakt kasserer du foretagne ændringer, og den oprindelige tekst gendannes.

Slet tekst

Med denne kontakt slettes den komplette tekst.

Overtag


Med denne kontakt overtager du ændringerne.



Skærmtastatur

3.7 Klik-tilstand

Her kan du fastlægge, i hvilken klik-tilstand **beKEY®** skal arbejde.

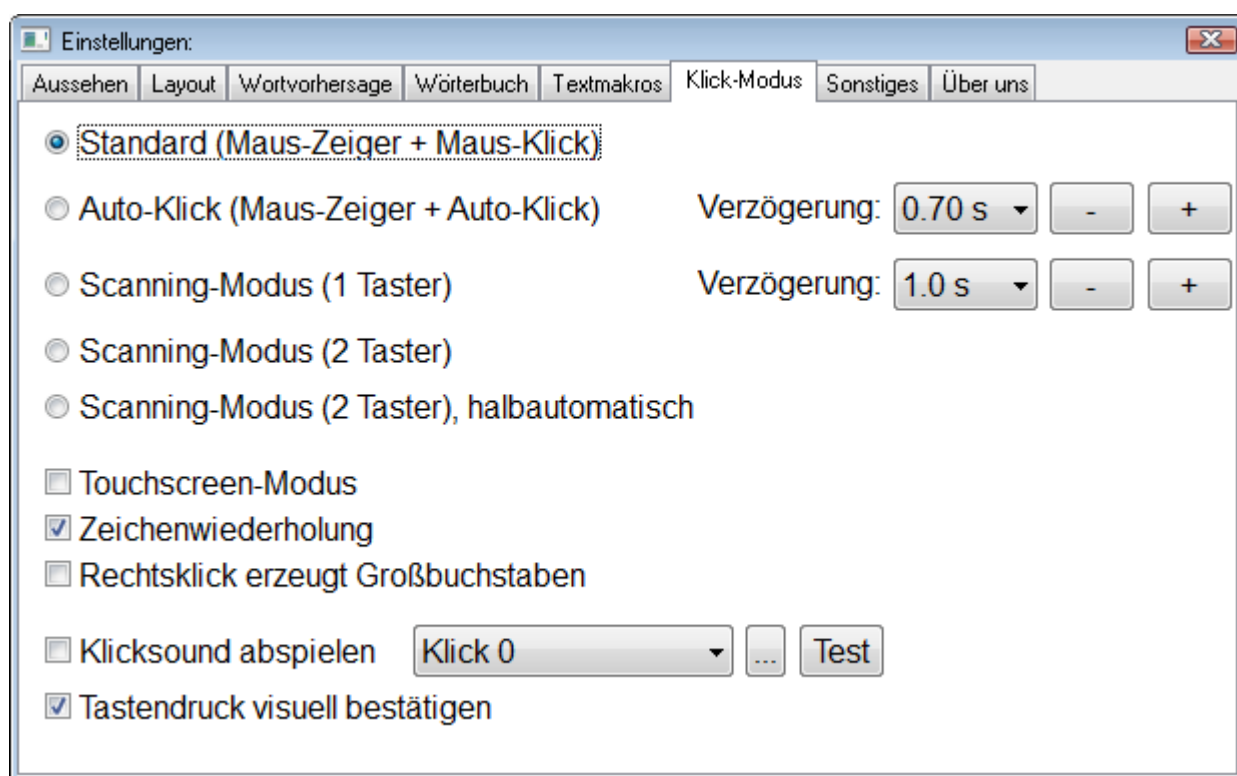

I **Standard-tilstand** udløses et tastetryk ved klik på venstre musetast. Museklikket kan også være et simuleret museklik, som det f.eks. er tilfældet ved øjenstyringer eller andre museemulatorer.

I **Auto-klik-tilstand** udløses et tastetryk automatisk, når musemarkøren forbliver en bestemt tid over en tast. Tidsintervallet kan bestemmes ved hjælp af valgmenuen eller + (plus) og - (minus) knapperne. Denne tilstand er også kendt under navnene **dvæletilstand** eller **Dwell mode**.

De følgende indstillinger er kun tilgængelige i versionen beKEY® deluxe SCAN!

I **Scanning tilstand (1 knap)** skiftes tasterne automatisk gruppe-/linjevis, og vel at mærke med den ved **Forsinkelse** indstillede hastighed. Et tryk på knap 1 udvælger den respektive gruppe/linje/tast.

I **Scanning tilstand (2 knapper)** skiftes tasterne gruppe-/linjevis ved tryk på knap 2. Et tryk på knap 1 udvælger den respektive gruppe/linje/tast.

I **Scanning tilstand (2 knapper) halvautomatisk** skiftes tasterne gruppe-/linjevis ved tryk på knap 2. Forbliver knappen trykket ned, skiftes der kontinuerligt videre. Et tryk på knap 1 udvælger

den respektive gruppe/linje/tast.

Tegngentagelse

Når denne kontakt er aktiv, udsendes der så længe bogstaver, som du holder den tilsvarende tast nede.

Højreklik genererer stort bogstav

Når denne kontakt er aktiv, genereres der automatisk et stort bogstav, når du højreklikker på en tast.

Afspil klik-lyd

Her fastlægger du, om der skal afspilles en lyd ved hvert tastetryk. Et klik på [...] tasten åbner en filvalgboks, hvori du kan vælge lydfilen. Denne skal foreligge i WAV-format.

Med **Test** kan du teste funktionen.


Bekræft tastetryk visuelt

Hvis denne indstilling er sat, vises der efter tryk på hver tast i et kort øjeblik en større ramme om tasten. Dette er især nyttigt på touchscreens, da man derved lettere kan se, om man har ramt den rigtige tast.



Skærmtastatur

3.8 Diverse

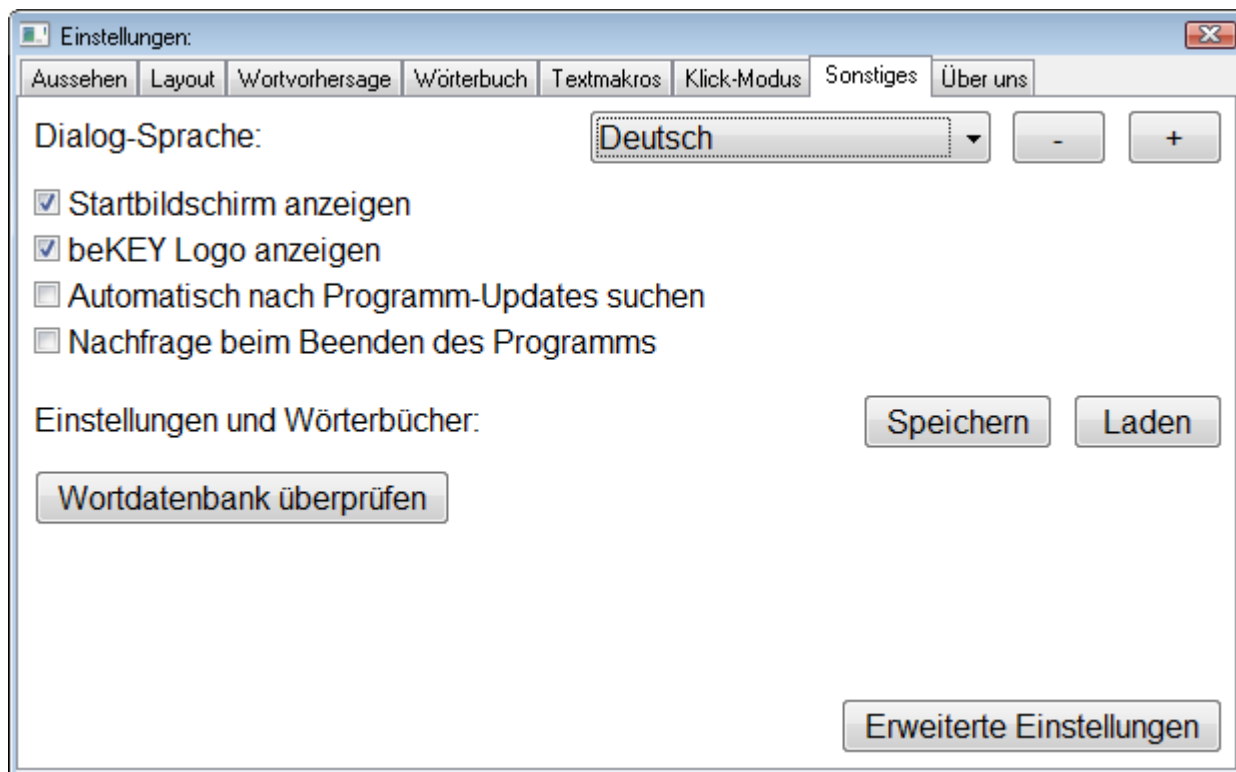

Dialogsprog

Denne indstilling skifter både sproget for programmet, altså dialoger, meddelelser osv.

Ændringer af sprogindstillingen bliver først synlige efter genstart af programmet.

Touchscreen tilstand

Når du tænder for touchscreen tilstand, opfører **beKEY®** sig anderledes i to henseender:

- 1) Logikken ved flytning af tastaturet med FLYT-tasterne er omvendt. (se [her](#).)
- 2) Tasterne ændrer ikke deres udseende, når musemarkøren er over dem ("fremhævelse"). Ved betjening med en touchscreen ville det føre til, at tasten stadig fremstår som aktiv, også efter at pennen hhv. fingeren allerede har forladt touchscrenen.

Vis startskærm

Her kan du indstille, om startskærmen skal vises ved start af **beKEY®**. Dog har denne indstilling kun betydning ved en fuldversion, i testversionen vises startskærmen altid.

Vis beKEY® logo

Her kan du indstille, om **beKEY® logoet** skal vises. Dog har denne indstilling kun betydning ved en fuldversion, i testversionen vises logoet altid.

Søg automatisk efter programopdateringer

Er denne indstilling aktiv, søger **beKEY®** ved programstart på vores server efter en ny programversion. Hvis en ny programversion skulle være tilgængelig, vil programmet afgive en tilsvarende meddelelse.

Forespørgsel ved afslutning af programmet

Er denne indstilling aktiv, fremkommer der ved afslutning af programmet en forespørgsel, om

programmet virkelig skal afsluttes. Dette skal forhindre utilsigtet lukning af programmet.

Start beKEY® ved brugerlogin

Er denne indstilling aktiv, starter beKEY® allerede ved Windows®-loginskærmen, så du kan bruge beKEY® til at indtaste dit brugernavn og adgangskode. Der er funktionaliteten begrænset, bl.a. er ordforudsigelsen ikke aktiv, og vinduets størrelse kan ikke ændres.

Denne funktion er kun tilgængelig under Windows® 2000 og XP.

Indlæs og gem indstillinger og ordbøger

Med disse kontakter kan du gemme hhv. indlæse de aktuelle indstillinger og ordbøger. Dette tjener f.eks. til datasikring af din ordbog eller til at overføre dataene til en ny computer. Begge funktioner (indlæsning og gemning) kræver, at beKEY® genstartes.

Især ved gemning kan det tage nogle sekunder, indtil alle ordbøger er gemt. I denne tid ser du ingen aktivitet på skærmen.

Som dataformat bruges et normalt Zip-arkiv.

Kontroller orddatabase

Funktion til at kontrollere og reparere orddatabasen.

Nogle gange dukkede der flere gange det samme ord op i ordbogen, og de overflødige poster kunne ikke slettes. Hvordan problemet opstod, er endnu uklart. Med reparationsfunktionen skulle de fejlagtige ord dog kunne slettes fra databasen.

Det anbefales i hvert fald at lave en backup forinden.

Avancerede indstillinger

Med denne kontakt åbner du vinduet for sjældent brugte **indstillinger**.



Skærmtastatur

3.9 Information




Her finder du information om programmet, versionsnummeret, dit serienummer og et link til vores hjemmeside. Angiv venligst altid dit versionsnummer og - hvis det foreligger - dit serienummer ved supporthenvendelser.

Hvis du bruger 30-dages testversionen, fremkommer der også en tekst **Indlæs registreringsfil**. Når du klikker derpå, kan du indlæse en registreringsfil, der findes på program-cd'en, eller som du har fået af os per e-mail.

beKEY®

Skærmtastatur

3.10 Avancerede indstillinger

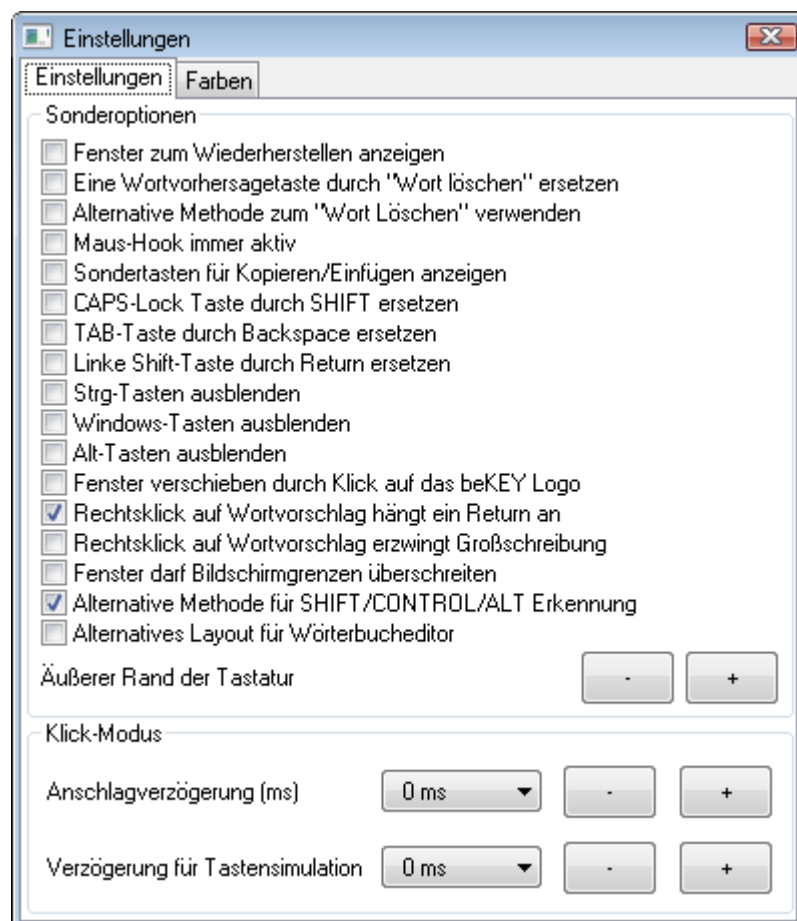

Da vinduet for programindstillingerne allerede var meget overbelastet, er nogle sjældent brugte indstillinger blevet udskilt til et nyt vindue. De fleste indstillinger burde være selvforklarende ved deres beskriftning. For nogle andre her en kort forklaring:

Vis vindue til gendannelse

Når beKEY® minimeres via  symbolet, fremkommer der et nyt, lille vindue med beKEY® logoet, hvormed du kan vise hovedvinduet igen.

Brug alternativ metode til sletning af ord

Når du klikker på "Slet ord"-tasten i beKEY®, genereres der normalt lige så mange "Backspace" tastetryk, som det foregående ord har bogstaver. Dog husker beKEY® kun det respektive sidste ord, så denne funktion kun fungerer én gang.

Hvis denne indstilling er aktiv, genereres der i stedet tastekombinationen "CTRL + Backspace". Dette sletter i de fleste teksteditorer og tekstbehandlingsprogrammer det sidste ord.

Mus-hook altid aktiv

En nøjagtig forklaring af denne indstilling ville være meget teknisk. Derfor kun så meget: Hvis du bruger software, der ikke kan betjenes korrekt med beKEY®, f.eks. menuer lader sig ikke folde ud, softwaren mister inputfokus eller lignende, bør du prøve med denne indstilling.

Vis specialtaster for kopiering og indsættelse

Med denne indstilling vises der ved siden af "pil op"-tasten endnu to taster for "CTRL-C" og "CTRL-V", som du kan bruge til at kopiere og indsætte. Dette fungerer ikke ved alle

tastaturlayouts.

Vindue må overstige skærmgrænser

Normalt kontrollerer beKEY® ved forstørring og flytning konstant vinduesposition og forhindrer, at vinduet - også delvist - forlader skærmen. Med denne indstilling kan du slukke for denne kontrol. Hvis vinduet helt eller delvist befinder sig uden for skærmen, fremkommer der i processkuffe-menu'en en ny indstilling, "Kontroller vinduesposition". Dermed vises vinduet komplet igen.

Alternativt layout for ordbogseditor

I tidligere beKEY®-versioner fandtes der i ordbogsreditoren tre taster, hvormed man hurtigt kunne ændre stor/lille begyndelsesbogstav i et ord. Af pladsmangel blev disse fjernet i en senere version. Med denne indstilling vises disse taster igen i ordbogsreditoren. Denne ændring bliver først synlig efter en genstart af programmet.

Anslagsforsinkelse

Hvis du f.eks. indstiller 500ms (et halvt sekund), ignoreres der flergangskliks på samme tast i dette tidsrum. Med denne indstilling kan utilsigtede tastetryk forhindres.

Forsinkelse for testesimulation

Når du i beKEY® aktiverer en ordforudsigelsestast eller makrotast, sender beKEY® tastetrykkene for den respektive lagrede tekst til det aktuelle program. Hvis dette "sluger" taster, altså hvis nogle tegn mangler, kan du her indstille en forsinkelse. I de fleste tilfælde er en forsinkelse på "1 ms" allerede tilstrækkelig til at afhjælpe problemet.