


BRUGSANVISNING FOR

lægetaburet **KLINIK 1** (HMI-nr. 25198)

og **KLINIK 2** (HMI-nr. 25199)

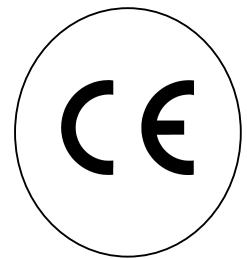

HØJDEINDSTILLING AF SÆDE:

- Placér Dem i siddestilling på taburetten.
- Grib fat om gasfjederens udløserarm (A), som sidder lige under det polstrede sæde (B).
- Træk opad i udløserarmen - hermed udløses låsen på gasfjederen.
- Ønsker De sædehøjden øget, let presset af Deres vægt på sædet, indtil den ønskede sædehøjde nås. Slip derefter udløserarmen.
- Ønsker De sædehøjden reduceret, skal De øge presset af Deres vægt på sædet, indtil den ønskede sædehøjde nås. Slip derefter udløserarmen.

INDSTILLING AF RYGLÆN (kun på KLINIK 2):

- Når De har indstillet sædehøjden, indstilles "sædedybden" (=afstanden til ryglænspolstringen (E)) ved at løsne fingerskruen (C) bag på ryglænsstøtten. Skub eller træk ryglænspolstringen, indtil den ønskede position. Spænd derefter fingerskruen igen.
- Ryglænet indstilles i højden ved først at løsne fingerskruen (D), som er placeret ud for sædet lige under ryglænsstøtten. Sæt ryglænsstøtten i den ønskede højde, og spænd fingerskruen igen.

VEDLIGEHOJDELSE:

- ** Eftersø jævnligt gasfjeder, sæde, ryglæn samt deres fastspænding.
- ** Hjulene efterspændes regelmæssigt og holdes fri af hår for at bevare deres maksimale køreevne. Udskift slidte eller ødelagte dele:
HELLERE ÉN GANG FOR MEGET END ÉN FOR LIDT !
- ** Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler.

Vi – dan-rehab a/s, Messingvej 13-15, DK-8900 Randers – erklærer på eget ansvar, at **KLINIK 1** og **KLINIK 2** er i overensstemmelse med European Standard EN 1441 (1997) i henhold til bestemmelserne i EU Direktiv 93/42 EEC.

www.danrehab.dk
tel. 8644 7355

KLINIK 1 (med ryglæn)

og

Klinik 2 (uden ryglæn)



Taburetterne er forsynet med fem 75 mm hjul, hvoraf ét er med bremse.

Skai-betræk i farverne sort eller lysgrå. Der kan leveres i andre farver mod et mindre pristillæg.



Messingvej 13-15 • DK-8900 Randers

Tlf. 8644 7355 • Fax 8644 7770

www.danrehab.dk • E-mail: info@danrehab.dk