


Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

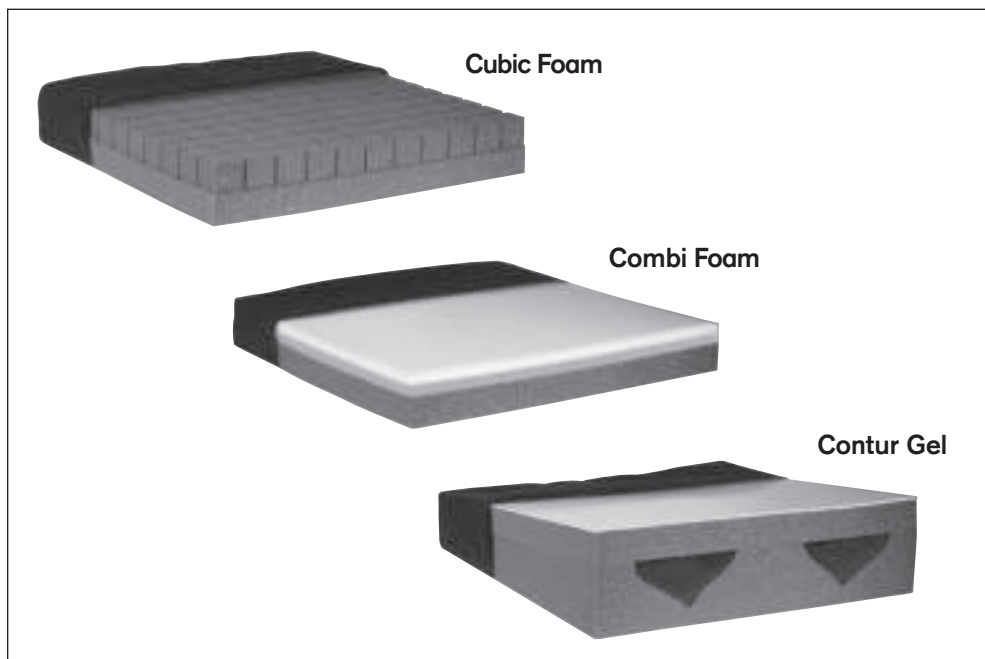

Cubic Foam 476C00=SK100 / **Combi Foam** 476C00=SK200 /

Contur Gel 476C00=SK300

Ⓚ **Betjeningsvejledning**

Anvendelsesformål

Kørestol-hynderne Cubic Foam, Combi Foam og Contur Gel er udelukkende til decubitusprofylakse og decubitusterapi ved brug af en kørestol.

CE-overensstemmelse

Produktet opfylder kravene i direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Produktet er klassificeret i klasse I på baggrund af klassificeringskriterierne som gælder for medicinsk udstyr i henhold til direktiv bilag IX. Derfor har Otto Bock som producent og eneansvarlig udarbejdet overensstemmelseserklæringen ifølge direktivets bilag VII.

Sikkerhedstips



Hynder må kun udvælges og tilpasses af specielt uddannet personale!



Isætningen af en hynde i en kørestol forskyder kørestolens tyngdepunkt, hvorved kørestolen evt. kan vippe tilbage og forårsage personskade. Kontroller derfor i hvert tilfælde, om kørestolen skal udstyres med en vippebeskyttelse eller en indstillelig akselholder til forbedring af stabiliteten, som også bruges til benamputerede personer. Alle Otto Bock Health Care-hynder er udviklet til formindskelse af liggesår. Ganske vist kan ingen hynde helt udelukke sædetryk eller liggesår. Otto Bock Health Care-hynder kan ikke erstatte omhyggelig pleje af huden, især ikke sund ernæring, hygiejne og regelmæssig tryklindring.



Før langvarig brug bør hver hynde yderligere afprøves nogle timer under medicinsk opsyn, hvorved det skal sikres, at der ikke opstår hudirritation. Kontroller huden regelmæssigt med hensyn til røde steder. Rød farve af huden er en klinisk indikation for vævskader. Hvis der opstår røde steder på huden, skal brugen af hynden standses omgående og en læge eller terapeut skal konsulteres.



Hynden må ikke komme i kontakt med skarpe genstande og bør ikke udsættes for høj varme eller åben ild.



Hold under daglig brug øje med hyndens korrekte position i kørestolen, henholdsvis den korrekte montering af betrækket, hvis det blev fjernet.



Hyndens lynlås bør være på siden henholdsvis bagsiden.



Den påsyede dyffelstribbe tjener til hyndens fiksering i kørestolen og bør vende mod betrækket.

Hyndens retning:

Cubic Foam: Terningstrukturen er øverst.

Combi Foam: Det hvide, bløde skumgummilag er øverst.

Contur Gel: Technogel®-laget er øverst, den lave siddeflade bagest og den tykke siddeflade øverst (sidderampe).

Beskrivelse

Cubic Foam

Kørestol-hynden Cubic Foam hjælper med til en bedre fordeling af trykket på grund af dets ternede struktur. Især forskydningskraften, som opstår ved normale skum-hynder, reduceres på grund af terningstrukturen. Terningstrukturen støtter luftcirkulationen og forbedrer således sædeklimaet.

Combi Foam

Combi Foam-hynden består af en kombination i 3 lag:

- *Bæreskumgummi (grå)*: optager effektivt brugerens vægt.
- *Relax-skumgummi (rosa)*: gennem et ringe tilbagetryk udsættes fremtrædende kropsdele (f.eks. sædebensspids) for mindre trykkræft.
- *Afslutningsskumgummi (hvid)*: dette relativt bløde skumgummi øger siddekomforten og bidrager til en større kontaktflade mellem bruger og hynde.

Contur Gel

Kørestol-hynden Contur Gel består af formskumsforbindelse i 2 lag med et afsluttende lag af Technogel®.

Gennem de udkårne benunderlag bliver låret inddraget i den effektive trykfordeling. Den indarbejdede sidderampe forbedrer positioneringen og reducerer faren for „rutschen fremad“ i kørestolen. Skumgummi-mellemlaget udvider holdefladerne og virker desuden trykreducerende. Det afsluttende Technogel®-lag formindsker forskydningskraften.

Pleje

Hele hynden kan vaskes i skåneprogrammet på 40 °C med et mildt og miljøvenligt vaskemiddel. Betrækket bør vaskes separat. Brug ikke blegemiddel! Tør ikke i tørretumbler!

Ansvar

Producentens garanti gælder kun, hvis produktet er blevet anvendt under de angivne forhold og til de påtænkte formål. Producenten anbefaler, at produktet anvendes og vedligeholdes i henhold til anvisningerne.

Hersteller/Manufacturer:

Otto Bock HealthCare GmbH

Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt/Germany

National: Telefon 05527 848-1461/1462/1463 · Fax 05527 848-1460

International: Phone +49 5527 848-1304/1562/1590/1594/3663 · Fax +49 5527 848-1676

e-mail: reha@ottobock.de · Internet: www.ottobock.com

Versandanschrift für Rücksendungen / Address for Returns

Otto Bock HealthCare GmbH

Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany

