



COBI REHAB®
The Positioning Company

Lasal lejringspuder

Bruges til

- Neurologisk skadede brugere
- Brugere i palliative forløb
- Immobiler brugere
- Smertepatienter

Brugsanvisning



Lasal Trekantpude
Lasal Nakkepude
Lasal T-pude
Lasal Halvmånepude




ADVARSEL

Puderne må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale, eller af personale, der har fået instruktion i brugen af puderne. Forkert lejring kan medføre skader på brugeren.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af produktet.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug ALDRIG egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, som opstår efter reparationer, der er lavet uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

 Brugsanvisningen skal læses grundigt før Lasal lejringspuder tages i brug.

Ret opmærksomheden mod Advarsler og Sikkerhedsvejledninger mærket med .

SIKKERHEDS-VEJLEDNINGER

- Undgå skarpe og ru genstande mod puderne
- Undgå at få klemt puderne i fx sengehesten eller ved hjulene og andre dele på kørestolen
- Brug ikke puder, der er gået i stykker
- Brug ikke Lasal lejringspuder i nærheden af brandkilder eller varme overflader
- Brug ikke puderne sammen med varmetæpper, da det kan føre til overophedning af brugeren
- Placér ikke computer eller andet elektronisk udstyr på lejringspuderne. Det kan føre til overophedning og antændelse af det elektroniske udstyr.

Specifikationer

Kuglemateriale	Ekspanderet polystyren. Flammehæmmet.
Inderpude	PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug- og svamperesistent.
Yderbetræk	100 % Öko-Tex bomuld. Betrækket er anti-bakterielt behandlet. Ej flammehæmmet.
Rengøring	Bomuldsbetrækket er vaskbart. Puderne kan vaskes med almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.
Bortskaffelse	Puderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald (brandbart affald).
ISO-klassifikation	09 07 06 - 02
CE	93/42/EEC 1993

Anvendelse

Lasal lejringspuder bruges af børn og voksne som støtte og aflastning i liggende eller siddende stilling i fx sengen, kørestolen, sofaen eller på gulvet.

Pudernes formbarhed giver lejringspuden en større overflade, hvilket gør det både komfortabelt og aflastende for brugeren. Pudernes tætte berøring ind mod kroppen giver en følelse af ro og tryghed, og det er nemt at ændre på pudernes form undervejs.

Bemærk, at Lasal lejringspuder ikke er et antidecubitus produkt, trods den høje komfort og trykfordeling.

Beskrivelse af

Lasal lejringspuder findes i en bred vifte af faconer og størrelser. Kombinationen af de små polystyrenkugler i en fleksibel inderpude betrukket med et yderbetræk i bomuld gør, at puderne former sig individuelt efter brugeren og underlaget. Lasal lejringspuder er formbare og glider derfor ikke, som en almindelig pude kan gøre.

Yderbetrækket findes i forskellige farver, hvis man ønsker at gøre brug af farvekoden i selve lejringspuden.

T-pude

T-puden bruges som abduktionspude mellem benene eller som generel støtte til underbenene. T-puden bruges også til mavelejring, hvor puden løfter personen op i en tilpas højde fra underlaget, hvilket øger bevægelsesfriheden.

Trekantpude

Trekantpuden er en forholdsvis fast pude, der bruges som stabilisator langs kroppen i siddende eller liggende stilling eller som fyld i sengen. Afhængigt af størrelsen kan Trekantpuden også bruges som støtte under knæene, langs underbenene eller under fødderne.



Lasal T-puder

Halvmånepude

Halvmånepuden bruges som støtte under arm og hånd eller i svangen i siddende og liggende stilling. Halvmånepuden bruges også som trykafledning mellem knæ og fødder.

Nakkepude

Nakkepuden sidder tæt ind til halsen hele vejen rundt. Den støtter og stabiliserer hoved- og nakke-region i halvt siddende stilling. Puden er formbar, og fyldet kan masseres hen, hvor der er behov for det. Betrækket kan bestilles med lukning med gribebånd for helt tæt lukning mod halsen.

Lasal Trekantpude



Lasal Nakkepuder



Lasal Halvmånepuder

Vedligeholdelse og rengøring

Udover almindelig rengøring kræver Lasal lejringspuder ingen særlig vedligeholdelse. Puderne skal opbevares tørt og ved almindelig rumtemperatur. Undgå, at puderne kommer i berøring med ru overflader samt skarpe og spidse genstande. Undgå at efterlade puderne i direkte sollys over længere tid.

Yderbetrækket kan vaskes på 60° C. Bemærk, at farven på yderbetrækket falmer med tiden. Vask kulørte betræk separat. Yderbetræk tørretumbles ved lav temperatur og krymper ca. 5 %.

Inderpuden aftørres med vand tilsat rengøringsmiddel, klor-engangsklude (max. 1000 ppm) eller sprit. Inderpuden må ikke maskinvaskes, da polystyrenkuglerne smelter ved temperaturer over 71° C. Varmeelementerne i en vaske-maskine eller tørretumbler kan tage skade af af komme i kontakt med polystyrenkugler.

PH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel bør ikke være højere end 11,4. Undgå skyllemidler og andre tilsætningsstoffer, som indeholder opløsningsmidler.

Garanti

Garanti-perioden for Lasal lejringspuder er et år fra købsdato. Fakturaen gælder som garantibevis.

Lasal lejringspuder, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse eller har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader udover normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Enhver uautoriseret reparation af produktet samt manipulation af komponenterne vil ugyldiggøre garantien.



PRODUCENT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

06/2019/CP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com