



Betjeningsvejledning Bellman Ringer (DK)



Bellman Ringer er en telefonklokke, der hjælper dig med at høre dit telefonsignal i hjemmet eller på arbejdspladsen. Den alarmerer tydeligt med forstærket lyd- og lyssignal, når telefonen ringer.

Sådan gør du:

1. Åbn batteridækslet og isæt 4 stk. 1,5 V Alkaline batterier type LR6 (AA). Skru batteridækslet fast med den lille skrue, som sidder på batteridækslet.
2. Sæt den ene ende af den medfølgende telefonledning i Bellman Ringers telefontilslutning i bunden af klokken.
3. Tilslut den anden ende af ledningen i telefonvægstikket. Hvis der sidder telefonstikprop i forvejen udtages den/disse og stikket fra Bellman Ringer sættes i. Herefter isættes de udtagne stik.
4. Justér styrken, tonehøjden og ringesignalhastigheden, så det passer dig bedst.

Batterier

Bellman Ringer drives af 4 stk. 1,5 V Alkaline batterier (type LR6) som isættes under batteridækslet på bagsiden af apparatet. Batterierne holder i 2-3 år.

Indstillingsmuligheder

På forsiden af Bellman Ringer findes tre skydereguleringer.

Styrkekontrol - justerer lydstyrken på ringesignalet mellem 0 – 95 dB SPL / 1 meter.

Tonekontrol - markeret "C, D, E, F," hvor "C" er den mørkeste tone, og "F" er den lyseste.

Ringesignalhastighed - ændrer antallet af ringesignaler pr. sekund.

Lydsignalet kan kobles til og fra ved hjælp af den røde trekantede knap på Bellman Ringers forside.

Lyssignal

På forsiden af Bellman Ringer er en lampe, som blinker, når telefonen ringer.

Øvrigt



Udendørsklokke kan tilsluttes Bellman Ringer.

* Bemærk: Hvis ekstern højttaler eller udendørs klokke tilsluttes højttalerudgangen, skal den tilsluttede enhed opfylde sikkerhedskravene i EN60 950.

Advarsel! Tag altid Bellman Ringer fra telefonnettet, inden der udføres service eller batteriskift.

Produktbeskrivelse

- 1) Indikatorlampe
- 2) Lydsignal til/fra
- 3) Styrkekontrol
- 4) Tonehøjdekontrol
- 5) Ringesignalhastighed
- 6) Vægophæng
- 7) Batteridæksel
- 8) Højttalerudgang*
- 9) Telefontilslutning

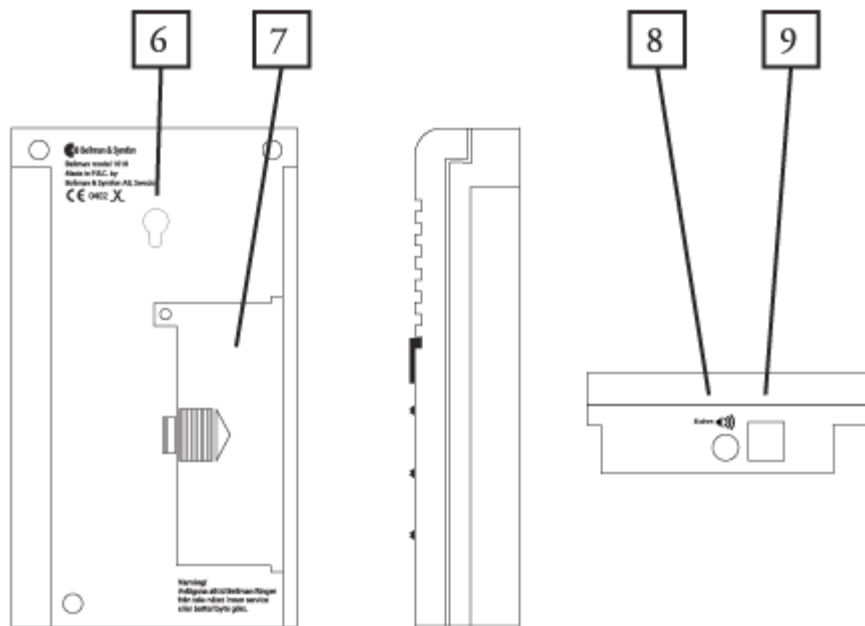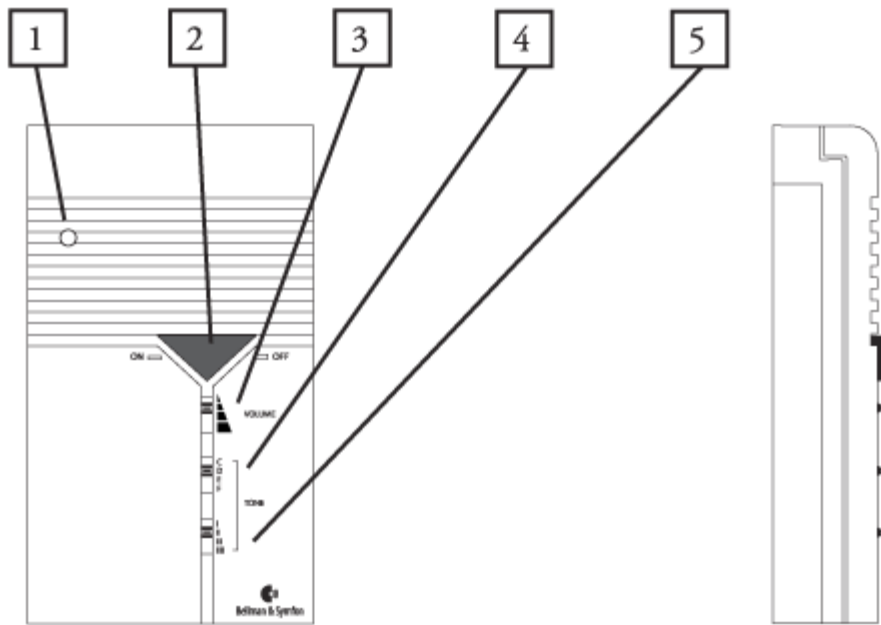

Address:
Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30,
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweden

Our office hours are:
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30

Telephone: +46 31 682820
Fax: +46 31 682890
Homepage: www.bellman.com
Sending us company e-mail: info@bellman.symfon.se