

Brugsanvisning for Progeo



Indhold:


A	-	Beskrivelse af de enkelte dele
B	-	Betjeningsvejledning
C	-	Indstillingsmuligheder
D	-	Tilbehør
E	-	Vedligeholdelse
F	-	Tekniske data
G	-	Garanti

1. Opspændelig stropryg
2. Justerbart rygrør (1,5 cm)
 - kort, justerbar fra 30 til 42 cm
 - lang, justerbar fra 42 til 54 cm
3. Tøjbeskytter/sideskjold
 - flere modeller
4. Beslag til tøjbeskytter/sideskjold
5. Sæde med velcro bånd til pu
6. forreste del af kørestolsramm
7. Justerbar lægstrop
8. Fodhviler ramme, kort eller l højdejusterbar via huller pr. l
9. Dæk kun 24"
 - Højtryksdæk – primo
 - Højtryksdæk – profil
 - Flexel
 - Continental
 - Kik air
 - Kik mako
 - Kik dækfarve: sort, grå, rød
10. Håndring
 - Aluminium anodiseret
 - Titanium
 - Ultra Grip
 - Max Grip
 - Dual Grip
 - Quad


Exelle og Maxt



Exelle Junior

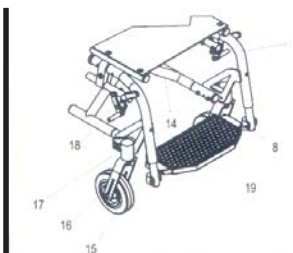

Exelle Vario

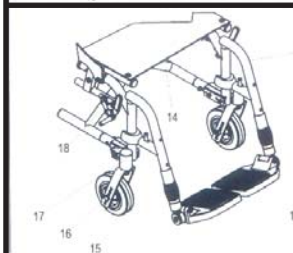

11. Quick release
12. Monterings plade for drivhjul
13. Bagerste stelramme
14. Kryds
15. Forhjul
 - 3" Sport
 - 4" Soft
 - 5" Softroll
 - 6" Flexel
 - 6" Luft
 - 7" Luft
16. Forgaffel
17. Forgaffel ophæng
18. Bremses
 - Lige håndtag
 - Aftagelige forlænger
 - Sportsbremse – under sædet
 - Ledsager bremse
19. Fodhviler
 - Hel fodplade
 - (vinkel og dybdejusterbar)
 - Fodplade position:
 - 2/3 indvendig
 - Helt indvendig
 - Helt udvendig


Brugen:

Unikt design, letkørt og store valgmuligheder til at give personligt præg, karakteriserer **Exelle, Exelle Vario, Exelle Junior** samt **Max T**.

Alle disse modeller er sammenklappelige og med præcisionskryds som giver en fantastisk stiv og fast ramme. Hver model har mulighed for særlige og personlige løsninger og er utrolige letkørende og vægtlette.

De store tilvalgsmuligheder gør kørestolene meget alsidige og anvendelige for såvel indendørs som udendørs brug.

Max stigning 6% Max brugervægt: 120 kg.

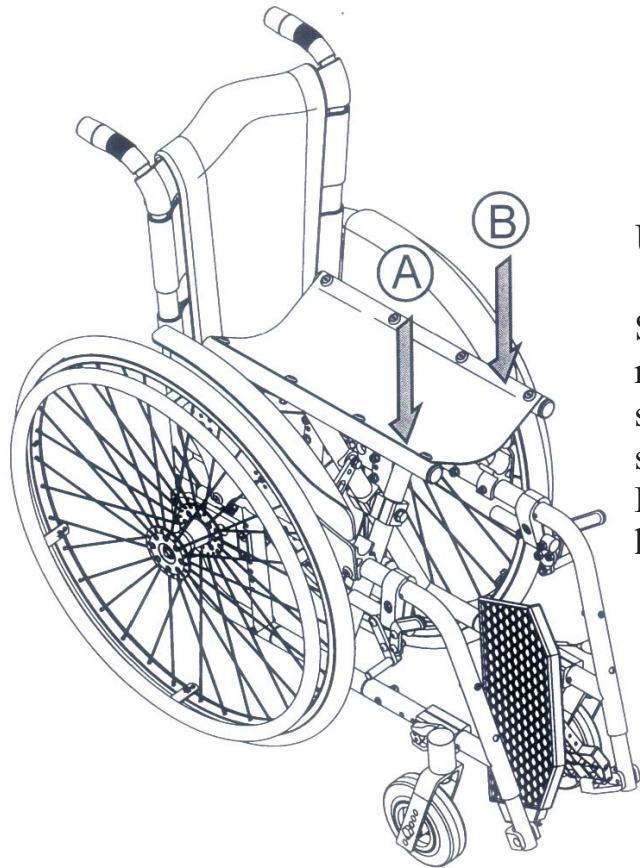



Udfoldning af stol:

Sæt dine hænder på hvert sit sæderør – se A og B på tegningen – og tryk herefter på rørene ned mod jorden. **Pas på ikke at få fingrene i klemme.** Hold fingrene ind mod sædemidten mens du presser ned. Det går lidt lettere hvis du løfter det ene baghjul lidt, så gulvet ikke kan blokere udfoldningen. Vær opmærksom på om stolen er helt udslået. Pres evt. en ekstra gang på sædet. Herefter vippes fodpladen ned og sættes fast (hvis helfodplade). Ved individuelle fodplader vippes de ”bare” ned.

Sammenfoldning af stolen:

Fjern puder (sæde/ryg) o.l. fra stolen. Klap fodhvileren op til den ene side. (ikke nødvendigt ved automatisk opklappelig fodhviler)

Hiv nu i sædestykket – se C og D på tegningen – og stolen vil klappe sig sammen.

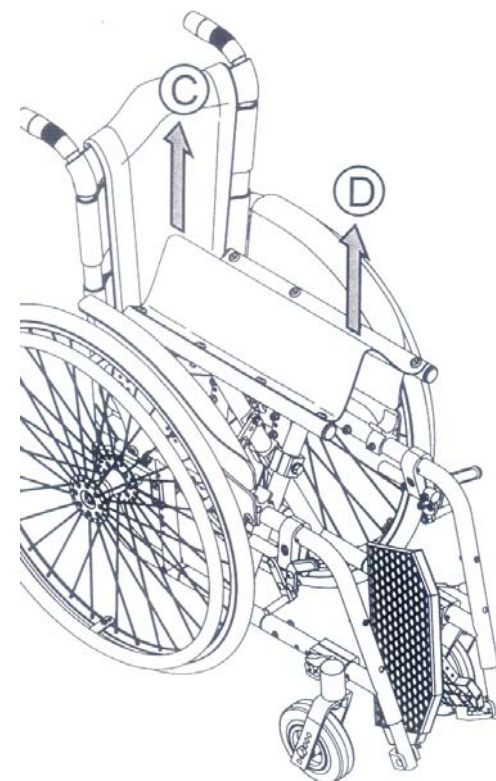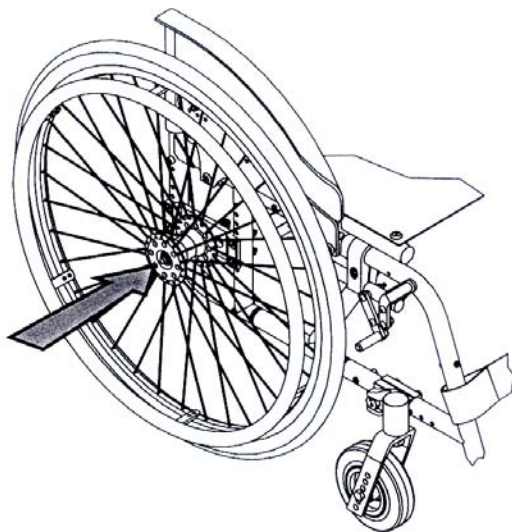


Quick release på baghjulene:

Via denne funktion kan du let og hurtigt tage baghjulene af. Dette gør bl.a. at du kvikt kan gøre stolen mindre bebyrdende i forbindelse med f.eks. transport.

For at kunne tage hjulet af skal du med et let tryk aktivere hjulets nav/quick release knappen - se tegning – herefter kan hjulet stille og roligt tages af.

For at sætte hjulet på igen, sættes hjulet til hjulbøsningen og trykkes på plads. (bemærk at quick release knappen også skal aktiveres ved påsætning).

I forbindelse med aftagning og påsætning af hjulene må bremserne ikke være slået til.

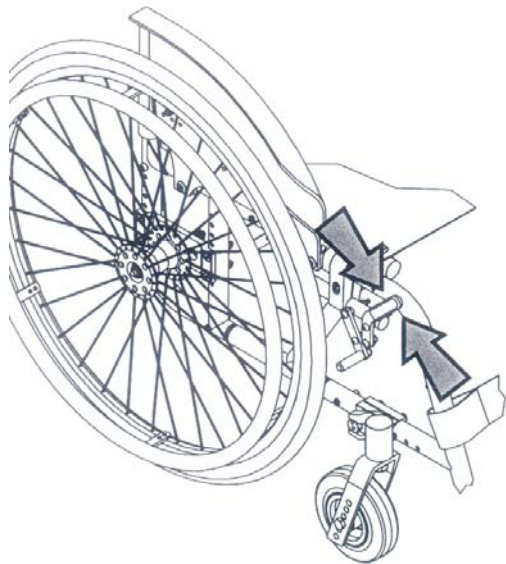


Bremser:

For at bremse kørestolen, skubbes bremsegrebet tilbage. For at løsne bremsen skubbes bremsegrebet frem. Se tegning. **NB: Afhængig af model – kan virke modsat.** For at få den optimale bremseeffekt er det vigtigt at bremsen har den korrekte afstand mellem hjul og bremsen. Afstanden skal være ca. 1 cm. (se også afsnittet om indstillingsmuligheder).

Justering af ryglænet:

Der er mulighed for at højdejustere ryglænet for hver 1,5 cm. Fjern de anviste skruer – se billede – og skub ryglænet ned eller op til den ønskede højde. Når den ønskede højde er fundet, sørg da for at skrue skruerne i igen.


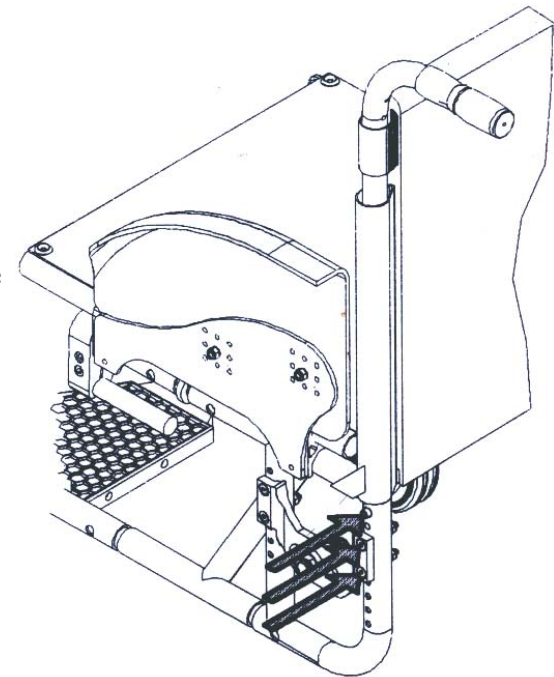


Indstilling af de bagerste hjul:

Denne indstilling er meget vigtig for fordelingen af tyngdepunktet i kørestolen. Der er muligheder.

1. : Højdejustering. Her er der 6 muligheder. Løsn skruerne - se tegning - og skru dem fast igen når den rette højde er fundet.

: Dybdejustering. Her er også 6 justeringsmuligheder. Pladen har huller til de første 3 positioner, men skal drejes 180 grader for at få de sidste 3 muligheder.

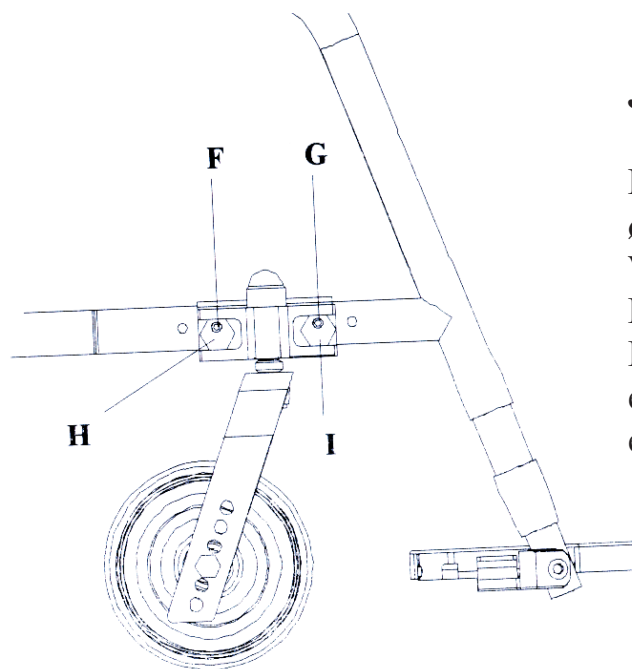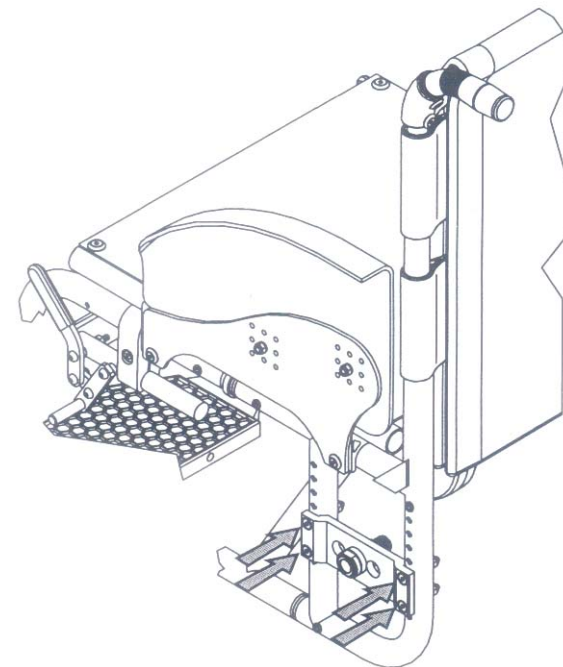


Justering af forhjul og forgaffel:

Forgaflen har 5 huller til justering af højden. Skru fastgørelsesbolten løs, find den ønskede højde/hul og skru fastgørelsesbolten på igen.

Vinkelindstilling af forgafflen:

Denne justering er nødvendig da forgaffelhuset altid skal være i lodret plan med gulvet. Løsn de to fastgørelsesbolte F og G – se tegning – og justér placeringen af de excentriske sekskanter H og I – se tegning – inde i forgaffelhuset. Når den rigtige vinkel er fundet, da skru H, I, F og G fast igen.

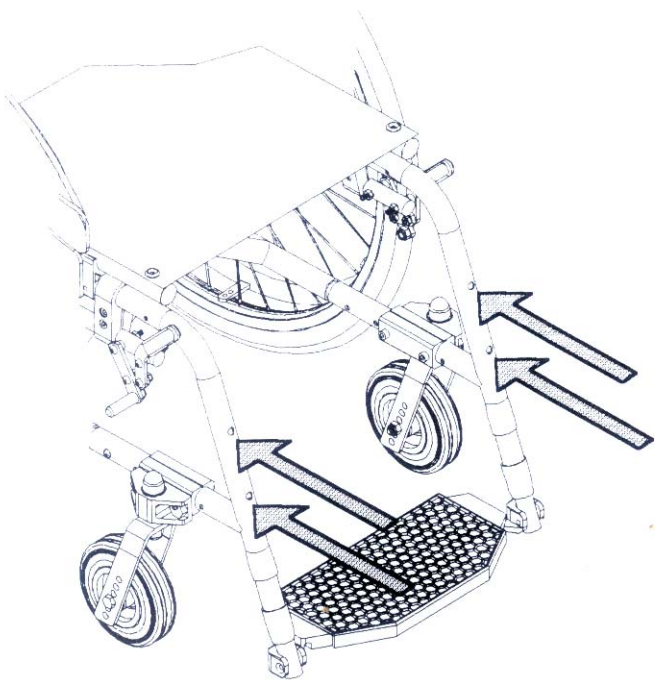



Højdejustering af fodpladen:

Fodpladerørene har 5 huller til højdejustering af fodpladen. Ved hjælp af de 2 fastgørelsesskruer på forgaflerne har du i alt 10 forskellige højdeindstillinger.
- se tegning.

Justering af vinkel på fodpladen:


For at vinkelindstille fodpladen skal der løsnes 4 skruer, L og M (to for hvert rør) se tegning – justér fodpladen op eller ned til du har fundet den ønskede vinkel. Indsæt skruerne igen og sørg for at de bliver skruet godt fast igen.

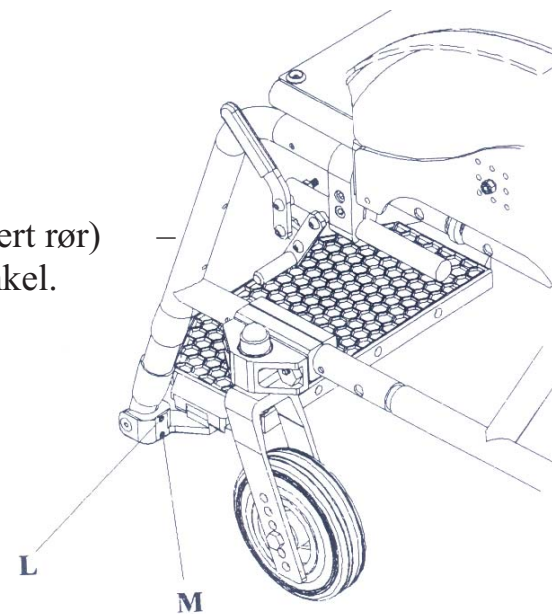

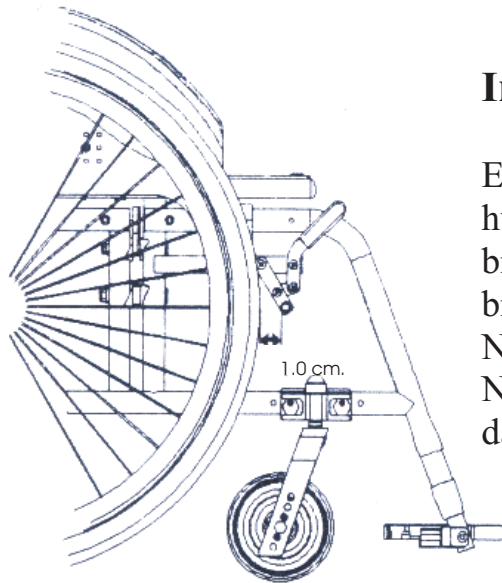


Indstilling af bremseser:

En genindstilling af bremsen er nødvendigt for at kunne bremse, hvis baghjulene er blevet justeret. Den absolut bedste afstand mellem bremseklods og hjul/dæk er ca. 1 cm. – se tegning – for at indstille bremsen skal du løsne skruerne A og B på bremseholderen og justerer. Når den ønskede indstilling er opnået strammes skruerne igen. NB: For at opnå den bedst mulige bremsefunktion er det vigtigt at dækkene har det korrekte dæktryk. 110 PSI (7,5 Bar).

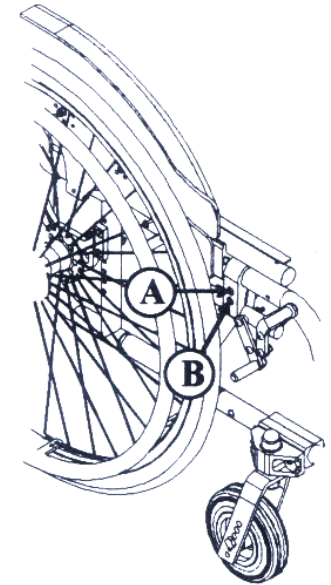

Indstilling af ryglænet:

Ryglænet indstilles via velcrostropper. Løft rygslaget bagpå og spænd eller løsn velcrostropperne. Når det ønskede resultat er opnået, da sæt rygslaget tilbage på plads. NB! Indstilling af ryglænet foretages med brugeren i stolen.

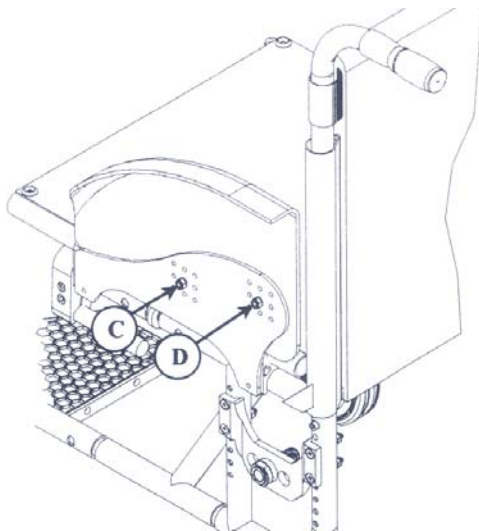

Indstilling af tøjbeskyttere/sideskjolde:

Det er muligt at indstille både højden og dybden på tøjbeskytterne/sideskjoldene. Tøjbeskytterne/sideskjoldene er skruet sammen med et aluminiumsbeslag med adskillige huller. Skru skruerne ud C og D – se tegning - og skru dem fast igen i de huller som ønskes.

Tilbehør:

Stort tilbehørsprogram til stolene.
Ring og rekvirer brochure.

Vedligeholdelse:

For at opnå den optimale funktion og sikkerhed, anbefales det at kørestolen jævnligt rengøres. Benyt venligst ikke skrappe rengøringsmidler. Hvis kørestolen udsættes for havvand anbefales en omhyggelig rengøring. Efterspænd jævnligt skruer, bolte m.m.

Tekniske data:

LS: sidebredde 36 – 39 – 42 – 45 cm.

PS: Sædedybde: 35 – 37,5 – 40(standard) – 42,5 – 45 cm.

H POST: sædehøjde - bagtil 44 cm.

H ANT: sædehøjde – foran 49 cm.


IT: længde 90 cm.

Vægt: Exelle ca. 12 kg MaxT ca. 11,5 kg

LT: bredde: LS (sædebredde) + 19 cm.

TS: højde ryglæn 36 cm – justerbar fra 30 til 54 cm.

IC: bredde sammenfoldet ca. 26 cm.

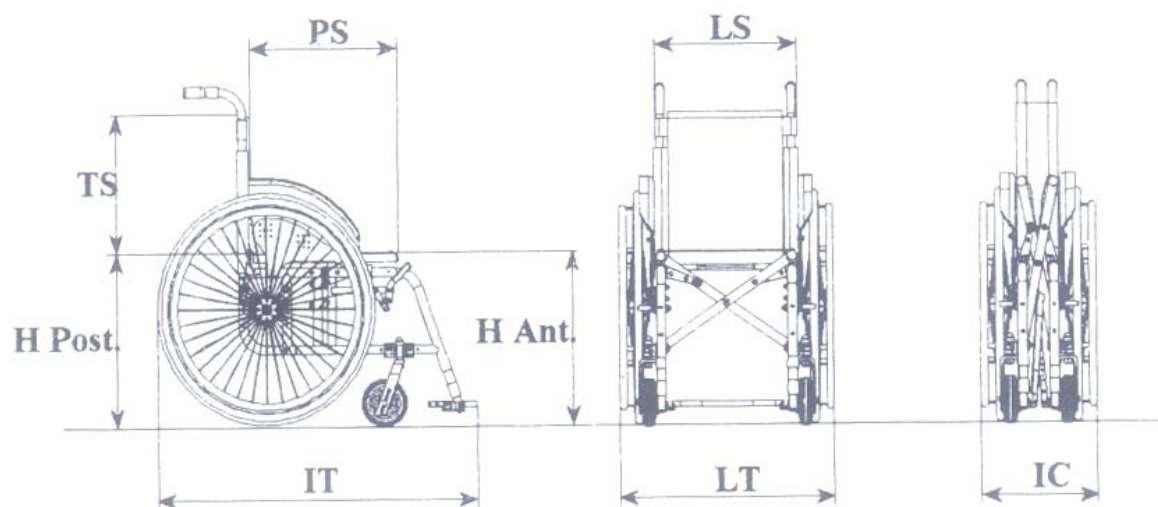

Garanti:

Der ydes 1 års garanti efter gældende regler om garanti i Danmark. Der ydes dog en 5 års garanti på stel/rammen. Garantien gælder fra datoen for levering. Garantien gælder ikke: ved skader under transport som ikke straks anmeldes til transportøren. Skader som er repareret uden for autoriseret værksted. Slid. Skader forvoldt af personer eller ting. Misligholdelse.

Ret til uvarslede ændringer af oplysningerne i dette dokument forbeholdes.