

ADL®/Surcon arsos® basic – Hybridsystem.

April '05 / Mappe afs. 2.



NB: HUSK PUMPE INDSTILLING/VEKSELTRYK ELLER STATISK (se nederst på siden)

A) HMI - NR.: 38.910 - Surcon vare nr.: 1530. - (83 cm.)

B) HMI - NR.: 38.911 - Surcon vare nr.: 1531. - (90 cm.)

TILBUD: Kr. 4.850,- pr. sæt inkl. WDS pumpe 2- vejs strækbart PU- betræk. Netto pris.

Beskrivelse/Installation/betjeningsvejledning over:

Arsos® Basic – vekselsystem Hybridmadras og WDS pumpe:

- Unikt innovativt lavtryksterapi/vekseltryks system til bl.a. indsættelse til dekubitusprofylakse og terapi-understøttelse. Sår stadie II (efter Seiler).
- Egnet til senge efter norm: DIN EN 1970:2000 / DIN EN 60601-2-38 ved en madras højde på 120 cm. (7 cm. Arsos basic + undermadras på 5 cm.)
- **Særdeles velegnet til senge med sidegitter (af hensyn til totalhøjden).**
- Personvægt ca. 40 – 130 kg.
- Air foam topmadras i den af ADL patenterede luft – skum – teknologi.
- Madras mål: **A)** 830 x 2000 x 70 mm. **B)** 900 x 2000 mm x 70 mm.
- Individuel/regulerbar vekselse tryks system med dexos® light WDS pumpe.
- **3 kammer vekselse tryks pumpe også med mulighed for statisk funktion.**
- **3 kammer hybrid topmadras lejringsystem** med 10 stk. udskiftelige flad-celler. Madrascellerne er i en speciel konstruktion (en kombination af luft og 'sandwich - skum.)
- Madrascellekerne i PU/polyuretan - skumstofkonstruktion, med **randzoneforstærkning** for at give en god personstabilitet, bl.a. når man sidder op på kanten af madrassen. De enkelte skumstof-celler er omgivet af PU hylster med plads til luft for vekselse tryk.
- Betræk: PU/polyuretan strækbart inkontinens afdækning.
- Fugtafvisende, åndbart.
- Førsteklasses kvalitetsbetræk vaskbart v/max. 95 grader C.
- **Statisk madras funktion: Static knap ind på I – (EIN/ON). Ens tryk i alle kamre**
- **Vekselse tryk: Static knap slås fra på II – (AUS/OFF) - (Altid på II ved vekselse tryk)**
- **Den røde lampe lyser rødt indtil det indstillede tryk er nået.**

- Betinget tørring i tørretumbler ved lave grader.
- Kan desinficeres termisk – eller aftørres med gængse desinfektionsmidler.
- Arsos basic hybridmadrassen lægges ovenpå en skummadras **min. 5 cm.**
- **Ideel til anvendelse for at overholde de lovmæssige afstandskrav/højde fra overkant af madras til overkant af evt. sengegærde/sidegitter – 22 cm.** Uden sengegærde kan man godt anvende en lidt højere skummadras.
- Madrasomslag til hoved - og fodende, slangerne i fodenden.
- Kan afdækkes med alm. lagen ovenpå madrassens PU- betræk.
- Ved indsættelse af basic- madrassen sammen med Dexos light WDS pumpe: de 3 slanger sættes på pumpen, når man **hører et klik**, er slangerne tilsluttet korrekt på pumpen. De 3 madrasslanger skal ikke kobles til pumpen i en bestemt rækkefølge.
- Tilslut el ledningen fra WDS pumpen til elstikket og tænd.
- Ved hurtig udluftning ("CPR-ventil") trækkes de 3 slanger af selve pumpen.

Tekniske data:

Navn:	Arsos® Basic madras	Dexos® light WDS pumpe
Materiale	Polyuretan (PU) Skumstof - celler	ABS- Polymerisat
Pressehårdhed kPa	2,0 oversiden 4,0 undersiden	-
Rumvægt kg/m ³	20 oversiden 35 undersiden	-
Dimensioner uden luft - cm.	83 x 7 x 200 90 x 7 x 200	42 x 14 x 32
Vægt i kg.	~ 11,0	~ 1,6
Garanti	2 år	2 år
Tilslutning	-	230 v/8 W/50Hz.Sikring 0,5 A.
Rengøring	Desinficeres -aftørring eller kemotermisk	Desinficeres ved aftørring
Anvendelses- område		Dekubitusprofylakse og/terapi indtil stadie II (efter Seiler)

FABRIKS-GARANTI: 2 år på madras og Dexos light WDS pumpe.

Statisk funktion: Static knap ind på I – (EIN/ON).
Vekseltryk: Static knap slås fra på II – (AUS/OFF).
NB: Altid II ved vekseltryk.

WDS PUMPE - Kontrollampen lyser rødt til trykket er nået.

Foreløbig skala/vægt indstilling af Dexos light WDS pumpen v/ anvendelse sammen med arsos basic madras:

Mbar (skalaindstilling)	Ca. personvægt kg:		
16 mbar	40	-	50
19 mbar	50	-	60
22 mbar	60	-	70
25 mbar	70	-	80
28 mbar	80	-	90
31 mbar	90	-	100
34 mbar	100	-	110
37 mbar	110	-	120
40 mbar	120	-	130

Arsos Basic:

Vægtfordelingen på en person er meget forskellig, så man må prøve at vurdere m.h.t. pumpe/skala indstillingen.

NB: start evt. med maksimum indstilling på skalaen, det går hurtigere og så indstil / justere ind efter ca. 10 min.

Nogle steder starter man også op med slukket pumpe (eller på laveste indstilling) ved personer med mange smerter, hvor det mere drejer sig om understøttelse i smerteterapien end forebyggelse/ behandling af tryksår. En vurdering af personen /sygdomsbillede som helhed er vigtigt, og skala/vægtindstillingen kommer ofte i " 2. række ". Komforten og stressfaktorerne er jo meget vigtige elementer i behandlingen.

Rengøring / Desinfektion:

Madrascellerne: aftørres med vand og de mest almindelige sæber kan anvendes, **må ikke indeholde aldehyder og tensider.**

Betræk: Det aftagelige 2 vejs strækbare inkontinens betræk (PU-PA) er vaskbart ved 90-95 C⁰ – kan tørre tumbles ved lav temperatur.

Desinfektion: Madrassen kan aftørres med de gængse desinfektionsmidler **uden aldehyder**. Kan også desinficeres kemotermisk.