

Op og rundt i sengen

Alle ved, at det er næsten umuligt at ligge stille i sengen – ikke engang når vi sover, ligger vi stille. Også stærkt bevægelseshæmmede personer kan af og til havne forkert i sengen. At løfte og rette patienter er derfor én af de almindeligste opgaver ved en plejeseng. Forskning* viser også, at der hér opstår mange arbejdsskader.

Likos positioneringslagen RepoVendelagen er et udmærket hjælpemiddel, når en patient eksempelvis skal flyttes højere op i sengen eller vendes. Lagenet lægges på under patienten og kan i hele indlæggelsestiden fungere som et almindeligt lagen. Ved hjælp af en loftlift kan plejepersonalet derefter nemt flytte og vende patienten uden større anstrengelse.

Positioneringslagenet kan anvendes både i kombination med og i stedet for almindelige lagener. Det er desuden fuldt ud muligt for én person at flytte og vende en patient i sengen med RepoVandelagen.



*) *The accident process preceding overexertion back injuries in nursing personel* by Inga-Lill Engkvist, BSc, Mats Hagberg MD, Eva Wigaeus Hjelm, PhD, Ewa Menchel, PhD, Lena Ekenvall MD, PROSA study group. Scand J Work Environ Health 1998;24(5):367-375.

A dynamic 3D biomechanical evaluation of the load on the low back during different patient-handling tasks by Skotte JH, Essendrop M, Hansen AF, Schibye B. J Biomech. 2002 Oct;35(10):1357-66.

stat™ RepoVendelagen

Op i sengen



Brugeren er gledet ned i sengen. RepoVendelagen kan bruges til at få ham højere op i sengen. Loftliften køres i stilling, og båndøjerne fastgøres på løftebøjlen.



Når brugeren er løftet fri af sengen, flyttes han nemt højere op ved hjælp af RepoVendelagen. Alt sammen med minimal fysisk anstrengelse.



Liko har et bredt udvalg af loftshejs. Multirall er ét af flere gode alternativer i kombination med RepoVendelagen



Sengen redes nemt med RepoVendelagen. Det er behageligt at ligge på og kan anvendes i kombination med eller i stedet for sædvanlige underlag.

tidligere



At løfte brugere højere op i sengen manuelt er et tungt og opslidende arbejde. En opgave, som er forbundet med risici og som opstår mange gang om dagen for den enkelte hjælper.

Vend i sengen



Løft først patienten til sengens ene side ved hjælp af Repo. Skift derefter bindeøjerne om.



Vend brugeren forsigtigt og kontrolleret til siden ved hjælp af loftlift.



Støt brugeren med puder på passende steder, frigør derefter Repo og træk det på plads i sengen.

tidligere



Mange brugere skal vendes flere gange dagligt for at undgå risiko for liggesår. Selv ved en veludført manuel teknik udsættes personalet for tung belastning. Det kan ikke undgås.

RepoVendelagen redder ryggen



Forståelse, udvikling og tilpasning

At løfte et menneske kræver både gode tekniske hjælpemidler og indsigt i medicinske komplikationer. Liko er specialist i løft og forflytning af bevægelseshæmmede mennesker. I mere end 25 år har vi med stor succes udviklet og tilpasset funktionelle hjælpemidler, som er sikre og lette at anvende. En stor del af vores succes bygger netop på vores kombination af høj teknisk kompetence, medicinsk kunnen og egne erfaringer fra arbejde inden for plejen. RepoVendelagen er et godt eksempel på Likos evne til at forstå, udvikle og tilpasse produkter til forskellige behov inden for plejen.

| stat™ | RepoVendelagen

Artikel	Materiale	Størrelse	Art. nr.	Maks. last
RepoVendelagen	Bomuld/PES	Regular	3687701	200 kg
RepoVendelagen	Netpolyester	Regular	3687301	200 kg
RepoVendelagen	Bomuld/PES	Ultra	3687702	500 kg
RepoVendelagen	Netpolyester	Ultra	3687302	500 kg

Vaskeanvisning: 85°C, tørring i tørreskab eller tumblertørring.
Kontakt din Liko-repræsentant for råd og informationer om eventuelle opdateringer.



Liko er en svensk virksomhed, som er markedsførende i Norden og er repræsenteret med egne virksomheder og forhandlere i mere end 25 lande verden over.

Liko er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001. Likos hejs opfylder kravene i henhold til ISO 10535.



CE

Lifts with care

 **Liko**

www.liko.com

Fabrikant

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Forhandler i Danmark:

A.P. Botved
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tlf: 80 37 37 37 Fax: 70 20 37 37
info@botved.dk
www.botved.dk

| stat™ | RepoVendelagen



Dok.nr. 7DK16031002 • © Copyright Liko AB 2006-05

Lifts with care

 **Liko**