

RollOn



Lifts with care



Stå på egne ben

Ganske ligesom evnen til at bevæge sig varierer, er der også stor forskel på behovet for hjælpemidler. Liko har altid befundet sig tæt på brugerne, hvilket konstant giver gode ideer til problemløsning. Netop sådan har vi også udviklet RollOn – det perfekte hjælpemiddel til dem, der har svært ved at gå, men som alligevel har tilstrækkelig styrke i armene til selv at kunne trække sig op og stå på benene.

RollOn er meget mere end et godt og sikkert hjælpemiddel – den kan også spille en vigtig rolle i rehabiliteringsarbejdet eller som midlertidig forflytnings- og balancestøtte i forskellige plejesituationer. RollOn bidrager til en aktiv træning i oprejningssituationen uden at belaste hjælperen.

Som mange andre af Likos produkter er RollOn bygget i aluminium og er derfor nem at manøvrere og let at holde ren. Takket være den omsluttende støtteramme bliver den stående stilling stabil i alle retninger.



Derhen hvor du skal

RollOn kan beskrives som en smidig oprejsningsstøtte udviklet til sikre forflytninger til og fra siddende stilling. Den fungerer udmærket som hjælp til og fra toilettet eller mellem seng og stol.

RollOn kan også være et godt alternativ til kørestolen i en situation, hvor brugeren kan være til fare for sig selv eller en hjælper. Det kan for eksempel være, når brugeren skal rejse sig efter en operation eller fødsel, kort sagt i tilfælde, hvor balancen midlertidigt kan være sat ud af spillet. RollOn er desuden en god hjælp, når man vil hjælpe en bruger, som er gledet frem i sin kørestol, til en normal siddestilling.



Fra sengen



Når brugeren skal rejse sig fra sengen, placerer han fødderne på RollOns fodplade og tager fat i håndtagene. Han læner sig let fremover og trækker sig op til stående. Hvis sengen kan hæves og sænkes, letter det oprejsningen. Det er altid lettere at rejse sig fra et lidt højere niveau. Hjælperen slår sædestøtterne ned og flytter brugeren derhen, hvor han skal.

Til en bedre stilling



Til toilettet ►

RollOn er den trygge hjælp, når det er tid til toiletbesøg.

I ro og mag fremme ved toiletsædet er det nemt at slå sæderammen op og hjælpe til med afklædningen.

Alt for tit sker det, at en bruger glider frem i sin kørestol og havner i en ubekvem stilling. Ved hjælp fra RollOn kan brugeren selv flytte sig længere bagud i stolen på en nem og smidig måde uden at belaste hjælperen.



RollOn – sikrere end andre



Kropspude
Giver sikkerhed og støtte fortil.

Konstruktion
RollOn er bygget i aluminium – et let, miljøvenligt og økonomisk materiale.

Sikkerhedslås
Låser sæderammen i en sikker stilling.

Underbensstøtte
Bløde og behagelige puder, som automatisk vinkles efter benenes stilling. Justerbar i højde og dybde for at give maksimal komfort og sikkerhed.

Hygiejnisk
Alle flader er glatte og kan tørres af med husholdningsrens. RollOn tåler spuling og kan sågar anvendes i brusesituationer.

Hjul
De letløbende tvillinghjul kan låses for at sikre en stabil stilling.

Sædepuder
Giver sikkerhed og støtte bagtil.

Sæderamme
En sikker indramning, som er justerbar i højden for tilpasning til lave og høje brugere.

Fodplade
Stabilt og skridsikkert design. Let at rengøre.

Understel
Kan spredes for perfekt tilpasning til eksempelvis kørestolen eller yndlingsslænestolen.

Helt sikker bagtil



Én af de funktioner, der gør RollOn unik, er de smarte sædestøtter. De gør det let at komme ind i og ud af RollOn uden at give afkald på sikkerheden. De letter også ved af- og påklædning i forbindelse med eksempelvis toiletbesøg.

Når brugeren er kommet ordentligt i stilling, slås puderne ganske enkelt ned bag sædet og sikres med et enkelt håndgreb.

Kan tilpasses helt enkelt



Individtilpasset

For at passe lige godt til både lave og høje brugere har RollOn flere forskellige indstillingsmuligheder og flere alternative håndgreb, som brugeren kan anvende i oprejsningssituationen.



Benspredning

Understellet spredes nemt ved hjælp af en fodbevægelse. Normalt behøver man ikke fiksere lejet, eftersom RollOn er stabil på alle ledler. Fodpladen er forsynet med antiskridmønster og kan nemt frigøres for rengøring.

Tekniske data

Maks. last:	160 kg
Totalvægt:	24 kg
Bredde understel:	62–90 cm
Længde understel:	89 cm
Højde understel:	11 cm
Hjul (tvilling):	75 mm
Materiale:	Aluminium



På plads i yndlingslænestolen



Nu har du fået et lille indblik i mulighederne med oprejsningsstøtten RollOn. Samtidig har vi fortalt lidt om, hvordan vi tænker hos Liko, at vi, når vi udvikler vores produkter og metoder, for eksempel altid tager udgangspunkt i behovet eller problemet. Et produkt alene løser ikke problemet. Produkter skal altid tilføres viden under forskellige former – først da kan resultatet blive vellykket, og man kan få lov at slappe lidt af i sin yndlingslænestol.

Kontakt os gerne, så fortæller vi mere om RollOn og om andre dele af vores brede sortiment af produkter og viden.

Liko er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.



Lifts with care

 **Liko**

Fabrikant
Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Forhandler i Danmark:
Botved Plejestyre A/S
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tlf: 80 37 37 37
Fax: 70 20 37 37
info@botved.dk
www.botved.dk