



Invacare® | **Vicair® Puder**

Den optimale løsning for trykaflastning og positionering



**Vicair puderne** giver en optimal kombination af trykaflastning, høj kvalitet og stabil positionering.

Puderne, der er klinisk testet, er individuelt justerbare og tilmed vedligeholdelsesfrie. De er sikre og enkle at anvende både for hjælper og bruger, og der er ikke behov for daglig kontrol. Vægten på puderne er utrolig lav med et gennemsnit på mindre end 750 gram.

### Unik teknologi med bløde *SmartCells*™

**Vicair** puderne benytter sig af **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode til støtte og aflastning af kroppen.

**Vicair** puderne indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet **SmartCells**, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne gør puden blød og komfortabel at sidde på, samtidig med at cellerne bevarer den lave friktion. Cellene glider let mod hinanden og former sig efter kroppens konturer og danner en stor overflade. Resultatet er en stabil og komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en optimal trykfordeling.

Puderne er inddelt i flere kamre, der kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at minimere tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil positionering.



### Optimal positionering og trykaflastning

**Vicair** er klinisk testet med vældigt gode resultater. Puderne kan bruges i de fleste alvorlige tilfælde af tryksår. Derudover giver puderne en høj grad af stabilitet, der medfører nedsat shear, god komfort og øget bevægelsesfrihed

### Mange muligheder

Der er en række behov og hensyn, der skal tages højde for indenfor siddestillingsområdet. Puderne skal være trykaflastende, og samtidig kunne imødekomme forskellige individuelle behov for god positionering.

Det kan være for at korrigerende eksisterende fejlstillinger eller for at forebygge nye. For at dække disse behov leveres **Vicair** i flere forskellige modeller: **Positioner Plus**, **Vector O2**, og **Adjuster O2**, der alle leveres i højderne 6 og 100 mm. Se også særskilte brochurer om andre **Vicair** puder som **Vicair Active O2** og **Vicair AllRounder O2**. Endelig tilbydes **Vector** i en stor størrelse i 10 cm højde samt i børnestørrelser **Vector Junior**.

Alle **Vicair** puder kan justeres individuelt.



## Standardpuder



### Positioner Plus

Inddelt i 4 kamre. De 2 sidekamre er specielt udviklet til at give sidestabilitet og forhindre udadrotation af benene. Giver optimal trykaflastning og har flere positioneringsmuligheder.



### Adjuster O2

Inddelt i 5 kamre for at tilbyde individuelle løsninger til brugere. Gode justeringsmuligheder ved komplekse positioneringsbehov fx asymmetrisk benlængde eller bækkenstilling og optimal trykaflastning. **Adjuster O2** inklusiv celler er vaskbar. Se særskilt brochure om **Adjuster O2**.



### Vector O2

**Vector O2** er inddelt i 9 kamre for at give øget stabilitet til bækkenet, forhindre ind og udadrotation af lårene samt fremadskridning på puden. En pude, der giver optimal trykaflastning og samtidig en funktionel stabil siddestilling. **Vector O2** inklusiv celler er vaskbar. Se særskilt brochure om **Vector O2**.



### Vector Junior

Puden er 9 cm høj, fyldt med Baby **SmartCells** og har samme funktion som **Vicair Vector**. Blot tilpasset en junior størrelse.



### Active O2

Den forreste del er opbygget med en blød ergonomisk formet skumdel for at skabe stabilitet. Bagerst har **Active O2 SmartCells** for at give trykaflastning under tuber og os sacrum. Se særskilt brochure.



### Multifunctional

Opbygget som en **Adjuster** pude, men med lidt længere kamre bagerst på puden for optimal tilpasning til den ekstra dybde på dybdejusterbare stole som fx el-kørestole eller Invacare's komfortkørestole.

## Specialpuder



### Asymmetric

Specialdesignet pude. Anbefales til brugere, som har behov for ekstra plads pga. proteser eller begrænset hoftebevægelighed. Kan også give god støtte til en høj femuramputation.



### Pommel

Specialdesignet pude med løs abduktionspude. Velegnet til brugere med behov for trykaflastning samtidig med en abduktionspude. Og med mulighed for at fjerne abduktionspuden ved forflytning eller brug af kolbe.

## Betræk








### Betræk

Alle puderne leveres med slidstærkt, strækbart og komfortabelt betræk. Vælg mellem standard betræk eller inkontinensbetræk.

## Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk). For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

<p>Størrelser</p> 	<p>Vægt</p> 	<p>Max. brugervægt:</p> 	<p>Rengøring af betræk</p> 	
<p><b>Vicalr Puder</b> se skema nedenfor</p>	<p>0,4-1,2 kg</p>	<p>250 kg (Active O2: 200 kg) (Vector Junior: 100 kg)</p>	<p>90°</p>	

## Størrelser, mm (b x d)

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
	Positioner Plus	Adjuster O2	Vector O2	Vector Junior	Active O2	Multi-functional	Pommel/ Asymmetric
250 x 250				x			
300 x 300				x			
350 x 350				x			
350 x 400	x	x	x		x		x
400 x 400	x	x	x		x		x
400 x 450	x	x	x		x		x
430 x 430	x	x	x				x
450 x 400	x	x	x		x		x
450 x 450	x	x	x		x		x
400 x 500	x	x	x		x		x
450 x 500	x	x	x		x		x
500 x 450	x	x	x		x		x
500 x 500	x	x	x		x		x
370 x 520						x	
400 x 520						x	
450 x 520						x	
500 x 520						x	
600 x 500			x				

## Størrelser, mm (h)

Positioner Plus	Adjuster O2	Vector O2	Vector Junior	Active O2	Multi-functional	Pommel/ Asymmetric
60/100	60/100	100	90	100	80	100

## Betræk

Sort



Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark



**Yes, you can.®**