



HMI-nr 49056 fra hmi-basen.dk

Find flere QR-koder  
inde i brochuren



# Molift Sejl

 **etac**<sup>®</sup>



# Molift Easy Sejl

Molift Easy Sejl kan bruges i de fleste løftesituationer. Både ryg og benstropper har en fast polstring, som gør sejlet mere komfortabelt for brugeren. Det fordeler vægten jævnt og mindsker risikoen for at sejlet vil klemme, klumpe eller på anden måde være ubehagelig mod brugerens hud. Kantbåndet i den ene side af benstropperne, er syet ind på selve benpolstringen, hvilket giver god trykfordeling under lårene.

Molift Easy sejlene er designet til at opnå en korrekt stilling fra liggende til siddende og omvendt, ved at skulderlækkerne (glidestropperne) på sejlet glider naturligt på plads under løftet.

## Let at benytte

En enkel og unik teknik gør det muligt for plejeren kun at bruge én hånd under sejlplægningen, mens den anden hånd er ledig til at støtte brugeren. Molift Easy sejl er godkendt i overensstemmelse med kvalitetsstandarden EN ISO 10535.



HMI-nr 49056 fra hmi-basen.dk

Sejl uden hovedstøtte



HMI-nr 49063 fra hmi-basen.dk

Sejl med hovedstøtte



Ved hjælp af sejlets glideløkker får man en bekvem siddestilling i sejlet.

## Egenskaber

- Behagelig mod brugerens hud
- Enkel at lægge på
- Glideløkker for at justere siddestillingen
- Farvekode for valg af størrelse

Størrelse	Sejl uden hovedstøtte		Sejl med hovedstøtte		Anbefalet vægt (kg)	Max belastning (kg)
	HMI-nr.	Art.nr.	HMI-nr.	Art.nr.		
XS	49056	3025000	49063	3026000	17 - 25	300
S	49057	3025100	49064	3026100	25 - 50	300
M	49058	3025200	49065	3026200	45 - 95	300
L	49059	3025300	49066	3026300	90 - 160	300
XL	49060	3025400	49067	3026400	160 - 240	300
XXL	49061	3025500	49068	3026500	230 - 300	300



# Molift Easy Raiser Sejl



HMI-nr. 35348 fra hmi-basen.dk

Molift Easy Raiser er et polstret sejl, som er udviklet til aktive løft i kombination med Molift Quick Raiser. Det giver en perfekt støtte til lænden, og er det ultimative valg ved løft og forflytning fra siddende til siddende. Sejlet placeres hurtigt og nemt på brugeren. Sejlets design gør det perfekt til toiletbesøg.

Molift Easy Raiser har skridsikker belægning på indersiden for at forhindre, at sejlet glider op. Den høje ryg fordeler vægt og belastning jævnt over en stor flade. Mavebæltet er med til at give ekstra støtte og stabilitet.

Molift Easy Raiser Support er et Molift Easy Raiser sejl med sædestøtte, hvis brugeren har brug for lidt ekstra hjælp til at rejse sig.



## Egenskaber

- Hurtigt og nemt at placere
- God lændestøtte
- Mavebælte for ekstra støtte og stabilitet
- Skridsikker belægning
- Høj ryg fordeler vægt og belastning.
- Kan vaskes ved 80 °C eller autoklave ved 85 °C.

Størrelse	Art.nr.	HMI-nr.	Taljemål (cm)	Max belastning (kg)
<b>Molift Easy Raiser Sejl</b>				
XS	3020003	35348	55 - 60	300
S	3020000	31199	60 - 75	300
M	3020001	20634	75 - 100	300
L	3020002	25192	100 - 150	300
XL	3020004	41851	150 - 175	300
<b>Molift Easy Raiser Sejl inkl. Support</b>				
XS	3019003	69173	55 - 60	300
S	3019000	69180	60 - 75	300
M	3019001	69181	75 - 100	300
L	3019002	69184	100 - 150	300
XL	3019004	69183	150 - 175	300
<b>Separat Support</b>				
XS / S / M	3019011	49118		
L / XL	3019012	49119		



# Molift Easy Toiletsejl





HMI-nr 49051 fra hmi-basen.dk

Løft og forflytning af bruger til og fra toilettet er ofte det mest vanskelige løft. Sammenlignet med et almindeligt sejl er løftepunkterne flyttet - fra lår og sæde til knæhaser og bryst for at få sædeområdet fri til af- og påklædning.

Molift Easy toiletsejl har justerbare løkker på skulder- og benstøtter, som giver mulighed for en 90° siddestilling. Det sikrer en rigtig toiletstilling. To spænder på mavebæltet (tvillingbælte) sikrer en jævn fordeling af vægt og belastning og giver bedre mulighed for at stramme ordentligt til, for at opnå øget stabilitet og sikkerhed.

Molift Easy toiletsejl har god rygstøtte. De hængslede benstøtter kan placeres på flere måder, hvilket betyder, at man bedre kan tilgodese individuelle behov. Samtidig gør de placering af sejlet samt af- og påklædning både enklere og hurtigere.

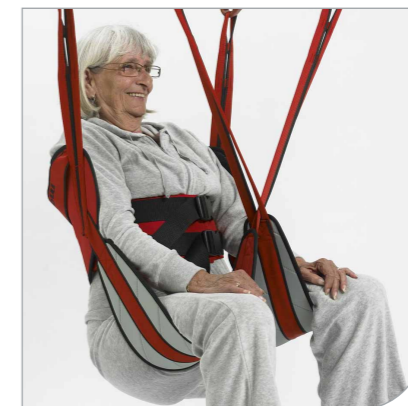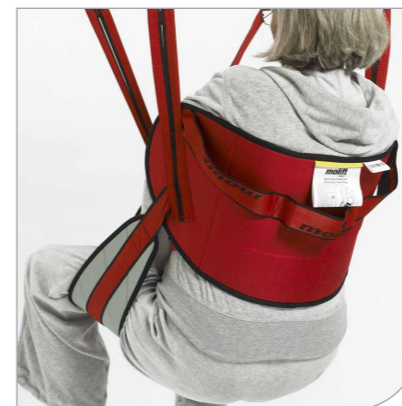

## Egenskaber

- Mulighed for 90° siddestilling
- God rygstøtte
- Jævn fordeling af vægt og belastning
- Tvillingbælte for øget tryk og stabilitet
- Polstring for øget komfort
- Hængslede benstøtter af hensyn til individuelle behov.

Størrelse	Art.nr.	HMI-nr.	Anbefalet vægt (kg)	Max belastning (kg)
XXS	3032050	49051	12 - 17	300
XS	3032000	49049	17 - 25	300
S	3032100	49050	25 - 50	300
M	3032200	49046	45 - 95	300
L	3032300	49052	90 - 160	300
XL	3032400	49053	160 - 240	300
XXL	3032500	49054	230 - 300	300



# Molift Easy Amputationssejl

Molift Easy amputationssejl er designet med henblik på tryk og komfortabel forflytning af brugere med enkelt- eller dobbeltsidet amputation. Sammenlignet med et almindeligt Molift Easy sejl, er åbningen rundt om sædet reduceret, for at forhindre, at brugeren glider ned i sejlet. Benstropperne er længere, så de kan placeres under begge ben samtidigt, og har løkker, som den modsatte bændel trækkes ind i for at forhindre, at de glider fra hinanden. To spænder på mavebæltet (tvillingbælte) sikrer en jævn fordeling af vægt og belastning og giver bedre mulighed for at stramme ordentligt til, så brugeren opnår størst mulig stabilitet og sikkerhed.

Molift Easy sejlene er designet til at opnå en korrekt stilling fra liggende til siddende og omvendt, ved at skulderlækkerne (glidestropperne) på sejlet glider naturligt på plads under løftet. Hvis man ønsker at låse brugeren i en oprejst siddestilling, har skulderlækkerne en ekstra løkke, som forhindrer sejlet i at glide. Benstropperne har flere positioner for at kunne give brugeren en mere tilbagelænet siddestilling og dermed mere støtte og stabilitet.

Molift Easy amputationssejl giver brugeren særligt god støtte omkring sæde og krop og er derfor også velegnet til brugere, som er meget tynde og/eller har meget dårlig stabilitet. Molift Easy amputationssejl leveres både med og uden hovedstøtte. Vi anbefaler sejl med hovedstøtte ved løft fra liggende stilling.



HMI-nr 49069 fra hmi-basen.dk

Sejl uden hovedstøtte



HMI-nr 49076 fra hmi-basen.dk

Sejl med hovedstøtte



## Egenskaber

- Reduceret sædeåbning forhindrer, at brugeren glider
- God støtte omkring kroppen og sædet
- Tvillingbælte sikrer god stabilitet
- Behageligt mod brugerens hud
- Nemt at folde og nemt at placere
- Positioneringslækker til at regulere siddevinkel

Størrelse	Sejl uden hovedstøtte		Sejl med hovedstøtte		Anbefalet vægt (kg)	Max belastning (kg)
	HMI-nr.	Art.nr.	HMI-nr.	Art.nr.		
XXS	49069	3027050	49076	3028050	12 - 17	
XS	49070	3027000	49077	3028000	17 - 25	300
S	49071	3027100	49078	3028100	25 - 50	300
M	49072	3027200	49079	3028200	45 - 95	300
L	49073	3027300	49080	3028300	90 - 160	300
XL	49074	3027400	49081	3028400	160 - 240	300
XXL	49075	3027500	49082	3028500	230 - 300	300



# Molift Stå/Gå Vest



HMI-nr 69166 fra hmi-basen.dk

Molift Stå/Gå Vest er specialudviklet med henblik på en tryk og sikker rehabilitering, men den er også meget anvendelig ved toiletbesøg. Molift gå-vest har adopteret flere træk fra professionelt klatreudstyr for at tilgodese komfort og sikkerhed på bedst mulig måde.

Det høje bælte har ekstra polstring, så tryk og belastning bliver jævnt fordelt. Det er udstyret med dobbelte bæltespænder for at opnå vekselstramning, så der opnås øget tryghed, støtte og stabilitet. De polstrede lyskestropper forhindrer, at bæltet glider op. Selvstrammende ophængsløkker forhindrer, at brugeren glider eller falder på gulvet, hvis benene skulle svigte. Belastningen på benene justeres ved at hæve eller sænke løfteren/loftliften.



De polstrede benstropper forhindrer at bæltet rykker sig.



Selvstrammende ophængsløkker forhindrer sejlet i at glide.

## Egenskaber

- Tvillingbælte med ekstra polstring
- Polstrede lyskestropper
- Selvstramning

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr	Anbefalet vægt (kg)	Max belastning (kg)
XXS	69166	3036000	12 - 17	300
XS	69167	3036050	17 - 60	300
S	69168	3036100	60 - 75	300
M	69169	3036200	75 - 100	300
L	69170	3036300	100 - 150	300
XL	69172	3036400		300



## Molift Engangssejl



Molift engangssejl er designet til at beskytte mod smitteoverførsel, som ellers kan opstå, når flere deler sejl. Det skal følge patienten under hele opholdet. Sejlet skal bortskaffes i henhold til gældende rutiner, når det bliver snavset, eller når patienten ikke har brug for det længere. Det skal ikke vaskes. Ved kontakt med væske vil foret blive misfarvet, og et stort kryds vil dukke op. Dette for at sikre tryk og hygiejnisk løft og forflytning.

Molift engangssejl er polstret for at give patienten et komfortabelt løft, samtidig med at det bliver lettere at placere. Sejlet har samme facon og størrelse som Molift Easy sejl. Det er desuden fremstillet af et miljøvenligt materiale. Patienten er dermed sikret en komfortabel og hygiejnisk forflytning, uden den miljømæssige belastning, som engangsprodukter ofte forårsager.



### Egenskaber

- Polstring giver høj komfort
- Miljøvenligt materiale
- Velegnet til infektionskontrol
- Foret skifter farve, når det skal udskiftes
- Samme facon som Molift Easy sejl
- Sælges i pakninger á 10 sejl.

Størrelse	Art.nr.	HMI-nr.	Anbefalet vægt (kg)	Max belastning (kg)
S	3050100	70830	25 - 50	300
M	3050200	70831	45 - 95	300
L	3050300	70832	90 - 160	300
XL	3050400	70833	160 - 240	300







Molift – an Etac company

Etac A/S  
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark  
Tlf. 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57  
info@etac.dk www.etac.dk

  
Skaber muligheder