

HANDY LAVFRIKTIONSPRODUKTER

Er altid ved hånden
til fleksible forflytninger




Enkle hjælpemidler, som altid er ved hånden. Sådan kunne man sammenfatte Likos nye produktserie Handy. I serien findes der flere manuelle hjælpemidler, som fuldstændiggør vores brede udbud af personlifte og tilbehør.

Handyprodukterne opfylder også et andet behov. Behovet for selv at kunne hjælpe til efter egen formåen. Ikke mindst for personer med funktionsnedsættelser er det ofte meget vigtigt ikke at blive for passiv og lade plejepersonalet udføre alt arbejdet med forflytninger i eller uden for sengen.

Flere af Handyprodukterne tillader brugeren i højere grad at deltage i forflytningen og støtter dermed vores filosofi om ikke at anvende hjælpemidler, som unødvendigt gør brugeren for passiv.

De første i serien er produkterne, som præsenteres i denne brochure: Handy Glidelagen og Handy Glidlet.

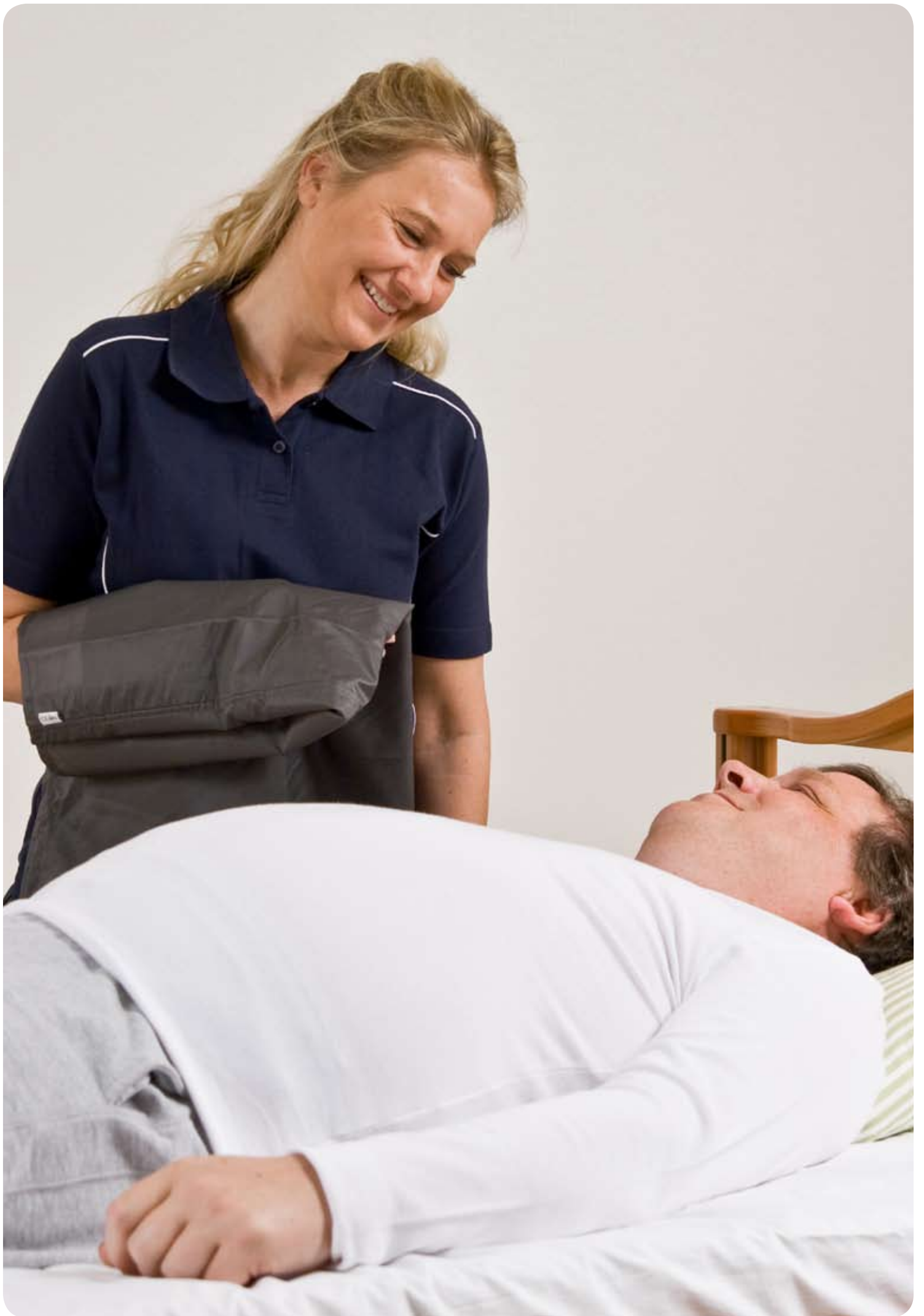



Handy Glidelagen

Handy Glidelagen er et glimrende hjælpemiddel, som støtter påsætning af løftesejl, særligt på meget tunge eller smertefølsomme brugere samt på brugere med kontrakturer.

Handy Glidelagen findes i 2 forskellige størrelser, hvor den mindre model Kort fortrinsvist anvendes, så placeringen af løftesejlet i en kørestol eller under brugerens ben bliver nemmere. Denne model har små lommer, som er en hjælp ved påsætning i fx en trang kørestol.

Den større model Lang anvendes også til påsætning af et løftesejl under en liggende bruger. Handy Glidelagen Lang har stropper i den øverste kant for nemt at kunne fastgøre glidelagenet i sengen, så blot 2 medarbejdere kan klare arbejdsopgaven.

Glidelagenet leveres altid i sæt med 2 stk. og anvendes normalt også parvis.

Vær opmærksom på, at forflytninger med Glidelagen skal foretages let og smidigt. Såfremt forflytningerne opleves tunge, anbefaler vi, at der anvendes andre af Likos mange hjælpemidler til løft og forflytninger.



Sådan placeres løftesejlet i liggende position



1. Til en liggende bruger anvendes to stk. Glidelagen Lang.

2. De to glidelagener fungerer interaktivt og gør det nemt at indføre eller fjerne løftesejlet under brugeren.

3. Glidelagenet kan med fordel fastgøres i sengens hovedgærde ved hjælp af de praktiske stropper og et spændebånd (tilbehør).



Sådan placeres løftesejlet i siddende position



I siddende position kan Handy Glidelagen Kort gøre det nemmere at indføre løftesejlet bag brugerens ryg...



...eller at få løftesejlets benstøtte på plads under brugerens lår.

VAREBETEGNELSE

Handy Glidelagen kort, uden håndtag
 Handy Glidelagen kort, uden håndtag
 Handy Glidelagen lang, med håndtag
 Handy Glidelagen lang, med håndtag

VARENBR.
 3715015
 3715017
 3716015
 3716017

STØRRELSE
 M
 XL
 M
 XL

MÅL (CM)
 70 x 70
 120 x 85
 90 x 185
 140 x 215



Handy Glidlet

Handy Glidlet findes i 3 forskellige modeller til forskellige anvendelsesområder og leveres (til forskel fra Handy Glidelagen) enkeltvis.

Den mindste model, Kort, anvendes fortrinsvist til at flytte en bruger højere op i sengen.

Mellemvarianten Lang anvendes til at vende en bruger i sengen eller ved forflytning mellem 2 senge.

Handy Glidlet Bred kan anvendes til at vende eller flytte brugeren i sengen. Det kan også anvendes til flytning mellem 2 senge.

Vær opmærksom på, at forflytninger med Glidelagen skal foretages let og smidigt. Såfremt forflytningerne opleves tunge, anbefaler vi, at der anvendes andre af Likos mange hjælpemidler til løft og forflytninger.

VAREBETEGNELSE

	VARENØR.	STØRRELSE	MÅL (CM)
Handy Glidlet, Kort	3710015	M	70 x 90
Handy Glidlet, Lang	3711015	M	90 x 185
Handy Glidlet bred (med håndtag)	3712015	M	140 x 140

Vending i seng



Med Handy Glidlet er det nemmere at vende brugeren i sengen.



Brugeren vendes forsigtigt og kontrolleret ved hjælp af den lave friktion i Glidlet.

Flytning højere op i sengen



Med egen kraft kan brugeren hjælpe med at flytte sig højere op i sengen. Medhjælperen hjælper til ved at holde brugerens fødder.



Glidlet gør, at der kræves betydeligt mindre kraft ved flytninger samtidigt med, at brugeren medvirker aktivt.

Flytning mellem 2 senge



Glidlet Bred kan anvendes til hurtigt og problemfrit at flytte en bruger mellem 2 senge.



Ikke mindst på sygehuse er der et stort behov for at flytte patienter til og fra senge.



Liko tilbyder en komplet løsning til sikre løft og forflytninger

Nu har du læst om produkter, som er en vigtig del for at løse løfte- og forflytningssituationer på arbejdspladsen. Men det er ikke tilstrækkeligt med disse oplysninger. Vi har i årenes løb erfaret, at en velfungerende og sikker løsning består af 3 faktorer.

Først og fremmest behøver du sikre og brugervenlige **PRODUKTER**. For det andet kræves **VIDEN** om, hvordan du sikkert håndterer dine hjælpemidler og gennemfører sikre løft og forflytninger. Og for det tredje har du brug for **ARBEJDSMETODER**, som garanterer, at personalet rent faktisk arbejder korrekt. Dette er en vejledning til sikre forflytninger.

Med vort kendskab giver vi dig kompetence til alle 3 faktorer. Med hjælp af Liko garanterer du, at både personale og brugere får et sikkert miljø til løft og forflytninger.

www.liko.com

Fabrikant
liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Forhandler i Danmark:
A.P Botved
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tlf: 80 37 37 37
Fax: 70 20 37 37
info@botved.dk
www.botved.dk

 **Liko**
A  Company