



• **Brug:**

Skulder skade:

Dislokering, fraktur (øverst på overarmsknoglen, større ledbåndsskade på overarm), skulderbrud, fraktur på skulderknogle (clavicle).

Gigtsmerter:

Periarthritis, akut frossen skulder.

Neurologi:

Neutralisering (paralyse) af nervefibre, nervebundter.

Efter operation:

Operation af skuldermuskler (rotator cuff syndrom), operation af kraveben, skulder-ledforbindelse.

Str.	1	2	3	4	5	6
Brystmål (cm)	≤ 70	71-80	81-90	91-120	121-129	≥ 130
Kode	7014353	7014376	7014382	7014399	7014407	4511542

Montering



Placer skulderpude stroppen på skulderbladet for stabilisering.



I 2.



Placer flap 4 på del 2 i niveau med maven.



ør luk



Luk albuestøtten flap 6.



Der medfølger Velcro bånd, til at stabilisere forarmen i den ønskede position.

